

RÉSUMÉ

Le système de suivi à distance LATITUDE™ NXT de Boston Scientific permet aux médecins de surveiller régulièrement à distance les informations du patient et du dispositif implanté, via un Communicateur qui se trouve au domicile du patient.

Cet article décrit comment le Communicateur peut utiliser un hotspot Wi-Fi personnel pour envoyer des informations par le biais d'une connexion à Internet.

Produits Référencés

Système de suivi à distance des patients LATITUDE NXT

Les produits mentionnés peuvent faire l'objet de marques déposées ou non par Boston Scientific Corporation ou une de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les produits référencés ici peuvent ne pas être autorisés dans toutes les zones géographiques. Informations relatives à l'utilisation dans les pays où le produit est dûment enregistré auprès des autorités sanitaires.

Pour obtenir des informations détaillées concernant le fonctionnement du dispositif, se reporter aux instructions complètes d'utilisation disponibles sur : www.bostonscientific-elabeling.com.

PRÉCAUTION : Conformément à la loi, ce dispositif ne peut être vendu ou distribué que par un médecin ou sur prescription médicale. Les indications, contre-indications, précautions et mises en garde figurent sur l'étiquette du produit. Schémas créés par Boston Scientific Corporation, sauf indication contraire.

CRT-D: Resynchronisation Cardiaque Défibrillateur
CRT-P: Resynchronisation Cardiaque Pacemaker
ICD: Défibrillateur automatique implantable
S-ICD: Défibrillateur implantable sous-cutané

Contacts

www.bostonscientific.com

Amériques

Services Techniques

Service Client LATITUDE™

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

Services Patients

1.866.484.3268

Europe, Moyen Orient, Afrique

Services Techniques

+32 2 416 7222

intltechservice@bsci.com

Support Médecin LATITUDE

latitude.europe@bsci.com

Japon

Services Techniques

japantechservice@bsci.com

Service Client LATITUDE

japan.latitude@bsci.com

Asie-Pacifique

Services Techniques

+61 2 8063 8299

aptechservice@bsci.com

Service Client LATITUDE

latitudeasiapacific@bsci.com

© 2016 by Boston Scientific Corporation or its affiliates. All Rights Reserved.

Utilisation de la fonctionnalité Hotspot personnel avec un Communicateur LATITUDE™ NXT

Le système LATITUDE permet aux prestataires de soins de santé d'accéder aux données du dispositif implanté entre les consultations planifiées. Le Communicateur envoie régulièrement les données de votre dispositif implanté au système LATITUDE au moyen de l'une des diverses méthodes suivantes, en fonction de sa configuration. Certaines méthodes de configuration peuvent nécessiter un équipement supplémentaire. Les données peuvent être transmises par le biais des différents types de connexion suivants :

- Ligne téléphonique classique (ligne fixe)
- Réseau de données cellulaire (recourant à un Adaptateur cellulaire USB)
- Connexion Internet filaire (recourant à un Adaptateur Ethernet USB LATITUDE)
- Hotspot personnel (recourant à un Adaptateur accessoire USB LATITUDE)

Un hotspot est un emplacement physique, en général un téléphone cellulaire ou un autre dispositif mobile (p. ex., téléphone portable, smartphone ou tablette) offrant un accès sans fil à Internet—en général, à l'aide de la technologie Wi-Fi.

Si cela est pris en charge par votre dispositif mobile et votre plan de service, il est possible d'activer et d'appairer un hotspot avec votre Communicateur. Cela permettra au Communicateur d'accéder sans fil à Internet afin d'envoyer des données cryptées à votre centre LATITUDE.

Activez les fonctions Hotspot personnel, Bluetooth® , et Bluetooth attache, le cas échéant sur votre dispositif mobile lorsque vous vous trouvez à proximité de votre Communicateur pendant au moins une heure chaque jour et pour permettre les interrogations manuelles du dispositif. Cela devrait laisser assez de temps au Communicateur pour se connecter au hotspot et contacter le système LATITUDE.

Les hotspots et tous les coûts qui leur sont associés sont administrés par le biais de votre fournisseur de service mobile. Veuillez vous assurer de bien comprendre le forfait de transmission de données par Internet intégré à votre plan de service ; en effet, votre fournisseur peut vous facturer un supplément si vous dépassez votre forfait autorisé. En outre, sachez que l'utilisation du Bluetooth et du hotspot sur votre dispositif mobile peut en diminuer l'autonomie.

Ce dont vous aurez besoin

- Un Communicateur branché sur une prise électrique
- Un dispositif mobile, avec fonction hotspot, prenant en charge la connectivité Bluetooth (et Bluetooth attache, le cas échéant)
- Un plan de service autorisant le transfert de données par Internet et la fonction hotspot
- Un Adaptateur accessoire USB LATITUDE relié au Communicateur (Figure 1)

Pour obtenir un Adaptateur accessoire USB LATITUDE, veuillez contacter le bureau Boston Scientific approprié (voir colonne latérale). Pour les Amériques, veuillez utiliser le numéro de téléphone du Service aux patients.

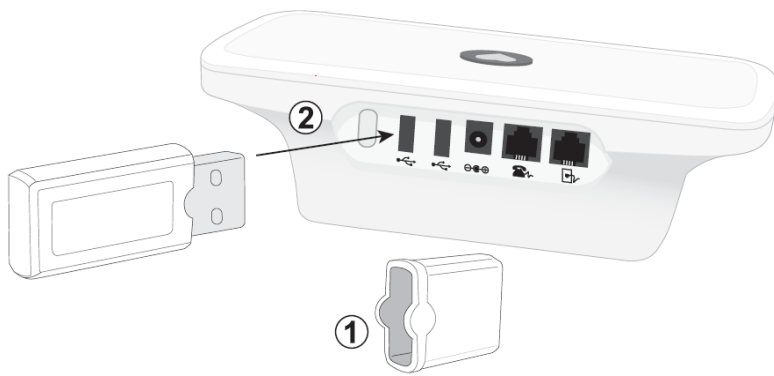


Figure 1. Branchement de l'Adaptateur accessoire USB LATITUDE. Enlever le bouchon (1) et insérez l'adaptateur accessoire USB LATITUDE (2) dans un des deux lecteurs USB sur le panneau arrière du Communicateur.

Appairage de votre hotspot et de votre Communicateur

1) *Configurez votre dispositif mobile en activant :*

- la fonctionnalité hotspot
- Bluetooth attache, le cas échéant
- le Bluetooth
- le mode Appairage/Découvrable Bluetooth

Vous trouverez probablement ces options dans la section « Paramètres » de votre dispositif mobile. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire lors de la configuration de votre dispositif mobile, veuillez contacter votre fournisseur de service mobile.

2) *Veillez vous assurer que le Communicateur :*

- est branché sur une prise de courant en état de marche
- possède un Adaptateur accessoire USB LATITUDE branché sur l'un des deux ports USB situés à l'arrière de l'appareil (Figure 1)

3) *Appairage du Communicateur avec votre dispositif mobile*

- Appuyez sur le bouton « État » au dos du Communicateur et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Cela permettra au Communicateur de trouver votre dispositif mobile et d'amorcer le processus d'appairage.
- Sélectionnez le Communicateur lorsqu'il apparaîtra dans la liste des connexions disponibles sur votre dispositif mobile.
Vous le trouverez dans la liste des options sous le nom « MISC » ou « LATITUDE NXT ».
- Lorsqu'il vous sera demandé de saisir un code PIN sur votre dispositif mobile, veuillez inscrire « 123456 ».
- Une fois que le Communicateur sera correctement appairé, le symbole d'envoi clignotant en vert deviendra fixe, et l'icône Médecin s'affichera en bleu. Cela mettra fin au processus d'appairage. Le Communicateur et le dispositif mobile resteront appairés, et vous n'aurez pas besoin de renouveler le processus d'appairage.

Si l'appairage a échoué, le symbole d'envoi s'affichera en jaune sur le Communicateur.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant l'appairage de votre dispositif mobile, veuillez contacter le fournisseur de service de votre dispositif mobile.