


**Solyx™**

Sistema de Sling de Incisão Única

*Ilustrado o Sistema de Sling Solyx Azul*

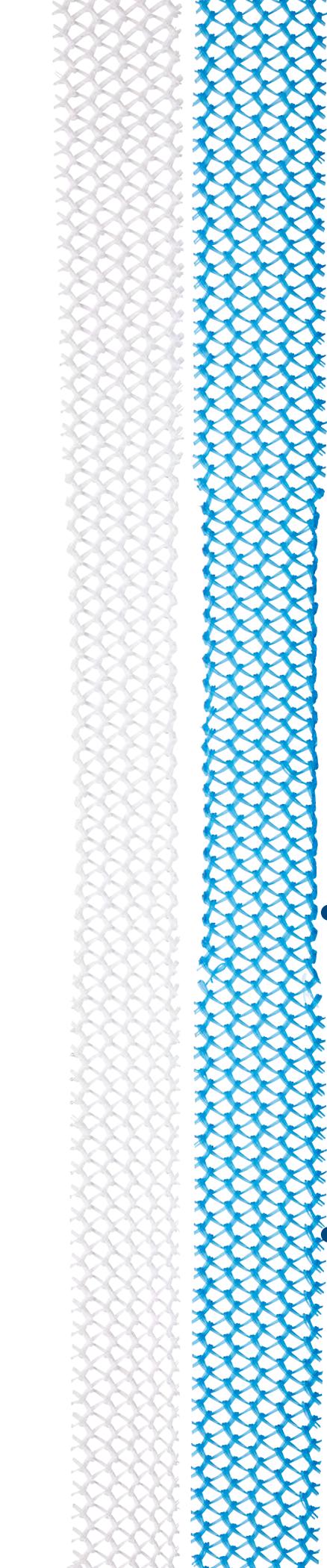

## Solyx™

### Sistema de Sling de Incisão Única

Como podemos continuar inovando nossa família de slings de uretra média, que já são os produtos preferidos de quase 800.000 pacientes? Criando a mesma malha confiável em uma cor azul de fácil visualização. Com isso, qualquer que seja a sua abordagem cirúrgica preferida, a malha azul Advantage™ proporciona maior visibilidade para que você possa tratar de seus pacientes com mais confiança.

Uma porção lisa e sem pontas sob a uretra, concebida para manter sua integridade durante o tensionamento e potencialmente reduzir a irritação da parede uretral.

As bordas com pontas fora da porção suburetral ajudam a minimizar a migração da malha.

#### **Melhor visibilidade. Baseado em evidências.**

- As mesmas propriedades da nossa malha patenteada Advantage, documentada em mais de 35 publicações até o momento.
- A cor azul de fácil visualização melhora sua visibilidade para um tensionamento intraoperatório mais preciso do sling e facilita a localização pós-operatória.


#### **Malha de polipropileno<sup>1</sup> confiável**

- Espessura da malha: 0,66 mm
- Tamanho dos poros: 1182 µm
- Tamanho da fibra (diâmetro): 0,15 mm
- Peso: 100 g/m<sup>2</sup>

## O Sistema de Sling de Incisão Única concebido com Microajuste

- Possibilidade de apertar e soltar conforme necessário
- O encaixe do suporte na ponta do dispositivo de entrega foi projetado para facilitar o controle durante a colocação
- O sling é tensionado pelo avanço e a retração do dispositivo de entrega
- O conjunto da malha foi projetado para ser colocado longe de estruturas críticas, como o feixe do obturador

Observação: Uma vez depositado no tecido, o suporte não precisa ser reconectado à ponta do eixo para tensão/ajuste adicional.

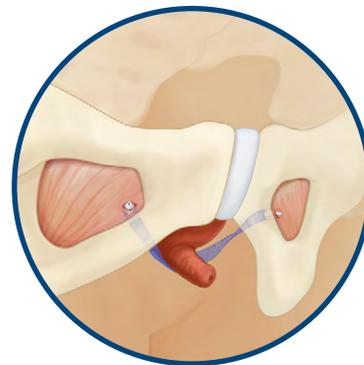

Abordagem de incisão única




### Marcador de linha média

Destinado a facilitar a orientação para uma colocação precisa

### Dispositivo de entrega

- Projetado para acomodar o suporte no local em que for colocado
- Punho ergonômico

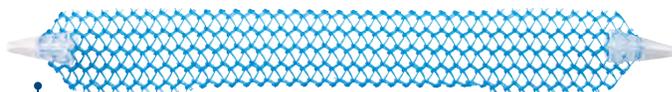


### Suporte da malha

- O design com rebarbas permite direcionar a malha suavemente através do tecido
- O encaixe na ponta do dispositivo de entrega foi projetado de modo a evitar o deslizamento prematuro do suporte


## Informações para Pedidos

Código do Produto	Descrição	Quantidade
M0068507010	Sistema de Sling de Incisão Única Solyx™ Azul	1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha
M0068507000	Sistema de Sling de Incisão Única Solyx™	1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha


# Procedimento para o Sistema de Sling de Uretra Média de Incisão Única Solyx™ 2

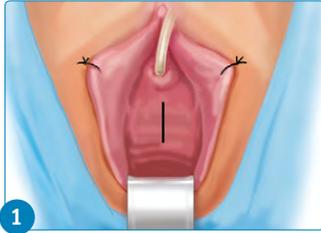


1. Prepare e cubra o paciente com campo estéril utilizando a prática cirúrgica padrão. Certifique-se de que a bexiga está vazia. Faça uma incisão na parede vaginal anterior, ao nível da uretra média, de aproximadamente 1,0 a 1,5 cm de comprimento.

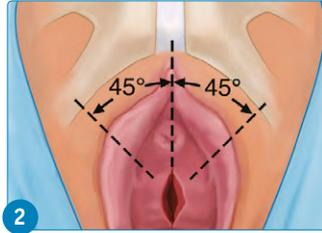


2. Disseque bilateralmente até a porção interna do ramo púbico inferior em um ângulo de 45 graus fora da linha média, criando um caminho para a colocação do dispositivo de entrega.

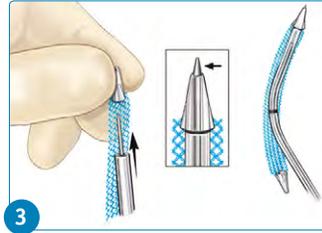


3. Insira o conjunto de malha no dispositivo de entrega colocando a ponta do dispositivo no suporte da malha. OBS.: Empurre o suporte da malha sobre a ponta do dispositivo de entrega até que fique nivelado com a extremidade do resalto do dispositivo de entrega. Ao colocar o suporte da malha no dispositivo de entrega, certifique-se de que a malha esteja orientada de modo que fique na curva externa do dispositivo de entrega. A malha estará agora pronta para ser colocada.

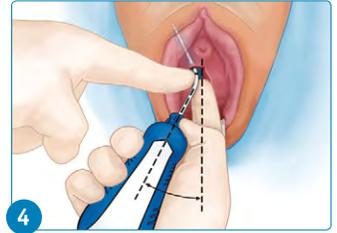


4. Insira o dispositivo de entrega com o conjunto da malha montado através da incisão com o punho a um ângulo de 30 graus a partir da linha média, na posição vertical e paralela ao chão.
5. Coloque um dedo indicador no marcador da linha média do dispositivo de entrega e empurre para penetrar através da fáscia endopélvica. Você deve sentir uma mudança na resistência à medida que a ponta do trocarte penetra através da fáscia endopélvica. Pare o avanço.

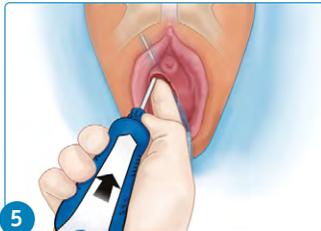

5. Insira o dispositivo de entrega no sentido cefálico a 0,5 cm de distância do ramo púbico inferior.

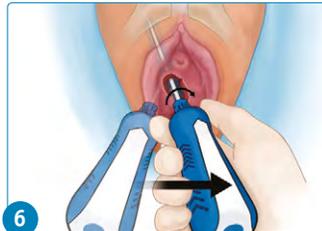

6. Mova o punho para o lado contralateral da paciente e em seguida gire o punho no sentido horário 45 graus, visando o aspecto medial superior do forame obturador. Isto irá posicionar a ponta do trocarte para a penetração perpendicular no músculo obturador interno.

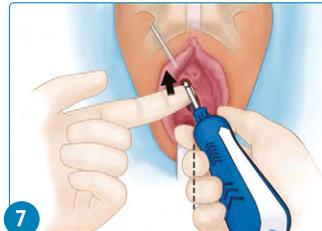

7. Coloque o dedo atrás da marca da linha média do dispositivo de entrega e insira o suporte da malha no músculo obturador interno. A marca da linha média deve estar alinhada aproximadamente na posição da linha média sob a uretra.



8. Deposite o suporte segurando o mecanismo de colocação com uma mão e puxando o punho do dispositivo de entrega para trás com a outra. Isso irá depositar o suporte no tecido do músculo obturador interno circundante, o liberando do dispositivo de entrega. Puxe suavemente o conjunto da malha para garantir sua colocação adequada.
9. Repita todos os passos no lado contralateral do paciente.



9. Assegure o tensionamento adequado do conjunto da malha antes da colocação pelo punho do dispositivo de entrega. A tensão adequada requer que o sling seja colocado firmemente contra a uretra.



10. Deposite o suporte segurando o mecanismo de colocação com uma mão e puxando o punho do dispositivo de entrega para trás com a outra. Isso irá depositar o suporte no tecido do músculo obturador interno circundante, o liberando do dispositivo de entrega. OBS.: Uma vez depositado no tecido, o suporte não precisa ser reconectado à ponta do eixo para tensão/ajuste adicional. A cistoscopia pode ser realizada neste momento, a critério do médico.
11. Feche a incisão utilizando os métodos habituais.

1. Moali, Pamela, et al. Tensile properties of five commonly used mid-urethral slings relative to the TVT™ Int Urogynecol J (2008) 19:655–663 DOI 10.1007/s00192-007-0499-1

2. Ilustrado o Sistema de Sling Solyx Azul

Atenção: Para Slings de Uretra Média para Incontinência Urinária Feminina: A legislação dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou por ordem de um médico qualificado no uso de malha cirúrgica para correção da incontinência urinária de esforço.

ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso se aplicam somente aos países com registro da autoridade sanitária pertinente. Este material não se destina para uso na França.

Os produtos foram incluídos apenas para fins informativos e podem não ser aprovados ou vendidos em determinados países. Verifique a disponibilidade do produto em outros territórios com seu representante local ou com o serviço de atendimento ao cliente.

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. Todas as imagens são de propriedade da Boston Scientific.

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way  
Marlborough, MA 01752  
www.bostonscientific.com

© 2018 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.  
WH-413614-AC MAIO 2018