

CONTAK RENEWAL[®] 3 und 4 Alle acht (8) Befestigungsschrauben festziehen

ZUSAMMENFASSUNG

Ebenso wie bei den Systemen zur kardialen Resynchronisation mit Defibrillatorfunktion (CRT-D) CONTAK RENEWAL[®] 1 und 2, sind auch bei den CONTAK RENEWAL CRT-Ds 3 und 4 beim Anschließen der Elektroden an das Gerät insgesamt jeweils acht (8) Befestigungsschrauben festzuziehen. Allerdings hat sich bei den CONTAK RENEWAL CRT-Ds 3 und 4 die Position der Befestigungsschrauben geändert.

CONTAK RENEWAL CRT-Ds 3 und 4 beim Anschließen der Elektroden an das Gerät insgesamt jeweils acht (8) Befestigungsschrauben festzuziehen. Wie die untenstehende Skizze zeigt, befinden sich vier (4) Befestigungsschrauben auf der Oberseite (Abbildung 1), drei (3) auf der Rückseite (Abbildung 2) und eine (1) auf der Vorderseite des Anschlussblocks (Abbildung 3).

Nicht vergessen: Alle acht Befestigungsschrauben der CONTAK RENEWAL CRT-Ds 3 und 4 festziehen.

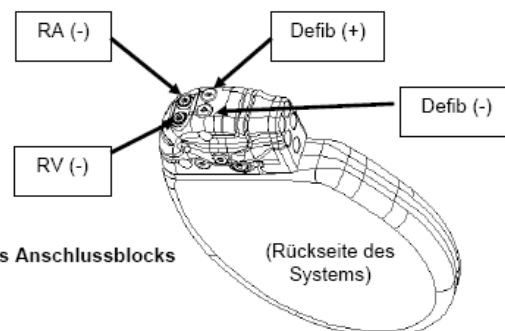


Abbildung 1. Oberseite des Anschlussblocks

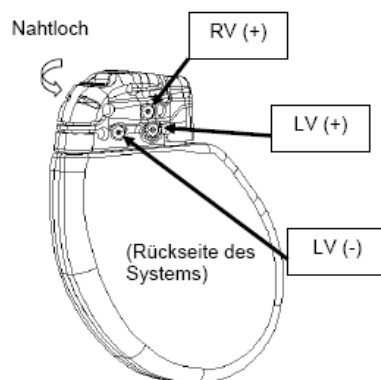


Abbildung 2. Rückseite des Anschlussblocks

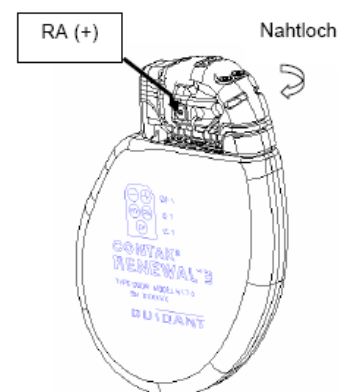


Abbildung 3. Vorderseite des Anschlussblocks

GILT FÜR FOLGENDE CRM-PRODUKTE

Die Folgenden sind Handelsmarken von Cardiac Pacemakers, Inc., einem Unternehmen der Boston Scientific Gruppe: CONTAK RENEWAL

Einige der in diesem Artikel genannten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern zugelassen. Für umfassende Informationen zum Gerätebetrieb bitte die entsprechende Produktdokumentation verwenden.

CRM KONTAKTINFORMATIONEN

Vereinigte Staaten

www.bostonscientific.com

Technischer Service – U.S.A.

LATITUDE Klinischer Support – U.S.A.

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

tech.services@bsci.com

latitude@bsci.com

Patienten Service

1.866.484.3268

International

www.bostonscientific-international.com

Technischer Service – Europa

+32 2 416 7222

eurtechservice@bsci.com

Internationales LATITUDE Service Center

www.latitude.bostonscientific-international.com

latitude.international@bsci.com