



Advantage Fit™ e Advantage™

Sistema de Sling de Uretra Média Transvaginal



Advantage Fit™ e Advantage™

Sistema de Sling de Uretra Média Transvaginal

Como podemos continuar inovando nossa família de slings de uretra média, que já são os produtos preferidos de quase 800.000 pacientes? Criando a mesma malha confiável em uma cor azul de fácil visualização. Com isso, qualquer que seja a sua abordagem cirúrgica preferida, a malha azul Advantage™ proporciona maior visibilidade para que você possa seus pacientes com mais confiança.

Uma porção lisa e sem pontas sob a uretra, concebida para manter sua integridade durante o tensionamento e potencialmente reduzir a irritação da parede uretral.

As bordas com pontas fora da porção suburetral ajudam a minimizar a migração da malha.

Melhor visibilidade. Baseado em evidências.

- As mesmas propriedades da nossa malha patenteada Advantage, documentada em mais de 35 publicações até o momento.
- A cor azul de fácil visualização melhora sua visibilidade para um tensionamento intraoperatório mais preciso do sling e facilita a localização pós-operatória.

Malha de polipropileno¹ confiável

- Espessura da malha: 0,66 mm
- Tamanho dos poros: 1182 µm
- Tamanho da fibra (diâmetro): 0,15 mm
- Peso: 100 g/m²

Punho do dispositivo de entrega

Cabo ergonômico projetado para caber na mão do médico e permitir o uso ambidestro.

Punho antideslizante

Projetado para uma pega ergonômica e evitar que as mãos escorreguem durante a manipulação intraoperatória.

Impulsor no Advantage Fit

Projetado com um impulsor para o posicionamento ergonômico dos dedos, proporcionando ao usuário uma maior estabilidade e controle da agulha durante a entrega.

Raio e diâmetro da agulha

A agulha mais fina e a curva mais apertada do Advantage Fit reduzem a força de inserção e deixam a malha mais próxima do osso púbico² e mais distante de estruturas críticas.

- Diâmetro da agulha do Advantage: 5mm
- Diâmetro da agulha do Advantage Fit: 2,7mm (46% mais fina)

Patilha de centragem

Permite o alinhamento correto do centro da malha sob a uretra. Permite também que o médico aplique contratensão no sling, preservando a integridade da malha.




Abordagem Transvaginal

Dilatador azul


Melhora a visualização durante a cistoscopia.

Advantage Fit™ e Advantage™


Procedimento para o Sistema de Sling de Uretra Média Transvaginal³

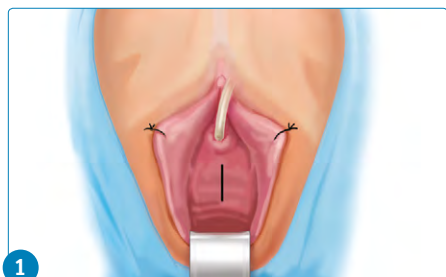


1. Depois de preparar os campos cirúrgicos vaginal e abdominal inferior, faça duas pequenas incisões transversais abdominais, com aproximadamente 0,5 cm a 1 cm, de cada lado da linha média, imediatamente acima da sínfise.
2. Faça uma incisão mediana vertical de 1,0 cm a 1,5 cm na parede vaginal anterior ao nível da linha média da uretra. Dissecte bilateralmente a porção interna do ramo púbico inferior num ângulo de 45° para fora da linha média, criando uma via de passagem para a colocação do dispositivo de entrega.
3. Carregue a extremidade proximal do tubo dilatador segurando a junta entre o dilatador e a luva e colocando-a sobre a extremidade distal da agulha. Deslize o tubo dilatador sobre a agulha até que a extremidade proximal do dilatador encoste na extremidade distal do impulsor do dilatador.

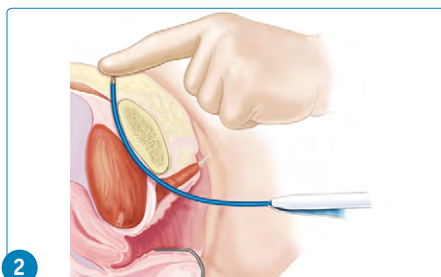


4. Apoiando a ponta da agulha na superfície palmar do dedo indicador não dominante, introduza suavemente o dispositivo de entrega no sentido anterolateral no espaço parauretral e perfure a fáscia endopélvica.
5. Passe cuidadosamente o dispositivo de entrega pelo espaço de Retzius e perfure a bainha do reto e o músculo. Oriente o dispositivo por meio de palpação na incisão abdominal ipsilateral até que a ponta da agulha apareça através da incisão.

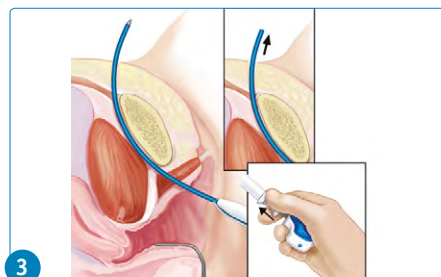


6. Quando o conjunto da ponta da agulha e tubo dilatador se estender extra-abdominalmente, avance o impulsor de dedo no punho para frente, o que fará com que o tubo dilatador avance além da ponta da agulha.
7. Segure o dilatador colocando uma pinça hemostática ou similar no lado livre da extremidade do dilatador para fixá-lo temporariamente de forma extra-abdominal.
8. Retire a agulha de dentro do dilatador puxando-a para fora do dilatador e para fora da vagina. O conjunto de tubo dilatador e malha deve permanecer no lugar.
9. Repita no lado contralateral. Neste ponto, os dois tubos dilatadores estarão posicionados e uma cistoscopia deve ser realizada para confirmar a integridade da bexiga.

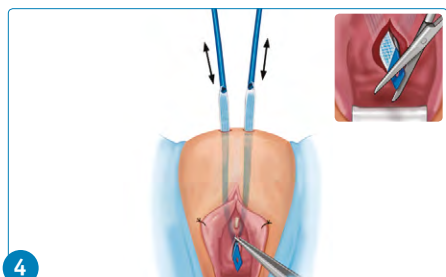

10. Tensione a malha puxando os dois dilatadores para cima simultaneamente para que o vazamento de urina se limite a não mais que uma ou duas gotas.
11. Quando a tensão adequada for atingida, segure a patilha de centragem azul e corte a aba pelo centro do orifício perfurado.
12. Certifique-se de que ambas as metades patilha de centragem azul foram removidas do canal vaginal.

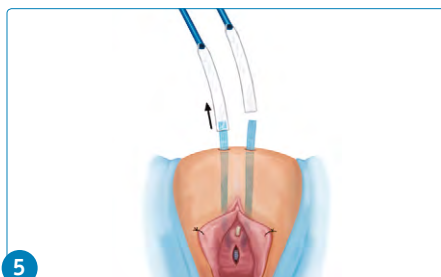

13. Retire a manga de proteção puxando-a para cima em ambos os dilatadores simultaneamente e verifique a tensão da malha, ajustando-a conforme necessário.

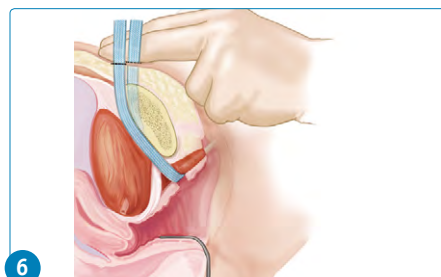

14. Uma vez atingida a tensão desejada, faça uma ligeira pressão sobre o abdômen, corte as extremidades distais da malha e permita que estas extremidades se retraiam para o interior da incisão.
15. Feche as incisões do modo habitual.

Informações para Pedidos

| Código do Produto | Descrição | Quantidade |
|-------------------|----------------------------|--|
| M0068502120 | Sistema Advantage Fit Azul | 1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha |
| M0068502110 | Sistema Advantage Fit™ | 1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha |
| M0068502050 | Sistema Advantage™ Azul | 1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha |
| M0068502000 | Sistema Advantage™ | 1 Dispositivo de Entrega e 1 Conjunto de Malha |

1. Moali, Pamela, et al. Tensile properties of five commonly used mid-urethral slings relative to the TVT™. *Int Urogynecol J* (2008) 19:655–663 DOI 10.1007/s00192-007-0499-1

2. Quando comparado com o Sling de Uretra Média Transvaginal Advantage™

3. Ilustrado o Sistema de Sling Advantage Fit Azul

Atenção: Para Slings de Uretra Média para Incontinência Urinária Feminina: A legislação dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou por ordem de um médico qualificado no uso de malha cirúrgica para correção da incontinência urinária de esforço.

ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso se aplicam somente aos países com registro da autoridade sanitária pertinente. Este material não se destina para uso na França.

Os produtos foram incluídos apenas para fins informativos e podem não ser aprovados ou vendidos em determinados países. Verifique a disponibilidade do produto em outros territórios com seu representante local ou com o serviço de atendimento ao cliente. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. Todas as imagens são de propriedade da Boston Scientific.

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
www.bostonscientific.com

© 2018 Boston Scientific
Corporation ou suas afiliadas.
Todos os direitos reservados.
WH-465202-AC MAIO 2018