

**Lynx**<sup>TM</sup>

Sistema de Sling de Uretra Média Suprapúbico



## Lynx™

### Sistema de Sling de Uretra Média Suprapúbico

Como podemos continuar inovando nossa família de slings de uretra média, que já são os produtos preferidos de quase 800.000 pacientes? Criando a mesma malha confiável em uma cor azul de fácil visualização. Com isso, qualquer que seja a sua abordagem cirúrgica preferida, a malha azul Advantage™ proporciona maior visibilidade para que você possa seus pacientes com mais confiança.

Uma porção lisa e sem pontas sob a uretra, concebida para manter sua integridade durante o tensionamento e potencialmente reduzir a irritação da parede uretral.


As bordas com pontas fora da porção suburetral ajudam a minimizar a migração da malha.

#### **Melhor visibilidade. Baseado em evidências.**

- As mesmas propriedades da nossa malha patenteada Advantage, documentada em mais de 35 publicações até o momento.
- A cor azul de fácil visualização melhora sua visibilidade para um tensionamento intraoperatório mais preciso do sling e facilita a localização pós-operatória.

#### **Malha de polipropileno<sup>1</sup> confiável**

- Espessura da malha: 0,66mm
- Tamanho dos poros: 1182µm
- Tamanho da fibra (diâmetro): 0,15mm
- Peso: 100g/m<sup>2</sup>

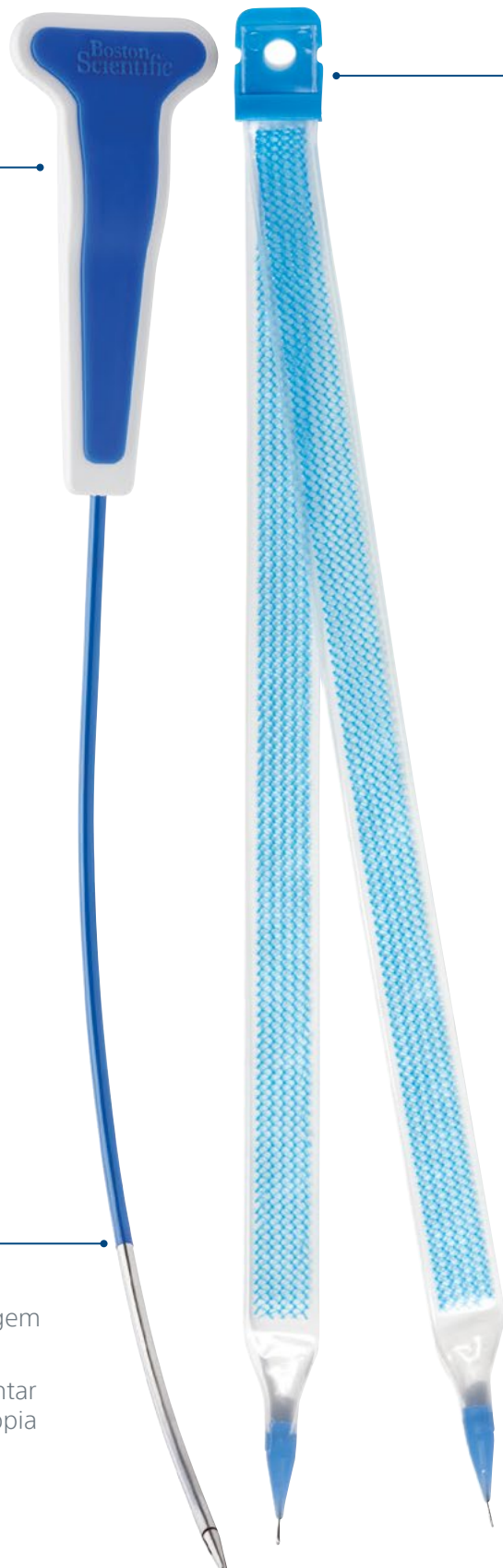


### Punho antideslizante

O punho antideslizante foi projetado de modo a para evitar que a mão escorregue durante a manipulação intraoperatória

### Patilha de centragem

Permite o alinhamento correto do centro da malha sob a uretra. Permite também que o médico aplique contratensão no sling, preservando a integridade da malha.

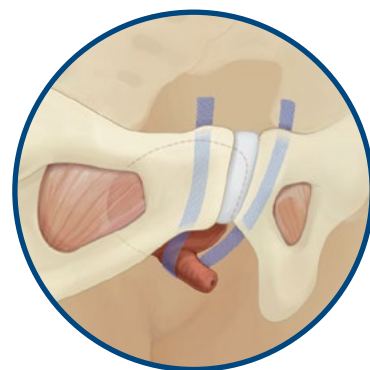

Abordagem suprapúbica

### Agulha


- Projetada para facilitar a passagem de dispositivos suprapúbicos
- A agulha é colorida para aumentar a visibilidade durante a cistoscopia

### Laçada

- Facilita o encaixe e a remoção de agulhas e malhas
- A transição suave da laçada para a malha permite uma perturbação mínima do tecido

# Procedimento para o Sistema de Sling de Uretra Média Suprapúbico


## Lynx™2

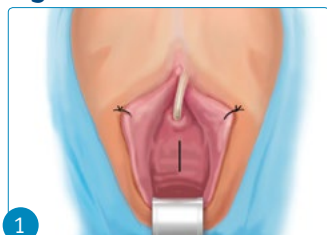


- 1
- Prepare os campos cirúrgicos vaginal e abdominal inferior.
  - Faça duas pequenas incisões transversais abdominais, com aproximadamente 0,5 cm a 1 cm, de cada lado da linha média, imediatamente acima da sínfise.
  - Faça uma incisão na parede vaginal anterior e disseque bilateralmente no modo habitual.




- 2
- Insira uma agulha através da incisão abdominal, deslocando a agulha para baixo num movimento vertical.
  - Perfure a fáscia do músculo reto para penetrar o Espaço de Retzius.
  - Oriente a extremidade distal da agulha para baixo, ao longo da superfície posterior do osso púbico, através da incisão vaginal.
  - Repita no lado contralateral com a segunda agulha.

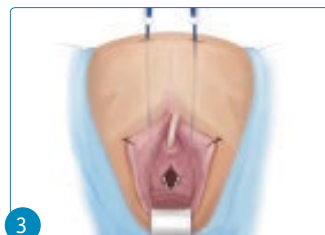


- 3
- Com ambas as agulhas posicionadas, deve ser realizada uma cistoscopia para confirmar a integridade da bexiga.
  - Se uma das agulhas for visualizada na bexiga, retire a agulha. Inspeccione visualmente a agulha para verificar a sua integridade. Esvazie a bexiga e repita o Passo 2 no lado em que ocorreu a perfuração da bexiga.

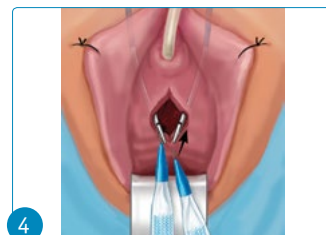


- 4
- Após determinar se a bexiga está intacta, introduza uma laçada na extremidade distal de cada uma das agulhas saindo através da incisão vaginal.

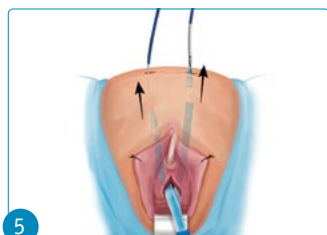


- 5
- Puxe as agulhas para cima através das incisões abdominais, certificando-se de que o conjunto da malha não esteja torcido e fique totalmente plano sob a uretra.
  - Retire as laçadas das agulhas.

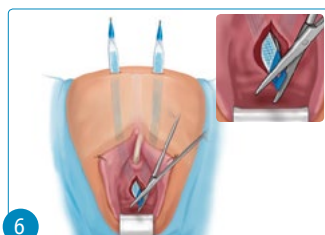

- 6
- Ajuste o conjunto da malha puxando os dilatadores para cima, de modo a que a patilha de centragem azul fique sob a uretra.
  - Aplique a tensão correta no conjunto da malha e manga, de acordo com as preferências do médico.
  - Segure a patilha de centragem azul e corte-a pelo centro do orifício perfurado, tendo o cuidado de assegurar que as duas metades da patilha azul estejam completamente removidas do canal vaginal.

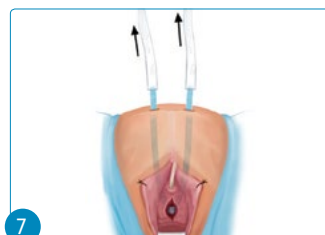

- 7
- Puxe para cima os dilatadores para remover a manga, deixando a malha na posição.
  - Verifique a tensão da malha e ajuste-a, conforme necessário.

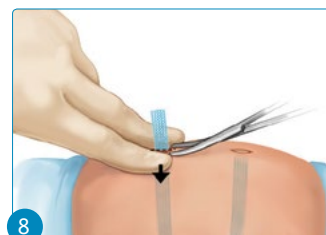

- 8
- Faça uma ligeira pressão sobre o abdômen, corte as extremidades distais da malha e confirme que estas se retraem para o interior das incisões abdominais.
  - Feche todas as incisões utilizando os métodos habituais.

## Informações para Pedidos

Código do Produto	Descrição	Quantidade
M0068503010	Sistema de Sling Lynx™ Azul	2 Dispositivos de Entrega e 1 Conjunto de Malha
M0068503000	Sistema de Sling Lynx™	2 Dispositivos de Entrega e 1 Conjunto de Malha

1. Moalli PA, Papas N, Menefee S, et al. Tensile properties of five commonly used mid-urethral slings relative to the TVT. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. Mai 2008;19(5):655-63.
2. Ilustrado o Sistema de Sling Lynx Azul

Atenção: Para Slings de Uretra Média para Incontinência Urinária Feminina: A legislação dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou por ordem de um médico qualificado no uso de malha cirúrgica para correção da incontinência urinária de esforço.

ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por médicos ou sob receita médica. As indicações, contra-indicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso se aplicam somente aos países com registro da autoridade sanitária pertinente. Este material não se destina para uso na França.

Os produtos foram incluídos apenas para fins informativos e podem não ser aprovados ou vendidos em determinados países. Verifique a disponibilidade do produto em outros territórios com seu representante local ou com o serviço de atendimento ao cliente.

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. Todas as imagens são de propriedade da Boston Scientific.

### Boston Scientific

Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way  
Marlborough, MA 01752  
[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

© 2018 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

WH-489506-AC MAIO 2018