



Cateter de Apoio Rubicon™ Control vs. Cateteres de Suporte Navicross®.


O Cateter de Apoio Rubicon™ Control oferece a combinação ideal de controle, facilidade de avanço e rastreabilidade para navegar rapidamente até CTOs complexas.

Os testes de referência demonstram que o Cateter de Apoio Rubicon™ Control combina resposta ao torque, capacidade de avanço e resistência à torção para auxiliar a navegação em anatomias complexas.

Resposta ao Torque

Quanto maior, melhor

Em todos os tamanhos, o cateter de apoio Rubicon™ Control oferece uma rotação da ponta mais responsiva após uma rotação completa do cubo. Um número mais alto indica uma resposta mais próxima do ideal de 1:1.

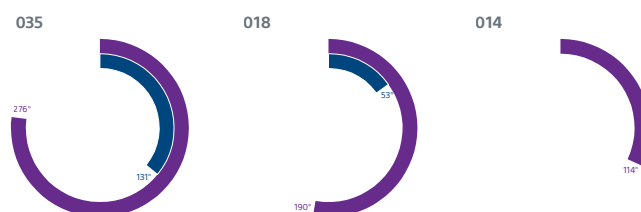

Capacidade de Avanço

Quanto maior, melhor


Em todos os tamanhos, o cateter de apoio Rubicon™ Control oferece maior capacidade de avanço, ou seja, a força transmitida da extremidade proximal para a distal à medida que o cateter avança.



Resistência à Torção

Quanto menor, melhor

Em todos os tamanhos, o cateter de apoio Rubicon™ Control oferece melhor resistência à torção, ou seja, o raio no qual o dispositivo começa a torcer.

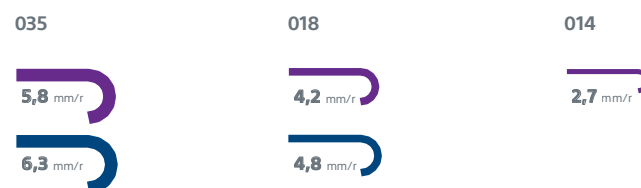

Códigos de Produto Rubicon™

Nº do catálogo de ref.	Descrição do Material
H749394321415A0	RUBICON CONTROL 014 150 ANG1 (SGL)
H749394321415A1	RUBICON CONTROL 014 150 ANG1 (BX5)
H749394321815A0	RUBICON CONTROL 018 150 ANG1 (SGL)
H749394321815A1	RUBICON CONTROL 018 150 ANG1 (BX5)
H749394321815S0	RUBICON CONTROL 018 150 STR (SGL)
H749394321815S1	RUBICON CONTROL 018 150 STR (BX5)
H749394323509A0	RUBICON CONTROL 035 90 ANG1 (SGL)
H749394323509A1	RUBICON CONTROL 035 90 ANG1 (BX5)
H749394323513S0	RUBICON CONTROL 035 135 STR (SGL)
H749394323513S1	RUBICON CONTROL 035 135 STR (BX5)
H749394323515A0	RUBICON CONTROL 035 150 ANG1 (SGL)
H749394323515A1	RUBICON CONTROL 035 150 ANG1 (BX5)
H749394323515B0	RUBICON CONTROL 035 150 ANG2 (SGL)
H749394323515B1	RUBICON CONTROL 035 150 ANG2 (BX5)
H749394323515S0	RUBICON CONTROL 035 150 STR (SGL)
H749394323515S1	RUBICON CONTROL 035 150 STR (BX5)

Cateter de apoio RUBICON™ Control

ATENÇÃO: A lei restringe estes dispositivos à venda por ou sob a ordem de um médico.

Indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na etiqueta do produto fornecida com cada dispositivo ou em <http://www.IFU-BSCI.com>.

Os produtos mostrados são apenas para FINS DE INFORMAÇÃO e podem não estar aprovados ou à venda em certos países. Este material não é destinado ao uso na França.

Medições realizadas pela Boston Scientific. Dados em arquivo. Os valores reais podem variar.

2026 Copyright © Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Os resultados do teste de bancada ou do estudo pré-clínico podem não ser necessariamente indicativos do desempenho clínico. Os testes foram realizados pela BSC ou em seu nome. Dados em arquivo.



Intervenções Periféricas
Av. Das Nações Unidas, 14.171 - Torre Marble 12º andar
CEP: 04794-000 - São Paulo - SP
www.bostonscientific.com

© 2026 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas.
Todos os direitos reservados.

PI-2515705-AA