



Cateter de Apoio RUBICON™ Control

Suporte Avançado Torque Preciso



**Alcance CTOs complexas em
locais difíceis com maior eficácia**



Pontas com
ângulos e retas



Núcleo de
Aço Inoxidável
com Trançado



Revestimento
hidrofílico distal
para navegação
suave



Compatível com
fios-guia 0,014",
0,018" e 0,035"

O design avançado proporciona suporte e controle durante a navegação em anatomias complexas.

O cateter de apoio Rubicon™ Control foi desenvolvido para auxiliar a navegação e o suporte de fios-guia em procedimentos vasculares periféricos. Com configuração de ponta reta ou angulada, estrutura trançada e revestimento hidrofílico distal, o dispositivo facilita o posicionamento, a troca de fios-guia e a entrega de soluções salinas ou de contraste, inclusive em anatomias periféricas desafiadoras.


Excelente capacidade de avanço, suporte de fio-guia e resistência a dobras



O conector ergonômico auxilia o manuseio do cateter durante a navegação.

Disponível para fios-guia de 0,014", 0,018" e 0,035", atendendo diferentes necessidades procedimentais.

O revestimento hidrofílico distal contribui para a lubricidade durante o avanço do dispositivo.

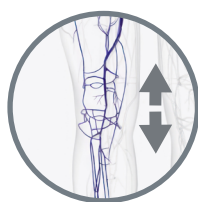

Acima e abaixo do joelho




Anatomia Tortuosa



Lesões Ostiais



Exploração suave

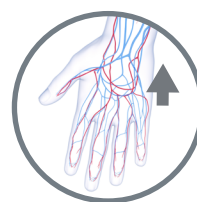

Entrada radial



Capacidade Coaxial

Desempenho

O cateter de apoio Rubicon™ Control oferece a combinação ideal de controle, capacidade de avanço e rastreamento. Com capacidade de torque superior em todos os pontos de acesso, navegue com eficiência pelas OTCs e anatomias mais difíceis.¹

Resultados

Os testes de referência do cateter de apoio Rubicon™ Control revelam que ele tem um desempenho melhor do que outros cateteres de suporte nas três categorias principais.¹

Resposta ao torque


Em todos os tamanhos, o cateter de apoio Rubicon™ Control oferece uma rotação de ponta mais responsiva após uma rotação completa do torqueador, proporcionando uma resposta próxima do ideal de 1:1.¹

Capacidade de avanço

Os testes de referência demonstraram que o cateter de apoio Rubicon™ Control apresentou elevada capacidade de transmissão de força da extremidade proximal para a distal durante o avanço do dispositivo. Em comparação com os dispositivos avaliados, os resultados evidenciaram desempenho consistente nas configurações 0,014", 0,018" e 0,035".¹

Resistente à dobra

Nos testes de bancada realizados, o cateter de apoio Rubicon™ Control apresentou resistência à dobra igual ou superior aos dispositivos comparados em todas as configurações avaliadas. A resistência à dobra é determinada pelo raio mínimo de curvatura em que o dispositivo começa a apresentar deformação.¹

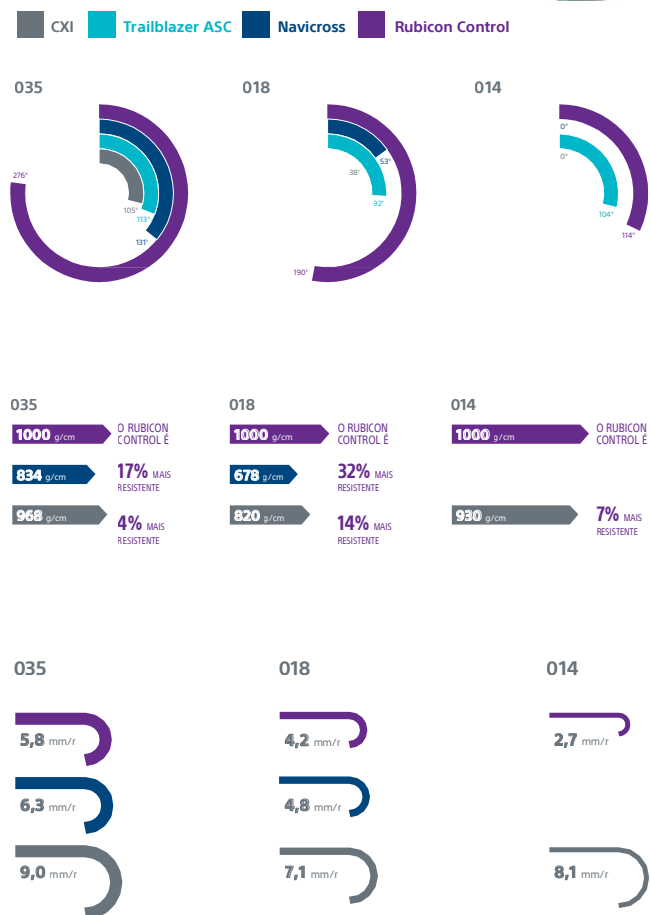

1. Todos os produtos testados são cateteres trançados angulados. Medições realizadas pela Boston Scientific. Dados em arquivo. Os valores reais podem variar. (n=4 para cada tamanho, quando aplicável (.035", .018", .014")). Os resultados do teste de bancada ou do estudo pré-clínico podem não ser necessariamente indicativos do desempenho clínico. Os testes foram realizados pela BSC ou em seu nome. Dados em arquivo.

Cateter de Apoio Rubicon™ Control - Códigos dos Produtos

Nº do catálogo de ref.	Descrição do Material
H749394321415A0	RUBICON CONTROL 014 150 ANG1 (SGL)
H749394321415A1	RUBICON CONTROL 014 150 ANG1 (BX5)
H749394321815A0	RUBICON CONTROL 018 150 ANG1 (SGL)
H749394321815A1	RUBICON CONTROL 018 150 ANG1 (BX5)
H749394321815S0	RUBICON CONTROL 018 150 STR (SGL)
H749394321815S1	RUBICON CONTROL 018 150 STR (BX5)
H749394323509A0	RUBICON CONTROL 035 90 ANG1 (SGL)
H749394323509A1	RUBICON CONTROL 035 90 ANG1 (BX5)
H749394323513S0	RUBICON CONTROL 035 135 STR (SGL)
H749394323513S1	RUBICON CONTROL 035 135 STR (BX5)
H749394323515A0	RUBICON CONTROL 035 150 ANG1 (SGL)
H749394323515A1	RUBICON CONTROL 035 150 ANG1 (BX5)
H749394323515B0	RUBICON CONTROL 035 150 ANG2 (SGL)
H749394323515B1	RUBICON CONTROL 035 150 ANG2 (BX5)
H749394323515S0	RUBICON CONTROL 035 150 STR (SGL)
H749394323515S1	RUBICON CONTROL 035 150 STR (BX5)

Cateter de apoio RUBICON™ Control

ATENÇÃO: A lei restringe estes dispositivos à venda por ou sob a ordem de um médico.

Indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na etiqueta do produto fornecida com cada dispositivo ou em <http://www.IFU-BSCI.com>.

Os produtos mostrados são apenas para FINS DE INFORMAÇÃO e podem não estar aprovados ou à venda em certos países. Este material não é destinado ao uso na França.

2026 Copyright © Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Resultados de estudos de caso não são necessariamente preditivos de resultados em outros casos. Resultados em outros casos podem variar.

**Boston
Scientific**
Avançando a ciência pela vida™

Intervenções Periféricas
Av. Das Nações Unidas, 14.171 - Torre Marble 12º andar
CEP: 04794-000 - São Paulo - SP
www.bostonscientific.com

© 2026 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas.
Todos os direitos reservados.

PI-2515112-AA