

平成 30 年 11 月 28 日

報道関係者 各位

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
代表取締役社長 内木 祐介



「植込み型心臓ペースメーカ (ACCOLADE™) 及び
除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ CRT-P (VALITUDE™)」
患者モニタリング (クラス I) に関するお知らせ

弊社が製造販売しております植込み型心臓ペースメーカ (ACCOLADE™) 及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ CRT-P (VALITUDE™) につきまして、下記のとおり、患者モニタリング (経過観察) *を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、対象となる製品は全て特定されておりますので、本製品が植込まれている患者様に対して、モニタリングを実施して頂くよう、速やかに医療機関に対し依頼いたします。

患者様をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

記

1. 患者モニタリングの概要

植込み型心臓ペースメーカ (アコレード、アコレード MRI) 及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ CRT-P (ヴァリチュード) (以下、ペースメーカ) において、分時換気量 (MV) センサ信号の間欠的なオーバーセンシングが発生する事例が報告されました。当該事象が発生した場合、ペーシングが抑制され、特にペースメーカ依存の患者様において重篤な健康被害に至る可能性を否定することができないことから、当該製品の患者モニタリングに着手することを決定いたしました。

2. 患者モニタリングを実施する事業所

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| (1) 会社の名称 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 |
| (2) 本社所在地 | 東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス |
| (3) 事業の業態 | 第一種医療機器製造販売業 |
| (4) 許可番号 | 13B1X00043 |

3. 患者モニタリングを実施する医療機器の概要

- | | |
|---------|--|
| (1) 販売名 | 1) アコレード
(承認番号：22800BZX00168000、承認年月日：平成 28 年 4 月 19 日) |
| | 2) アコレード MRI
(承認番号：22700BZX00334000、承認年月日：平成 27 年 11 月 6 日) |

※患者モニタリングとは、医療機器等の製造販売業者等が、製造販売した医療機器等を患者から摘出することなく、当該医療機器等を使用している患者の経過を観察することを指します。

3) ヴァリチュード

(承認番号：22800BZX00187000、承認年月日：平成28年5月9日)

- (2) 一般的名称 1, 2) 植込み型ペースメーカー
3) 除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ
- (3) 製造元の名称及び国名 ガイダント・コーポレーション
米国

4. 患者モニタリングの対象

(1) 製造番号

1) アコレード

L300

704711	707669	709573	709839	709919	709925	709993	710051	710059
710060	710070	710075	710076	710077	710080	710110	710113	710116
710118	710126	710128	710140	710147	710148	710152	710155	710160
710162	710186	710191	710194	710205	710209	710211	710214	710216
710228	710237	710238	710241	710259	710268	710282	710283	710288
710290	710297	710298	710300	710301	710318	710319	710327	710339
710344	710355	710357	710358	710359	710362	710363	710364	710368
710370	710378	710380	710381	710385	710393	710396	710399	710401
710414	710419	710421	710431	710561	710673	710959	710992	710994
710999	711029	711035	711038	711052	711056	711064	711075	711118
711123	711128	711143	711146	711152	711168	711169	711176	711177
711178	711184	711187	711191	711195	711196	711200	711203	711213
711216	711220	711224	711233	711238	711245	711246	711248	711254
711262	711275	711282	711283	711284	711291	711618	711634	711744
712917	712951	712955	712956	712958	712960	712962	712966	712971
712973	712978	712980	712981	712985	712986	712988	712989	712990
712994	712995	712999	713000	713001	713008	713011	713012	713015
713017	713020	713022	713024	713030	713040	713045	713057	713068
713069	713076	713078	713080	713081	713085	713086	713090	713092
713093	713099	713102	713104	713107	713109	713110	713117	713118
713122	713123	713143	713277	713278	713318	713319	713320	713326
713333	713335	713357	713363	713368	713372	713385	713386	713388
713389	713393	713399	713401	713404	713407	713408	713409	713411
713414	713419	713431	713445	713446	713449	713450	713457	713458
713460	713462	713463	713468	713471	713473	713475	713476	713479
713481	713485	713486	713487	713488	713490	713492	713494	713496
713497	713499	713504	713505	713507	713509	713510	713518	713522
713523	713524	713529	713531	713532	713534	713539	713540	713550
713551	713552	713554	713556	713558	713559	713561	713563	713564
713565	713566	713567	713568	713569	713570	713572	713575	713576
713578	713579	713580	713583	713584	713587	713590	713591	713613
713614	713615	713616	713617	713618	713619	713620	713622	713623
713635	713638	713639	713640	713643	713655	713656	713659	713662
713664	713665	713668	713670	713671	713672	713673	713676	713677

713681	713683	713686	713687	713689	713694	713697	713698	713701
713702	713705	713706	713708	713709	713712	713714	713716	713717
713724	713727	713728	713729	713730	713733	713735	713739	713741
713742	713743	713746	713749	713750	713753	713756	713758	713760
713763	713767	713768	713771	713773	713774	713775	713776	713777
713779	713780	713781	713782	713786	713787	713788	713789	713790
713791	713792	713794	713795	713796	713797	713798	713799	713801
713802	713803	713805	713806	713807	713808	713809	713813	713814
713815	713816	713817	713820	713822	713823	713824	713825	713827
713828	713829	713830	713831	713832	713833	713842	713849	713853
713858	713859	713863	713866	713875	713877	713880	713886	713887
713911	713947	713950	713960	713971	713988	714034	714035	714040
714046	714050	714055	714056	714058	714060	714061	714069	714083
714085	714096	714101	714104	714107	714111	714145	714155	714157
714172	714173	714178	714181	714212	714230	714233	714245	714253
714291	714296	714305	714309	714326	714386	714451	714468	714472
714480	714482	714507	714532	714580	714606	714618	714624	714626
714633	714634	714640	714656	714661	714670	714682	714689	714693
714700	714712	714720	714724	714740	714753	715498	715500	716152
716171	716173	716187	716207	716218	716220	716231	716241	716252
716256	716300	716343	716359	716361	716373	716399	716406	716410
716413	716431	716432	716433	716434	716436	716437	716450	716475
716482	716483	716484	716489	716490	716494	716502	716506	716524
716592	716596	716598	716602	716605	716606	716624	716625	716648
716652	716672	716676	716712	716728	716771	716811	716816	716829
716839	716840	716849	716850	716936	716958	717082	717084	717088
717113	717115	717148	717156	717158	717185	717187	717192	717193
717207	717209	717211	717213	717214	717219	717221	717222	717223
717229	717231	717242	717244	717246	717256	717267	717270	717271
717272	717273	717279	717283	717287	717289	717290	717294	717298
717304	717307	717310	717313	717315	717316	717323	717324	717325
717330	717334	717337	717342	717372	717380	717381	717382	717443
717524	717529	717545	717547	717554	717559	717561	717564	717597
717604	717616	717617	717618	717625	717629	717642	717646	717648
717649	717650	717651	717659	717666	717668	717669	717671	717675
717676	717678	717680	717682	717687	717689	717692	717695	717696
717698	717699	717701	717704	717705	717709	717710	717711	717715
717721	717723	717725	717726	717732	717737	717738	717746	717753
717757	717759	717776	718150	718153	718154	718156	718160	718251
718252	718264	718274	718283	718285	718301	718302	718303	718304
718314	718316	718321	718322	718327	718330	718334	718338	718339
718340	718347	718349	718373	718386	718392	718394	718398	718401
718403	718404	718406	718407	718411	718413	718417	718418	718427
718428	718430	718431	718432	718433	718438	718452	718453	718455
718456	718462	718465	718468	718471	718474	718489	718493	718514

718515	718516	718517	718542	718560	718580	718590	718595	718691
718692	718700	718706	718742	718759	718786	718794	718796	718798
718833	718873	718885	718895	718896	718917	718919	718934	718940
718948	718960	718970	718972	718994	718999	719013	719016	719017
719020	719021	719026	719027	719029	719031	719053	719054	719057
719058	719060	719064	719070	719075	719112	719176	719188	719203
719222	719224	719228	719235	719247	719277	719305	719310	719335
719352	719363	719370	719374	719375	719377	719378	719381	719385
719388	719389	719393	719396	719397	719399	719402	719409	719412
719419	719422	719423	719425	719426	719427	719429	719434	719437
719438	719439	719441	719443	719444	719445	719446	719447	719448
719449	719455	719458	719459	719461	719466	719473	719481	719493
719503	719504	719505	719506	719507	719511	719514	719516	719517
719519	719520	719538	719578	719580	719584	719604	719628	719630
719642	719643	719645	719646	719648	719649	719657	719681	719699
719715	719717	719725	719728	719736	719742	719772	719776	719778
719784	719785	719793	719794	719796	719797	719801	719803	719807
719813	719818	719819	719820	719829	719842	719854	719878	719901
719906	719907	719959	719965	719970	719977	720013	720015	720026
720030	720034	720037	720040	720053	720054	720063	720123	720239
720278	720437	720557	720578	720623	720666	720751	721211	721241
721242	721599	721604	721930	721933	721934	721935	721936	721938
721940	721941	721946	721968	721969	721972	721975	721996	722017
722025	722026	722033	722050	722078	722080	722117	722132	722136
722139	722279	722349	722356	722568	722599	722637	722666	722669
722670	722688	722690	722692	722693	722695	722696	722698	722699
722700	722702	722704	722706	722709	722710	722711	722720	722727
722729	722787	722793	722802	722803	722804	722809	722812	722813
722814	722816	722818	722820	722866	722903	722937	722973	722985
722987	722999	723003	723005	723006	723007	723008	723009	723011
723024	723026	723031	723035	723036	723037	723038	723040	723041
723045	723073	723079	723080	723173	723182	723190	723196	723200
723207	723211	723212	723220	723221	723225	723235	723236	723247
723250	723253	723268	723269	723272	723273	723277	723279	723282
723290	723296	723316	723335	723361	723369	723371	723380	723404
723408	723418	723426	723436	723438	723439	723442	723443	723444
723448	723450	723454	723455	723460	723465	723467	723470	723472
723473	723476	723477	723480	723481	723482	723483	723484	723485
723487	723488	723489	723490	723491	723498	723499	723502	723515
723516	723519	723522	723523	723525	723530	723531	723536	723538
723545	723546	723547	723548	723549	723550	723551	723568	723569
723572	723574	723576	723577	723581	723582	723583	723584	723586
723587	723588	723589	723590	723591				

L301

722780	723695	723730	723769	723770	723772	723775	723777	723791
723795	723810	723822	723854	723890	723897	723964	724015	724016
725735	727441	733150	733188	733262	733923	735384	735648	735776
735798	735838	736044	736062	736740	736853	736863	736988	737026
737037	737046	737081	737137	737170	737190	737248	737379	737384
737400	737448	737533	737614	737627	737644	737654	737656	737688
737715	737716	737731	737750	737773	737788	737794	737796	737803
737842	737897	737958	737977	737987	738018	738070	738103	738131
738257	738307	738318	738339	738370	738500	738660	738723	738823
738873	738905	739001	739006	739059	739155	739163	739164	739201
739205	739231	739249	739275	739321	739340	739354	739361	739372
739491	739512	739520	739538	739547	739558	739575	739589	739656
739681	739682	739707	739722	739759	739763	739772	739787	739805
739813	739819	739845	739847	739874	739875	739888	739894	739895
739896	739899	739900	739901	739902	739904	739905	739909	739911
739913	739915	739917	739921	739922	739938	739943	739944	739945
739949	739950	739951	739952	739953	739955	739956	739957	739964
739966	739969	739973	739974	739975	739976	739977	739979	739982
739985	739989	739991	739996	739997	739999	740005	740010	740012
740014	740018	740022	740023	740025	740028	740029	740033	740036
740042	740043	740050	740055	740059	740062	740063	740078	740081
740082	740084	740089	740100	740101	740102	740104	740106	740108
740111	740112	740115	740116	740118	740120	740122	740124	740126
740128	740129	740130	740132	740134	740135	740212	740215	740220
740225	740232	740235	740242	740253	740261	740265	740267	740279
740293	740296	740303	740304	740305	740340	740358	740361	740365
740389	740391	740416	741054	741131	741565	743013	743410	743701
743702	743716	743726	743739	743740	743744	744892	744906	744908
745102	745651	745694	745753	745773	745797	745822	746375	746405
746528	746536	746558	746666	746667	746704	746712	746714	746715
746717	746721	746753	746763	746766	746773	746776	746778	746779
746782	746784	746792	746793	746794	746795	746803	746804	746806
746808	746809	746810	746811	746819	746828	746829	746832	746839
746840	746842	746844	746845	746850	746853	746856	746857	746862
746863	746873	746894	746895	746898	746899	746900	746901	746903
746904	746905	746915	746920	746923	746937	746954	746963	746964
746965	746972	746989	747063	747074	747077	747080	747087	747135
747149	747150	747158	747160	747164	747169	747170	747171	747178
747185	747186	747188	747194	747206	747216	747218	747248	747250
747269	747290	747299	747305	747307	747324	747386	747405	747410
747413	747415	747421	747463	747483	747493	747522	747526	747529
747535	747539	747540	747546	747556	747558	747559	747560	747561
747564	747582	747587	747590	747591	747592	747593	747605	747606
747614	747616	747618	747623	747633	747638	747639	747640	747641
747642	747648	747651	747652	747664	747666	747679	747680	747695

747696	747697	747699	747709	747710	747712	747713	747715	747722
747724	747750	747753	747754	747756	747759	747771	747778	747787
747792	747793	747800	747801	747802	747804	747805	747806	747812
747816	747820	747826	747827	747831	747833	747834	747845	747847
747848	747851	747855	747856	747857	747862	747866	747868	747869
747871	747874	747876	747889	747890	747891	747892	747900	747908
747912	747915	747916	747932	747936	747937	747957	747967	747969
747980	748079	748084	748090	748095	748118	748144	748145	748150
748166	748176	748183	748187	748192	748199	748200	748208	748214
748217	748218	748222	748223	748229	748232	748234	748252	748262
748470	748477	748510	748551	748578	748604	748610	748612	748613
748618	748818	748910	748914	749007	749083	749177	749245	749529
749636	749658	749670	749714	749772	749787	749817	749972	750022
750027	750045	750048	750089	750144	750191	750220	750248	750260
750284	750309	750315	750317	750328	750331	750348	750351	750373
750376	750377	750381	750382	750383	750384	750385	750390	750391
750394	750398	750400	750411	750422	750432	750433	750438	750455
750458	750463	750464	750469	750470	750472	750474	750478	750481
750486	750489	750491	750494	750496	750497	750499	750500	750501
750502	750506	750508	750510	750511	750514	750523	750528	750544
750545	750551	750554	750555	750559	750567	750576	750587	750618
750627	750635	750636	750637	750640	750641	750652	750655	750658
750662	750664	750665	750667	750674	750675	750681	750687	750707
750709	750714	750720	750744	750760	750763	750769	750776	750777
750785	750786	750798	750806	750822	750826	750840	750870	750890
750892	750901	750905	750906	750911	750915	750917	750918	750920
750928	750933	750934	750935	750948	750956	750957	750958	750962
750963	750965	750968	750969	750972	750975	750991	750993	751000
751002	751005	751008	751020	751033	751037	751041	751048	751050
751053	751062	751071	751075	751082	751083	751097	751108	751110
751118	751137	751146	751153	751156	751172	751182	751195	751199
751200	751203	751207	751210	751211	751223	751225	751228	751229
751235	751241	751247	751251	751252	751254	751255	751258	751267
751270	751289	751290	751293	751298	751303	751306	751309	751337
751338	751343	751355	751362	751368	751384	751407	751432	751438
751439	751455	751466	751467	751475	751490	751496	751503	751507
751526	751529	751530	751540	751549	751559	751606	751609	751610
751619	751634	751661	751677	751683	751684	751687	751691	751698
751707	751713	751721	751734	751740	751761	751773	751774	751796
751800	751836	751838	751876	751878	751909	751940	751969	751979
751980	751981	751990	752001	752011	752054	752059	752077	752082
752084	752092	752099	752109	752117	752119	752137	752143	752163
752211	752276	752289	752292	752304	752308	752311	752360	752361
752365	752367	752377	752379	752380	752382	752385	752387	752388
752390	752393	752394	752395	752398	752410	752420	752426	752430

752432	752434	752437	752439	752442	752444	752446	752449	752451
752453	752456	752465	752467	752475	752476	752477	752479	752480
752481	752486	752487	752488	752491	752493	752495	752497	752499
752500	752502	752503	752521	752532	752577	752596	752701	752705
752732	752752	752767	752768	752771	752779	752792	752823	753028
753221	753223	753272	753422	753466	753497	753498	753500	753557
754436	754483	754534	754571	754578	754580	754589	754594	754601
754644	754663	754664	754682	754728	754741	754745	754794	754819
754826	755245	755373	755423	756051	756121	756154	756170	756189
756207	756258	756273	756326	756336	756381	756398	756401	756426
756427	756440	757532	757572	758056	758477	758482	758498	758513
758517	758537	758543	758582	758611	758613	758674	758720	758728
758735	758738	758754	758865	758876	759055	759077	759131	759143
759394	759433	759442	759446	759447	759448	759451	759453	759488
759491	759514	759519	759522	759571	759582	759595	759910	759943
759953	759994	760085	760086	760098	760119	760128	760132	760139
760142	760144	760150	760161	760170	760182	760185	760204	760253
760258	760260	760270	760282	760303	760337	760346	760360	760365
760369	760380	760387	760392	760442	760450	760459	760484	760529
760530	760533	760543	760576	760599	760614	760616	760618	760624
760630	760631	760632	760660	760682	760688	760693	760705	760706
760708	760711	760714	760718	760723	760726	760729	760732	760733
760734	760737	760738	760741	760744	760748	760749	760769	760772
760780	760803	760818	760826	760892	760898	760945	760978	760996
761049	761060	761064	761118	761120	761148	761151	761174	761177
761178	761185	761203	761219	761225	761253	761270	761287	761332
761406	761419	761447	761461	761471	761481	761508	761510	761520
761627	761646	761702	761704	761726	761735	761743	761750	761760
761767	761770	761772	761782	761786	761804	761814	761820	761831
761838	761842	761845	761848	761867	761876	761884	761887	761891
761892	761895	761898	761900	761902	761906	761909	761911	761919
761923	761927	761929	761931	761942	761947	761954	761962	761966
761976	761997	762006	762016	762081	762086	762157	762165	762167
762191	762209	762221	762224	762225	762231	762234	762235	762241
762361	762409	762415	762421	762430	762439	762448	762455	762456
762460	762471	762505	762518	762546	762559	762560	762703	762706
762712	762714	762717	762718	762721	762737	762738	762739	762744
762745	762752	762756	762759	762761	762765	762771	762772	762776
762777	762779	762789	762792	762798	762799	762800	762807	762814
762822	762823	762824	762826	762828	762829	762834	762836	762839
762840	762849	762866	762884	762889	762895	762897	762901	762954
762987	762998	763027	763029	763032	763071	763072	763087	763093
763096	763105	763106	763108	763124	763125	763135	763136	763142
763155	763156	763157	763160	763169	763173	763190	763198	763206
763210	763211	763212	763215	763218	763219	763228	763230	763233

763239	763242	763243	763245	763247	763252	763257	763260	763264
763266	763276	763293	763303	763305	763313	763314	763317	763324
763327	763329	763338	763340	763345	763349	763362	763367	763370
763374	763376	763384	763390	763393	763400	763401	763413	763418
763420	763430	763437	763448	763451	763452	763470	763472	763512
763525	763553	763555	763566	763576	763592	763598	763599	763602
763603	763605	763606	763608	763613	763619	763621	763630	763632
763635	763637	763695	763700	763706	763718	763726	763741	763755
763773	763806	763811	763821	763825	763826	763845	763852	763853
763854	763863	763864	763877	763880	763885	763892	763898	763910
763913	763915	763918	763923	763926	763929	763931	763932	763937
763942	763951	763952	763962	763968	763977	763981	763984	763985
763997	764002	764003	764008	764011	764013	764014	764018	764019
764028	764068	764070	764081	764107	764128	764132	764139	764142
764146	764155	764156	764160	764161	764164	764165	764167	764168
764170	764214	764221	764233	764243	764271	764288	764290	764291
764294	764297	764303	764307	764310	764315	764324	764335	764342
764345	764349	764355	764356	764361	764377	764381	764386	764390
764399	764402	764412	764414	764415	764418	764421	764447	764468
764535	764546	764572	764587	764591	764974	765078	765085	765527
765540	765554	767999	768009	768041	768068	768211	768230	768262
768284	768290	768307	768318	768321	768338	768345	768346	768348
768350	768353	768354	768357	768358	768359	768360	768362	768859
769053	769056	769058	769081	769085	769088	769090	769091	769093
769095	769103	769105	769111	769112	769121	769137	769145	769148
769151	769162	769170	769171	769178	769190	769203	769207	769208
769210	769217	769218	769224	769230	769233	769234	769235	769238
769242	769244	769248	769249	769250	769258	769261	769269	769271
769274	769281	769285	769297	769298	769304	769305	769306	769310
769315	769323	769353	769354	769359	769360	769362	769446	769504
769534	769536	769541	769562	769617	769745	769746	769747	769749
769751	769752	769754	770294	770471	770506	770587	770596	770598
770603	770604	770608	770616	770617	770627	770629	770671	770672
770676	770677	770678	770685	770686	770691	770693	770694	770703
770706	770708	770714	770715	770717	770726	770727	770729	770739
770745	770755	770757	770758	770778	770788	770802	770808	770811
770813	770822	770828	770829	770839	770846	770852	770865	770875
770891	770901	770925	770942	770954	770983	770988	770990	770992
770994	770998	771002	771018	771020	771033	771034	771044	771047
771058	771071	771078	771079	771081	771087	771101	771132	771151
771195	771202	771213	771228	771229	771240	771249	771254	771269
771273	771274	771276	771277	771278	771289	771303	771305	771310
771323	771324	771333	771351	771352	771368	771372	771374	771377
771378	771382	771402	771423	771429	771458	771459	771461	771465
771474	771475	771477	771479	771480	771484	771486	771495	771496

771500	771507	771512	771523	771524	771526	771527	771547	771575
771843	772019	772044	772047	772073	772104	772110	772121	772125
772240	772258	772278	772279	772281	772293	772295	772300	772301
772309	772314	772316	772320	772322	772328	772330	772337	772339
772340	772341	772342	772343	772347	772353	772355	772361	772365
772367	772368	772369	772370	772380	772381	772393	772395	772399
772416	772417	772419	772436	772441	772445	772447	772450	772466
772469	772475	772488	772493	772496	772499	772503	772507	772522
772524	772533	772538	772541	772543	772545	772548	772552	772578
772582	772589	772607	772613	772614	772616	772619	772633	772640
772683	772687	772703	772710	772711	772745	772787	772788	772838
772842	772853	772873	772876	772877	772880	772883	772885	772894
772901	773023	773032	773036	773042	773058	773080	773093	773104
773110	773137	773143	773157	773160	773167	773176	773178	773183
773185	773189	773191	773208	773212	773215	773216	773226	773235
773237	773238	773244	773246	773249	773251	773252	773257	773258
773259	773261	773269	773274	773276	773277	773279	773280	773281
773282	773287	773288	773291	773296	773298	773305	773306	773309
773313	773317	773318	773322	773323	773329	773330	773335	

L321

705468	707577	707721	707723	707725	707731	707732	707735	707737
707738	707739	707743	707747	707752	707758	707765	707768	707770
707772	707775	707777	707778	707780	707783	707785	707790	707791
707795	707796	707813	707875	707876	707878	707954	708017	708034
708036	708037	708071	708083	708085	708095	708101	708102	708103
708104	708107	708124	708129	708132	708140	708141	708143	708230
708258	708266	708267	708268	708269	708270	708271	708274	708275
708287	708294	708296	708297	708299	708300	708303	708304	708307
708309	708310	708395	708431	708461	708986	709296	709499	709604
709914	710047	710500	710577	710694	710719	710793	710913	710954
711007	711051	711104	711202	711276	711298	711342	711353	711367
711422	711533	711538	711539	711553	711574	711612	711627	711637
711659	711680	711692	711713	711730	711742	711773	711795	711803
711810	711814	711816	711825	711826	711830	711838	711846	711852
711861	711862	711866	711868	711870	711885	711889	711905	711907
711908	711909	711913	711914	711920	711923	711939	711940	711942
711945	711950	711951	711953	711987	712022	712065	712195	712200
712226	712230	712236	712273	712287	712288	714411	714496	714498
714663	714764	714808	715030	715226	715297	715515	715518	715524
715537	715554	715555	715557	715559	715565	715569	715570	715573
715574	715577	715580	715581	715622	715623	715624	715625	715629
715633	715635	715639	715643	715649	715651	715656	715657	715668
715670	715675	715676	715679	715680	715685	715686	715687	715688
715689	715692	715694	715698	715702	715708	715709	715710	715711

715712	715713	715714	715716	715719	715720	715721	715723	715729
715730	715733	715734	715737	715738	715739	715740	715741	715750
715753	715754	715755	715758	715759	715762	715765	715775	715778
715780	715784	715785	715786	715790	715792	715794	715798	715799
715801	715802	715804	715808	715811	715812	715815	715816	715817
715818	715820	715822	715826	715827	715829	715834	715835	715836
715839	715840	715844	715846	715850	715852	715866	715868	715870
715871	715874	715886	715892	716045	716050	716051	716070	716074
716079	716086	716093	716119	716126	716127	716130	716134	716147
716149	716153	716157	716158	716186	716188	716189	716212	716213
716216	716220	716223	716233	716235	716265	716269	716271	716272
716274	716283	716285	716287	716291	716294	716310	716313	716325
716326	716331	716343	716353	716359	716365	716376	716378	716393
716394	716401	716406	716410	716413	716421	716432	716434	716441
716446	716463	716464	716482	716487	716489	716497	716499	716502
716504	716514	716524	716538	716540	716544	716546	716548	716553
716555	716557	716559	716564	716570	716572	716587	716622	716681
716687	716712	716721	716733	716752	716763	716765	716767	716779
716802	716822	716867	716874	716875	716879	716888	716889	716912
716916	716950	716994	717008	717019	717022	717050	717055	717085
717087	717089	717099	719231	719399	719409	719466	719489	719490
719504	719539	719580	719586	719591	719679	720035	720044	720048
720050	720056	720060	720078	720098	720101	720104	720110	720119
720122	720132	720172	720194	720202	720219	720228	720229	720233
720264	720268	720272	720274	720276	720284	720293	720304	720307
720309	720311	720312	720313	720315	720318	720319	720320	720335
720345	720346	720355	720357	720362	720364	720371	720375	720377
720381	720394	720409	720410	720411	720425	720426	720428	720431
720436	720438	720452	720466	720868	720884	721013	721058	721111
721130	721146	721161	721163	721164	721169	721173	721174	721183
721248	721249	721252	721262	721362	721865	721941	721947	721948
721954	721957	721964	721974	721978	721993	721995	721996	722004
722007	722013	722157	722185	722209	722229	722236	722238	722259
722317	722325	722339	722343	722346	722356	722371	722376	722381
722391	722397	722411	722419	722420	722427	722473	722479	722498
722505	722511	722514	722556	722567	722605	722615	722628	722631
722652	722656	722699	722719	722720	722723	722735	722738	722740
722742	722749	722756	722759	722763	722777	722779	722781	722789
722812	722814	722839	722866	722889	722894	722922	722945	723037
723040	723078	723079	723094	723105	723139	723144	723694	724156
724157	724164	724250	724374	724754	724755	724758	724784	724787
724788	724808	724813	724825	724839	724843	724845	724847	724875
724925	724950	725064	725141	725160	725162	725163	725164	725165
725168	725170	725175	725192	725194	725195	725202	725204	725206
725207	725208	725211	725213	725214	725218	725219	725227	725229

725239	725240	725258	725306	725320	725324	725328	725336	725337
725339	725340	725344	725347	725350	725380	725439	725443	725445
725448	725449	725451	725457	725458	725462	725471	725476	725477
725478	725479	725480	725557	725623	725624	725631	725633	725640
725643	725646	725651	725658	725660	725666	725667	725673	725675
725677	725679	725680	725681	725682	725696	725702	725705	725708
725709	725711	725712	725721	725722	725728	725744	725749	725750
725770	725784	726069	726072	726075	726091	726096	726097	726098
726102	726103	726104	726105	726107	726115	726119	726125	726126
726127	726128	726129	726130	726131	726132	726133	726134	726136
726137	726139	726140	726141	726143	726144	745870		

2) アコレード MRI

L310

101938	700406	700630	700710	701345	702153	702502	702716	702800
702805	702849	702852	702913	702944	702964	703072	703094	703100
703105	703110	703126	703134	703140	703164	703167	703168	703189
703212	703228	703230	703235	703264	703265	703284	703287	703292
703301	703303	703305	703312	703320	703330	703351	703369	703371
703377	703388	703391	703397	703402	703408	703415	703422	703431
703441	703468	703476	703485	703496	703507	703520	703521	703523
703524	703527	703530	703537	703542	703556	703560	703570	703572
703575	703586	703606	703613	703620	703625	703634	703646	703648
703660	703666	703668	703670	703671	703676	703684	703689	703698
703703	703716	703718	703719	703720	703725	703727	703728	703733
703741	703756	703760	703764	703775	703777	703780	703782	703785
703791	703806	703812	703837	703871	703872	703886	703896	703912
703915	703918	703926	703942	703943	703947	703958	703961	703964
703973	703977	703981	703982	703983	703988	703989	703993	703994
703998	704001	704005	704008	704009	704011	704012	704013	704016
704018	704020	704023	704024	704026	704027	704032	704040	704042
704043	704044	704045	704047	704049	704051	704052	704054	704057
704058	704060	704064	704065	704067	704069	704071	704072	704073
704074	704081	704082	704084	704085	704088	704098	704101	704104
704105	704110	704111	704113	704114	704116	704118	704119	704124
704125	704126	704127	704130	704131	704132	704134	704136	704138
704139	704140	704141	704144	704147	704149	704151	704152	704154
704157	704159	704160	704161	704163	704164	704166	704169	704176
704178	704179	704182	704190	704195	704213	704216	704233	704254
704256	704261	704267	704276	704277	704289	704291	704293	704295
704313	704315	704318	704335	704337	704345	704355	704356	704366
704370	704372	704384	704400	704402	704417	704420	704421	704425
704426	704429	704430	704433	704465	704468	704472	704489	704492
704496	704497	704498	704503	704504	704514	704530	704534	704537
704541	704555	704565	704584	704592	704593	704594	704596	704601

704602	704605	704608	704609	704610	704618	704621	704622	704623
704634	704637	704638	704639	704641	704642	704645	704663	704665
704669	704670	704682	704701	704705	704707	704711	704721	704728
704729	704736	704742	704745	704748	704749	704750	704751	704761
704763	704764	704772	704775	704793	704796	704799	704806	704808
704822	704829	704833	704834	704835	704845	704851	704856	704867
704881	704882	704888	704889	704902	704907	704914	704917	704924
704931	704934	704939	704943	704944	704962	704975	704985	704991
704994	704997	705000	705008	705009	705016	705017	705019	705021
705024	705028	705035	705051	705060	705063	705067	705071	705072
705076	705079	705082	705093	705098	705100	705101	705120	705171
705179	705212	705220	705233	705234	705244	705250	705260	705265
705267	705272	705281	705282	705303	705304	705305	705309	705314
705335	705345	705355	705359	705362	705363	705379	705394	705487
705490	705494	705498	705510	705514	705515	705535	705537	705539
705540	705547	705552	705560	705571	705574	705588	705591	705600
705616	705620	705659	705682	705689	705694	705706	705718	705725
705740	705748	705761	705775	705777	705788	705804	705810	705811
705815	705831	705835	705846	705847	705852	705854	705856	705860
705865	705870	705879	705885	705890	705894	705901	705903	705912
705913	705918	705924	705935	705937	705938	705940	705941	705944
705945	705948	705952	705957	705959	705962	705968	705978	705982
705983	705984	705988	705990	705992	705993	705996	705998	705999
706000	706001	706003	706006	706008	706010	706014	706017	706020
706026	706027	706031	706036	706038	706042	706043	706046	706053
706062	706069	706076	706079	706094	706095	706116	706119	706123
706128	706131	706132	706138	706144	706146	706148	706152	706153
706164	706165	706166	706169	706172	706174	706199	706201	706206
706209	706210	706211	706213	706216	706217	706218	706220	706221
706222	706223	706224	706225	706233	706235	706237	706238	706239
706240	706242	706244	706245	706253	706256	706257	706270	706272
706273	706274	706277	706279	706280	706281	706283	706294	706295
706297	706298	706305	706307	706310	706311	706314	706317	706322
706324	706326	706330	706331	706333	706334	706335	706337	706338
706345	706348	706349	706352	706354	706356	706357	706358	706360
706365	706366	706368	706370	706373	706384	706388	706391	706394
706396	706399	706404	706407	706410	706412	706415	706419	706423
706425	706431	706434	706436	706441	706445	706451	706455	706457
706467	706469	706472	706473	706478	706483	706486	706487	706488
706489	706495	706496	706500	706501	706502	706503	706504	706507
706508	706509	706510	706512	706513	706514	706515	706517	706519
706521	706522	706524	706525	706527	706531	706533	706534	706535
706536	706538	706539	706541	706542	706547	706548	706550	706551
706552	706554	706555	706560	706561	706569	706571	706572	706574
706576	706578	706580	706582	706584	706585	706590	706591	706592

706594	706598	706599	706601	706603	706604	706605	706607	706609
706611	706614	706615	706618	706619	706621	706622	706624	706625
706626	706629	706632	706633	706634	706637	706641	706643	706652
706653	706661	706662	706663	706666	706667	706671	707315	707340
707444	707495	707546	707550	707551	707558	707561	707569	707577
707582	707596	707625	707626	707628	707635	707637	707652	707921
707960	707967	707968	707976	707994	707997	708045	708121	708142
708179	708195	708196	708203	708205	708209	708214	708234	708247
708280	708382	708388	708518	708522	708526	708538	708539	708591
708629	708661	708785	708796	708841	708849	708852	708856	708859
708869	708897	708913	708920	709073	709078	709087	709260	709311
709509	709553	709561	709563	709570	709600	709608	709620	709621
709644	709648	709649	709683	709701	709704	709708	709709	709727
709742	709764	709796	709812	709867	709875	709885	709889	709917
710204	710221	710292	710297	710298	710299	710305	710357	710366
710367	710418	710427	710534	710563	710572	710582	710593	710601
710613	710620	710667	710717	710759	710773	710778	710780	710781
710782	710783	710793	710796	710797	710799	710802	710806	710810
710818	710823	710828	710831	710832	710834	710836	710841	710842
710845	710847	710848	710849	710850	710855	710859	710861	710862
710863	710867	710930	710936	710954	710956	710959	710964	710968
710970	710984	711001	711009	711013	711023	711030	711052	711061
711064	711068	711070	711072	711077	711078	711081	711087	711095
711097	711102	711105	711106	711108	711110	711113	711119	711131
711156	711167	711168	711171	711175	711193	711251	711255	711313
711336	711416	711436	711464	711467	711478	711483	711489	711493
711502	711513	711514	711517	711530	711539	711548	711551	711556
711589	711607	711608	711644	711687	711725	711736	711737	711765
711778	711799	711803	711808	711821	711829	711865	711882	711933
711939	711974	712008	712083	712084	712088	712118	712122	712125
712128	712130	712213	712372	712379	712745	712779	712783	712808
712840	712850	712877	712884	712922	712934	712939	712941	713007
713012	713087	713126	713130	713138	713173	713181	713183	713185
713203	713220	713267	713269	713292	713303	713326	713327	713358
713392	713405	713417	713444	713453	713467	713475	713502	713533
713554	713567	713574	713615	713616	713626	713646	713650	713655
713656	713661	713689	713694	713697	713700	713702	713712	713721
713775	713788	713794	713799	713805	713816	713871	713876	713914
713917	713936	713943	713948	713971	713985	713992	714017	714063
714064	714113	714133	714145	714158	714161	714162	714164	714180
714189	714307	714332	714343	714350	714354	714357	714364	714366
714410	714417	714444	714469	714478	714481	714487	714491	714515
714540	714546	714559	714561	714572	714573	714578	714581	714592
714597	714631	714637	714645	714667	714690	714691	714704	714707
714708	714741	714745	714746	714748	714752	714760	714789	714798

714814	714821	714838	714863	714876	714879	714884	714887	714890
714891	714893	714894	714900	714964	714966	714968	714970	714977
714978	714980	714985	714990	714991	714996	714997	715032	715150
715152	715159	715166	715171	715176	715180	715184	715186	715190
715191	715195	715201	715203	715209	715296	715302	715305	715307
715311	715312	715314	715315	715326	715327	715330	715334	715352
715353	715357	715358	715359	715363	715364	715372	715386	715389
715468	715524	715529	715535	715545	715556	715557	715568	715572
715578	715580	715593	715598	715605	715609	715616	715648	715655
715680	715690	715916	715918	715938	715963	715980	715983	716137
716175	716223	716293	716312	716352	716362	716450	716587	716600
716667	716726	716949	717010	717032	717037	717043	717072	717075
717122	717179	717244	717268	717294	717317	717320	717329	717537
717895	718134	718219	718298	718350	718364	718568	718704	718792
718801	718804	718816	718834	718835	718876	718881	718889	718891
718930	718938	718947	718955	718967	718979	718980	718996	718999
719009	719022	719025	719031	719048	719052	719083	719096	719097
719101	719108	719110	719112	719122	719133	719134	719148	719158
719164	719165	719167	719169	719175	719180	719182	719187	719200
719204	719205	719214	719216	719218	719222	719223	719226	719227
719233	719234	719242	719246	719248	719254	719257	719268	719270
719273	719274	719293	719302	719307	719327	719332	719334	719355
719357	719368	719383	719398	719461	719463	719477	719483	719486
719488	719500	719513	719530	719532	719535	719537	719546	719557
719574	719590	719599	719624	719644	719714	719748	719790	719805
719828	719843	719886	720070	720296	720326	720436	720458	720464
720488	720497	720514	720520	720537	720543	720544	720597	720626
720754	720758	720774	720800	720924	720946	720979	720985	720992
720999	721022	721035	721077	721088	721117	721581	721583	721632
721813	721843	721876	722172	722175	722185	722203	722206	722216
722218	722291	722332	722334	722336	722369	722398	722414	722431
722470	722477	722529	722550	722566	722584	722587	722602	722635
722639	722640	722643	722646	722657	722677	722684	722698	722699
722715	722726	722731	722738	722746	722771	722773	722774	722776
722809	722810	722819	722820	722898	722912	722938	723046	723051
723066	723080	723113	723127	723168	723173	723178	723190	723231
723254	723262	723269	723277	723280	723290	723303	723309	723313
723316	723322	723326	723345	723358	723401	723416	723418	723433
723436	723437	723444	723450	723465	723491	723503	723537	723546
723561	723568	723574	723595	723604	723612	723616	723628	723629
723644	723664	723668	723671	723676	723686	723701	723705	723720
723723	723728	723735	723737	723752	723757	723761	723769	723786
723788	723803	723804	723841	723865	723867	723879	723886	723894
723910	723936	723941	723942	723944	723953	723954	723956	723994
724058	724121	724142	724156	724159	724172	724176	724178	724189

724197	724230	724291	724306	724352	724357	724391	724396	724397
724404	724433	724442	724446	724452	724485	724490	724492	724498
724502	724510	724514	724518	724519	724520	724522	724525	724529
724540	724541	724542	724546	724548	724551	724557	724575	724583
724595	724600	724607	724610	724615	724617	724632	724641	724665
724678	724691	724692	724694	724707	724719	724730	724743	724751
724753	724755	724762	724794	724894	724990	724995	724998	725118
725167	725168	725209	725242	725244	725270	725275	725279	725281
725286	725296	725333	725375	725377	725393	725422	725424	725439
725442	725444	725445	725466	725468	725490	725550	725615	725625
725666	725689	725974	726099	726106	726113	726115	726150	726152
726297	726304	726309	726366	726376	726387	726391	726393	726408
726429	726458	726477	726559	726590	726658	726758	726762	726791
726832	726909	727016	727035	727055	727072	727084	727191	727199
727213	727214	727304	727306	727316	727329	727334	727341	727348
727354	727361	727364	727373	727378	727401	727408	727412	727417
727420	727422	727423	727426	727427	727441	727442	727444	727449
727456	727457	727466	727473	727474	727477	727507	727510	727515
727556	727557	727579	727611	727621	727663	727707	727712	727745
727746	727766	727772	727814	727858	727862	727867	727884	727890
727891	727943	727949	727960	727988	728041	728543	728583	728762
728827	728885	728889	728893	728913	728922	728961	729002	729003
729005	729028	729069	729070	729075	729076	729148	729158	729159
729160	729161	729170	729172	729189	729222	729230	729236	729237
729238	729251	729255	729260	729262	729265	729272	729275	729281
729310	729319	729321	729323	729330	729359	729368	729371	729374
729388	729392	729399	729404	729440	729448	729458	729460	729499
729504	729517	729520	729529	729564	729579	729593	729602	729606
729616	729634	729657	729710	729714	729721	729747	729768	729903
729915	730000	730007	730012	730016	730017	730039	730069	730070
730085	730092	730153	730156	731164	731170	731289	731346	731871
731892	731917	731984	732001	732025	732068	732070	732130	732170
732217	732244	732291	732297	732324	732355	732362	732392	732410
732459	732461	732468	732499	732623	732626	732629	732652	732676
732702	732716	732721	732741	732773	732786	732922	732938	732940
732945	732963	732998	733059	733074	733077	733110	733163	733193
733254	733255	733298	733321	733390	733394	733405	733407	733408
733415	733441	733495	733511	733515	733752	733797	733955	733973
733974	733975	733988	733989	734152	734201	734297	734308	734493
734526	734711	734775	734817	734863	734894	734903	734905	734907
734908	734914	734928	734948	734978	735003	735004	735014	735030
735036	735037	735046	735050	735055	735057	735061	735066	735103
735112	735126	735134	735160	735163	735164	735181	735186	735211
735219	735236	735249	735250	735272	735293	735375	735385	735393
735394	735398	735404	735407	735417	735431	735441	735442	735448

735454	735536	735544	735572	735583	735593	735605	735639	735711
735748	735770	735779	735885	735911	735912	735917	735926	735928
735950	735951	735952	736004	736027	736036	736062	736073	736108
736186	736196	736225	736298	736333	736335	736342	736356	736421
736422	736425	736457	736487	736518	736578	736587	736603	736614
736645	736650	736652	736740	736744	736793	736800	736810	736880
736922	736980	736995	737046	737053	737098	737116	737171	737191
737238	737335	737339	737351	737385	737398	737404	737409	737437
737443	737449	737458	737488	737511	737520	737570	737583	737586
737645	737656	737669	737671	737704	737713	737716	737723	737729
737733	737741	737743	737745	737747	737759	737779	737823	737831
737850	737865	737870	737873	737876	737881	737883	737902	737907
737909	737936	737945	737947	737965	737968	737976	737978	737985
737987	737989	737998	738005	738006	738009	738013	738021	738024
738027	738038	738043	738052	738057	738059	738063	738069	738070
738073	738090	738092	738093	738094	738104	738115	738135	738136
738137	738148	738155	738167	738170	738192	738204	738210	738248
738274	738286	738293	738302	738304	738307	738418	738440	738487
738514	738528	738533	738546	738552	738569	738575	738645	738672
738707	738717	738721	738763	738810	738829	738849	738853	738886
738888	738913	738918	738929	738930	738936	738937	738954	738958
738963	738964	739009	739013	739014	739017	739020	739021	739040
739045	739048	739073	739075	739100	739116	739125	739135	739142
739173	739194	739195	739206	739207	739218	739221	739227	739245
739298	739313	739350	739351	739361	739363	739380	739398	739425
739431	739438	739452	739461	739468	739473	739483	739484	739494
739495	739496	739500	739504	739506	739525	739554	739600	739630
739652	739654	739659	739677	739684	739692	739698	739707	739715
739737	739748	739768	739788	739792	739795	739797	739815	739839
739844	739845	739851	739854	739861	739867	739882	739927	739932
739937	739943	739946	739952	739955	740019	740025	740056	740066
740079	740082	740089	740090	740101	740108	740132	740133	740196
740207	740250	740254	740276	740281	740301	740314	740363	740365
740367	740373	740374	740377	740382	740395	740447	741501	741793
741873	741888	741892	741918	741950	741958	741969	741984	741996
742002	742003	742006	742018	742031	742040	742070	742084	742112
742119	742132	742140	742143	742149	742156	742171	742175	742176
742203	742206	742207	742211	742213	742219	742223	742224	742240
742242	742275	742307	742327	742334	742344	742437	742444	742533
742554	742561	742610	742649	742652	742659	742662	742774	742842
742850	742877	742887	742890	742898	742911	742917	742942	742976
742979	742989	742991	743005	743029	743039	743043	743095	743096
743116	743135	743213	743235	743335	743390	743395	743435	743448
743482	743521	743527	743562	743565	743568	743569	743570	743575
743579	743581	743597	743602	743603	743606	743609	743610	743612

743614	743617	743627	743628	743632	743639	743640	743641	743643
743648	743652	743657	743658	743661	743666	743670	743672	743677
743679	743680	743686	743690	743691	743692	743693	743695	743696
743697	743698	743704	743708	743709	743713	743714	743719	743724
743726	743733	743737	743739	743743	743751	743761	743771	743774
743776	743829	743832	743833	743844	743854	743866	743867	743870
743872	743873	743877	743884	743889	743931	743938	744462	744830
744908	744991	745001	745057	745063	745070	745076	745083	745091
745115	745127	745261	745354	745371	745472	745481	745524	745552
745581	745593	745595	745600	745601	745655	745673	745677	745686
745706	745720	745737	745743	745777	745790	745793	745798	745813
745819	745821	745834	745854	745855	745957	745974	746025	746061
746123	746138	746148	746159	746165	746166	746294	746307	746314
746326	746379	746381	746387	746397	746413	746416	746435	746446
746461	746469	746496	746509	746512	746514	746515	746517	746518
746523	746526	746528	746540	746543	746546	746548	746550	746556
746566	746567	746570	746571	746574	746593	746640	746676	746697
746700	746719	746908	746912	746913	746929	746934	746942	746950
746970	746984	746985	746993	746994	747017	747019	747045	747062
747073	747077	747088	747111	747125	747127	747129	747144	747152
747156	747165	747166	747173	747213	747246	747266	747280	747294
747321	747332	747346	747350	747365	747395	747401	747423	747532
747547	747571	747821	747842	747905	747932	748002	748123	748243
748251	748255	748281	748284	748298	748329	748402	748452	748477
748480	748504	748517	748522	748529	748544	748558	748599	748604
748606	748607	748656	748852	748859	748877	748957	749131	749251
749266	749270	749272	749283	749310	749434	749436	749439	749499
749520	749625	749648	749654	749677	749686	749688	749693	749701
749710	749723	749733	749739	749777	749788	749794	749807	749815
749821	749825	749835	749837	749841	749846	749851	749852	749855
749881	749882	749886	749899	749900	749965	749966	749975	749979
749980	749983	749989	750046	750063	750071	750075	750077	750093
750098	750116	750118	750127	750128	750134	750137	750139	750145
750148	750149	750152	750156	750161	750162	750168	750169	750176
750179	750197	750210	750212	750215	750219	750248	750276	750350
750364	750365	750597	750889	750920	750957	750979	751020	751041
751048	751104	751105	751118	751119	751141	751150	751156	751170
751172	751175	751180	751182	751198	751218	751251	751267	751271
751358	751360	751402	751407	751408	751413	751418	751422	751475
751546	751580	751592	751607	751630	751634	751640	751659	751665
751681	751699	751730	751744	751746	751779	751831	751840	751846
751857	751864	751871	751873	751906	751915	751923	751927	751928
751933	751937	751949	751957	751965	751971	751987	752008	752059
752060	752082	752084	752089	752411	752446	752474	752495	752519
752537	752538	752544	752560	752576	752588	752597	752608	752628

752645	752668	752691	752724	752850	752894	752915	752953	752987
753027	753055	753068	753084	753117	753170	753235	753894	753905
753939	753951	753963	753976	753992	753993	754013	754023	754036
754074	754078	754088	754091	754093	754096	754135	754136	754162
754177	754187	754188	754190	754203	754209	754217	754244	754245
754254	754266	754412	754488	754522	754644	754706	754849	754903
754978	755086	755125	755172	755177	755190	755239	755259	755265
755299	755323	755329	755352	755428	755437	755582	755613	755619
755651	755661	755675	755764	755787	755832	755845	755850	755901
755915	755937	755955	756092	756166	756177	756179	756189	756223
756229	756243	756253	756602	756632	756647	756662	756670	756677
756684	756723	756730	756744	756745	756746	756747	756749	756751
756757	756760	756770	756771	756773	756784	756785	756796	756805
756810	756814	756824	756827	756829	756836	756890	756906	756913
756917	756920	756952	756955	756959	756988	756994	757002	757005
757018	757032	757036	757082	757138	757153	757199	757331	757373
757380	757382	757384	757405	757411	757413	757472	757479	757515
757566	757567	757599	757659	757720	757735	757737	757786	757859
757881	758017	758022	758129	758137	758155	758267	758278	758281
758313	758316	758325	758327	758329	758342	758365	758370	758388
758389	758394	758413	758416	758434	758456	758457	758460	758466
758472	758473	758478	758484	758502	758504	758527	758528	758537
758539	758594	758613	758622	758623	758640	758645	758662	758669
758682	758691	758704	758707	758710	758740	758763	758772	758782
758809	758816	758818	758819	758826	758851	758869	758947	759036
759456	759468	759485	759497	759550	759607	759632	759636	759637
759639	759640	759659	759660	759677	759680	759689	759694	759695
759703	759709	759710	759715	759732	759738	759744	759748	759752
759762	759767	759773	759775	759783	759796	759800	759804	759808
759811	759825	759837	759850	759858	759864	759865	759896	759918
759922	759927	759945	759990	759991	759998	760026	760061	760101
760119	760130	760162	760165	760168	760172	760192	760235	760240
760257	760295	760313	760331	760333	760336	760420	760423	760533
760542	760546	760570	760581	760601	760650	760671	760675	760679
760687	760692	760696	760731	760737	760738	760751	760753	760769
760776	760794	760798	760815	760816	760827	760836	760976	760979
761128	761163	761168	761229	761240	761261	761338	761476	761503
761576	761636	761866	761931	762059	762338	762352	762537	762587
762607	762635	762654	762663	762677	762685	762717	762718	762721
762729	762734	762742	762769	762785	762789	762795	762798	762863
762864	762869	762900	762908	762916	762929	762935	762939	762949
763124	763137	763147	763171	763228	763367	763387	763470	763559
763564	763741	763754	763757	763822	763861	763886	763927	764480
765370	765528	765672	765703	765896	765992	766031	766035	766051
766077	766082	766090	766123	766133	766139	766150	766152	766159

766168	766191	766201	766205	766208	766239	766245	766258	766274
766276	766284	766288	766289	766293	766294	766296	766297	766299
766304	766306	766326	766333	766341	766350	766352	766357	766368
766373	766377	766493	766541	766546	766550	766583	766630	766639
766641	766677	766678	766680	766722	766729	766742	766782	766931
766981	766991	767136	767137	767162	767176	767225	767280	767343
767362	767373	767411	767430	767446	767454	767467	767490	767491
767497	767505	767518	767521	767536	767558	767599	767669	767692
767743	767750	767759	767789	767834	768229	768284	768311	768320
768370	768448	768452	768460	768466	768471	768475	768483	768486
768487	768493	768494	768499	768524	768527	768530	768538	768551
768561	768571	768582	768584	768592	768597	768615	768620	768621
768627	768630	768633	768634	768635	768638	768643	768662	768676
768679	768684	768691	768700	768701	768706	768709	768710	768737
768738	768740	768744	768748	768749	768750	768754	768838	768851
768875	768892	768911	768912	768915	768928	768938	768944	768951
768962	768966	768978	768992	768997	768998	769040	769042	769069
769099	769169	769234	769264	769278	769310	769335	769336	769382
769404	769589	769594	769612	769629	769631	769659	769661	769694
769711	769713	769727	769732	769773	769788	769799	769804	769853
769858	769927	770069	770102	770113	770114	770122	770126	770185
770190	770211	770302	770311	770320	770324	770333	770376	770385
770386	770387	770389	770394	770395	770396	770397	770401	770403
770404	770406	770407	770415	770416	770427	770439	770449	770479
770504	770506	770537	770556	770569	770576	770601	770607	770616
770621	770666	770696	770704	770732	770749	770755	770765	770783
770817	770824	770828	770855	770864	770906	770910	770914	770918
770920	770928	770929	770947	770951	770962	770965	770967	770980
770984	770987	770990	771018	771019	771041	771078	771082	771085
771097	771104	771105	771124	771127	771141	771164	771171	771178
771185	771197	771200	771207	771211	771216	771227	771230	771232
771280	771325	771330	771394	771499	771845	772031	772307	772330
772802	772832	772842	772870	772871	772874	772880	772885	772887
772890	772892	772894	772896	772898	772903	772904	772907	772909
772911	772922	772926	772927	772928	772931	772932	772933	772947
772950	772960	772963	772964	772982	772984	772996	773006	773012
773023	773047	773054	773087	773099	773289	773294	773299	773392
773395	773396	773417	773425	773433	773443	773510	773511	773628
773655	773701	773738	773739	773749	773820	773822	773873	774177
7718145	735038	737342	738156	738220	739317	739472	749665	749950
749958	751122	751169	768246	768351	768394	768400	768453	768459
768476	768480	768502	768614	769625	770244	772508	772509	772788
772816	774295	774395						

L311

103239	103763	200229	200356	202560	203417	203510	203529	203544
203824	204151	204162	204283	204576	204778	204964	205022	205110
205299	205549	205634	205681	205814	205902	205903	206007	206012
206059	206104	206130	206198	206324	206421	206515	206546	206554
206573	206575	206577	206594	206627	206634	206644	206646	206693
206708	206714	206725	206749	206752	206780	206836	206851	206859
206861	206878	206903	206911	206919	206938	206941	207001	207005
207025	207037	207075	207082	207147	207185	207209	207210	207214
207224	207284	207308	207309	207327	207346	207349	207362	207382
207412	207414	207418	207423	207425	207436	207446	207452	207453
207472	207475	207486	207487	207488	207489	207490	207493	207494
207495	207500	207502	207507	207509	207510	207511	207512	207516
207518	207519	207520	207521	207525	207526	207537	207542	207545
207549	207556	207558	207562	207569	207575	207576	207577	207588
207589	207595	207600	207601	207602	207603	207607	207622	207623
207625	207627	207628	207630	207632	207633	207644	207652	207674
207697	207700	207709	207728	207730	207732	207739	207742	207743
207763	207767	207783	207786	207803	207804	207811	207815	207820
207822	207823	207827	207829	207834	207839	207841	207863	207864
207865	207867	207872	207875	207884	207892	207894	207897	207900
207901	207904	207905	207910	207915	207925	207928	207929	207933
207937	207941	207942	207943	207945	207961	207972	207975	207977
207979	207994	208009	208022	208041	208043	208080	208081	208084
208088	208113	208125	208130	208140	208142	208148	208150	208151
208162	208163	208174	208190	208193	208197	208199	208205	208207
208216	208229	208232	208236	208254	208263	208272	208286	208289
208292	208301	208303	208311	208317	208322	208326	208328	208337
208340	208346	208363	208374	208388	208389	208395	208424	208426
208427	208429	208431	208433	208437	208441	208451	208454	208463
208464	208466	208472	208477	208480	208481	208483	208484	208486
208487	208488	208490	208494	208499	208500	208502	208504	208506
208508	208509	208510	208518	208524	208526	208527	208529	208531
208535	208540	208542	208547	208549	208559	208561	208564	208567
208568	208622	208623	208631	208635	208641	208647	208652	208653
208662	208664	208672	208676	208677	208678	208688	208693	208701
208704	208705	208709	208715	208721	208724	208727	208732	208740
208742	208746	208750	208753	208760	208765	208771	208772	208784
208790	208792	208797	208810	208811	208815	208818	208824	208825
208832	208833	208837	208844	208853	208856	208859	208892	208895
208896	208897	208903	208909	208918	208924	208925	208928	208950
208982	208989	208993	208996	208999	209001	209003	209009	209017
209023	209026	209038	209039	209040	209047	209063	209067	209071
209074	209077	209080	209087	209103	209109	209111	209112	209114
209116	209129	209136	209138	209159	209170	209180	209206	209208

209233	209234	209241	209242	209246	209248	209269	209271	209273
209282	209283	209289	209302	209306	209309	209322	209323	209344
209364	209366	209375	209406	209410	209411	209431	209444	209453
209454	209456	209468	209475	209476	209483	209488	209496	209498
209514	209526	209535	209540	209547	209569	209574	209586	209606
209611	209617	209622	209625	209635	209636	209637	209639	209640
209645	209646	209647	209652	209657	209660	209666	209668	209673
209686	209690	209693	209699	209700	209709	209712	209719	209722
209726	209727	209729	209730	209731	209732	209733	209743	209744
209749	209755	209757	209765	209766	209768	209770	209778	209801
209803	209805	209810	209811	209821	209838	209849	209854	209858
209901	209919	209938	209948	209956	209976	209981	209998	210007
210012	210021	210055	210066	210077	210080	210130	210146	210187
210227	210233	210237	210240	210241	210261	210272	210275	210288
210297	210306	210307	210308	210314	210328	210343	210346	210352
210355	210360	210364	210369	210382	210387	210392	210397	210402
210408	210418	210421	210438	210439	210476	210481	210482	210487
210488	210494	210496	210501	210561	210566	210568	210577	210590
210600	210604	210606	210610	210619	210621	210638	210650	210660
210663	210676	210679	210696	210727	210735	210741	210754	210766
210775	210784	210790	210805	210815	210818	210830	210847	210849
210858	210875	210876	210881	210899	210909	210936	210941	210942
210948	210960	210967	210972	210980	210993	210994	210997	211006
211009	211022	211032	211035	211040	211053	211068	211071	211110
211123	211144	211163	211178	211196	211217	211226	211230	211244
211245	211246	211247	211253	211255	211257	211264	211295	211311
211372	211374	211389	211424	211444	211574	211603	211714	211729
211757	211791	211824	211829	211865	211932	211956	211969	211996
211998	212009	212081	212144	212151	212164	212170	212195	212244
212266	212271	212305	212310	212313	212325	212331	212332	212338
212347	212349	212359	212360	212365	212368	212370	212373	212375
212376	212378	212380	212386	212391	212422	212427	212428	212431
212433	212436	212445	212450	212452	212453	212456	212466	212488
212489	212492	212494	212496	212499	212500	212501	212502	212504
212512	212515	212518	212519	212523	212528	212530	212532	212537
212538	212542	212543	212545	212546	212549	212554	212557	212561
212564	212566	212568	212571	212572	212575	212576	212578	212582
212589	212596	212599	212602	212605	212606	212607	212608	212609
212617	212619	212620	212621	212623	212624	212627	212628	212629
212631	212632	212649	212650	212652	212656	212669	212670	212672
212673	212674	212678	212679	212682	212683	212684	212688	212692
212693	212695	212696	212701	212702	212703	212707	212708	212709
212712	212716	212720	212721	212722	212724	212726	212728	212729
212730	212732	212737	212739	212740	212743	212744	212749	212750
212752	212755	212756	212759	212765	212771	212775	212776	212780

212781	212784	212785	212788	212789	212792	212793	212794	212795
212798	212799	212801	212802	212805	212810	212811	212817	212824
212825	212828	212829	212831	212832	212833	212837	212844	212845
212848	212849	212851	212853	212856	212860	212864	212867	212868
212870	212877	212879	212880	212881	212882	212883	212884	212887
212889	212890	212892	212897	212901	212903	212904	212906	212908
212910	212911	212913	212914	212918	212920	212921	212926	212929
212930	212933	212935	212936	212938	212945	212949	212953	212954
212955	212956	212957	212958	212960	212961	212963	212965	212970
212971	212973	212976	212978	212982	212984	212985	212989	212992
213008	213011	213019	213022	213028	213032	213034	213036	213038
213039	213041	213049	213050	213056	213063	213067	213071	213074
213081	213082	213084	213085	213086	213091	213093	213094	213096
213103	213106	213114	213116	213117	213125	213128	213133	213134
213145	213167	213170	213174	213180	213184	213188	213203	213204
213209	213211	213213	213214	213216	213221	213223	213231	213236
213244	213245	213247	213248	213259	213261	213271	213272	213273
213283	213285	213298	213303	213307	213311	213316	213322	213323
213325	213337	213338	213339	213340	213344	213348	213353	213358
213359	213363	213373	213374	213388	213389	213400	213413	213426
213449	213464	213474	213485	213494	213495	213516	213528	213530
213557	213558	213561	213576	213579	213590	213592	213798	214597
215177	215261	215265	215286	215298	215327	215357	215370	215383
215387	215392	215454	215455	215458	215506	215511	215512	215528
215535	215574	215589	215591	215596	215610	215611	215617	215621
215622	215623	215626	215635	215648	215651	215659	215663	215666
215667	215668	215672	215674	215683	215688	215692	215693	215701
215703	215714	215726	215740	215741	215754	215755	215759	215767
215771	215775	215800	215824	215831	215834	215851	215852	215860
215866	215959	215961	215965	215966	215976	215985	216012	216016
216025	216032	216045	216049	216066	216073	216076	216088	216098
216100	216103	216106	216236	216246	216267	216268	216269	216271
216272	216276	216277	216301	216416	216450	216497	216498	216537
216540	216592	216616	216617	216623	216627	216631	216633	216635
216641	216681	216758	218785	219056	219104	219322	219342	219674
219682	219727	219816	220229	220233	220236	220237	220239	220240
220242	220243	220250	220259	220267	220270	220282	220284	220286
220288	220289	220299	220306	220423	220424	220425	220426	220427
220428	220432	220438	220442	220444	220450	220452	220454	220455
220457	220460	220461	220466	220467	220470	220471	220473	220476
220478	220484	220485	220486	220488	220490	220492	220494	220495
220497	220503	220517	220518	220519	220520	220527	220529	220532
220533	220536	220537	220539	220540	220544	220546	220547	220548
220550	220551	220557	220558	220559	220563	220564	220566	220569
220570	220572	220575	220580	220583	220588	220591	220596	220597

220605	220610	220611	220614	220615	220621	220622	220631	220635
220639	220658	220667	220747	220813	220920	220948	220953	220955
220965	220972	220974	220976	220977	220978	220989	220990	221003
221017	221018	221030	221043	221044	221053	221080	221087	221097
221106	221155	221196	221198	221203	221206	221262	221264	221281
221285	221291	221314	221315	221340	221349	221392	221407	221444
221446	221449	221470	221510	221514	221723	221827	221885	222057
222121	222141	222143	222144	222302	222316	222367	222415	222418
222423	222425	222488	222588	222624	222625	222676	222689	222693
222697	222701	222710	222713	222726	222731	222745	222764	222777
222779	222782	222784	222796	222853	222857	222868	222873	222880
222895	222898	222913	222930	222940	222965	222967	222987	222992
223022	223031	223040	223054	223059	223060	223071	223085	223096
223188	223193	223205	223224	223240	223301	223320	223354	223369
223389	223407	223417	223425	223428	223432	223433	223441	223447
223476	223477	223486	223527	223558	223561	223570	223574	223580
223586	223610	223613	223621	223635	223644	223658	223852	223872
223923	223939	223997	223999	224021	224058	224077	224086	224097
224100	224128	224180	224201	224265	224276	224292	224316	224389
224410	224498	224532	224537	224538	224553	224596	224598	224603
224614	224668	224688	224708	224729	224751	224784	224813	224872
224883	224887	224894	224942	224964	224973	224984	224996	224998
225007	225050	225051	225060	225061	225062	225082	225103	225114
225121	225134	225152	225156	225168	225180	225193	225208	225214
225215	225223	225228	225229	225234	225246	225252	225275	225285
225288	225311	225322	225375	225398	225409	225417	225436	225441
225452	225454	225465	225473	225481	225515	225522	225525	225527
225530	225540	225545	225548	225549	225556	225557	225564	225582
225606	225612	225618	225642	225645	225648	225663	225684	225686
225691	225709	225712	225745	225770	225771	225772	225773	225781
225787	225788	225793	225795	225797	225816	225820	225821	225831
225832	225833	225834	225836	225840	225841	225846	225850	225852
225858	225864	225865	225866	225885	225905	225906	225935	225939
225942	225961	225971	225977	225978	225979	225984	225992	225994
225997	225998	226002	226033	226047	226053	226124	226125	226129
226147	226150	226167	226168	226171	226183	226197	226220	226232
226244	226259	226268	226281	226288	226299	226319	226322	226334
226384	226392	226411	226416	226425	226432	226437	226439	226456
226463	226475	226492	226495	226498	226502	226507	226517	226532
226537	226575	226578	226593	226597	226613	226662	226665	226681
226683	226687	226716	226785	226790	226791	226794	226796	226812
226820	226821	226828	226830	226836	226841	226844	226857	226861
226864	226881	226886	226887	226899	226902	226916	226919	226934
226963	226965	226966	226973	227005	227006	227008	227010	227013
227026	227043	227044	227046	227047	227048	227057	227059	227070

227073	227080	227098	227101	227156	227193	227202	227225	227245
227274	227287	227294	227321	227328	227341	227607	227611	227651
227759	227780	227807	227858	227907	227948	227971	228003	228012
228065	228071	228072	228159	228188	228304	228439	228443	228666
228735	228766	228770	228807	228820	228823	228824	228847	228850
228858	228890	228896	228983	229050	229053	229064	229091	229116
229319	229328	229350	229394	229396	229400	229402	229408	229416
229420	229423	229425	229432	229448	229451	229462	229470	229472
229494	229501	229507	229509	229511	229513	229514	229518	229525
229532	229539	229542	229552	229553	229566	229570	229572	229573
229574	229577	229587	229602	229604	229606	229630	229632	229640
229644	229646	229657	229662	229673	229676	229683	229684	229700
229718	229723	229727	229730	229732	229736	229739	229748	229755
229756	229761	229778	229787	229798	229820	229821	229831	229840
229842	229844	229850	229858	229866	229867	229869	229899	229900
229904	229923	229925	229937	229938	229947	229949	229952	229957
229962	229964	229967	229973	229984	229992	229993	229994	229997
230003	230005	230017	230031	230034	230075	230166	230181	230196
230241	230323	230617	230625	230754	230811	230852	230874	230950
230953	230964	231002	231017	231019	231084	231090	231115	231149
231150	231154	231155	231157	231164	231166	231167	231181	231184
231186	231190	231193	231211	231441	231442	231446	231463	231472
231479	231492	231494	231496	231498	231516	231523	231533	231537
231540	231547	231561	231566	231579	231580	231593	231603	231619
231628	231641	231648	231654	231655	231690	231693	231717	231724
231749	231750	231753	231767	231782	231792	231793	231797	231807
231810	231818	231831	231841	231842	231854	231855	231862	231872
231877	231915	231919	231921	231929	231936	231941	231952	231956
231969	231973	231976	231977	231979	231983	231984	231988	232003
232006	232015	232018	232022	232027	232032	232044	232049	232056
232057	232058	232059	232071	232084	232088	232097	232104	232111
232123	232125	232130	232138	232141	232142	232154	232157	232168
232177	232180	232188	232194	232213	232274	232303	232417	232424
232430	232435	232436	232437	232438	232440	232442	232443	232446
232449	232450	232458	232459	232463	232465	232466	232467	232473
232477	232478	232479	232489	232490	232492	232493	232495	232497
232498	232507	232515	232519	232521	232524	232527	232528	232531
232532	232540	232541	232542	232545	232546	232553	232554	232557
232566	232570	232581	232607	232782	232815	232820	232821	232847
232854	232864	232878	232886	232891	232907	232912	232916	232917
233135	233158	233163	233176	233182	233204	233276	233279	233280
233298	233307	233314	233319	233322	233328	233358	233359	233361
233362	233386	233393	233407	233420	233423	233424	233425	233449
233450	233454	233469	233476	233484	233490	233507	233511	233512
233513	233518	233520	233530	233541	233545	233549	233552	233554

233555	233556	233559	233564	233590	233606	233627	233641	233649
233654	233655	233660	233662	233688	233768	233770	233779	233919
233940	233945	233957	233962	233966	233975	233980	233991	233998
234001	234003	234006	234008	234010	234012	234029	234031	234037
234044	234051	234054	234058	234059	234064	234066	234071	234074
234084	234093	234100	234110	234114	234115	234128	234130	234132
234142	234149	234158	234164	234167	234172	234176	234179	234184
234196	234199	234210	234216	234217	234222	234224	234229	234233
234235	234237	234238	234242	234259	234262	234263	234266	234271
234273	234274	234282	234283	234287	234288	234299	234303	234309
234330	234344	234355	234357	234365	234410	234419	234431	234432
234436	234439	234441	234454	234456	234467	234471	234483	234486
234491	234495	234496	234506	234508	234513	234523	234526	234536
234539	234549	234553	234560	234570	234577	234588	234602	234610
234619	234636	234637	234641	234645	234651	234654	234669	234672
234680	234681	234693	234695	234712	234719	234743	234749	234756
234759	234776	234791	234798	234817	234821	234831	234843	234846
234848	234850	234852	234858	234866	234872	234903	234904	234911
234916	234917	234921	234926	234938	234940	234945	234952	234957
234973	234976	234978	234996	235003	235031	235054	235569	235585
235595	235688	235691	235730	235755	235846	235872	235894	235906
235909	235915	235945	235953	236008	236011	236397	236483	236526
236546	236568	236581	236677	236679	236685	236707	236715	236729
236737	236747	236756	236760	236785	236808	236809	236811	236813
236818	236827	236841	236849	236856	236885	236895	236916	236942
236945	236985	236993	237000	237013	237015	237037	237042	237049
237060	237088	237095	237097	237099	237103	237110	237123	237132
237133	237323	237364	237560	237562	237563	237564	237566	237568
237576	237580	237589	237590	237599	237614	237626	237631	237653
237656	237662	237669	237672	237683	237694	237696	237698	237700
237703	237712	237713	237714	237716	237721	237723	237729	237730
237744	237751	237755	237766	237771	237778	237781	237790	237793
237794	237805	237806	237810	237811	237816	237828	237830	237831
237835	237858	237861	237862	237865	237866	237872	237879	237886
237889	237894	237911	237918	237927	237940	237941	237946	237949
237951	237953	237961	237964	237967	237969	237975	237979	237987
237988	237989	237991	237997	238001	238002	238004	238073	238519
238536	238544	238948	239066	239072	239094	239099	239176	239200
239235	239237	239239	239280	239330	239332	239355	239357	239363
239386	239388	239390	239421	239422	239424	239428	239440	239441
239452	239470	239472	239476	239477	239485	239521	239543	239544
239548	239551	239557	239561	239616	239618	239640	239685	239693
239696	239697	239711	239742	239743	239762	239774	239782	239821
239832	239839	239843	239850	239854	239867	239869	239877	239884
239919	239922	239940	239954	239959	239979	240030	240033	240151

240979	241024	241037	241128	241211	241225	241257	241300	241301
241304	241332	241349	241363	241365	241410	241411	241420	241444
241481	241523	241536	241553	241566	241615	241616	241638	241646
241829	241837	241879	241896	241965	242000	242003	242026	242041
242127	242173	242183	242217	242325	242357	242366	242401	242420
242440	242457	242512	242518	242524	242552	242556	242616	242921
242922	242933	242935	242940	242950	242958	242959	242965	242970
242985	243131	243137	243143	243160	243168	243172	243174	243186
243192	243197	243201	243202	243203	243204	243205	243212	243215
243219	243220	243221	243223	243225	243226	243227	243230	243235
243248	243253	243254	243265	243267	243268	243269	243277	243281
243285	243296	243300	243331	243334	243341	243346	243347	243353
243358	243423	243435	243444	243451	243459	243461	243466	243480
243499	243557	243564	243988	244011	244046	244106	244115	244187
244207	244217	244317	244329	244331	244382	244420	244477	244516
244525	244630	244647	244655	244675	244693	244709	244733	244754
244811	244813	244820	244835	244840	244850	244860	244892	244922
244949	244953	244973	245197	245209	245211	245233	245244	245308
245311	245347	245354	245361	245459	245461	245467	245505	245592
245600	245613	245868	245983	246013	246088	246173	246185	246194
246197	246221	246230	246235	246371	246409	246411	246453	246543
246563	246624	246672	246681	246805	246807	246832	246875	246913
246982	247022	247066	247077	247089	247103	247115	247127	247145
247149	247167	247212	247223	247234	247297	247319	247324	247331
247343	247353	247360	247361	247385	247387	247389	247414	247415
247435	247446	247448	247452	247479	247482	247485	247493	247494
247502	247509	247520	247542	247546	247557	247564	247572	247575
247577	247580	247581	247582	247617	247624	247628	247632	247639
247643	247648	247650	247666	247673	247675	247678	247686	247690
247702	247707	247708	247718	247735	247769	247771	247781	247806
247815	247822	247826	247834	247836	247847	247852	247858	247859
247861	247869	247870	247876	247891	247894	247896	247905	247909
247923	247933	247949	247961	247963	247993	248004	248008	248031
248032	248034	248040	248044	248045	248057	248058	248070	248078
248080	248081	248084	248087	248089	248117	248131	248148	248167
248182	248217	248580	248684	248869	249018	249026	249065	249068
249083	249096	249107	249108	249109	249111	249149	249150	249154
249157	249176	249188	249192	249202	249208	249210	249225	249242
249249	249269	249316	249328	249335	249385	249420	249474	249516
249525	249569	249646	249691	249799	249826	249851	249930	249967
249977	249987	250015	250060	250095	250184	250213	250272	250285
250306	250331	250365	250401	250404	250507	250609	250623	250705
250706	250711	250736	250769	250786	250809	250817	250824	250826
250837	250880	250891	250893	250905	250907	250920	250930	250940
250943	250947	250948	250950	250965	251006	251012	251016	251025

251038	251044	251060	251068	251071	251098	251119	251181	251241
251503	251556	251575	251606	251656	251725	251728	251732	251804
251812	251870	251956	251960	251988	251992	251995	252000	252004
252020	252057	252060	252061	252066	252081	252126	252191	252223
252300	252473	252479	252496	252497	252600	252605	252620	252626
252637	252659	252664	252666	252689	252699	252701	252717	252737
252742	252769	252816	252834	252850	252877	252892	252897	252907
252917	252941	252943	252949	252992	253047	253049	253063	253067
253069	253093	253099	253109	253113	253116	253119	253137	253154
253157	253164	253177	253194	253205	253207	253210	253211	253218
253231	253267	253280	253298	253317	253336	253352	253361	253366
253373	253401	253434	253509	253528	253543	253563	253588	253594
253599	253630	253660	253725	253767	253791	253852	253886	253931
253945	253972	253981	254023	254036	254053	254063	254069	254131
254171	254215	254254	254260	254261	254268	254295	254351	254371
254409	254419	254420	254438	254455	254459	254471	254488	254507
254511	254514	254530	254536	254548	254550	254551	254584	254601
254613	254623	254633	254636	254659	254690	254701	254702	254708
254709	254759	254765	254767	254816	254831	254832	254866	254904
254972	254989	255001	255033	255066	255085	255095	255114	255115
255121	255184	255189	255275	255304	255307	255308	255330	255390
255468	255513	255517	255577	255588	255600	255609	255674	255676
255740	255767	255811	255840	255874	255895	255905	255912	255948
255962	255985	255993	256011	256017	256034	256060	256070	256075
256136	256149	256157	256174	256184	256189	256193	256196	256206
256213	256232	256248	256262	256272	256280	256296	256312	256316
256348	256352	256428	256431	256432	256476	256498	256511	256514
256523	256572	256715	256720	256756	256773	256848	256876	256929
256933	257009	257035	257064	257076	257085	257132	257191	257229
257236	257245	257286	257291	257295	257318	257365	257373	257407
257439	257440	257454	257458	257467	257471	257480	257591	257597
257617	257624	257625	257655	257753	257767	257774	257798	257856
257876	257878	257886	257947	257960	257963	257977	257980	257989
258003	258026	258039	258046	258051	258052	258053	258057	258059
258062	258078	258085	258101	258108	258119	258139	258149	258153
258184	258187	258189	258199	258201	258205	258214	258216	258221
258225	258228	258232	258233	258234	258240	258243	258250	258253
258254	258255	258256	258261	258268	258269	258273	258282	258291
258299	258358	258393	258512	258626	259143	259230	259234	259330
259378	259509	259635	259694	259713	259745	259787	259844	259895
259917	259972	260036	260050	260051	260055	260071	260082	260103
260182	260240	260244	260252	260258	260262	260323	260329	260411
260415	260485	260501	260525	260528	260534	260543	260596	260604
260606	260634	260671	260673	260678	260685	260690	260722	260728
260730	260743	260748	260760	260762	260797	260800	260819	260830

260836	260840	260841	260871	260930	260950	260973	261022	261047
261150	261156	261157	261231	261265	261358	261395	261396	261442
261512	261642	261892	261902	262072	262792	262847	262966	263007
263008	263027	263449	263735	263883	263917	263949	263989	264011
264059	264100	264107	264135	264221	264241	264296	264327	264329
264478	264529	264591	264647	264751	264804	264825	264989	265000
265001	265030	265063	265071	265072	265092	265095	265110	265157
265164	265188	265201	265216	265232	265284	265307	265357	265364
265374	265387	265426	265462	265483	265492	265509	265535	265575
265604	265670	265766	265769	265814	265819	265876	265931	265933
265941	265963	265977	265980	265989	266148	266377	266492	266513
266629	266635	266806	266867	266871	267023	267035	267052	267361
267549	267646	267719	267733	268687	269137	269247	269454	269552
270561	270622	270833	270857	270912	270920	270961	270973	271011
271024	271040	271048	271051	271087	271124	271128	271142	271150
271154	271179	271225	271295	271392	271495	271499	271512	271549
271554	271563	271614	271616	271621	271628	271631	271635	271636
271643	271672	271683	271685	271807	271812	271814	271872	271889
271940	271952	271996	272014	272017	272026	272030	272033	272049
272065	272071	272074	272077	272084	272100	272103	272104	272113
272134	272160	272163	272164	272187	272201	272202	272229	272231
272232	272233	272234	272249	272274	272356	272358	272391	272393
272397	272404	272406	272446	272457	272466	272473	272474	272501
272511	272522	272552	272559	272578	272580	272583	272587	272598
272618	272627	272651	272673	272675	272676	272689	272719	272720
272723	272773	272789	272837	272875	272904	272923	273038	273039
273083	273095	273099	273139	273140	273199	273263	273319	273374
273538	273557	273564	273647	273669	273703	273741	273773	273778
273788	273793	273828	273829	273907	273968	274042	274091	274116
274218	274258	274289	274563	274568	274605	274648	274699	274749
274894	274952	274954	274963	274989	275005	275067	275069	275085
275107	275109	275129	275239	275250	275264	275268	275301	275350
275355	275376	275393	275410	275438	275452	275468	275470	275489
275491	275512	275575	275591	275624	275657	275665	275727	275804
275805	275822	276011	276039	276080	276166	276257	276340	276348
276442	276485	276510	276533	276707	276720	276772	276773	276784
276785	276792	276848	276861	276868	276871	276897	276907	276922
276974	277014	277021	277022	277128	277143	277184	277302	277375
277484	277602	277606	277666	278185	278476	278487	278490	278567
278588	278613	278633	278655	278663	278745	278777	278819	278825
278845	278871	278896	278923	278931	278945	278970	279055	279080
279106	279168	279175	279177	279190	279192	279196	279221	279237
279257	279339	279345	279355	279397	279403	279418	279438	279453
279455	279470	279472	279492	279586	279595	279601	279609	279623
279636	279645	279648	279650	279676	279708	279710	279730	279731

279737	279757	279760	279763	279776	279788	279799	279802	279804
279809	279812	279817	279822	279847	279851	279866	279875	279890
279899	279908	279934	279937	279942	279943	279945	279946	279949
279965	279967	279990	280022	280028	280030	280035	280056	280063
280072	280109	280134	280179	280215	280314	280335	280360	280393
280407	280414	280431	280470	280473	280513	280523	280568	280627
280641	280675	280715	280739	280748	280864	280865	280871	280903
280925	280928	280942	280952	281008	281047	281111	281130	281162
281189	281190	281212	281234	281272	281307	281309	281339	281407
281423	281425	281449	281512	281518	281555	281566	281640	281643
281677	281691	281700	281757	281762	281768	281769	281808	281846
281904	281906	281925	281940	281967	281987	281988	282023	282037
282042	282044	282056	282062	282064	282069	282074	282096	282105
282112	282115	282116	282167	282168	282173	282176	282185	282222
282225	282244	282268	282285	282320	282322	282325	282355	282404
282437	282438	282462	282499	282518	282590	282597	282601	282628
282642	282663	282785	282941	282951	282981	283071	283072	283104
283112	283123	283211	283215	283232	283233	283280	283286	283298
283301	283311	283349	283397	283423	283438	283444	283448	283462
283478	283499	283503	283511	283515	283516	283520	283535	283570
283575	283580	283590	283595	283610	283615	283631	283684	283723
283796	283799	283800	283801	283818	283889	283908	283976	283981
283997	283999	284001	284004	284024	284027	284047	284058	284060
284073	284080	284088	284104	284108	284120	284122	284141	284142
284145	284154	284165	284182	284183	284186	284189	284191	284196
284201	284208	284209	284309	284316	284505	284617	284623	284867
284877	284894	284908	284946	284977	284993	285005	285075	285104
285209	285266	285269	285271	285274	285369	285377	285394	285418
285657	285670	285687	285829	285849	285869	286002	286050	286144
286190	286273	286320	286350	286381	286415	286435	286440	286452
286466	286483	286522	286526	286530	286537	286541	286576	286579
286600	286620	286634	286721	286736	286758	286769	286771	286805
286806	286822	286881	286910	286966	286980	286988	287005	287061
287066	287067	287075	287091	287116	287117	287228	287250	287287
287300	287304	287306	287313	287344	287380	287389	287439	287454
287458	287801	287806	287844	287881	288004	288097	288151	288176
288240	288244	288252	288255	288277	288284	288289	288312	288321
288361	288369	288371	288377	288392	288418	288421	288428	288432
288436	288437	288446	288447	288456	288466	288469	288471	288477
288479	288486	288498	288501	288513	288515	288527	288540	288541
288544	288551	288555	288557	288558	288559	288560	288562	288566
288570	288575	288582	288584	288595	288600	288602	288603	288606
288607	288611	288616	288625	288629	288630	288632	288633	288635
288639	288641	288646	288660	288676	288680	288682	288691	288708
288711	288724	288731	288733	288738	288743	288747	288753	288759

288760	288763	288768	288780	288784	288786	288797	288807	288808
288813	288815	288816	288822	288823	288827	288830	288834	288836
288839	288848	288850	288867	288885	288888	288889	288890	288894
288895	288896	288898	288900	288910	288911	288914	288920	288922
288924	288926	288934	288935	288940	288968	288991	289003	289012
289024	289027	289029	289038	289042	289088	289101	289105	289118
289133	289135	289142	289144	289147	289150	289151	289153	289155
289167	289169	289191	289212	289214	289222	289232	289235	289238
289292	289302	289307	289317	289327	289331	289336	289371	289372
289373	289386	289400	289401	289413	289414	289427	289428	289429
289438	289442	289468	289469	289480	289488	289489	289491	289492
289496	289508	289511	289515	289519	289522	289524	289528	289531
289549	289551	289552	289563	289564	289568	289573	289574	289576
289593	289602	289604	289605	289607	289608	289611	289616	289619
289620	289621	289633	289638	289652	289653	289656	289659	289665
289667	289698	289700	289702	289703	289711	289714	289716	289718
289738	289747	289752	289759	289774	289778	289783	289800	289805
289811	289830	289836	289837	289838	289840	289842	289850	289855
289861	289868	289875	289877	289880	289887	289895	289898	289900
289901	289904	289912	289922	289927	289929	289935	289937	289944
289951	289962	289967	289969	289978	289986	289992	289998	290032
290043	290048	290052	290057	290060	290061	290066	290078	290084
290085	290104	290110	290118	290125	290128	290154	290167	290173
290174	290198	290202	290229	290240	290250	290258	290259	290262
290264	290282	290287	290321	290330	290334	290363	290385	290396
290399	290401	290404	290412	290459	290464	290467	290469	290524
290631	290683	290686	290717	290771	290802	290815	290922	290923
290926	290961	290993	290994	291324	291503	291580	291669	291698
291759	291832	291892	291896	291910	291923	291969	292023	292048
292069	292119	292138	292139	292171	292296	292420	292586	292649
292729	292762	292763	292764	292772	292774	292791	292810	292813
292840	292881	292908	292923	292927	292930	292931	292934	292947
292950	292951	292959	292968	292970	292971	292972	292986	292991
292998	293018	293024	293025	293027	293039	293044	293049	293053
293057	293067	293069	293072	293074	293086	293087	293088	293089
293128	293131	293135	293141	293159	293176	293182	293240	293243
293246	293247	293280	293292	293299	293334	293364	293365	293377
293378	293390	293397	293411	293414	293415	293432	293439	293449
293456	293468	293471	293491	293597	293645	293662	293665	293700
293742	293744	293751	293759	293773	293775	293788	293792	293797
293803	293808	293820	293842	293872	293877	293885	293899	293937
293946	293950	293970	293975	294010	294034	294035	294065	294083
294108	294119	294121	294152	294185	294207	294210	294211	294213
294220	294230	294231	294238	294239	294241	294247	294249	294251
294274	294275	294284	294287	294291	294333	294353	294355	294361

294378	294379	294380	294398	294410	294427	294431	294436	294439
294441	294443	294447	294470	294473	294474	294476	294478	294481
294482	294483	294486	294488	294489	294495	294496	294499	294500
294501	294504	294509	294517	294523	294526	294530	294531	294542
294546	294548	294552	294554	294559	294563	294565	294566	294569
294570	294571	294582	294583	294591	294593	294617	294620	294629
294634	294635	294641	294647	294649	294653	294655	294668	294697
294699	294700	294778	294782	294785	294787	294791	294811	294812
294823	294831	294837	294845	294847	294855	294856	294858	294859
294861	294862	294865	294867	294871	294875	294878	294887	294900
294905	294907	294909	294912	294914	294916	294920	294922	294923
294925	294927	294928	294935	294936	294937	294944	294945	294946
294947	294949	294961	294962	294963	294967	294969	294973	294977
294988	294989	294993	294996	294998	295001	295014	295015	295017
295018	295024	295025	295031	295034	295035	295037	295038	295039
295040	295045	295047	295048	295050	295052	295065	295080	295081
295084	295095	295099	295105	295108	295113	295116	295118	295131
295133	295140	295141	295148	295150	295156	295162	295167	295168
295170	295171	295174	295179	295184	295185	295191	295192	295193
295196	295202	295210	295224	295230	295234	295235	295236	295240
295290	295291	295295	295388	295392	295395	295396	295417	295418
295432	295433	295435	295438	295440	295441	295554	295697	295712
295768	295770	295790	295793	295794	295892	295911	295952	295965
295969	296009	296034	296089	296092	296472	296530	296535	296592
296619	296660	296689	296694	296699	296705	296725	296812	296913
296949	296962	296981	297005	297058	297063	297128	297129	297130
297140	297155	297274	297280	297320	297330	297385	297407	297506
297576	297613	297640	297649	297660	297664	297673	297689	297717
297718	297722	297748	297774	297776	297825	297826	297827	297869
297886	297897	297921	297984	298019	298033	298035	298056	298069
298072	298150	298167	298236	298302	298614	298702	298780	298984
299100	299161	299172	299178	299241	299353	299356	299384	299398
299403	299434	299442	299539	299557	299576	299672	299887	299952
299982	300036	300062	300192	300292	300310	300313	300355	300391
300444	300659	300724	300741	300755	300759	300780	300866	300890
300931	301036	301138	301164	301195	301248	301411	301450	301481
301490	301498	301502	301511	301515	301521	301535	301584	301604
301619	301623	301632	301636	301648	301652	301664	301669	301684
301696	301707	301708	301714	301716	301717	301718	301724	301733
301734	301739	301740	301741	301749	301751	301752	301760	301765
301768	301776	301805	301812	301816	301831	301836	301850	301854
301859	301861	301870	301881	301889	301894	301920	301942	301964
301966	301974	301977	301990	301992	301994	302014	302016	302025
302039	302040	302043	302049	302055	302060	302062	302081	302092
302095	302119	302120	302121	302143	302147	302151	302162	302164

302167	302174	302184	302193	302197	302200	302206	302227	302239
302240	302241	302244	302263	302280	302294	302317	302321	302322
302329	302341	302344	302353	302362	302369	302383	302401	302409
302417	302427	302443	302445	302449	302465	302478	302495	302507
302512	302548	302552	302558	302575	302576	302584	302585	302612
302652	302660	302669	302680	302690	302711	302732	302738	302746
302748	302751	302757	302770	302852	302917	302982	302990	303033
303037	303060	303064	303111	303139	303155	303161	303178	303220
303231	303242	303243	303270	303276	303281	303344	303349	303352
303363	303388	303393	303407	303410	303418	303419	303425	303461
303487	303533	303540	303547	303618	303727	303815	303822	303894
303897	303905	303943	303946	303974	303982	304017	304022	304023
304030	304065	304097	304451	304510	304533	304619	304627	304644
304651	304733	304739	304765	304769	304799	304801	304832	304837
304861	304864	304886	304889	304902	304904	304941	304967	304988
305033	305050	305053	305056	305058	305072	305075	305090	305098
305109	305127	305133	305146	305147	305160	305162	305177	305187
305199	305211	305214	305221	305223	305289	305302	305303	305306
305334	305337	305343	305351	305359	305380	305383	305387	305433
305441	305449	305461	305479	305496	305505	305519	305534	305552
305559	305566	305568	305570	305588	305590	305602	305614	305624
305628	305634	305641	305652	305661	305664	305679	305681	305683
305684	305686	305697	305721	305736	305740	305741	305757	305763
305767	305778	305779	305795	305815	305828	305830	305833	305884
305888	305899	305906	305909	305917	305919	305921	305922	305935
305951	305957	305958	305968	305981	305988	305990	305994	305996
305997	306003	306014	306020	306029	306047	306048	306051	306071
306076	306085	306099	306110	306115	306124	306133	306143	306145
306153	306160	306161	306162	306218	306245	306266	306267	306275
306279	306348	306528	307163	307289	307508	307635	307698	307734
307736	307751	307763	307768	307903	307935	307947	307978	308047
308099	308103	308109	308121	308158	308180	308192	308228	308248
308299	308302	308352	308358	308425	308511	308521	308534	308545
308571	308581	308587	308615	308637	308638	308648	308663	308678
308692	308695	308733	308764	308794	308796	308914	308920	308942
308945	308961	308964	308979	308980	308987	308988	308992	308993
308997	309001	309003	309013	309138	309140	309249	309320	309355
310115	310142	310184	310271	310321	310598	310843	310845	310858
310909	310962	311003	311101	311195	311198	311200	311201	311203
311204	311207	311209	311213	311246	311288	311298	311331	311342
311366	311393	311396	311397	311409	311417	311426	311428	311431
311446	311480	311505	311509	311510	311530	311551	311555	311559
311587	311611	311613	311661	311672	311689	311695	311724	311782
311787	311812	311828	311831	311832	311843	311846	311863	311910
311935	311976	312000	312012	312080	312111	312153	312155	312184

312261	312293	312307	312320	312418	312427	312495	312496	312555
312582	313277	313425	313572	313615	313621	313668	313714	313732
313837	313881	313893	313894	313939	313966	314001	314004	314005
314112	314132	314133	314139	314142	314149	314152	314153	314155
314159	314165	314186	314193	314204	314211	314214	314225	314234
314241	314250	314253	314256	314268	314278	314284	314286	314293
314294	314296	314301	314310	314316	314324	314327	314328	314330
314349	314362	314368	314372	314375	314378	314379	314387	314391
314396	314401	314408	314417	314427	314428	314430	314447	314456
314462	314470	314496	314497	314499	314501	314502	314507	314511
314527	314534	314535	314544	314557	314559	314560	314563	314581
314584	314591	314606	314630	314639	314640	314651	314653	314666
314673	314675	314676	314677	314681	314682	314705	314711	314725
314727	314738	314742	314745	314748	314750	314760	314768	314771
314797	314798	314799	314810	314814	314816	314819	314835	314839
314847	314868	314871	314896	314917	314957	314990	315010	315011
315049	315064	315116	315118	315150	315210	315223	315237	315289
315331	315334	315416	315497	315530	315640	315755	315776	315795
315863	315886	316030	316087	316104	316179	316255	316276	316280
316317	316328	316332	316339	316405	316426	316470	316496	316531
316612	316622	316624	316704	316744	316749	316774	316854	316904
317157	317281	317492	317574	317684	317725	317932	317941	318090
318162	318177	318220	318275	318293	318339	318349	318363	318372
318377	318390	318419	318427	318442	318481	318483	318498	318499
318541	318549	318553	318567	318605	318607	318622	318623	318658
318660	318676	318679	318688	318692	318698	318712	318718	318771
318785	318798	318802	318807	318815	318818	318820	318830	318845
318853	318875	318890	318927	318964	318965	318969	318971	318977
318978	318982	318983	318988	319018	319022	319031	319036	319037
319038	319042	319055	319066	319098	319116	319118	319139	319164
319171	319181	319216	319230	319665	319683	319730	319732	319752
319788	319894	319905	320040	320053	320057	320065	320067	320074
320115	320127	320155	320190	320196	320237	320302	320309	320314
320354	320420	320425	320459	320463	320551	320569	320629	320648
320741	321023	321074	321096	321132	321139	321198	321205	321294
321371	321410	321425	321429	321445	321457	321466	321493	321521
321539	321567	321570	321603	321621	321631	321686	321694	321720
321739	321746	321753	321754	321759	321763	321764	321769	321772
321778	321813	321859	321869	321912	321916	321920	321925	321946
321988	322038	322079	322121	322128	322173	322230	322283	322337
322351	322495	322551	322609	322631	322704	322769	322858	322900
323026	323069	323098	323100	323133	323136	323152	323159	323160
323162	323165	323168	323178	323187	323200	323201	323212	323213
323220	323222	323248	323249	323263	323283	323294	323300	323330
323361	323384	323387	323390	323435	323457	323471	323476	323494

323507	323511	323515	323541	323552	323556	323557	323633	323655
324415	324492	324766	324797	324802	324877	324889	324989	325211
325256	325503	325521	325580	325594	325613	325624	325714	325752
325848	325859	325889	325908	325910	325925	325959	325988	326003
326007	326012	326017	326025	326036	326043	326055	326057	326058
326059	326074	326085	326101	326113	326128	326145	326154	326178
326196	326204	326211	326213	326215	326220	326221	326225	326227
326249	326267	326274	326282	326289	326298	326302	326313	326331
326335	326343	326350	326359	326409	326415	326428	326436	326565
326597	326633	326657	326795	326810	326814	326829	326831	326869
326893	326936	326978	326999	327035	327040	327058	327069	327081
327095	327121	327142	327145	327148	327149	327150	327152	327157
327166	327172	327185	327195	327197	327198	327199	327215	327220
327221	327228	327230	327243	327256	327258	327271	327273	327309
327317	327329	327365	327388	327390	327392	327404	327428	327429
327433	327454	327466	327494	327501	327504	327520	327544	327546
327564	327565	327570	327574	327581	327585	327591	327592	327599
327627	327642	327643	327644	327647	327650	327655	327657	327658
327664	327674	327677	327680	327687	327723	327776	327826	327832
327895	327985	328085	328453	328463	328636	328662	328849	329134
329137	329213	331232	331524	331617	331692	331783	331795	331893
331918	331929	331963	331965	331966	331989	332013	332059	332074
332075	332084	332114	332123	332136	332150	332162	332207	332224
332240	332243	332263	332270	332295	332307	332309	332311	332318
332323	332335	332342	332369	332382	332384	332389	332396	332413
332419	332425	332435	332437	332445	332456	332458	332473	332476
332484	332500	332508	332511	332516	332517	332525	332539	332557
332561	332588	332590	332593	332596	332609	332629	332634	332636
332652	332695	332696	332705	332755	332759	332787	332825	332857
332882	332903	332931	332949	332957	332973	333001	333002	333015
333027	333057	333058	333064	333071	333072	333073	333081	333107
333108	333148	333161	333193	333194	333218	333262	333321	333322
333331	333338	333341	333358	333359	333362	333387	333422	333439
333446	333449	333479	333484	333502	333535	333551	333555	333560
333582	333595	333645	333647	333651	333668	333669	333671	333677
333695	333710	333711	333723	333732	333738	333747	333750	333758
333761	333822	333827	333829	333846	333853	333860	333864	333865
333869	333870	333871	333888	333906	333963	333969	333970	333976
333986	334008	334013	334018	334019	334037	334039	334044	334047
334053	334083	334090	334107	334125	334132	334139	334151	334169
334198	334201	334209	334228	334258	334262	334273	334280	334292
334335	334343	334358	334366	334374	334393	334412	334417	334424
334443	334458	334462	334466	334516	334532	334546	334612	334618
334619	334706	334730	334763	334787	334796	334890	334895	334901
334902	334916	334929	334933	334946	334949	334981	335054	335087

335135	335157	335176	335196	335223	335247	335338	335346	335348
335362	335432	335492	335509	335580	335597	335599	335603	335613
335616	335621	335638	335642	335646	335656	335659	335661	335674
335709	335713	335718	335734	335740	335772	335779	335780	335851
335857	335861	335886	335888	335927	335945	335952	335967	335968
335977	335983	335995	336014	336017	336050	336135	336249	336268
336314	336316	336339	336344	336429	336454	336483	336543	336551
336564	336569	336591	336623	336636	336665	336666	336682	336705
336824	336827	336838	336845	336848	336869	336873	336912	336937
336968	337097	337104	337117	337239	337346	337385	337387	337393
337403	337419	337468	337474	337488	337493	337497	337609	337616
337638	337640	337646	337650	337699	337734	337764	337790	337839
337840	337884	337893	337897	337979	337981	337996	338001	338007
338009	338010	338020	338055	338058	338076	338081	338093	338141
338339	338348	338525	338700	338742	338848	338924	338931	339000
339028	339032	339052	339064	339065	339157	339252	339287	339313
339339	339353	339364	339383	339407	339413	339434	339478	339498
339500	339534	339555	339582	339585	339669	339671	339770	339781
339806	339813	339870	339875	339876	339877	339878	339952	339964
339985	339987	339991	339994	340018	340080	340086	340091	340115
340121	340146	340147	340151	340157	340158	340168	340184	340223
340230	340231	340249	340276	340278	340355	340401	340404	340461
340463	340482	340503	340554	340555	340556	340562	340566	340587
340592	340631	340640	340663	340689	340698	340709	340732	340738
340760	340763	340781	340804	340808	340809	340813	340817	340821
340833	340857	340868	340869	340870	340875	340886	340888	340903
340907	340917	340948	340962	340965	340975	340986	341026	341044
341050	341053	341063	341086	341089	341094	341095	341098	341102
341113	341114	341132	341172	341174	341217	341218	341258	341361
341367	341433	341434	341474	341581	341654	341682	341734	341751
341795	341799	341885	341971	342006	342043	342293	342298	342318
342322	342325	342494	342503	342504	342507	342509	342510	342511
342523	342552	342590	342659	342665	342686	342696	342717	342726
342752	342762	342823	342850	342869	342873	342878	342911	342935
342961	342999	343002	343008	343009	343010	343031	343039	343049
343058	343060	343072	343079	343081	343126	343142	343180	343183
343187	343203	343225	343233	343264	343318	343327	343328	343357
343359	343371	343372	343374	343378	343427	343477	343522	343534
343561	343575	343579	343587	343588	343596	343621	343630	343664
343673	343692	343699	343702	343706	343711	343716	343723	343736
343739	343756	343758	343812	343814	343816	343831	343832	343835
343840	343841	343847	343865	343866	343885	343902	343907	343908
343911	343939	343942	343948	343956	343974	343978	343982	343986
343993	344029	344039	344040	344074	344090	344097	344164	344185
344186	344194	344197	344203	344221	344225	344247	344278	344288

344293 344294 344332 344388 344396 344451 344521 344557 344604
344622 344642 344701 344707 344810 344822 344829 344852 344920
344939 344961 344966 344983 345003 345027 345049 345050 345082
345119 345123 345133 345306 345312 345404 345612 345686 345708
345716 345768 345862 345865 345879 345897 345915 345916 345991
346074 346080 346081 346105 346108 346141 346148 346154 346168
346189 346199 346207 346236 346296 346310 346326 346373 346378
346380 346422 346425 346435 346440 346461 346480 346496 346523
346526 346552 346573 346577 346630 346639 346684 346707 346736
346761 346774 346777 346792 346793 346810 346855 346868 346884
346899 346909 346913 346923 346924 346932 346936 346937 346941
346962 346970 346971 346974 346993 346995 346999 347004 347008
347009 347058 347063 347065 347070 347071 347082 347085 347087
347110 347120 347123 347124 347126 347138 347181 347192 347194
347196 347209 347227 347244 347249 347257 347305 347306 347308
347309 347319 347325 347329 347339 347361 347369 347404 347433
347437 347439 347440 347442 347445 347458 347471 347511 347518
347524 347539 347543 347569 347573 347577 347593 347598 347617
347623 347665 347683 347684 347688 347696 347702 347716 347720
347723 347727 347738 347744 347747 347748 347761 347762 347771
347791 347793 347798 347809 347836 347837 347847 347852 347853
347861 347870 347876 347892 347901 347905 347922 347942 347944
347950 347952 347978 347990 347993 347994 347995 348011 348013
348014 348016 348017 348018 348020 348022 348023 348030 348033
348034 348035 348045 348046 348048 348056 348059 348060 348061
348062 348063 348065 348067 348068 348069 348070 348071 348072
348073 348074 348075 348076 348077 348092 348098 348099 348103
348104 348106 348107 348110 348111 348112 348113 348115 348123
348136 348143 348146 348147 348150 348157 348205 348218 348222
348223 348224 348226 348227 348239 348241 348249 348250 348251
348252 348256 348269 348288 348290 348291 348292 348314 348319
348322 348323 348324 348325 348326 348327 348337 348342 348348
348350 348352 348353 348354 348355 348370 348371 348372 348373
348374 348378 348379 348380 348381 348382 348384 348385 348387
348388 348391 348394 348396 348397 348398 348400 348402 348403
348404 348405 348406 348408 348409 348411 348413 348416 348421
348422 348427 348430 348438 348449 348461 348464 348481 348487
348514 348527 348548 348562 348568 348570 348580 348582 348593
348599 348628 348647 348691 348695 348735 348739 348761 348778
348790 348800 348804 348817 348829 348843 348853 348865 348873
348878 348899 348903 348904 348924 348931 348934 348935 348951
348970 348971 348978 348979 348989 348995 348997 349009 349020
349027 349042 349102 349106 349128 349152 349170 349174 349180
349184 349200 349220 349226 349231 349242 349249 349275 349288
349308 349317 349322 349365 349380 349398 349410 349412 349429

349443	349448	349456	349465	349487	349531	349550	349575	349595
349610	349628	349643	349649	349656	349673	349682	349688	349690
349691	349692	349693	349698	349704	349707	349710	349720	349724
349821	349837	349939	349943	349947	349948	349954	349971	350002
350194	350233	350255	350286	350307	350352	350380	350388	350424
350425	350524	350546	350586	350592	350598	350656	350657	350684
350720	350721	350739	350753	350755	350796	351150	351285	351454
351521	351603	351662	351663	351719	351788	351862	351869	351926
351928	351990	351996	352006	352009	352062	352067	352094	352171
352243	352247	352249	352277	352278	352286	352290	352298	352306
352349	352413	353331	353440	353526	353615	353810	353814	354385
354433	354451	354834	354846	354969	355005	355052	355060	355079
355268	355281	355320	355410	355485	355503	355504	355532	355565
355574	355587	355618	355677	355682	355706	355710	355714	355769
355836	355879	355939	355944	355999	356023	356069	356096	356107
356137	356141	356152	356228	356248	356421	356443	356520	356635
356837	356971	356993	357332	357354	357665	357686	357742	357812
357846	357854	357898	357911	358002	358050	358072	358193	358195
358356	358395	358427	358493	358532	358580	358581	358584	358588
358687	358700	358730	358750	358751	358782	358852	358880	358884
359016	359100	359116	359471	359577	359603	359678	359685	359688
359696	359713	359825	359841	359943	360002	360095	360121	360157
360179	360215	360296	360333	360399	360906	360943	361113	361141
361163	361195	361273	361362	361489	361494	361578	361661	361663
361800	361926	362005	362191	362214	362610	362682	363037	363314
363334	363423	363495	363547	363599	363650	363652	363707	363727
363731	363768	363773	363778	363811	363819	363842	363848	363852
363859	363865	363877	363886	363890	363914	363961	363968	364041
364043	364062	364099	364117	364141	364201	364226	364276	364292
364323	364384	364387	364437	364506	364528	364557	364566	364596
364603	364607	364634	364638	364662	364663	364668	364679	364689
364699	364709	364711	364714	364736	364741	364747	364758	364773
364776	364777	364807	364819	364833	364854	364883	364887	364889
364897	364898	364905	364917	364933	364937	364957	364959	364960
364964	364967	364971	364972	364998	365311	365380	365381	365386
365422	365437	365447	365448	365497	365567	365568	365575	365587
365619	365631	365674	365694	365720	365754	365774	365779	365786
365800	365809	365810	365858	365865	365866	365867	365868	365882
365908	365914	365928	365929	365939	365949	365950	365979	365996
366018	366019	366022	366025	366066	366072	366085	366089	366117
366169	366178	366190	366192	366196	366223	366226	366229	366238
366243	366268	366294	366299	366302	366305	366310	366311	366313
366328	366333	366344	366363	366384	366413	366434	366438	366446
366451	366460	366462	366463	366467	366508	366515	366547	366554
366561	366563	366594	366627	366653	366755	366904	366938	366977

366999	367005	367006	367115	367143	367256	367354	367358	367369
367372	367385	367386	367408	367416	367424	367476	367497	367726
367921	367927	367954	367991	368019	368040	368107	368125	368128
368153	368179	368198	368199	368212	368213	368236	368267	368296
368320	368349	368353	368398	368689	368857	368871	368898	369039
369064	369065	369074	369091	369092	369094	369098	369111	369112
369122	369125	369151	369154	369161	369165	369187	369188	369200
369206	369211	369325	369330	369380	369574	369633	369642	369659
369750	369755	369767	369781	369799	369803	369831	369834	369848
369854	369855	369858	369881	369891	369929	369943	369973	369992
369993	370168	370469	370495	370498	370530	370552	370573	370579
370623	370627	370637	370638	370657	370669	370673	370674	370687
370690	370758	370760	370786	370790	370793	370816	370820	370822
370828	370830	370831	370833	370839	370841	370843	370847	370860
370866	370867	370868	370890	370898	370927	370932	370933	370952
370956	370959	370961	370963	370965	370970	370972	370989	370990
370997	370998	370999	371006	371007	371013	371014	371020	371021
371023	371026	371027	371030	371031	371034	371035	371036	371148
371151	371245	371247	371261	371441	371527	371561	371593	371688
371752	371772	371779	371799	371808	371814	371824	371827	371851
371857	371875	371876	371878	371882	371884	371889	371913	371916
371918	371930	371933	371936	371941	371943	371950	371955	371963
371964	371994	372009	372028	372049	372072	372102	372127	372140
372178	372217	372254	372257	372325	372333	372335	372346	372348
372358	372359	372374	372377	372381	372388	372392	372395	372421
372428	372430	372448	372449	372500	372501	372507	372545	372547
372548	372557	372625	372626	372654	372663	373003	373022	373023
373024	373027	373041	373045	373114	373128	373133	373136	373139
373145	373192	373213	373218	373224	373243	373282	373312	373373
373396	373421	373432	373486	373646	373663	373670	373735	373894
373994	374037	374099	374131	374259	374286	374333	374416	374496
374513	374526	374531	374532	374535	374562	374574	374603	374609
374619	374666	374678	374694	374702	374725	374727	374733	374747
374760	374769	374776	374778	374794	374795	374841	374845	374858
374864	374870	374898	374911	374975	374977	374986	374988	374989
374995	374997	375001	375011	375015	375016	375017	375026	375046
375057	375062	375066	375091	375135	375147	375187	375194	375204
375210	375254	375279	375316	375317	375390	375508	375557	375599
375606	375613	375720	375760	375806	375826	375849	375858	375882
375931	376098	376467	376823	377228	377254	377261	377380	377483
377497	377564	377708	377810	377813	378005	378011	378033	378047
378053	378063	378107	378121	378123	378126	378192	378195	378212
378253	378290	378295	378296	378298	378375	378382	378385	378410
378421	378425	378450	378526	378582	378595	378630	378632	378641
378643	378690	378709	378738	378756	378763	378798	378801	378803

378805	378838	378868	378871	378875	378876	378878	378882	378900
378920	378935	378946	378975	378984	378985	378994	379001	379006
379012	379018	379051	379068	379093	379114	379123	379126	379131
379137	379157	379179	379184	379186	379204	379209	379212	379214
379217	379224	379233	379234	379247	379253	379261	379267	379276
379277	379290	379339	379346	379350	379362	379391	379440	379449
379450	379454	379463	379480	379531	379544	379546	379566	379575
379596	379629	379667	379749	379792	379953	379957	379973	380044
380049	380052	380073	380077	380080	380145	380162	380182	380189
380231	380321	380323	380342	380560	380576	382032	382397	382494
382779	383046	383204	383439	383699	383823	383912	384106	384108
384110	384111	384126	384162	384167	384193	384199	384214	384224
384265	384270	384271	384278	384296	384329	384331	384334	384335
384349	384371	384374	384391	384395	384404	384425	384427	384444
384450	384452	384464	384470	384473	384516	384518	384555	384611
384617	384654	384757	384794	384838	384943	384975	384986	385003
385006	385007	385008	385047	385089	385102	385106	385108	385109
385116	385136	385164	385199	385200	385209	385244	385246	385252
385260	385263	385274	385280	385295	385301	385309	385311	385325
385331	385333	385347	385363	385369	385374	385378	385385	385387
385392	385393	385403	385404	385405	385407	385428	385431	385432
385439	385452	385458	385468	385470	385472	385476	385508	385509
385513	385524	385529	385536	385539	385544	385559	385570	385574
385580	385599	385611	385616	385636	385657	385677	385691	385693
385695	385696	385697	385700	385711	385725	385750	385759	385780
385799	385812	385821	385837	385838	385840	385845	385852	385858
385859	385863	385893	385906	385917	385918	385951	385954	385992
385997	385998	386013	386032	386040	386047	386080	386108	386110
386223	386241	386295	779058	780291	780454	780888	788151	809074
279428	319576	320525	320725	320758	321131	321216	321630	321635
325660	332293	339858	347119	347215	355745	356054	356085	369726
369846	370575	370605	379883	380020	380037	380061	380071	380179
380314	382634	382663	383781	383782	383880	383972		

L331

100939	323154	701687	702066	703017	703185	703305	703766	703980
704204	704288	704320	704330	704498	704545	704567	704590	704601
704615	704740	704765	704785	704791	704808	704809	704833	704852
704889	704890	704909	704949	704959	704961	704991	705002	705025
705028	705031	705033	705039	705042	705043	705045	705046	705058
705092	705103	705104	705110	705111	705124	705127	705135	705140
705144	705145	705146	705150	705159	705160	705162	705173	705174
705178	705179	705184	705195	705208	705212	705216	705223	705227
705236	705244	705249	705255	705256	705259	705271	705275	705282
705295	705308	705311	705313	705316	705319	705333	705341	705352

705400	705402	705442	705461	705463	705464	705486	705487	705496
705497	705500	705506	705507	705508	705515	705522	705524	705526
705534	705541	705543	705550	705555	705556	705557	705609	705620
705622	705631	705637	705645	705664	705683	705702	705712	705719
705728	705757	705762	705767	705771	705802	705817	705824	705828
705832	705835	705844	705851	705873	705874	705898	705901	705904
705918	705927	705931	705941	705943	705950	705956	705961	705976
705979	705987	705998	706002	706007	706010	706019	706020	706025
706030	706031	706034	706040	706042	706043	706050	706057	706058
706062	706076	706078	706082	706086	706095	706099	706100	706101
706102	706104	706106	706108	706110	706111	706112	706115	706118
706124	706129	706132	706133	706137	706140	706146	706152	706160
706162	706164	706167	706179	706187	706202	706208	706213	706214
706219	706223	706228	706239	706242	706245	706247	706248	706261
706264	706270	706275	706281	706294	706303	706304	706305	706317
706321	706329	706331	706333	706334	706336	706340	706341	706342
706343	706350	706351	706357	706359	706362	706363	706368	706371
706372	706374	706376	706378	706387	706390	706399	706406	706413
706416	706435	706444	706458	706460	706461	706463	706474	706482
706494	706500	706502	706508	706522	706526	706532	706540	706542
706548	706557	706561	706563	706564	706569	706570	706580	706584
706591	706595	706603	706605	706613	706625	706626	706635	706638
706640	706641	706653	706664	706665	706677	706678	706679	706682
706687	706700	706703	706705	706706	706717	706719	706726	706732
706751	706756	706761	706770	706780	706787	706800	706802	706813
706836	706845	706850	706855	706865	706871	706882	706892	706910
706912	706913	706924	706927	706935	706936	706938	706950	706962
706970	706971	706978	706980	706981	706983	706985	706990	706991
707003	707004	707014	707016	707017	707018	707021	707027	707030
707035	707039	707045	707058	707059	707071	707072	707075	707081
707085	707091	707096	707105	707106	707111	707113	707115	707120
707123	707132	707133	707134	707138	707139	707143	707147	707150
707152	707153	707155	707159	707176	707177	707179	707185	707186
707188	707189	707191	707196	707206	707208	707211	707212	707214
707216	707221	707224	707226	707228	707230	707237	707238	707240
707241	707242	707244	707248	707255	707256	707257	707259	707262
707263	707268	707276	707283	707289	707293	707297	707298	707299
707302	707303	707307	707310	707313	707314	707315	707316	707317
707318	707319	707321	707322	707326	707334	707337	707338	707340
707344	707347	707348	707349	707352	707353	707354	707357	707362
707363	707364	707371	707376	707377	707379	707389	707390	707397
707402	707403	707408	707410	707416	707417	707419	707423	707428
707437	707438	707439	707442	707445	707446	707447	707455	707457
707458	707461	707464	707466	707468	707469	707470	707471	707474
707475	707476	707477	707478	707479	707480	707481	707482	707485

707486	707487	707489	707490	707492	707493	707495	707497	707504
707506	707514	707515	707518	707520	707521	707522	707527	707530
707532	707533	707542	707543	707544	707545	707546	707547	707549
707550	707555	707556	707557	707558	707559	707561	707565	707568
707570	707572	707574	707575	707580	707581	707586	707589	707593
707596	707597	707601	707605	707606	707607	707609	707610	707611
707613	707620	707622	707626	707628	707629	707630	707632	707634
707637	707639	707641	707643	707644	707645	707651	707653	707654
707655	707657	707659	707660	707661	707663	707665	707670	707672
707673	707674	707675	707676	707677	707678	707679	707681	707685
707686	707687	707688	707689	707691	707694	707701	707708	707709
707714	707716	707721	707722	707723	707724	707725	707731	707734
707737	707741	707742	707745	707746	707749	707751	707752	707753
707754	707755	707757	707759	707760	707761	707762	707768	707771
707772	707774	707775	707776	707778	707782	707783	707787	707788
707792	707793	707795	707796	707797	707800	707804	707805	707806
707809	707811	707812	707814	707815	707816	707817	707819	707820
707823	707824	707827	707829	707830	707834	707837	707842	707843
707844	707845	707847	707852	707857	707858	707859	707863	707866
707867	707870	707872	707875	707878	707880	707881	707883	707884
707886	707889	707890	707892	707897	707905	707906	707919	707920
707922	707923	707924	707926	707928	707929	707931	707934	707937
707941	707942	707943	707944	707946	707950	707952	707954	707956
707957	707958	707959	707960	707964	707966	707967	707970	707971
707972	707974	707975	707976	707983	707984	707985	707986	707987
707990	707991	707992	707993	707994	707995	707996	707997	707998
707999	708000	708002	708005	708006	708009	708012	708014	708025
708026	708029	708030	708031	708033	708034	708037	708041	708043
708044	708045	708047	708048	708049	708050	708055	708056	708057
708059	708061	708062	708063	708064	708065	708069	708071	708072
708073	708074	708076	708079	708085	708086	708087	708089	708092
708094	708095	708096	708097	708098	708099	708102	708103	708104
708107	708111	708112	708113	708114	708115	708116	708117	708120
708127	708130	708131	708135	708136	708140	708142	708144	708145
708146	708149	708150	708151	708154	708155	708156	708157	708158
708159	708161	708162	708163	708164	708171	708174	708175	708177
708180	708183	708184	708186	708187	708190	708192	708193	708197
708199	708200	708202	708203	708204	708206	708207	708211	708212
708215	708217	708221	708224	708228	708229	708236	708239	708240
708242	708247	708248	708251	708255	708256	708260	708264	708268
708270	708272	708275	708276	708278	708283	708285	708286	708288
708292	708293	708295	708297	708299	708301	708302	708303	708306
708309	708312	708314	708318	708320	708321	708324	708325	708328
708330	708332	708335	708337	708338	708342	708355	708356	708358
708360	708362	708363	708365	708367	708370	708371	708372	708374

708376	708378	708379	708382	708386	708387	708389	708390	708394
708395	708398	708400	708406	708413	708417	708419	708421	708425
708429	708436	708439	708440	708444	708448	708451	708455	708456
708462	708465	708466	708467	708475	708482	708483	708485	708490
708492	708493	708494	708495	708496	708499	708509	708514	708519
708555	708584	708616	708625	708643	708647	708650	708662	708683
708689	708699	708742	708753	708842	708918	709408	709443	709709
709712	709716	709718	709723	709725	709726	709727	709807	709808
709833	709861	709863	709897	709904	709906	709910	709913	709915
709926	709944	709945	709948	709949	709950	709952	709956	709962
709977	709980	709981	709992	709993	709999	710005	710006	710019
710025	710030	710033	710040	710041	710042	710043	710052	710070
710071	710072	710074	710077	710078	710144	710170	710261	710313
710314	710315	710316	710318	710322	710327	710353	710356	710357
710361	710363	710388	710412	710446	710455	710459	710465	710494
710537	710652	710657	710659	710685	710736	710751	710777	710778
710787	710792	710808	710814	710824	710864	710941	710948	710965
710967	710973	710977	710991	710992	710995	710996	710999	711000
711001	711007	711008	711012	711013	711016	711019	711020	711085
711105	711110	711111	711122	711142	711143	711168	711176	711197
711207	711210	711213	711214	711230	711240	711243	711244	711248
711249	711275	711288	711290	711291	711293	711295	711300	711319
711323	711327	711329	711330	711332	711348	711353	711360	711365
711370	711377	711388	711426	711502	711503	711527	711540	711541
711542	711560	711666	711668	711778	712078	712085	712088	712089
712091	712092	712097	712101	712102	712109	712110	712111	712112
712115	712117	712121	712124	712127	712130	712148	712153	712155
712165	712170	712174	712176	712178	712186	712187	712189	712190
712203	712205	712208	712210	712217	712218	712225	712227	712229
712235	712236	712237	712253	712255	712256	712258	712269	712270
712275	712277	712289	712292	712294	712302	712303	712310	712324
712325	712337	712341	712342	712343	712344	712348	712351	712356
712359	712362	712366	712373	712375	712387	712394	712398	712404
712410	712411	712420	712421	712424	712430	712435	712438	712441
712450	712451	712456	712576	712602	712629	712631	712644	712649
712704	712796	712867	712881	712932	713074	713094	713154	713175
713247	713270	713327	713357	713494	713667	713685	713695	713699
713700	713701	713705	713706	713707	713708	713710	713711	713713
713714	713715	713718	713719	713720	713721	713722	713723	713724
713728	713729	713731	713734	713735	713736	713737	713738	713740
713741	713742	713743	713744	713746	713748	713749	713750	713752
713753	713754	713756	713777	713821	713823	713835	713874	713914
714011	714027	714028	714032	714033	714036	714038	714043	714048
714050	714051	714052	714054	714055	714065	714071	714090	714105
714107	714108	714116	714137	714144	714145	714146	714150	714152

714158	714159	714165	714168	714169	714170	714171	714172	714173
714175	714176	714180	714183	714184	714186	714189	714193	714195
714198	714199	714201	714203	714218	714223	714228	714229	714231
714233	714234	714235	714236	714237	714238	714241	714242	714260
714265	714266	714268	714270	714273	714274	714275	714283	714284
714286	714287	714293	714297	714298	714302	714311	714312	714313
714318	714325	714327	714328	714332	714338	714344	714347	714350
714351	714352	714355	714356	714357	714358	714359	714370	714380
714383	714384	714386	714389	714390	714391	714402	714406	714409
714413	714416	714417	714420	714421	714430	714432	714433	714442
714443	714445	714448	714449	714452	714453	714461	714465	714466
714467	714469	714471	714473	714475	714480	714483	714494	714495
714499	714507	714514	714520	714530	714533	714543	714546	714548
714549	714555	714557	714566	714576	714579	714588	714601	714616
714619	714620	714629	714635	714636	714637	714640	714648	714658
714664	714666	714676	714677	714682	714684	714703	714708	714714
714726	714731	714737	714738	714739	714740	714741	714742	714743
714748	714749	714750	714753	714754	714756	714757	714760	714763
714765	714772	714773	714775	714776	714779	714782	714798	714855
714856	714858	714870	714890	714903	714909	714920	714932	714936
714939	714945	714949	714956	714957	714958	714965	714969	714972
714980	714982	714983	714984	714989	715012	715013	715016	715023
715025	715027	715028	715032	715047	715059	715063	715064	715070
715085	715093	715113	715123	715138	715147	715157	715167	715172
715206	715207	715222	715230	715237	715249	715251	715253	715259
715260	715264	715268	715274	715281	715287	715292	715293	715296
715305	715320	715327	715338	715342	715345	715347	715357	715358
715366	715376	715381	715401	715405	715411	715417	715426	715430
715443	715453	715456	715457	715476	715477	715497	715513	715514
715515	715530	715537	715538	715539	715545	715549	715554	715556
715558	715561	715567	715570	715577	715588	715598	715605	715609
715614	715617	715619	715620	715636	715639	715640	715641	715646
715648	715653	715657	715660	715669	715673	715675	715676	715682
715686	715689	715700	715704	715705	715708	715713	715715	715732
715744	715745	715746	715747	715756	715771	715777	715789	715790
715794	715798	715800	715801	715810	715811	715814	715819	715820
715821	715822	715825	715841	715856	715857	715862	715867	715868
715886	715890	715917	715918	715919	715933	715934	715944	715948
715953	715954	715955	715964	715969	715971	715972	715981	715983
715985	715990	716017	716020	716023	716032	716033	716034	716039
716040	716041	716055	716060	716061	716063	716068	716072	716076
716084	716095	716098	716100	716110	716113	716115	716125	716127
716132	716146	716147	716151	716155	716157	716158	716174	716176
716177	716183	716185	716186	716192	716200	716203	716205	716210
716212	716218	716228	716237	716238	716239	716240	716241	716245

716246	716248	716251	716263	716264	716266	716269	716270	716275
716277	716281	716284	716285	716287	716302	716306	716307	716315
716325	716328	716332	716333	716340	716341	716343	716367	716385
716387	716389	716390	716391	716411	716413	716416	716430	716436
716438	716453	716454	716456	716458	716459	716461	716481	716482
716489	716492	716495	716496	716497	716498	716500	716513	716515
716533	716542	716544	716549	716554	716563	716566	716572	716573
716577	716585	716587	716597	716599	716603	716608	716611	716617
716619	716625	716627	716628	716647	716651	716662	716667	716690
716691	716702	716764	716782	716831	716840	716864	716882	716920
716936	716944	716966	717008	717072	717097	717122	717130	717200
717256	717284	717318	717319	717362	717383	717417	717423	717424
717426	717439	717447	717453	717455	717457	717471	717472	717473
717503	717510	717514	717521	717529	717544	717550	717551	717575
717589	717605	717612	717618	717637	717641	717656	717661	717668
717674	717678	717680	717697	717707	717712	717716	717723	717725
717732	717764	717766	717772	717774	717775	717780	717784	717787
717788	717789	717790	717795	717800	717801	717803	717809	717810
717812	717817	717824	717835	717838	717839	717853	717861	717879
717886	717943	717996	718004	718041	718043	718068	718074	718075
718080	718092	718163	718179	718199	718202	718203	718204	718205
718206	718207	718208	718209	718211	718239	718256	718257	718294
718314	718328	718331	718374	718397	718398	718418	718436	718445
718452	718457	718468	718483	718503	718515	718521	718529	718533
718535	718538	718540	718541	718549	718568	718573	718575	718577
718578	718584	718589	718590	718608	718609	718610	718613	718631
718637	718792	718800	718815	718822	718828	718836	718842	718846
718847	718864	718866	718869	718870	718871	718880	718881	718882
718892	718895	718906	718910	718912	718913	718914	718915	718919
718925	718931	718936	718939	718940	718945	718951	718958	718961
718965	718970	719143	719150	719152	719153	719156	719176	719183
719191	719196	719202	719204	719206	719208	719211	719216	719218
719219	719223	719227	719230	719232	719233	719237	719238	719239
719241	719243	719245	719249	719250	719253	719255	719256	719257
719262	719265	719269	719277	719278	719283	719301	719377	719379
719428	719497	719514	719522	719547	719553	719554	719561	719563
719566	719569	719578	719579	719580	719582	719584	719585	719587
719588	719589	719590	719591	719593	719594	719595	719596	719599
719600	719601	719602	719603	719617	719621	719625	719626	719627
719631	719635	719641	719642	719643	719645	719647	719649	719650
719652	719653	719655	719657	719659	719660	719661	719662	719663
719670	719671	719672	719674	719677	719679	719680	719681	719682
719687	719689	719694	719695	719700	719703	719706	719707	719714
719715	719717	719772	719775	719847	719953	719972	719977	719989
719992	719999	720001	720005	720010	720011	720017	720020	720022

720025	720027	720028	720030	720031	720037	720038	720044	720046
720047	720052	720070	720071	720073	720076	720078	720081	720085
720093	720097	720100	720102	720105	720116	720120	720122	720123
720124	720155	720171	720208	720213	720218	720219	720220	720222
720225	720231	720232	720233	720236	720238	720239	720240	720242
720243	720244	720245	720246	720248	720251	720252	720253	720254
720255	720258	720259	720260	720261	720264	720265	720266	720280
720281	720284	720285	720286	720288	720289	720290	720292	720294
720298	720300	720302	720303	720306	720308	720310	720311	720312
720315	720317	720318	720321	720323	720324	720326	720327	720328
720330	720331	720332	720333	720335	720337	720339	720340	720345
720347	720348	720349	720351	720354	720355	720356	720357	720358
720362	720365	720366	720367	720368	720369	720370	720373	720377
720390	720399	720404	720407	720417	720419	720422	720425	720427
720430	720434	720436	720437	720448	720450	720455	720459	720462
720466	720471	720474	720478	720483	720484	720487	720489	720491
720493	720498	720500	720502	720504	720507	720510	720512	720513
720520	720522	720525	720530	720536	720537	720538	720539	720541
720544	720555	720558	720560	720561	720564	720566	720580	720587
720588	720590	720591	720592	720593	720594	720603	720607	720609
720614	720616	720620	720621	720622	720625	720627	720628	720642
720643	720647	720649	720655	720656	720662	720666	720670	720671
720672	720674	720679	720680	720681	720684	720685	720686	720687
720693	720702	720717	720719	720721	720723	720726	720730	720732
720734	720757	720765	720772	720777	720796	720799	720803	720804
720805	720810	720819	720826	720831	720836	720842	720843	720857
720858	720859	720861	720875	720880	720884	720886	720887	720888
720895	720896	720897	720902	720903	720910	720926	720930	720932
720942	720943	720950	720957	720970	720973	720980	720983	720985
720988	720990	720994	720995	721001	721005	721012	721014	721033
721040	721042	721047	721050	721052	721061	721062	721065	721066
721077	721080	721083	721084	721085	721090	721093	721105	721109
721112	721115	721117	721119	721122	721124	721125	721130	721131
721133	721134	721146	721156	721160	721162	721163	721166	721167
721168	721175	721176	721177	721180	721183	721186	721187	721188
721193	721197	721200	721202	721205	721206	721208	721210	721211
721212	721215	721218	721224	721225	721227	721228	721229	721231
721232	721233	721235	721236	721239	721242	721243	721245	721246
721247	721275	721319	721326	721327	721331	721334	721344	721345
721350	721352	721360	721364	721373	721385	721386	721390	721394
721395	721397	721398	721401	721407	721413	721426	721433	721451
721453	721459	721464	721474	721476	721478	721486	721508	721521
721534	721539	721685	721757	721759	721760	721795	721813	721826
721839	721851	721887	721900	721907	721955	721966	721968	721980
721990	721997	722011	722015	722020	722028	722036	722045	722056

722058	722106	722134	722137	722138	722150	722164	722172	722175
722183	722187	722189	722190	722192	722195	722203	722217	722218
722220	722221	722232	722233	722237	722239	722248	722252	722254
722256	722261	722269	722271	722276	722278	722279	722280	722281
722283	722284	722455	722467	722468	722471	722472	722476	722481
722487	722488	722490	722491	722492	722495	722498	722499	722500
722503	722506	722507	722510	722512	722513	722519	722521	722523
722527	722528	722530	722531	722537	722538	722539	722540	722542
722543	722544	722545	722549	722551	722557	722560	722565	722566
722567	722568	722569	722570	722571	722572	722577	722579	722586
722588	722589	722591	722592	722593	722594	722595	722596	722599
722600	722602	722604	722608	722609	722615	722618	722620	722623
722624	722625	722627	722630	722632	722635	722636	722637	722639
722640	722644	722648	722649	722651	722654	722656	722657	722658
722659	722661	722662	722664	722666	722669	722672	722673	722678
722684	722686	722688	722689	722690	722691	722692	722694	722700
722701	722703	722705	722706	722709	722710	722711	722712	722718
722719	722720	722721	722727	722730	722732	722734	722735	722736
722740	722742	722744	722745	722746	722748	722752	722753	722754
722755	722759	722761	722762	722763	722768	722769	722770	722776
722780	722781	722782	722784	722785	722789	722792	722798	722802
722912	722913	722917	722919	722926	722930	722932	722943	722956
722957	722959	722970	722973	722975	722978	722982	722983	722987
722989	722995	722998	723000	723002	723003	723004	723005	723013
723019	723025	723027	723034	723035	723039	723041	723042	723048
723051	723054	723056	723058	723063	723065	723079	723088	723089
723096	723098	723099	723104	723109	723110	723115	723123	723124
723128	723130	723136	723143	723149	723151	723153	723154	723155
723163	723178	723179	723194	723201	723203	723204	723210	723227
723240	723245	723250	723254	723265	723269	723276	723281	723290
723291	723292	723295	723297	723305	723309	723313	723316	723321
723325	723327	723329	723332	723337	723339	723341	723344	723346
723349	723351	723354	723355	723356	723360	723362	723364	723367
723368	723372	723373	723376	723378	723380	723382	723383	723384
723386	723387	723388	723389	723393	723394	723395	723396	723398
723399	723400	723401	723404	723405	723411	723413	723415	723417
723420	723425	723429	723430	723433	723434	723438	723444	723445
723447	723450	723451	723452	723456	723459	723460	723464	723478
723490	723491	723495	723497	723501	723504	723510	723512	723514
723515	723516	723519	723523	723527	723528	723531	723532	723533
723534	723536	723541	723542	723544	723547	723548	723550	723551
723556	723566	723567	723568	723570	723571	723573	723574	723575
723581	723583	723584	723585	723591	723593	723598	723599	723600
723607	723611	723612	723616	723623	723627	723641	723643	723648
723649	723652	723653	723654	723658	723660	723663	723664	723667

723668	723669	723671	723676	723682	723687	723703	723710	723711
723715	723716	723719	723734	723741	723751	723752	723761	723762
723764	723773	723782	723783	723784	724198	724200	724209	724212
724219	724224	724225	724236	724238	724291	724294	724305	724312
724314	724316	724319	724325	724344	724348	724357	724363	724365
724366	724374	724377	724385	724405	724413	724414	724418	724421
724429	724438	724443	724451	724455	724458	724459	724462	724478
724485	724489	724490	724492	724495	724498	724501	724504	724510
724520	724529	724578	724594	724599	724691	724697	724703	724712
724714	724715	724717	724726	724728	724734	724743	724750	724754
724756	724758	724759	724764	724769	724772	724780	724781	724785
724798	724799	724802	724807	724808	724809	724825	724826	724829
724832	724837	724842	724843	724845	724850	724858	724860	724863
724866	724871	724880	724886	724889	724891	724893	724909	724912
724913	724926	724927	725119	725127	725145	725146	725163	725168
725372	725381	725382	725386	725392	725393	725395	725397	725399
725401	725402	725403	725409	725414	725423	725425	725433	725435
725436	725442	725444	725449	725462	725464	725469	725471	725472
725477	725488	725490	725495	725502	725509	725510	725515	725520
725521	725523	725526	725529	725536	725538	725539	725542	725544
725545	725548	725554	725557	725558	725559	725562	725566	725575
725578	725579	725580	725582	725583	725588	725589	725590	725591
725598	725806	725808	725814	725817	725818	725822	725824	725826
725829	725833	725835	725836	725840	725842	725843	725844	725845
725847	725848	725849	725852	725854	725856	725858	725860	725861
725873	725878	725880	725886	725887	725890	725917	725919	725920
725927	725929	725933	725936	725937	725939	725940	725943	725944
725946	725948	725956	725964	725965	725967	725968	725971	725973
725975	725978	725982	725988	725991	725994	725995	725998	726000
726001	726004	726005	726007	726014	726016	726019	726021	726025
726028	726033	726034	726042	726043	726060	726061	726067	726068
726070	726073	726108	726112	726119	726124	726129	726132	726134
726139	726143	726146	726150	726152	726157	726162	726163	726164
726166	726167	726168	726170	726172	726173	726174	726176	726183
726199	726202	726203	726214	726222	726224	726226	726231	726237
726241	726245	726252	726256	726257	726264	726269	726271	726273
726277	726278	726281	726282	726290	726291	726294	726299	726313
726321	726332	726338	726342	726346	726431	726433	726443	726472
726477	726486	726507	726623	726635	726648	726650	726655	726674
726690	726696	726704	726715	726723	726760	726762	726771	726858
726887	726890	726913	726914	726928	726936	726938	726941	726950
726966	726968	726975	726980	726981	726994	727000	727010	727016
727017	727029	727064	727094	727101	727119	727139	727167	727169
727186	727196	727219	727225	727244	727256	727257	727261	727267
727309	727328	727337	727342	727346	727499	727587	727602	727708

727711	727718	727743	727755	727757	727762	727763	727792	727800
727827	727852	727853	727864	727865	727868	727873	727877	727887
727903	727909	727916	727923	727926	727927	727930	727935	727945
727950	727951	727953	727956	727959	727961	727964	727991	728000
728006	728010	728028	728030	728032	728040	728051	728059	728101
728132	728136	728140	728151	728160	728171	728172	728173	728174
728179	728183	728185	728189	728196	728197	728216	728219	728223
728227	728232	728234	728254	728290	728335	728363	728364	728367
728370	728445	728475	728521	728526	728577	728588	728590	728614
728640	728659	728681	728684	728698	728703	728705	728755	728764
728766	728777	728789	728793	728795	728806	728807	728808	728814
728819	728822	728824	728826	728830	728831	728832	728833	728846
728849	728854	728855	728861	728863	728874	728875	728879	728882
728883	728885	728907	728910	728912	728917	728921	728922	728923
728928	728934	728937	728942	728945	728946	728951	728956	728958
728962	728964	728969	728971	728972	728974	728984	728985	729005
729006	729010	729017	729018	729022	729025	729027	729030	729034
729036	729043	729044	729048	729053	729054	729057	729058	729059
729062	729064	729065	729067	729073	729076	729077	729078	729089
729091	729092	729096	729097	729098	729099	729102	729103	729106
729108	729110	729111	729112	729113	729114	729115	729117	729121
729126	729127	729140	729146	729151	729155	729157	729168	729174
729183	729184	729187	729193	729205	729208	729221	729222	729226
729227	729228	729231	729241	729243	729246	729248	729250	729252
729254	729262	729264	729269	729272	729273	729285	729286	729292
729305	729306	729316	729330	729335	729363	729398	729454	729461
729466	729467	729469	729499	729509	729510	729511	729514	729525
729536	729538	729543	729545	729556	729558	729564	729571	729573
729574	729577	729597	729602	729608	729609	729617	729624	729634
729637	729640	729641	729656	729658	729665	729669	729687	729691
729695	729699	729700	729701	729702	729703	729706	729714	729720
729724	729725	729728	729736	729741	729746	729748	729751	729753
729754	729757	729760	729764	729770	729771	729772	729792	729795
729798	729809	729815	729816	729818	729829	729840	729843	729846
729850	729857	729868	729886	729887	729890	729903	729923	729944
729945	729963	729970	730047	730094	730098	730267	730297	730326
730343	730369	730385	730449	730451	730533	730541	730547	730555
730565	730574	730592	730599	730604	730608	730615	730618	730622
730628	730629	730631	730639	730642	730654	730660	730664	730665
730671	730673	730682	730684	730686	730694	730696	730702	730704
730726	730733	730745	730750	730771	730788	730790	730819	730820
730833	730837	730858	730873	730880	730882	730884	730887	730890
730900	730901	730923	730929	730938	730942	730943	730944	730949
730960	730961	730963	730970	730979	730980	731003	731026	731043
731066	731069	731078	731080	731090	731116	731176	731177	731185

731196	731204	731216	731222	731225	731234	731267	731281	731285
731321	731323	731324	731341	731440	731444	731469	731472	731494
731496	731510	731549	731574	731577	731622	731634	731662	731672
731682	731733	731757	731774	731780	731794	731795	731798	731801
731809	731818	731820	731822	731842	731846	731858	731869	731879
731895	731896	731915	731918	731963	731968	731981	731988	732007
732009	732052	732062	732076	732096	732108	732123	732125	732204
732206	732215	732236	732238	732248	732296	732297	732313	732322
732330	732342	732352	732360	732367	732373	732401	732404	732408
732440	732443	732463	732485	732492	732519	732520	732522	732525
732531	732535	732546	732548	732574	732585	732586	732602	732608
732611	732616	732624	732683	732696	732839	732893	732954	732960
732969	732972	732974	732986	733000	733016	733017	733042	733044
733046	733054	733073	733074	733102	733127	733137	733138	733144
733147	733150	733154	733166	733191	733192	733223	733226	733230
733236	733239	733259	733268	733329	733330	733332	733333	733368
733401	733412	733430	733443	733448	733508	733603	733614	733622
733634	733644	733650	733666	733670	733673	733676	733681	733685
733694	733696	733698	733704	733713	733714	733719	733725	733728
733729	733732	733733	733734	733735	733738	733745	733747	733760
733762	733767	733768	733775	733777	733781	733793	733796	733797
733802	733809	733816	733830	733833	733835	733846	733850	733853
733855	733858	733864	733867	733868	733872	733873	733876	733882
733886	733887	733895	733901	733903	733921	733924	733927	733929
733946	733965	734004	734013	734045	734125	734126	734137	734139
734163	734204	734269	734301	734335	734373	734381	734384	734387
734416	734439	734469	734496	734501	734504	734507	734509	734566
734577	734578	734586	734612	734614	734625	734627	734633	734645
734652	734659	734678	734682	734695	734711	734712	734719	734722
734723	734724	734727	734729	734730	734742	734758	734760	734778
734779	734784	734788	734791	734794	734807	734823	734826	734827
734830	734835	734839	734846	734850	734851	734856	734857	734863
734880	734883	734885	734899	734903	734910	734911	734918	734919
734922	734937	734951	734956	734961	734966	734977	734978	734981
734982	734989	734995	734996	735000	735004	735005	735008	735011
735013	735018	735026	735038	735039	735073	735087	735091	735105
735107	735112	735113	735115	735152	735166	735220	735258	735265
735270	735271	735288	735327	735333	735337	735349	735376	735387
735409	735421	735461	735466	735474	735480	735567	735577	735578
735582	735597	735600	735604	735637	735685	735694	735717	735727
735742	735745	735746	735770	735777	735789	735800	735809	735812
735824	735831	735835	735841	735863	735873	735878	735886	735894
735912	735913	735923	735938	735942	735944	735946	735954	735961
735964	735982	735995	736002	736008	736014	736023	736035	736037
736038	736054	736056	736057	736061	736062	736066	736067	736069

736072	736075	736089	736094	736096	736101	736114	736115	736126
736130	736138	736139	736144	736152	736159	736163	736167	736169
736175	736181	736186	736187	736189	736194	736195	736197	736203
736207	736209	736213	736214	736219	736233	736235	736246	736247
736262	736264	736277	736289	736291	736301	736303	736310	736316
736326	736335	736336	736339	736354	736372	736378	736388	736394
736415	736420	736428	736431	736447	736448	736453	736456	736469
736472	736478	736485	736487	736497	736505	736540	736595	736603
736644	736684	736768	736796	736876	736885	736894	736908	736961
736974	736995	736996	737043	737047	737068	737070	737072	737080
737124	737249	737315	737338	737377	737393	737460	737488	737653
737661	737669	737679	737734	737745	737750	737754	737757	737764
737765	737766	737772	737773	737792	737844	737846	737854	737855
737876	737901	737908	737924	737950	737962	737967	737996	738013
738063	738311	738332	738337	738345	738348	738395	738404	738452
738453	738478	738483	738486	738491	738492	738507	738521	738530
738535	738552	738572	738594	738595	738599	738618	738619	738623
738626	738671	738701	738703	738708	738747	738772	738789	738825
738866	738918	738919	738929	738958	739007	739014	739033	739040
739042	739078	739090	739108	739109	739157	739177	739186	739188
739189	739200	739226	739246	739254	739255	739260	739265	739266
739274	739292	739500	739760	739895	740039	740085	740092	740097
740099	740102	740103	740111	740112	740116	740121	740123	740126
740148	740191	740199	740207	740208	740238	740251	740282	740300
740318	740325	740367	740370	740396	740404	740428	740439	740447
740461	740485	740496	740509	740511	740514	740532	740540	740560
740577	740623	740674	740687	740696	740712	740720	740728	740733
740738	740742	740745	740748	740753	740761	740790	740810	740812
740814	740840	740863	740865	740921	740960	740981	740982	741028
741032	741033	741035	741039	741047	741050	741053	741054	741078
741096	741108	741120	741192	741255	741256	741260	741363	741383
741390	741415	741426	741431	741435	741441	741502	741517	741525
741529	741557	741603	741645	741654	741688	741700	741708	741723
741749	741755	741789	741814	741839	741955	741964	741988	741992
741995	742006	742015	742027	742040	742063	742100	742135	742194
742212	742226	742258	742264	742267	742308	742351	742352	742386
742391	742411	742447	742555	742573	742574	742579	742649	742672
742725	742730	742766	742782	742794	742811	742817	742825	742868
742881	742895	742907	742912	742922	742940	742945	742967	742980
742989	742994	743001	743019	743048	743052	743056	743123	743125
743164	743176	743183	743187	743191	743205	743207	743216	743231
743240	743258	743276	743277	743280	743292	743304	743320	743327
743329	743331	743336	743348	743350	743367	743376	743385	743392
743395	743396	743406	743446	743465	743466	743484	743533	743536
743540	743551	743586	743590	743627	743632	743715	743720	743724

743735	743739	743751	743771	743772	743773	743790	743791	743805
743813	743832	743837	743838	743839	743844	743846	743859	743885
743944	743985	744024	744031	744036	744037	744044	744074	744086
744128	744150	744153	744184	744185	744187	744195	744201	744202
744203	744237	744246	744247	744248	744251	744274	744283	744292
744304	744310	744314	744332	744372	744407	744429	744467	744494
744595	744710	744843	744877	744965	744966	744991	745033	745040
745041	745065	745169	745177	745190	745218	745222	745248	745253
745297	745331	745378	745394	745406	745411	745438	745443	745458
745461	745462	745466	745467	745492	745499	745500	745501	745508
745517	745524	745526	745531	745566	745570	745574	745595	745597
745612	745613	745616	745624	745638	745641	745648	745661	745667
745675	745679	745693	745696	745702	745732	745750	745791	745795
745812	745842	745852	745876	745886	745908	745928	745953	745981
746025	746045	746112	746114	746165	746166	746237	746249	746262
746271	746300	746304	746351	746377	746386	746392	746408	746439
746462	746485	746487	746511	746525	746544	746555	746556	746560
746566	746591	746594	746601	746605	746611	746614	746622	746628
746636	746638	746641	746642	746643	746645	746660	746671	746685
746686	746689	746700	746701	746709	746710	746718	746723	746726
746728	746737	746742	746747	746755	746778	746782	746801	746805
746807	746820	746834	746841	746842	746846	746854	746856	746857
746859	746860	746863	746871	746872	746881	746882	746886	746911
746917	746926	746929	746941	746953	746955	746975	746984	746991
746995	746996	747032	747037	747043	747058	747063	747064	747074
747075	747083	747086	747098	747112	747117	747118	747126	747129
747132	747133	747134	747137	747141	747142	747143	747152	747157
747159	747160	747167	747173	747177	747179	747188	747202	747208
747209	747210	747211	747222	747223	747232	747235	747242	747243
747256	747258	747262	747267	747272	747274	747285	747286	747293
747296	747298	747303	747304	747307	747310	747315	747318	747321
747330	747333	747337	747338	747351	747358	747364	747370	747381
747382	747383	747399	747400	747401	747406	747411	747414	747416
747419	747425	747430	747431	747433	747435	747436	747437	747450
747455	747457	747462	747465	747467	747474	747481	747483	747489
747493	747494	747497	747506	747511	747516	747521	747523	747525
747541	747546	747552	747573	747579	747590	747602	747604	747622
747626	747627	747632	747635	747636	747640	747641	747655	747657
747662	747663	747666	747678	747680	747692	747693	747706	747708
747717	747725	747726	747757	747760	747761	747762	747775	747777
747784	747785	747786	747794	747809	747811	747818	747828	747830
747836	747839	747852	747856	747864	747877	747881	747884	747894
747934	747995	748079	748084	748101	748112	748162	748184	748217
748219	748220	748316	748323	748397	748399	748406	748412	748447
748459	748462	748466	748471	748516	748544	748550	748578	748582

748589	748761	748880	749398	749514	749571	749636	749641	749644
749656	749680	749697	749699	749727	749730	749731	749734	749745
749758	749791	749794	749821	749841	749846	749866	749867	749871
749895	749902	749909	749917	749926	749929	749943	749946	749948
749953	749955	749959	749960	749966	749969	749971	749986	750000
750003	750004	750008	750023	750028	750041	750049	750054	750055
750070	750074	750084	750086	750142	750146	750149	750213	750244
750263	750286	750330	750345	750352	750363	750368	750422	750432
750442	750457	750466	750496	750503	750522	750527	750528	750542
750543	750559	750564	750577	750587	750593	750598	750607	750608
750614	750624	750625	750626	750637	750644	750646	750656	750657
750662	750673	750680	750684	750685	750695	750697	750704	750716
750723	750725	750735	750736	750738	750741	750749	750754	750761
750764	750769	750776	750778	750782	750788	750789	750793	750794
750808	750809	750811	750823	750839	750844	750853	750854	750860
750864	750867	750872	750873	750882	750886	750889	750892	750894
750897	750898	750916	750930	750931	750938	750939	750947	750953
750955	750958	750960	750961	750966	750973	750978	750983	750985
750993	750994	750999	751000	751002	751004	751005	751007	751008
751011	751012	751013	751014	751021	751025	751029	751031	751034
751041	751044	751045	751050	751054	751056	751057	751060	751062
751064	751073	751080	751087	751097	751098	751099	751100	751104
751117	751122	751123	751135	751138	751151	751155	751156	751157
751162	751165	751168	751170	751171	751172	751180	751183	751186
751194	751196	751197	751200	751201	751206	751210	751211	751212
751213	751214	751216	751217	751219	751221	751224	751229	751243
751247	751249	751251	751256	751264	751265	751275	751277	751280
751284	751286	751290	751298	751304	751306	751307	751309	751314
751318	751320	751321	751323	751325	751338	751343	751344	751349
751352	751360	751375	751378	751388	751392	751393	751395	751402
751407	751412	751415	751419	751423	751426	751436	751444	751448
751450	751453	751455	751457	751467	751472	751473	751476	751485
751486	751489	751491	751494	751499	751504	751509	751512	751523
751537	751539	751545	751551	751559	751564	751568	751569	751570
751573	751575	751576	751578	751579	751580	751583	751584	751590
751593	751595	751601	751605	751606	751620	751621	751624	751634
751635	751645	751648	751656	751663	751664	751665	751673	751681
751683	751690	751692	751700	751708	751721	751754	751765	751783
751795	751799	751812	751836	751838	751857	751861	751868	751873
751878	751882	751898	751916	751920	751926	751927	751934	751944
751950	751953	751954	751957	751958	751974	751976	751978	751986
751990	752008	752011	752015	752025	752042	752048	752052	752078
752081	752088	752100	752108	752116	752126	752129	752130	752135
752138	752154	752165	752168	752179	752181	752186	752193	752195
752197	752215	752227	752228	752230	752234	752243	752248	752250

752251	752255	752257	752260	752262	752265	752269	752278	752288
752289	752291	752299	752302	752315	752322	752323	752327	752330
752333	752335	752339	752343	752345	752347	752348	752353	752366
752367	752371	752373	752377	752378	752382	752383	752384	752385
752392	752394	752401	752407	752411	752415	752419	752424	752429
752430	752432	752433	752435	752448	752454	752455	752456	752464
752465	752475	752483	752488	752498	752503	752530	752537	752541
752542	752552	752558	752560	752562	752563	752565	752573	752585
752586	752599	752600	752602	752603	752607	752612	752614	752618
752624	752635	752636	752640	752645	752650	752656	752658	752666
752667	752669	752670	752674	752680	752685	752690	752698	752699
752700	752705	752706	752708	752709	752712	752713	752718	752720
752723	752727	752735	752741	752743	752744	752748	752749	752750
752751	752752	752754	752755	752756	752761	752767	752781	752782
752787	752797	752800	752803	752804	752806	752807	752812	752837
752838	752843	752848	752851	752853	752856	752858	752859	752873
752875	752880	752890	752893	752900	752905	752912	752913	752920
752921	752926	752929	752930	752937	752955	752959	752960	752965
752966	752970	752978	752979	752983	752985	752987	752988	752996
752997	752999	753001	753013	753014	753027	753041	753042	753048
753057	753063	753064	753068	753070	753081	753086	753094	753096
753097	753098	753125	753126	753157	753158	753162	753171	753182
753208	753212	753216	753217	753232	753245	753249	753261	753266
753274	753283	753294	753308	753310	753312	753314	753329	753335
753343	753355	753358	753359	753370	753371	753379	753386	753388
753390	753391	753398	753403	753404	753406	753408	753412	753421
753425	753435	753441	753445	753450	753452	753453	753459	753460
753478	753480	753490	753491	753498	753524	753533	753536	753563
753582	753587	753597	753607	753620	753625	753639	753640	753644
753674	753683	753684	753690	753698	753700	753701	753702	753703
753704	753720	753722	753725	753726	753727	753729	753730	753732
753733	753737	753739	753741	753744	753746	753751	753753	753756
753757	753760	753761	753766	753768	753769	753770	753771	753772
753773	753778	753781	753789	753790	753798	753800	753801	753806
753808	753810	753812	753838	753848	753850	753860	753862	753865
753881	753895	753901	753904	753921	753924	753925	753926	753930
753931	753934	753936	753938	753939	753948	753955	753956	753957
753961	753964	753965	753968	753978	753982	753983	753986	753987
753992	753997	753998	754001	754002	754003	754005	754013	754043
754059	754084	754113	754130	754139	754158	754159	754185	754188
754195	754201	754208	754212	754215	754218	754230	754251	754267
754271	754274	754279	754286	754290	754303	754307	754314	754315
754319	754334	754339	754343	754381	754382	754391	754394	754396
754403	754405	754407	754419	754424	754435	754439	754462	754472
754473	754490	754491	754494	754509	754511	754512	754514	754522

754525	754541	754556	754558	754565	754567	754570	754578	754579
754601	754603	754618	754634	754642	754688	754696	754702	754707
754712	754714	754715	754732	754739	754757	754762	754782	754917
755540	755759	755783	755828	755890	755909	755947	756007	756144
756172	756177	756192	756310	756339	756423	756557	756712	756760
756774	756801	756865	756991	756995	756999	757014	757015	757022
757023	757025	757036	757105	757127	757128	757130	757144	757157
757159	757160	757164	757168	757192	757205	757262	757269	757270
757276	757331	757334	757340	757342	757356	757359	757368	757377
757379	757395	757407	757414	757418	757423	757437	757459	757464
757466	757467	757468	757472	757481	757493	757495	757505	757513
757518	757522	757536	757543	757549	757551	757566	757578	757585
757594	757596	757598	757599	757602	757610	757617	757620	757626
757641	757642	757643	757646	757648	757656	757658	757669	757674
757675	757677	757682	757687	757700	757713	757717	757719	757722
757729	757734	757738	757742	757743	757758	757762	757768	757778
757779	757781	757788	757790	757792	757795	757796	757797	757802
757803	757805	757824	757825	757827	757830	757836	757844	757852
757856	757857	757861	757876	757877	757880	757882	757885	757888
757900	757909	757916	757919	757943	757993	757997	757999	758004
758008	758009	758013	758014	758015	758028	758030	758032	758033
758035	758036	758045	758050	758052	758064	758066	758073	758080
758081	758082	758085	758086	758087	758092	758095	758096	758102
758110	758124	758126	758127	758146	758147	758148	758150	758153
758155	758156	758161	758163	758203	758226	758228	758230	758233
758234	758242	758243	758247	758250	758264	758268	758276	758287
758293	758294	758304	758310	758314	758315	758319	758330	758331
758340	758341	758344	758347	758356	758373	758388	758389	758426
758433	758435	758455	758459	758467	758477	758482	758485	758486
758489	758492	758523	758531	758536	758537	758538	758540	758552
758558	758566	758590	758592	758594	758595	758648	758650	758664
758667	758696	758704	758707	758713	758721	758722	758740	758743
758746	758754	758757	758764	758798	758817	758833	758858	758865
758875	758897	758899	758911	758913	758923	758930	758932	758939
758956	758957	758966	758971	758975	758976	758978	758980	758985
758986	758989	758990	758995	759007	759008	759011	759013	759016
759017	759018	759019	759023	759025	759027	759028	759029	759033
759040	759047	759049	759055	759059	759063	759064	759070	759071
759074	759079	759082	759088	759095	759097	759104	759105	759106
759114	759118	759119	759121	759124	759126	759133	759137	759139
759140	759142	759143	759144	759148	759150	759157	759158	759159
759160	759165	759166	759175	759185	759197	759206	759210	759215
759222	759228	759231	759235	759247	759251	759255	759256	759261
759262	759263	759266	759320	759323	759324	759325	759329	759342
759401	759635	759725	759736	759775	759792	759815	759837	759843

759855	759863	759947	759959	759965	760001	760018	760057	760082
760117	760163	760192	760193	760212	760213	760216	760227	760256
760270	760286	760288	760301	760331	760334	760363	760365	760388
760403	760407	760411	760418	760425	760430	760447	760463	760474
760513	760520	760557	760591	760593	760613	760626	760648	760659
760673	760721	760753	760759	760770	760772	760786	760792	760798
760810	760844	760847	760851	760857	760861	760895	760899	760912
760914	760915	760923	760924	760931	760940	760952	760962	760964
760968	760969	760981	761002	761005	761006	761016	761029	761034
761052	761063	761066	761068	761082	761096	761099	761103	761111
761115	761119	761121	761148	761150	761153	761164	761176	761179
761182	761183	761193	761206	761212	761219	761225	761228	761237
761239	761252	761265	761266	761267	761286	761293	761296	761305
761341	761354	761356	761373	761374	761383	761395	761396	761420
761423	761426	761427	761447	761489	761495	761507	761521	761522
761549	761560	761561	761578	761580	761608	761621	761623	761624
761634	761646	761650	761653	761655	761657	761689	761691	761693
761696	761702	761708	761709	761710	761719	761720	761721	761723
761725	761727	761735	761753	761754	761756	761758	761763	761765
761770	761774	761776	761787	761790	761793	761799	761810	761811
761813	761825	761832	761845	761850	761852	761858	761860	761872
761873	761874	761879	761880	761887	761907	761910	761912	761917
761919	761922	761925	761926	761931	761932	761937	761942	761968
762009	762011	762035	762039	762049	762054	762060	762067	762075
762079	762080	762084	762090	762094	762113	762117	762125	762160
762161	762163	762181	762198	762202	762207	762208	762231	762235
762250	762253	762272	762299	762311	762347	762351	762372	762376
762388	762393	762425	762426	762457	762460	762490	762493	762500
762524	762526	762539	762543	762548	762554	762557	762585	762588
762594	762596	762601	762603	762624	762626	762641	762666	762669
762693	762695	762696	762706	762708	762709	762721	762724	762754
762762	762771	762784	762807	762815	762825	762849	762868	762871
762896	762898	762900	762909	762910	762917	762918	762930	762931
762939	762946	762947	762953	762958	762961	762975	762977	762997
763062	763073	763077	763081	763089	763092	763119	763128	763137
763147	763151	763159	763203	763207	763210	763248	763259	763340
763345	763346	763411	763485	763488	763638	763639	763642	763651
763653	763663	763680	763701	763726	763740	763792	763798	763804
763805	763812	763827	763829	763832	763837	763843	763854	763856
763877	763884	763889	763893	763908	763940	763942	763946	763947
763952	763989	764001	764003	764013	764026	764033	764072	764086
764111	764136	764154	764164	764175	764190	764200	764209	764218
764220	764226	764232	764262	764263	764268	764272	764281	764288
764307	764313	764331	764336	764337	764340	764341	764352	764357
764372	764389	764393	764394	764396	764406	764409	764410	764429

764448	764449	764453	764455	764465	764474	764484	764504	764508
764515	764518	764537	764540	764544	764618	764626	764640	764649
764657	764660	764703	764706	764713	764730	764767	764768	764770
764771	764782	764810	764820	764836	764846	764889	764893	764918
764940	764954	764971	765064	765072	765286	765353	765355	765378
765381	765390	765412	765583	765608	765615	765633	765677	765681
765693	765706	765794	765800	765807	765823	765824	765841	765846
765851	765861	765864	765868	765875	765894	765929	765935	765936
765943	765944	765950	765971	765977	765984	765996	766006	766011
766016	766038	766040	766070	766078	766082	766083	766095	766121
766129	766143	766154	766157	766162	766165	766167	766177	766182
766191	766202	766217	766222	766231	766236	766242	766247	766252
766254	766266	766268	766272	766276	766278	766282	766291	766298
766300	766302	766307	766308	766311	766314	766320	766328	766332
766336	766350	766351	766360	766363	766375	766382	766397	766404
766408	766410	766430	766432	766436	766442	766466	766474	766478
766482	766489	766503	766504	766527	766530	766540	766556	766560
766565	766576	766577	766586	766593	766594	766597	766613	766615
766622	766637	766654	766662	766681	766689	766715	766719	766728
766736	766754	766841	766880	766904	766921	766944	766955	766983
767011	767042	767064	767107	767121	767140	767193	767194	767206
767212	767214	767226	767244	767245	767249	767262	767263	767274
767286	767298	767302	767305	767317	767323	767370	767380	767391
767393	767396	767429	767500	767526	767529	767537	767552	767558
767563	767572	767589	767592	767594	767607	767608	767613	767616
767627	767640	767658	767659	767663	767691	767706	767708	767788
767835	767960	767972	768174	768374	768382	768386	768453	768492
768592	768605	768663	768708	768737	768778	768792	768795	768806
768812	768817	768832	768849	768862	768863	768867	768869	768870
768893	768895	768904	768907	768911	768928	768930	768955	768960
768965	768981	768986	768987	768988	769022	769026	769032	769033
769034	769040	769056	769059	769060	769075	769102	769103	769104
769109	769141	769142	769145	769209	769225	769246	769274	769296
769319	769347	769363	769367	769383	769395	769410	769416	769436
769452	769481	769487	769489	769512	769517	769519	769536	769565
769582	769635	769786	769975	770025	770035	770047	770050	770060
770086	770116	770147	770152	770153	770162	770179	770181	770194
770212	770227	770228	770246	770247	770255	770263	770268	770282
770283	770306	770325	770345	770371	770378	770395	770402	770406
770445	770531	770533	770539	770547	770558	770560	770577	770647
770652	770655	770657	770712	770718	770721	770785	770851	770852
770856	770861	770890	770894	770911	770935	770980	770984	770997
771002	771019	771067	771080	771096	771116	771146	771149	771153
771160	771169	771170	771173	771181	771185	771204	771212	771216
771219	771225	771231	771232	771238	771244	771277	771281	771286

771310	771320	771323	771325	771326	771336	771337	771338	771346
771353	771356	771363	771371	771377	771384	771389	771410	771439
771519	771523	771548	771574	771605	771638	771866	771895	771904
771905	771956	771968	771981	771983	771985	772014	772047	772052
772068	772173	772179	772257	772312	772314	772451	772481	772487
772531	772534	772543	772550	772555	772557	772563	772564	772590
772592	772602	772625	772628	772651	772665	772679	772684	772693
772703	772775	772830	772882	772884	772890	772993	772998	773028
773040	773071	773085	773088	773105	773116	773122	773125	773132
773146	773162	773164	773168	773190	773195	773227	773229	773231
773235	773236	773241	773246	773249	773256	773257	773284	773293
773301	773307	773331	773336	773344	773351	773361	773392	773398
773409	773422	773423	773452	773464	773478	773488	773503	773509
773528	773535	773540	773546	773548	773560	773593	773613	773616
773637	773640	773647	773672	773674	773762	773877	773881	773910
773923	773959	773981	774007	774026	774064	774069	774126	774135
774174	774175	774191	774214	774219	774231	774268	774271	774284
774293	774303	774322	774326	774331	774340	774346	774358	774359
774364	774371	774379	774388	774389	774395	774403	774406	774412
774437	774440	774449	774450	774451	774459	774483	774484	774494
774509	774512	774520	774626	774628	774652	774913	774926	774932
774959	774978	774984	775021	775028	775032	775046	775049	775072
775079	775084	775085	775117	775131	775136	775154	775162	775165
775166	775184	775186	775197	775198	775199	775200	775213	775215
775229	775237	775266	775269	775282	775286	775296	775305	775313
775318	775332	775338	775342	775346	775348	775361	775365	775378
775381	775386	775387	775391	775401	775408	775415	775419	775422
775438	775443	775459	775493	775498	775500	775501	775505	775563
775566	775584	776154	776160	776188	776738	776743	776755	776768
776780	776804	776821	776827	776898	776899	776947	777034	777090
777092	777112	777165	777168	777176	777185	777193	777197	777207
777249	777263	777265	777270	777272	777283	777312	777339	777354
777365	777376	777382	777426	777439	777444	777445	777450	777454
777463	777465	777474	777502	777526	777527	777529	777531	777539
777542	777564	777565	777578	777585	777586	777587	777589	777593
777603	777608	777609	777610	777628	777641	777649	777685	777691
777745	777758	777775	777820	777846	777850	777865	777889	777898
777924	777937	777955	777966	777976	777994	777996	777998	778001
778008	778024	778057	778078	778080	778104	778106	778119	778141
778165	778167	778168	778173	778207	778214	778218	778225	778226
778229	778232	778251	778252	778260	778263	778268	778270	778283
778286	778298	778305	778306	778313	778316	778318	778321	778322
778324	778337	778344	778353	778360	778363	778373	778376	778399
778401	778419	778432	778480	778482	778499	778517	778537	778541
778550	778575	778605	778606	778612	778631	778640	778646	778672

778684	778709	778731	778742	778743	778753	778764	778768	778777
778781	778797	778802	778842	778847	778851	778866	778874	778890
778898	778908	778914	778917	778934	778998	779021	779058	779068
779098	779111	779127	779137	779143	779147	779152	779168	779224
779272	779275	779280	779289	779317	779318	779320	779333	779344
779347	779371	779378	779404	779410	779415	779420	779422	779430
779441	779471	779487	779497	779519	779543	779547	779552	779585
779631	779635	779643	779644	779650	779651	779659	779668	779676
779692	779714	779719	779731	779735	779742	779762	779763	779768
779776	779786	779789	779790	779791	779792	779793	779798	779807
779813	779820	779824	779832	779839	779840	779845	779855	779867
779868	779870	779877	779880	779889	779900	779901	779918	779920
779921	779925	779938	779941	779948	779963	779964	779968	779972
779973	779981	779984	779987	779993	779998	780000	780005	780016
780017	780025	780046	780055	780056	780074	780078	780089	780096
780105	780109	780135	780139	780145	780147	780148	780160	780179
780180	780195	780197	780198	780201	780206	780207	780216	780225
780229	780232	780237	780240	780242	780244	780259	780269	780276
780277	780283	780291	780298	780306	780326	780329	780332	780348
780362	780364	780380	780403	780404	780408	780413	780414	780415
780424	780425	780443	780447	780453	780454	780466	780474	780482
780484	780485	780488	780491	780494	780496	780501	780503	780520
780540	780555	780558	780562	780575	780576	780580	780590	780613
780617	780618	780619	780623	780629	780643	780664	780674	780676
780682	780691	780699	780700	780708	780726	780727	780728	780746
780764	780780	780790	780799	780800	780801	780802	780805	780841
780844	780861	780883	780888	780910	780947	780955	780972	781190
781196	781230	781259	781272	781308	781345	781349	781350	781357
781366	781379	781403	781406	781422	781428	781446	781470	781502
781535	781600	781644	781684	781694	781714	781716	781794	781815
781821	781825	781832	781893	781906	781930	781931	781963	781984
781987	782014	782018	782028	782031	782045	782064	782070	782073
782083	782095	782106	782119	782148	782150	782151	782158	782198
782232	782238	782239	782243	782247	782275	782294	782332	782338
782345	782364	782366	782374	782390	782410	782411	782418	782423
782425	782436	782442	782449	782474	782479	782481	782490	782491
782493	782496	782526	782536	782556	782566	782568	782574	782575
782576	782579	782582	782586	782589	782606	782628	782636	782637
782652	782658	782663	782667	782668	782669	782675	782688	782691
782718	782719	782730	782739	782755	782757	782759	782760	782776
782778	782781	782785	782786	782807	782808	782814	782822	782829
782831	782837	782841	782842	782845	782850	782853	782861	782866
782874	782889	782898	782899	782905	782906	782907	782911	782912
782913	782920	782922	782925	782930	782934	782936	782942	782952
782994	782997	783003	783009	783017	783035	783039	783040	783042

783043	783047	783049	783063	783070	783073	783076	783077	783086
783090	783091	783102	783103	783106	783110	783117	783119	783122
783124	783135	783139	783141	783142	783149	783151	783155	783158
783159	783161	783183	783190	783196	783199	783201	783203	783222
783233	783235	783241	783242	783248	783258	783263	783271	783276
783282	783310	783317	783318	783329	783344	783346	783359	783369
783377	783378	783380	783405	783407	783411	783416	783448	783460
783483	783508	783536	783556	783560	783583	783597	783611	783613
783618	783630	783660	783663	783674	783708	783739	783756	783777
783782	783807	783844	783847	783858	783867	783868	783889	783915
783924	783931	783935	783943	783955	783957	783959	783965	783968
783989	784008	784009	784012	784022	784025	784034	784051	784077
784079	784092	784124	784144	784146	784150	784173	784180	784188
784193	784196	784197	784207	784232	784238	784271	784275	784281
784302	784305	784306	784324	784326	784328	784343	784384	784386
784390	784403	784441	784460	784461	784463	784495	784513	784531
784565	784696	784764	784782	784823	784877	784936	784959	785017
785055	785057	785069	785090	785104	785106	785119	785159	785167
785179	785181	785185	785192	785206	785209	785214	785233	785240
785246	785250	785256	785258	785262	785263	785271	785283	785309
785322	785325	785332	785353	785362	785363	785382	785398	785407
785409	785416	785463	785487	785516	785518	785541	785579	785590
785645	785654	785710	785724	785738	785817	785852	785905	785913
785929	785962	786037	786040	786046	786062	786080	786083	786092
786106	786111	786113	786121	786185	786219	786265	786266	786275
786278	786306	786310	786321	786334	786346	786355	786381	786383
786394	786400	786408	786409	786411	786413	786414	786433	786450
786456	786465	786474	786486	786502	786508	786511	786527	786531
786539	786552	786556	786557	786564	786568	786574	786575	786576
786587	786589	786593	786606	786607	786609	786614	786616	786621
786631	786633	786634	786638	786640	786643	786653	786659	786670
786685	786693	786707	786713	786716	786724	786728	786731	786758
786765	786791	786794	786798	786806	786814	786821	786825	786830
786832	786841	786843	786845	786846	786851	786852	786857	786864
786870	786871	786884	786893	786897	786900	786906	786916	786918
786921	786923	786924	786928	786943	786951	786953	786959	786980
786985	786986	786989	786990	786991	787010	787014	787019	787021
787023	787025	787036	787037	787050	787051	787075	787077	787081
787090	787104	787109	787114	787133	787147	787148	787165	787172
787175	787177	787180	787183	787205	787206	787226	787257	787294
787295	787297	787300	787311	787312	787321	787323	787332	787335
787352	787362	787367	787369	787375	787381	787390	787391	787461
787466	787468	787480	787503	787532	787540	787544	787549	787551
787554	787566	787574	787581	787583	787592	787617	787619	787627
787629	787633	787637	787648	787649	787650	787654	787663	787681

787688	787690	787696	787702	787723	787735	787745	787747	787751
787752	787753	787757	787759	787760	787762	787764	787766	787768
787783	787787	787791	787798	787800	787803	787818	787824	787825
787827	787828	787833	787836	787840	787842	787843	787847	787851
787853	787857	787858	787859	787862	787871	787878	787879	787881
787883	787888	787901	787902	787903	787905	787909	787912	787913
787926	787930	787933	787937	787938	787941	787951	787953	787956
787979	787983	787988	788009	788018	788024	788031	788032	788038
788053	788054	788057	788058	788065	788066	788079	788080	788092
788093	788097	788101	788106	788113	788116	788135	788141	788145
788151	788156	788161	788162	788172	788175	788183	788187	788188
788199	788214	788217	788230	788233	788238	788256	788262	788269
788273	788274	788277	788280	788288	788293	788296	788306	788316
788325	788326	788327	788334	788335	788347	788358	788360	788363
788366	788371	788378	788381	788397	788402	788410	788411	788415
788424	788431	788441	788444	788446	788447	788454	788457	788462
788489	788495	788497	788498	788499	788502	788508	788510	788511
788513	788515	788522	788534	788536	788542	788547	788570	788593
788613	788628	788645	788661	788663	788755	788765	788825	788927
788938	788950	788975	789067	789082	789155	789190	789191	789240
789266	789267	789268	789272	789286	789287	789292	789299	789310
789311	789312	789314	789315	789331	789334	789338	789342	789343
789346	789347	789351	789353	789365	789369	789373	789381	789385
789387	789392	789411	789424	789479	789528	789545	789597	789600
789601	789608	789626	789659	789673	789708	789716	789746	789753
789759	789761	789767	789794	789822	789825	789828	789833	789858
789862	789881	789897	789916	789957	789961	789990	790012	790031
790057	790065	790071	790075	790081	790094	790118	790169	790212
790230	790261	790311	790349	790358	790369	790389	790390	790488
790532	790997	791020	791091	791146	791295	791341	791389	791454
791476	791481	791493	791506	791507	791561	791607	791626	791653
791675	791678	791705	791738	791739	791748	791753	791756	791759
791767	791802	791826	791853	791880	791918	791919	791920	791945
791948	791991	791997	791999	792013	792061	792079	792088	792145
792173	792184	792193	792232	792239	792275	792278	792287	792288
792292	792300	792301	792310	792330	792376	792379	792391	792394
792402	792437	792442	792443	792448	792454	792497	792506	792511
792514	792527	792530	792545	792547	792568	792574	792577	792580
792597	792611	792613	792627	792646	792666	792676	792679	792683
792688	792703	792718	792733	792757	792761	792790	792800	792823
792911	792957	792960	793526	793530	793555	793587	793591	793677
793684	793697	793743	793757	793762	793803	793807	793835	793838
793857	793906	793913	793932	793956	793965	793989	793990	794020
794029	794063	794077	794078	794157	794782	794800	794915	794920
794975	794999	795020	795022	795048	795050	795059	795108	795155

795156	795165	795229	795254	795258	795273	795274	795279	795284
795285	795326	795366	795380	795381	795382	795397	795399	795465
795470	795488	795549	795562	795669	795760	795797	795818	795826
795873	795895	795896	795901	795908	795980	795982	795993	795994
796003	796016	796047	796051	796069	796085	796092	796093	796130
796164	796181	796190	796195	796268	796274	796282	796283	796303
796306	796329	796367	796386	796400	796404	796488	796564	796604
796629	796654	796678	796771	796790	796792	796793	796796	796806
796820	796853	796920	796929	796937	796948	796955	796958	796974
796982	797022	797070	797076	797147	797228	797276	797307	797355
797378	797412	797495	797578	797646	797684	797685	797686	797707
797786	797839	797844	797886	797928	797930	797955	797964	797969
797990	798026	798028	798029	798030	798052	798058	798070	798078
798081	798097	798102	798186	798191	798217	798267	798273	798349
798373	798383	798389	798435	798448	798456	798465	798484	798485
798486	798507	798517	798518	798527	798553	798559	798579	798585
798589	798624	798638	798641	798650	798653	798665	798668	798670
798684	798686	798690	798692	798695	798697	798698	798700	798708
798710	798717	798721	798722	798734	798736	798737	798739	798779
798799	798800	798811	798819	798827	798833	798834	798837	798841
798842	798844	798847	798894	798907	799028	799107	799158	799173
799197	799199	799200	799203	799206	799207	799215	799222	799224
799252	799254	799259	799263	799279	799283	799289	799290	799298
799301	799302	799305	799308	799309	799315	799322	799324	799327
799328	799338	799340	799354	799358	799375	799408	799420	799424
799434	799446	799471	799494	799499	799504	799506	799511	799514
799516	799520	799527	799532	799534	799536	799543	799552	799553
799563	799566	799568	799572	799601	799609	799611	799626	799630
799633	799639	799644	799645	799655	799666	799677	799691	799713
799715	799728	799735	799771	799772	799781	799789	799794	799800
799822	799855	799856	799866	799871	799891	799910	799912	799913
799921	799923	799957	799960	799961	799962	799974	799987	800004
800008	800040	800066	800074	800078	800099	800100	800112	800119
800123	800132	800144	800182	800196	800206	800213	800217	800231
800246	800290	800294	800298	800301	800305	800320	800330	800332
800357	800359	800362	800426	800427	800472	800504	800581	800614
800626	800628	800649	800681	800692	800704	800752	800771	801382
801386	801553	801574	801579	801616	801626	801642	801649	801650
801670	801680	801723	801730	801746	801748	801766	801783	801822
801825	801841	801866	801921	802068	802082	802092	802129	802136
802219	802305	802333	802413	802427	802431	802432	802439	802443
802450	802454	802456	802457	802458	802459	802475	802479	802490
802491	802508	802511	802513	802518	802532	802535	802543	802578
802633	802661	802665	802694	802764	802811	802829	802870	802884
802899	802911	802957	802959	802973	803012	803040	803059	803066

803068	803124	803140	803148	803186	803189	803204	803215	803222
803320	803325	803408	803483	803535	803566	803645	803669	803752
803823	803842	803878	803945	803969	804010	804125	804173	804228
804248	804318	804333	804352	804360	804399	804403	804449	804480
804490	804491	804548	804553	804573	804580	804585	804587	804588
804594	804596	804598	804604	804629	804640	804643	804645	804646
804649	804669	804670	804677	804680	804681	804702	804703	804709
804720	804725	804741	804742	804744	804745	804750	804754	804757
804760	804765	804768	804769	804775	804779	804781	804786	804792
804793	804795	804799	804804	804812	804819	804820	804822	804831
804832	804838	804839	804841	804847	804854	804859	804860	804861
804865	804874	804876	804880	804903	804912	804917	804926	804930
804934	804942	804961	804963	804969	804982	804985	804991	805019
805023	805038	805043	805044	805070	805074	805076	805155	805182
805218	805307	805350	805366	805413	805421	805424	805504	805507
805539	805552	805553	805559	805568	805570	805583	805591	805614
805616	805625	805628	805632	805633	805640	805643	805644	805647
805652	805657	805658	805665	805680	805681	805683	805685	805686
805695	805698	805699	805705	805719	805720	805725	805727	805729
805734	805739	805743	805764	805768	805769	805784	805800	805806
805837	805838	805843	805845	805851	805852	805895	805905	805912
805913	805919	805924	805926	805927	805959	805998	806000	806005
806012	806067	806071	806079	806095	806096	806117	806133	806135
806139	806145	806149	806150	806152	806167	806170	806174	806177
806178	806180	806184	806185	806187	806189	806204	806207	806227
806249	806264	806265	806269	806270	806292	806296	806299	806305
806307	806312	806313	806314	806336	806369	806371	806372	806379
806385	806395	806434	806435	806449	806457	806484	806501	806532
806623	806641	806719	806731	806734	806757	806759	806768	806815
806835	806851	806920	806932	806934	806994	807001	807061	807129
807201	807222	807227	807231	807233	807236	807240	807246	807263
807286	807288	807313	807315	807342	807346	807362	807389	807398
807410	807418	807419	807429	807437	807474	807481	807502	807686
807727	807744	807789	807813	807831	807865	807870	807872	807939
807991	808254	808415	808497	808592	808593	808659	808669	808718
808800	808803	808807	808808	808857	809012	809041	809074	809235
809257	809301	809374	809379	809470	809478	809536	809559	809582
809613	809708	809717	809744	809772	809800	809809	809811	809815
809836	809867	809874	809880	809910	809914	809934	809940	809941
809943	809947	809948	809949	809950	809955	809958	809969	809971
809972	809974	809978	809980	809990	809993	809997	810000	810018
810019	810020	810034	810035	810038	810039	810053	810056	810063
810066	810070	810077	810080	810083	810088	810090	810096	810108
810115	810124	810126	810128	810131	810133	810136	810137	810138
810139	810140	810144	810145	810146	810150	810151	810154	810157

810160	810162	810177	810179	810186	810191	810195	810200	810204
810212	810219	810224	810234	810235	810242	810243	810253	810256
810258	810262	810264	810270	810288	810292	810304	810306	810307
810310	810314	810322	810323	810326	810330	810339	810348	810354
810357	810359	810365	810367	810371	810384	810401	810407	810409
810412	810415	810418	810439	810443	810448	810453	810455	810457
810459	810461	810463	810474	810475	810480	810497	810498	810499
810521	810529	810535	810558	810584	810596	810597	810598	810611
810622	810650	810699	810703	810709	810734	810763	810780	810795
810821	810838	810839	810854	810855	810858	810864	810966	811046
811080	811170	811204	811225	811226	811250	811291	811296	811306
811314	811330	811342	811361	811372	811410	811433	811469	811488
811509	811513	811528	811534	811545	811584	811594	811857	811860
811882	811931	811991	812052	812058	812157	812259	747263	747266
770933	779705	785059	793466	793467	793676	796087	798405	798491
801615	801721	805254	805472	805494	805501	805555	807877	809561
809622	809779	809786	809831	809832	809835	809837	809855	809960
809961	812138	812684						

3) ヴァリチュード

U125

704306	704341	704453	704477	704531	704975	704992	705733	705836
706399	706493	706552	706581	706728	707749	707952	708459	708492
708697	708814	708816	708819	709306	709308	709492	709549	709700
710094	710203	710205	710206	710247	710257			

U128

707173	707874	708385	708734	708781	708866	708888	708906	708915
709345	709410	709413	709488	709959	710086	710108	710122	710255
710256	710271	710273	710288	710323	710331	710338	710346	710350
710356	710361	710363	710365	710377	710378	710383	710388	710389
710395	710408	710412	710414	710418	710420	710423	710438	710439
710445	710450	710452	710459	710466	710470	710485	710488	710491
710502	710520	710914	710955	711039	711097	711153	711366	711738
711925	712036	712041	712150	712162	712167	712180	712265	712298
712634	712710	712742	713324	713491	713505	713536	713628	713699
714200	714286	714302	714317	714380	714389	714392	714404	714417
714420	714447	714476	714539	714578	714655	714685	714702	714710
714726	714729	714930	715606	715608	715610	715696	715854	715939
715949	715977	716001	716064	716069	716142	716201	716303	716317
716358	716382	716394	716400	716578	716581	716616	716680	716701
716708	716717	716723	716732	717153	717937	718344	718354	718362
718364	718391	718400	718442	718443	718447	718942	719018	719100
719218	719477	719635	719642	719680	719739	720059	720240	720385
720496	720585	720593	720612	720629	720684	720710	720736	720791

720839	720861	721093	722191	722281	722297	722305	722320	722329
722361	722394	722469	722516	722570	722738	723250	723334	723337
723397	723476	723483	723551	723687	723715	723813	724805	724936
725578	725826	725940	726280	726907	726911	727326	727427	727573
727582	727596	727631	727635	727642	727680	727682	727683	727711
727712	727738	727855	727871	727872	728085	728107	728111	728143
728221	728641	728999	729033	729050	729492	729493	729499	729516
729586	729624	729643	729693	729736	730346	730493	730598	730710
730730	730732	730759	730766	730767	730784	730797	730814	730872
730881	730980	733126	733420	733433	733440	733470	734450	735289
735292	735303	735393	735632	735684	735695	735753	735938	735964
728943	735934	735135	734871	735231	734464	734200	734461	733469
733517	733619	735962	735917	735884	735849	735391	735189	

- (2) 出荷時期： 1)平成28年6月29日～平成30年11月22日
2)平成27年11月25日～平成30年11月27日
3)平成28年6月17日～平成30年11月27日
- (3) 出荷数量： 1)3,602台
2)21,037台
3)311台
総数24,950台（平成30年11月27日時点）
- (4) 対象施設数： 1,254施設
- (5) 患者モニタリング開始日：平成30年11月27日

5. 患者モニタリングの理由

植込み型心臓ペースメーカ（アコレード、アコレード MRI）及び除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ CRT-P（ヴァリチュード）（以下、ペースメーカ）において、分時換気量（MV）センサ信号を自己脈と誤認し、間欠的なオーバーセンシングが発生する事例が報告されています。MV センサ信号のオーバーセンシングによってペーシングが抑制される時間が発生し、それにより失神前の状態に至る、あるいは失神を引き起こす可能性があります。

当該事象が発生した場合、ペーシングが抑制される可能性があり、重篤な健康被害に至る可能性を否定することができません。弊社では現在、MV センサ信号のオーバーセンシングを自動的に検知し解消するソフトウェアのアップデートの開発を行い、導入の準備をしておりますが、ソフトウェアアップデートが行われるまでの間、MV センサの設定状態の確認及び定期的なフォローアップなどの患者モニタリングを継続して実施していただくよう医療機関にお願いすることとしました。

6. 危惧される健康被害

当該事象が発生した場合、ペーシングが抑制される可能性があり、特にペースメーカ依存の患者様において重篤な健康被害に至る可能性を否定することができません。

7. その他

全ての納入施設は把握しており、対象製品の植込みを実施した医療機関に対し、MV センサの設定状態確認方法や患者様の管理に関する推奨事項について、情報提供を行います。

8. 本件に関するお問い合わせ先

会社の名称 ポストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
所在地 東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス
担当者氏名 コーポレートコミュニケーションズ&ブランディング部
柴山 敦子 (携帯) 090-8871-0341
E-mail Atsuko.Shibayama@bsci.com
信頼性保証本部
長倉 悠太、武田 邦子 (オフィス) 03-6853-7090

以上