

Gagless

ディスポ/マウスピース



“奥歯で噛み合わせる”

口腔咽頭の機能に着目した
ディスポーザブルマウスピース

Gagless ディスポ/マウスピース


“奥歯で噛み合わせる”

口腔咽喉の機能に着目した
ディスポーザブルマウスピース



従来型


咽喉反射がおこり、
苦痛が生じる。
マウスピースが
脱落することもある。

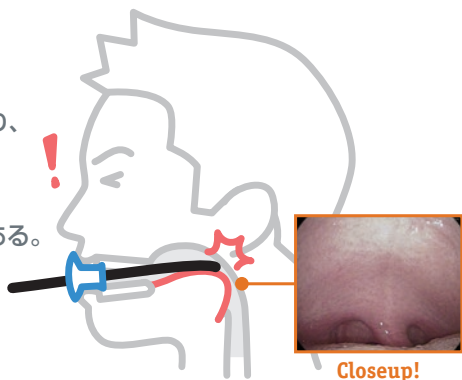

Closeup!

新規型


咽喉が広がり、
スムーズに
カメラが挿入し、
咽喉反射が軽減する。

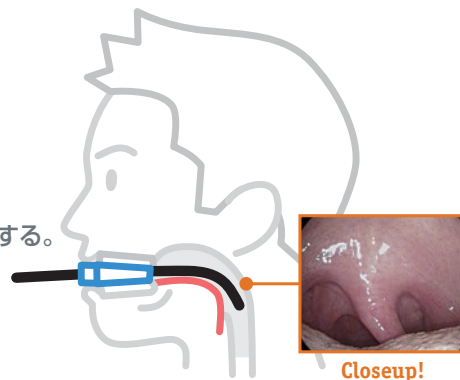

Closeup!


Step 1

両側から押えながら
口にくわえます。

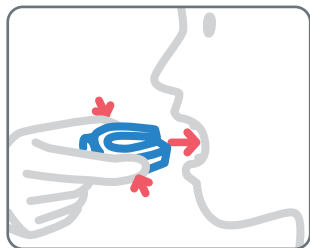

Step 2


手を離すと
元の状態にもどります。

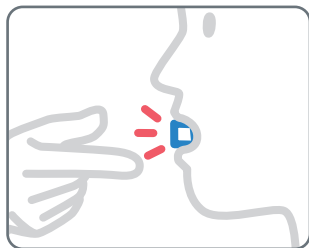

挿入口がふさがらない程度に
くちびるを閉じてください。

Step 3


まず奥歯で軽く噛み、
次に歯全体でゆっくり噛みます。

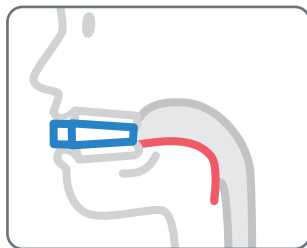

舌を下の前歯に当たるように
つき出すと、奥舌が下がり、
のどが広くなります。

Step 4

内視鏡が
スムーズに入ります。

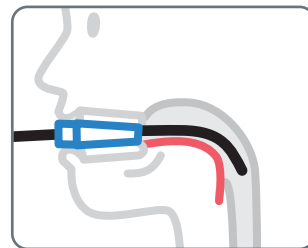


検査中はマウスピースが
動かない程度に
軽く噛み続けてください。

Gagless ディスポ

カタログ番号	製品名	規格	開口部内径	販売単位
M00504050	Gagless ディスポ 50	ディスポーザブル	45F	50個 / 箱入
M00504060	Gagless ディスポ 20	ディスポーザブル	45F	20個 / 箱入

ブロック内視鏡用 バイトブロック

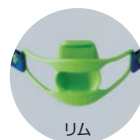

Gagless マウスピース

カタログ番号	製品名	規格	開口部内径	販売単位
M00504040	Gagless マウスピース	リユース	45F	2個 / 箱入



ノーマルタイプのブロック内視鏡用 バイトブロックもラインアップ。詳しくは弊社営業担当へご確認ください。

※径表示換算目安: 1mm=3French=0.0394inches

販売名: Gagless マウスピース
製造販売業者: イナバコム株式会社
製造販売届出番号: 31B2X00006000001

販売名: Gagless ディスポ
製造販売業者: イナバコム株式会社
製造販売届出番号: 31B2X00006000003

販売名: 内視鏡用 バイトブロック ブロック
製造販売届出番号: 13B1X00043000076

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston Scientific
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

2104-35213-A-ODP/PSST20210407-0431