

LATITUDE™


PROGRAMMING SYSTEM
MODEL 3300

In-Service



CONVENIENCE MADE PORTABLE

Das Programmiergerät , Modell 3300 wurde konzipiert, um die Benutzererfahrung zu verbessern und Anwendern mehr Möglichkeiten zu bieten

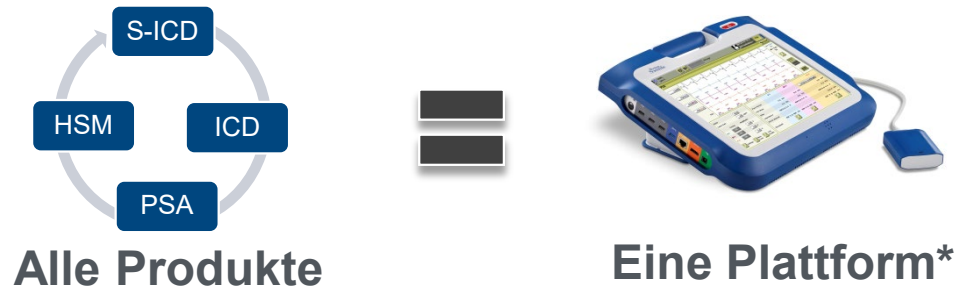

Anwenderfreundlich



Geringer Platzbedarf

Schneller bei Aggregatabfrage
und Datentransfer

Sofortiger Wechsel zwischen PSA
und Programmieroberfläche

Konnektion



Verbindung über Bluetooth®,
WLAN, Ethernet und USB

Datentransfer via Klinik-internen
PC zum KIS mit LATITUDE Link™

Digitale Aufzeichnung von
Ereignissen

Mobil



Geringes Gewicht (<4 kg)

2 Stunden Batteriebetrieb

Protektives,
ergonomisches Design

*Nicht alle Funktionen sind zum Zeitpunkt der Markteinführung verfügbar

KOMFORTABEL UND MOBIL



HÖHERE
ANWENDERFREUNDLICHKEIT



EINFACHE
VERBINDUNGSHERSTELLUNG



MOBIL UND LEICHT



*Komfortables und modernes
Design für eine einfachere
Patientenversorgung*

Einfacher Zugriff auf alle Verbindungen

Anschlussbuchsen Patientenseitig

Telemetrie-Programmierkopf
Modell 6395

S-ICD Telemetrie-
Programmierkopf Modell 3203

Reserviert für zukünftige
Anwendungen

EKG-Kabel
Modell 3154

PSA-Kabel – Kanal A/RV
Modell 6763

PSA-Kabel – Kanal LV
Modell 6763



Anschlussbuchsen Techn. Anwendung

Netzschalter (EIN/AUS)
Taste leuchtet grün bei
EINGESCHALTETEM
Programmiergerät

USB 2.0-Anschluss (3 x)

USB 3.0-Anschluss (1 x)

Ethernet-Anschluss


DisplayPort-Ausgang¹

Anschluss für Netzteil



¹Richtigen Adapter verwenden, wenn der Bildschirm einen VGA- oder HDMI-Anschluss besitzt

PSA - Entwickelt für mehr Effizienz

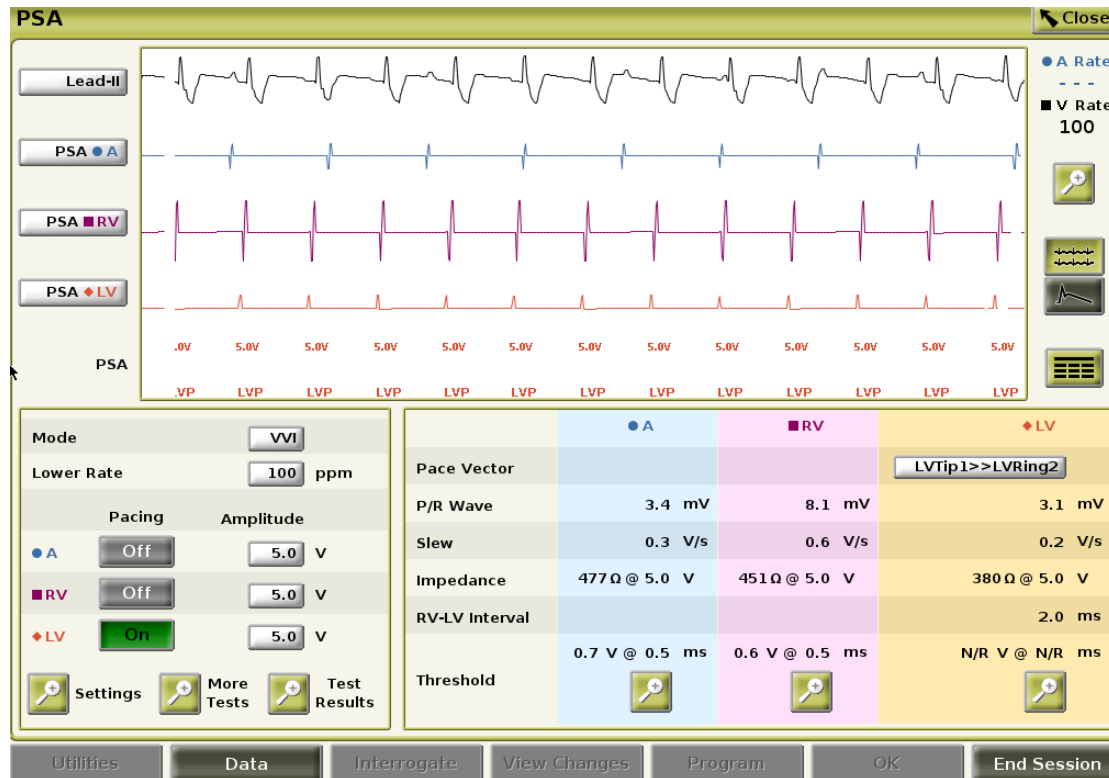

✓ Übertragung von PSA-Ergebnissen zum Device

✓ Sofortiger Wechsel zwischen PG und PSA


Aufzeichnen und Annotieren von EGM Aufzeichnungen



Momentaufnahme

Echtzeit-Aufzeichnung
(für bis zu 3 min.)


- ✓ **Präzise Bearbeitung von Daten**
- ✓ **Originalaufzeichnung bleibt immer verfügbar**
- ✓ **Sicherheit von Patientendaten**
 - ▶ Verwendung von Advanced Encryption Standards (AES) für die Datenverschlüsselung
 - ▶ Automatisches Löschen von Patientendaten auf interner Festplatte nach 14 Tagen

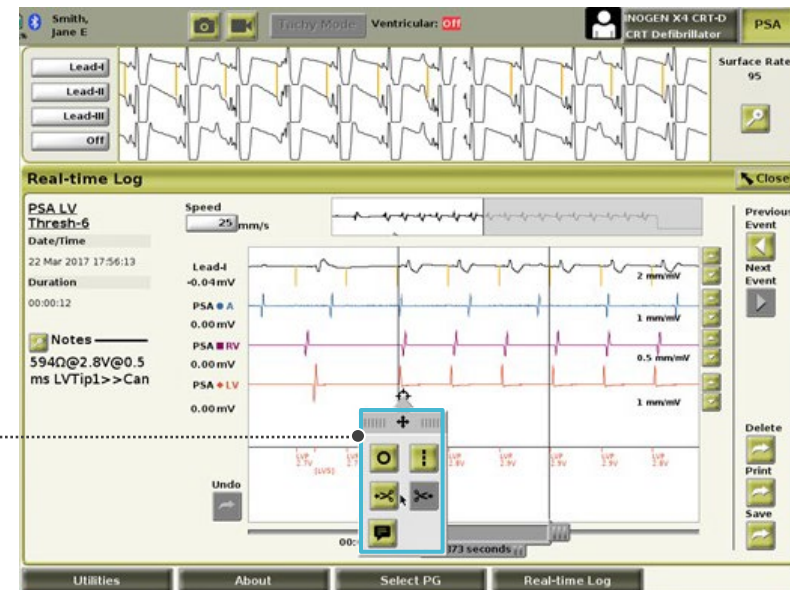

**Kommentieren, Hervorheben
und Ausschneiden von EGMs**

Optimierte Konnektivität – offen für neue Möglichkeiten

Verschiedene
Optionen für die
Datenübertragung

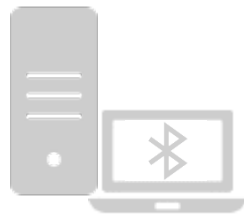

Datenexport
mit **Bluetooth®**
oder **USB**



Software-Updates
via **Download**
über **WLAN**
oder **Ethernet**

Immer die aktuelle
Device Software

Drucken und
Archivieren



Drucken von
Berichten
über **Bluetooth®**
oder **USB-Kabel**



USB-kompatibel

Datenübertragung und/oder
Software-Download
über **USB**

Überblick

Anwenderfreundlichkeit

Konnektivität

Mobilität



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
3300	LATITUDE Programmiersystem

Modell	Beschreibung
6395	Programmierkopf
6753	Batterie
6689	Netzteil
6285	Netzkabel (Europa)
6282	Netzkabel (Schweiz)



OPTIONALES ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
6753	Batterie (zusätzlich)
6755	Standfuß
3154	Oberflächen-EKG-Kabel
6629	BNC-Slave-EKG-Kabel
6252	USB-Stick
6763	Restерilisiertes PSA-Kabel (2,5 m)
6697+6133	PSA-Einwegkabel (5er-Packung + erforderlicher Adapter)
3320	Programmierkopfhülle
4625	IS-4 Adapter zum Anschluss der Messkabel (lila)
7001	DF-4 Adapter zum Anschluss der Messkabel (grün)



Überblick

Anwenderfreundlichkeit

Konnektivität

Mobilität



- 1 Boston Scientific 3120 LATITUDE Zoom Programmiergerät (<https://images.dotmed.com/images/listingpics/1614940.jpg>)
- 2 Liva Nova Orchestra Plus Programmiergerät (<http://www.livanova.sorin.com/file/view-2597.action>)
- 3 Medtronic 2090 CareLink Programmiergerät (<http://2znznu4x5d61ra4q12fyu67t-wpengine.netdna-ssl.com/img/medtron1290.jpg>)
- 4 Biotronik Renamic Programmiergerät (http://img.medicaexpo.de/images_me/photo-g/77894-11045478.jpg)
- 5 St Jude Medical Merlin Patientversorgungssystem (<http://s1.q4cdn.com/166440495/files/images/THE%20PROGRAMMER.png>)
- 6+7 Konzepttechnologie. Nicht zum Verkauf

Wichtige Hinweis: Hierin enthaltene Informationen ersetzen nicht die BSC Gebrauchsanweisungen für das LATITUDE Programmiersystem, Modell 3300, und zugehöriges Zubehör.

Die Gebrauchsanweisungen finden Sie unter www.Bostonscientific.com

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Boston Scientific-Vertreter.

Vorsicht: Diese Geräte dürfen von Gesetzes wegen nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sind der dem Produkt beiliegenden Packungsbeilage zu entnehmen. Gebrauchshinweise nur für Länder mit Produktregistrierung bei den entsprechenden Gesundheitsbehörden. Informationen nicht zur Verwendung oder Weitergabe in Frankreich bestimmt.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.