

Nützliche Informationen zu Ihrem LATITUDE™ Communicator

Ihr Arzt verschreibt Ihnen das LATITUDE™ NXT Patienten-Management-System, das ihm die Erfassung von Informationen über Ihr implantiertes Gerät sowie über Ihre medizinische Versorgung erleichtert.

LATITUDE™ NXT

Patienten-Management-System

Bedienerfreundlich, kontrollierbar, flexibel

Die richtigen Informationen
zur richtigen Zeit



Der Communicator überprüft Ihr implantiertes Gerät bei Ihnen zu Hause und sendet die Daten über das Internet an eine sichere Website, die von Ihrem Arzt aufgerufen werden kann.

Zeitplan für Ihre Fernabfrage: _____

Hinweise: _____

Patientenaufklärung:

- Tägliche Prüfung
 Fernabfrage
 Blinkende Herz-Taste (weiß)/PII
 Symbol „Arzt anrufen“
 Kippschalter


Anschlüsse:

- Analoge Telefonleitung 
 Mobilfunk 
 Mobilfunk (über USB-Adapter)  
 Ethernet (über USB-Adapter) 

Anschluss des Communicators:

Folgende Verbindungsarten stehen für Ihren Communicator zur Verfügung:

- A** Festnetz
- B** Mobilfunknetz
- C** Kabelgebundenes Ethernet über USB-Adapter

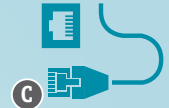

Der Communicator führt regelmäßig automatisch den Download und die Installation interner Software durch. Dieser Vorgang kann abhängig von der Verbindungsart bis zu 1,5h dauern.

Schnelle Communicator-Einrichtung



Diese Taste einmal drücken

Einrichtung abgeschlossen

Grüne LATITUDE™-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass der Communicator mit Strom versorgt wird

Überprüfen der korrekten Funktionsweise Ihres LATITUDE™ Communicators



Drücken Sie einmal für weniger als 3 Sekunden die Status-Taste.



Die letzte Datenübertragung war erfolgreich, falls die Anzeigen des Communicators wie in dieser Abbildung leuchten.

Blinkende Herz-Taste:



Aufforderung zur Datenübertragung

Wenn die Herz-Taste blinkt, drücken Sie sie einmal, und bleiben Sie nahe am Communicator.

LATITUDE™ Customer Support:

Bei Fragen wählen Sie bitte die **069 51709 481** oder besuchen Sie **www.bostonscientific.eu/LATITUDE** um mehr über LATITUDE™ zu erfahren

Die Abbildungen zeigen unter Umständen nicht die tatsächliche Größe des Produkts.

Alle genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. VORSICHT: Diese Devices dürfen nur durch oder im Auftrag eines Arztes erworben werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage für jedes Produkt. Informationen zum Gebrauch nur in Ländern mit Produktregistrierungen bei den zuständigen Gesundheitsbehörden.

CRM-334410-AA AUG2015 Gedruckt in Deutschland von medicalvision

Boston Scientific
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu/LATITUDE

© 2015 Boston Scientific Corporation oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. DINCRM0894GA