

# Guida alla configurazione su APPLE™

## MyLATITUDE™

### APP PER I PAZIENTI

#### PER INIZIARE

Di seguito è riportato tutto ciò che è necessario per configurare l'app MyLATITUDE per i pazienti:

- Lo smartphone o il tablet.
- ID e password Apple.
- Modello/numero di serie del dispositivo impiantato


(Il Suo Ospedale molto probabilmente ha fornito alcuni documenti in cui è possibile trovare queste informazioni).

L'app MyLATITUDE per i pazienti è compatibile con la versione iOS 10.0 e successive.

I requisiti per il dispositivo mobile o la versione del sistema operativo (OS) cambieranno nel tempo. Potrebbe essere necessario aggiornare o sostituire il dispositivo mobile e il sistema operativo per utilizzare l'app.

#### PASSAGGIO 1

Dal dispositivo mobile, accedere a [www.bostonscientific.eu/mylatitude](http://www.bostonscientific.eu/mylatitude). Scorrere verso il basso e fare clic sul badge dell'Apple Store per scaricare l'applicazione (in alternativa è possibile scansionare il codice QR qui sotto).

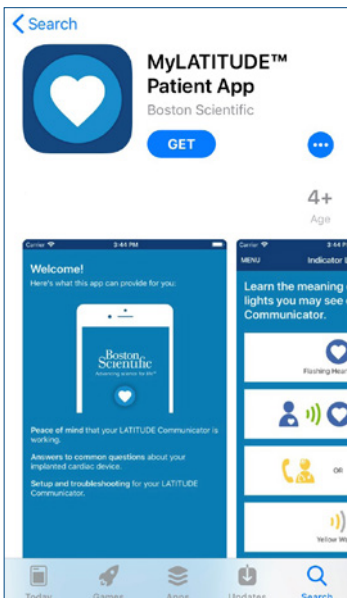

#### PASSAGGIO 2

Si verrà indirizzati all'App Store.

- **Toccare "GET" (SCARICA) per scaricare l'app.** Il download e l'uso dell'app MyLATITUDE per i pazienti sono gratuiti.
  - È possibile che per scaricare l'app venga chiesto di autenticarsi con ID e password Apple, impronta digitale o Face ID. Se non si ricorda l'ID e/o la password Apple, andare a su <https://iforgot.apple.com>.
- Se il dispositivo mobile non è compatibile, il pulsante "GET" (SCARICA) sarà disabilitato.



#### PASSAGGIO 3

Al termine del download, l'icona dell'app MyLATITUDE per i pazienti apparirà sullo schermo del dispositivo mobile. Cercare questa icona e toccarla per aprire l'app.


#### PASSAGGIO 4

Seguire la procedura di configurazione dell'app:

- Consultare i Termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy dei dati.
- Immettere la data di nascita, il modello e il numero di serie del dispositivo impiantato.
- Accettare le notifiche se si desidera essere avvisati della disconnessione del Comunicatore LATITUDE™.

## PASSAGGIO 5

Dopo aver completato il passaggio 4, verrà visualizzata una delle schermate seguenti.

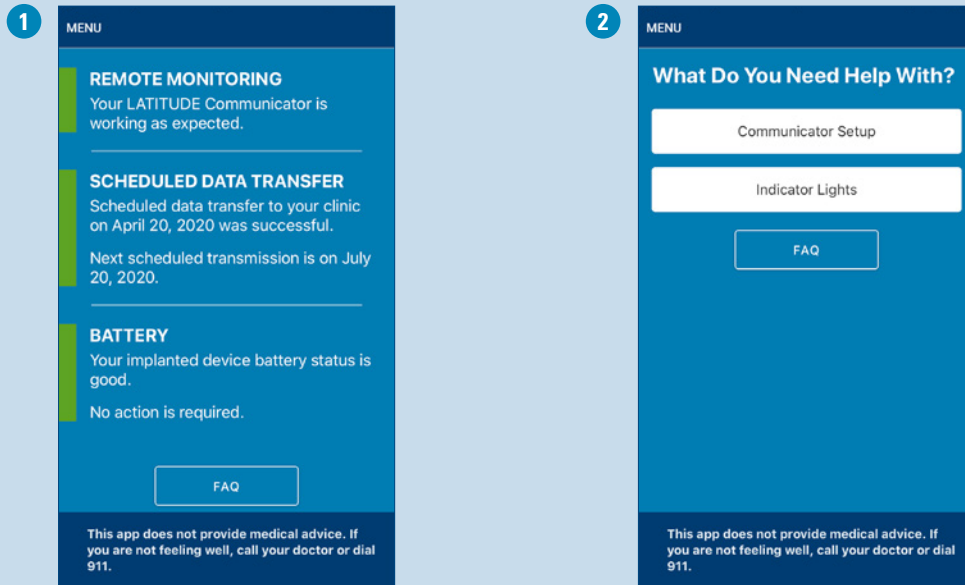

- 1 Se si vede questa schermata o una schermata simile, significa che le informazioni sono state inserite correttamente. Non sono necessarie ulteriori azioni per completare la configurazione dell'app MyLATITUDE per i pazienti.
- 2 Se viene visualizzata questa schermata, è possibile che le informazioni siano state inserite in modo errato. Toccare "MENU", quindi "Le mie informazioni" per rivedere le informazioni inserite. Assicurarsi che tutte le informazioni inserite siano corrette. Toccare "MENU", quindi "Home" per tornare alla schermata principale. Se tutte le informazioni sono corrette ma viene ancora visualizzata questa schermata, contattare l'assistenza clienti LATITUDE al numero 848 781164 o tramite e-mail: [latitude.international@bsci.com](mailto:latitude.international@bsci.com)

### Sistema LATITUDE™ NXT di gestione del paziente

#### Importanti informazioni sulla sicurezza

Il sistema LATITUDE™ NXT di gestione del paziente è un sistema di monitoraggio remoto che fornisce all'operatore sanitario l'accesso ai dati del dispositivo impiantato del paziente. Il sistema LATITUDE di gestione del paziente non è destinato all'assistenza in caso di situazioni mediche di emergenza. Se non ci si sente bene, contattare il proprio operatore sanitario o il proprio servizio di emergenza. Il Comunicatore non fornisce un monitoraggio continuo.

Il Comunicatore è progettato per funzionare su linee telefoniche standard, come quelle presenti nella maggior parte delle abitazioni private. Il Comunicatore può funzionare su altri sistemi telefonici, quali i sistemi Internet DSL e VoIP, se forniscono un'interfaccia analogica per il collegamento del Comunicatore.

Il Comunicatore è progettato per funzionare solo con il dispositivo impiantato del paziente per il quale è stato prescritto. Non funzionerà con dispositivi impiantati di altri pazienti e deve essere utilizzato solo dietro prescrizione medica. Il Comunicatore non è adatto all'uso con un generatore di impulsi diverso da un dispositivo Boston Scientific. In caso di domande sui rischi derivanti dall'uso del Comunicatore o del dispositivo impiantato, rivolgersi al proprio medico.

È molto importante che il Comunicatore resti collegato alla presa di alimentazione. Il Comunicatore deve restare collegato a una linea telefonica, a un adattatore ethernet o a un adattatore GSM per cellulare. Alcuni elettrodomestici e altre fonti di energia elettromagnetica potrebbero interferire con la comunicazione tra il Comunicatore e il dispositivo impiantato. Quando si utilizza il Comunicatore, è necessario trovarsi ad almeno 1 m di distanza da televisori, videoregistratori, lettori DVD, personal computer e altre apparecchiature elettroniche.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari. ATTENZIONE: la legge limita la vendita del presente dispositivo esclusivamente dietro prescrizione medica. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l'uso si trovano nell'etichetta del prodotto fornita con ogni dispositivo. Informazioni per l'uso solo nei Paesi con registrazione dei prodotti da parte delle autorità sanitarie competenti. Materiale non destinato all'uso in Francia.

CRM-914404-AA Stampato in Germania da medicalvision.

[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

© 2020 Boston Scientific Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
DINCRM9951A