


Resolution™ Clipsystem

Verfahrensschritte

Boston
Scientific

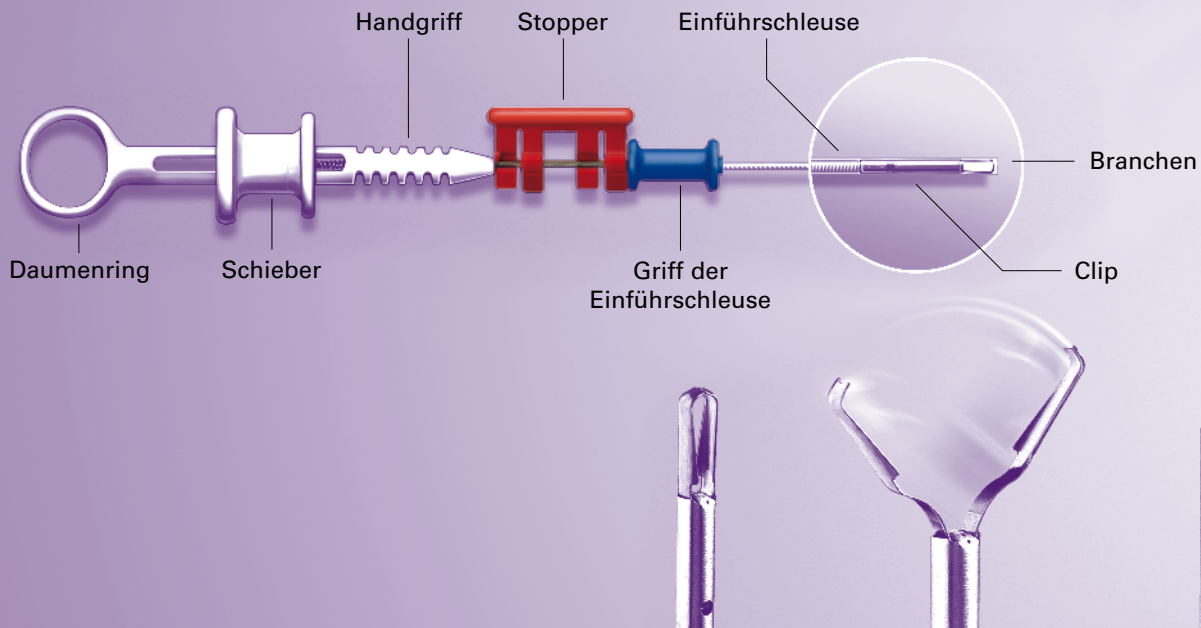

SCHRITT 1 – Vorbereitung

Abbildung 1



- Den Resolution Clip **vorsichtig in den Arbeitskanal einführen**.
- Den **roten Stopper entfernen**, wenn der Clip aus dem Endoskop austritt.
- Die **Branchen freigeben**, indem der **blaue Griff der Einführschleuse festgehalten** und der **Handgriff nach distal vorgeschoben** wird (Abb. 1).

SCHRITT 2 – Positionierung



Abbildung 2



Abbildung 3

Der Resolution Clip **öffnet und schließt sich wie eine Biopsiezange**.

- Um den **Clip zu öffnen**, den **Schieber nach distal bewegen** (Abb. 2).
- Um den **Clip zu schließen**, den **Schieber nach proximal ziehen**, bis ein **Widerstand im Handgriff zu spüren** ist (Abb. 3).
- Der Resolution Clip ist so konzipiert, dass er bis zu **5 Mal vor dem endgültigen Freisetzen geöffnet und geschlossen** werden kann. Dadurch wird das **Repositionieren des Clips ermöglicht**.*

Achtung: Falls der Handgriff über den ersten spürbaren Widerstand gezogen wird, kann der Clip nicht nochmals geöffnet werden.

SCHRITT 3 – Freisetzung



Abbildung 4



Abbildung 5

- **Setzen Sie den Clip frei**, indem Sie den **Schieber nach proximal über den spürbaren ersten Widerstand hinaus ziehen**; hierbei ist ein **erstes Klicken** zu hören oder zu spüren. Ziehen Sie den Schieber weiter, bis ein **zweites Klicken** zu hören oder zu fühlen ist (Abb. 4).
- Um den Clip vom Applikationssystem zu lösen, **den Handgriff nochmals öffnen** (Schieber nach distal bewegen, Abb. 5).
- Vor dem Herausziehen des Systems aus dem Arbeitskanal zuerst mit dem **blauen Griff die Hülle über die Ablösestelle schieben** und den **roten Stopper wieder befestigen**.

* Das erneute Öffnen und Schließen kann u. a. durch klinische Bedingungen und die Anatomie des Patienten eingeschränkt sein.

Dieser Überblick dient nur illustrativen Zwecken und ist lediglich als eine kurze Zusammenfassung der Verfahrenseigenschaften des Resolution Clips gedacht. Vollständige Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Alle angegebenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. VORSICHT: Diese Produkte dürfen nur durch oder im Auftrag eines Arztes erworben werden. Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und Anleitungen zur Benutzung sind der dem Produkt beigegebenen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

Informationen nur für die Verwendung in Ländern mit gültigen Produktregistrierungen bei den zuständigen Gesundheitsbehörden.

ENDO-101901-AA März 2012 - Gedruckt in den Niederlanden von DeBudelse/creativeservices.

© 2012 Boston Scientific Corporation oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. DINEND2310GA



Defining tomorrow, today
in Endoscopy.