

概要

本書には、リードスタイルットに関する全般的な情報とスタイルットモデル番号のガイドが記載されています。

関連製品

言及されているポストン・サイエンティフィック製の全スタイルット。

ここに掲載された製品は、Boston Scientific Corporation または系列企業の登録商標または未登録商標です。その他の商標はいずれもそれぞれの所有者に帰属します。

機器の動作に関する総合的な情報は、www.bostonscientific-labeling.com を参照してください。

注意：適応、禁忌、使用上の注意、警告は、各製品の添付文書ならびに取扱説明書をご確認ください。

特に明記していない限り、画像はすべてポストン・サイエンティフィックの提供するものです。

CRT-D：心再同期治療機能付き植込み型除細動器

CRT-P：心再同期治療ペースメーカー

ICD：植込み型除細動器

S-ICD：皮下植込み型除細動器

お問い合わせ先

www.bostonscientific.com

米国

テクニカルサービス

LATITUDE™ カスタマーサポート

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

患者サービス

1.866.484.3268

ヨーロッパ、中東、アフリカ

テクニカルサービス

+32 2 416 7222

intltechservice@bsci.com

LATITUDE カスタマーサポート

latitude.europe@bsci.com

日本

テクニカルサービス

japantechservice@bsci.com

LATITUDE カスタマーサポート

japan.latitude@bsci.com

アジア太平洋

テクニカルサービス

+61 2 8063 8299

aptechservice@bsci.com

LATITUDE カスタマーサポート

latitude.asiapacific@bsci.com

© 2018 by Boston Scientific Corporation or its affiliates. All Rights Reserved.

ポストン・サイエンティフィック スタイルットガイド

リードスタイルットは、リードを心臓内の目的の位置に留置する際に役立ちます。リード留置中にスタイルットを使用するときは、植込み中のリードと併用することを意図したスタイルットモデルを使用することを推奨します。さまざまなタイプと硬さを持つスタイルットが用意されており、多様な植込み術および患者の体内構造に適合させることができます。さまざまなポストン・サイエンティフィック製リードとの併用が推奨されるスタイルットを下記の表 1、2、および 3 に示します。

スタイルットのキャップおよびノブにはさまざまな色がありますが、これはモデルを色で区別しやすくするためです。スタイルットキャップの色は、スタイルットの長さ(センチメートル単位)を示し、スタイルットノブの色は、スタイルットの硬さを示します(図 1 参照)。

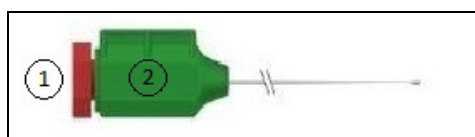


図 1. スタイルットのキャップ(1)およびノブ(2)の色は、スタイルットの長さおよび硬さを示します。

さらに、スタイルットの長さは、スタイルットキャップに刻印されており、スタイルットのタイプまたは硬さは、スタイルットノブに刻印されています(図 2 参照)。リードが同梱されたスタイルットは、白いフープ(ストレートスタイルット)または青いフープ(心房 J スタイルット)に入っていることにご注意ください。

スタイルットタイプ	ノブの刻印	フープの色
ストレート:		
ストレート	S	白色
テーパー	T	白色
ロングテーパー	LT	白色
心房 J:		
心房 J	J	青色
心房 J ワイド	W	青色

スタイルットの硬さ	ノブの刻印
硬い	Firm
しなやか	Lmbr
柔らかい	Soft
より柔らかい	X-soft

図 2. スタイルットのタイプおよび硬さ、ノブの刻印、およびフープの色

ポストン・サイエンティフィック製スタイルット

ポストン・サイエンティフィック製植込み型経静脈リードとの併用が推奨されるスタイルットを下記の表に示します。植込み中のリードに適した長さのスタイルットが選択されていることを確認してください。スタイルットに関するその他の情報については、個別の添付文書を参照してください。

表 1: RELIANCE 4-FRONT™、ENDOTAK RELIANCE 4-SITE™、および ENDOTAK RELIANCE™ リード

リードモデル	スタイルットモデル	スタイルットタイプ	全長 (cm)	硬さ	直径 (インチ)	ノブ W = 白色 G = 緑色	キャップ Y = 黄色 G = 緑色 B = 黒色
017X、018X、 026X、027X、 028X、029X、 063X、065X、 066X、067X、 068X、069X	6601	ストレート	59	柔らかい	0.014	G	Y
	6602	ストレート	59	硬い	0.016	W	Y
	6972	ストレート	64	柔らかい	0.014	G	G
	6971	ストレート	64	硬い	0.016	W	G
	6964	ストレート	70	柔らかい	0.014	G	B
	6963	ストレート	70	硬い	0.016	W	B

表 2: INGEVITY™ MRI

リードモデル	スタイルットモデル	スタイルットタイプ	全長 (cm)	硬さ	直径 (インチ)	ノブ Y = 黄色 G = 緑色	キャップ Y = 黄色 W = 白色 R = 赤色
7735	5003	ストレート	45	より柔らかい	0.013	Y	W
	5012	ロングテーパー	45	柔らかい	0.014	G	W
7740	5003	ストレート	45	より柔らかい	0.013	Y	W
	5012	ロングテーパー	45	柔らかい	0.014	G	W
	6506	心房 J	45	柔らかい	0.014	G	W
	6053	心房 J ワイド	45	柔らかい	0.014	G	W
7731	5004	ストレート	52	より柔らかい	0.013	Y	R
	5013	ロングテーパー	52	柔らかい	0.014	G	R
7736	5004	ストレート	52	より柔らかい	0.013	Y	R
	5013	ロングテーパー	52	柔らかい	0.014	G	R
7741	5004	ストレート	52	より柔らかい	0.013	Y	R
	5013	ロングテーパー	52	柔らかい	0.014	G	R
	6586	心房 J	52	柔らかい	0.014	G	R
	6054	心房 J ワイド	52	柔らかい	0.014	G	R
7732	5005	ストレート	59	より柔らかい	0.013	Y	Y
	5014	ロングテーパー	59	柔らかい	0.014	G	Y
7742	5005	ストレート	59	より柔らかい	0.013	Y	Y
	5014	ロングテーパー	59	柔らかい	0.014	G	Y
	6603	心房 J	59	柔らかい	0.014	G	Y
	6055	心房 J ワイド	59	柔らかい	0.014	G	Y

表 3: FINELINE™ II リード

リード 1 本モデル	スタイルットモデル	スタイルットタイプ	全長 (cm)	硬さ	直径 (インチ)	ノブ Y = 黄色 W = 白色 G = 緑色	キャップ Y = 黄色 M = ミント色 P = 紫色
4469	6061	ストレート	45	しなやか	0.014	G	Y
	6064	ストレート	45	硬い	0.016	W	Y
	6032	テーパー	45	しなやか	0.014	G	Y
	6038	心房 J	45	しなやか	0.014	G	Y
	6041	心房 J	45	硬い	0.016	W	Y

4472	6061	ストレート	45	しなやか	0.014	G	Y
	6032	テーパー	45	しなやか	0.014	G	Y
	6044	テーパー	45	柔らかい	0.013	Y	Y
	6038	心房J	45	しなやか	0.014	G	Y
	6050	心房J	45	柔らかい	0.013	Y	Y
4479	6061	ストレート	45	しなやか	0.014	G	Y
	6064	ストレート	45	硬い	0.016	W	Y
	6032	テーパー	45	しなやか	0.014	G	Y
	6035	テーパー	45	硬い	0.016	W	Y
4456	6062	ストレート	52	しなやか	0.014	G	M
	6065	ストレート	52	硬い	0.016	W	M
	6033	テーパー	52	しなやか	0.014	G	M
	6036	テーパー	52	硬い	0.016	W	M
4458	6048	ストレート	52	柔らかい	0.013	Y	M
	6062	ストレート	52	しなやか	0.014	G	M
	6033	テーパー	52	しなやか	0.014	G	M
	6045	テーパー	52	柔らかい	0.013	Y	M
4470	6062	ストレート	52	しなやか	0.014	G	M
	6065	ストレート	52	硬い	0.016	W	M
	6033	テーパー	52	しなやか	0.014	G	M
	6039	心房J	52	しなやか	0.014	G	M
	6042	心房J	52	硬い	0.016	W	M
4473	6062	ストレート	52	しなやか	0.014	G	M
	6033	テーパー	52	しなやか	0.014	G	M
	6045	テーパー	52	柔らかい	0.013	Y	M
	6039	心房J	52	しなやか	0.014	G	M
	6051	心房J	52	柔らかい	0.013	Y	M
4480	6062	ストレート	52	しなやか	0.014	G	M
	6065	ストレート	52	硬い	0.016	W	M
	6033	テーパー	52	しなやか	0.014	G	M
	6036	テーパー	52	硬い	0.016	W	M
4457	6063	ストレート	58	しなやか	0.014	G	P
	6066	ストレート	58	硬い	0.016	W	P
	6034	テーパー	58	しなやか	0.014	G	P
	6037	テーパー	58	硬い	0.016	W	P
4459	6049	ストレート	58	柔らかい	0.013	Y	P
	6063	ストレート	58	しなやか	0.014	G	P
	6034	テーパー	58	しなやか	0.014	G	P
	6046	テーパー	58	柔らかい	0.013	Y	P
4471	6063	ストレート	58	しなやか	0.014	G	P
	6066	ストレート	58	硬い	0.016	W	P
	6034	テーパー	58	しなやか	0.014	G	P
	6040	心房J	58	しなやか	0.014	G	P
	6043	心房J	58	硬い	0.016	W	P
4474	6063	ストレート	58	しなやか	0.014	G	P
	6034	テーパー	58	しなやか	0.014	G	P
	6046	テーパー	58	柔らかい	0.013	Y	P
	6040	心房J	58	しなやか	0.014	G	P
	6052	心房J	58	柔らかい	0.013	Y	P

＜本書で参照される機器の承認／認証情報(一部)を以下に示す。＞

販売名：リライアンス 4-フロント SG AFx

医療機器承認番号：22500BZX00308000

販売名：リライアンス 4-フロント G AFx

医療機器承認番号：22500BZX00307000

販売名：リライアンス 4-フロント G
販売名：リライアンス 4-フロント SG
販売名：ファイライン II ステロックス EZ
販売名：ファイライン II EZ PU
販売名：ファイライン II PU
販売名：インジェヴィティ
販売名：インジェヴィティ AFx

医療機器承認番号：22900BZX00303000
医療機器承認番号：22900BZX00302000
医療機器承認番号：21200BZY00142000
医療機器承認番号：21200BZY00143000
医療機器承認番号：21200BZY00191000
医療機器承認番号：22700BZX00336000
医療機器承認番号：22700BZX00335000