



Respuestas para hombres

*Para comprender las opciones de
tratamiento para la **incontinencia
urinaria de esfuerzo masculina** y la
disfunción eréctil*

¿Qué es la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina?


La incontinencia es cualquier pérdida involuntaria de orina.¹ La incontinencia urinaria de esfuerzo masculina (IUE) suele deberse a un esfínter dañado o al funcionamiento incorrecto de la vejiga. El esfínter es el músculo circular que controla la salida de la orina contenida en la vejiga. Cuando se daña, el músculo no puede apretar y cerrar la uretra, el tubo que evacua la orina. Esto hace que la orina se escape.

Entre las causas más frecuentes se incluyen:

- Tratamientos del cáncer de próstata (prostatectomía radical o radioterapia)²
- Dolencias como diabetes, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson o accidente cerebrovascular²
- Traumatismo pélvico o intervención quirúrgica³


Las opciones de tratamiento son las siguientes:⁴

- Productos absorbentes
- Dispositivos colectores internos
- Dispositivos externos
- Biorregulación / estimulación eléctrica
- Materiales de relleno (por ejemplo, inyecciones de colágeno)
- Opciones quirúrgicas

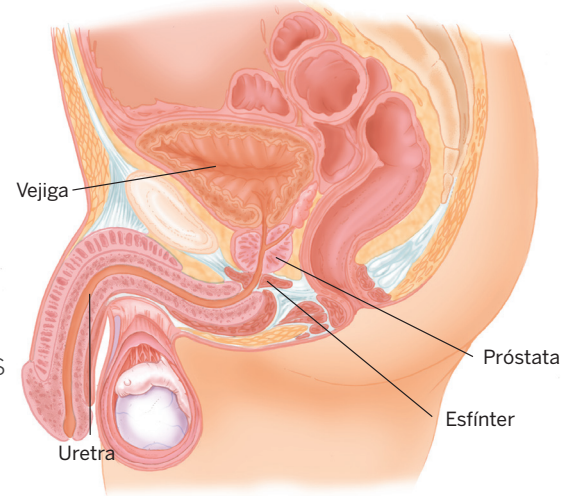

Sistema de sling masculino AdVance™

- Diseñado para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina⁵
- Sostiene la uretra y está diseñada para restaurar el control normal de la vejiga⁶
- Sling de malla sintética colocado en el cuerpo a través de incisiones de reducidas dimensiones⁵
- Casi todos los pacientes recuperan la continencia inmediatamente después de la intervención⁷
- Casi todos los pacientes pueden reanudar las actividades cotidianas normales al cabo de una o dos semanas⁵

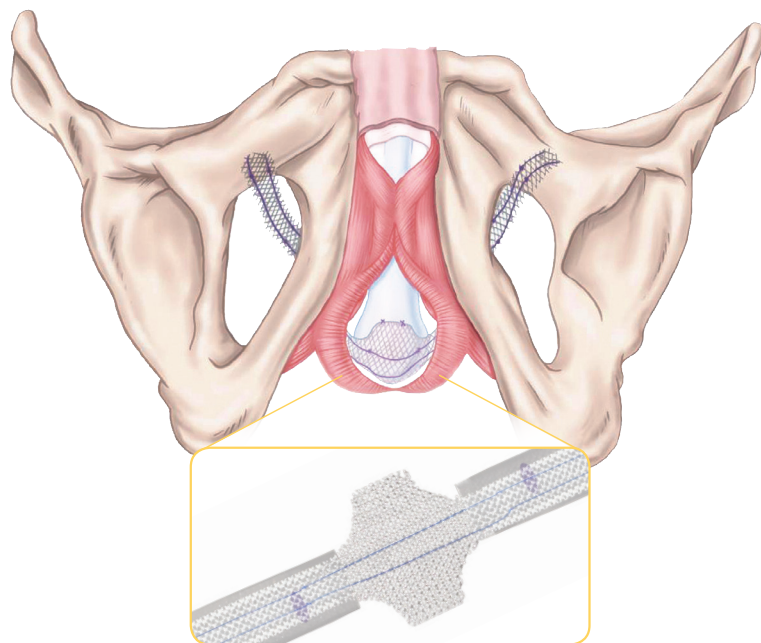

Si desea más información, consulte a su médico y visite MaleContinence.com

Resultados satisfactorios


- Seis estudios clínicos con más de 500 pacientes han comunicado índices de éxito del 54,6 % al 90,6 %⁶
- En un estudio de 42 pacientes, el 94,4 % de ellos recomendaría la intervención a un amigo⁸

El Sistema de sling masculino AdVance no es para hombres con⁵

- Infecciones de las vías urinarias
- Trastornos de coagulación sanguínea
- Sistemas inmunitarios debilitados o cualquier otra afección susceptible de afectar la cicatrización
- Insuficiencia renal y obstrucción de las vías urinarias

Sistema de control urinario AMS 800™

- Tratamiento de referencia para la IUE masculina después de una intervención quirúrgica del cáncer de próstata⁴
- Diseñado para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina después de una intervención quirúrgica en la próstata⁹
- Integrado totalmente en el cuerpo
- Permite un control urinario discreto
- Diseñado para restaurar el proceso natural de control de la orina imitando un esfínter normal, manteniendo cerrada la uretra hasta que desee para orinar⁹

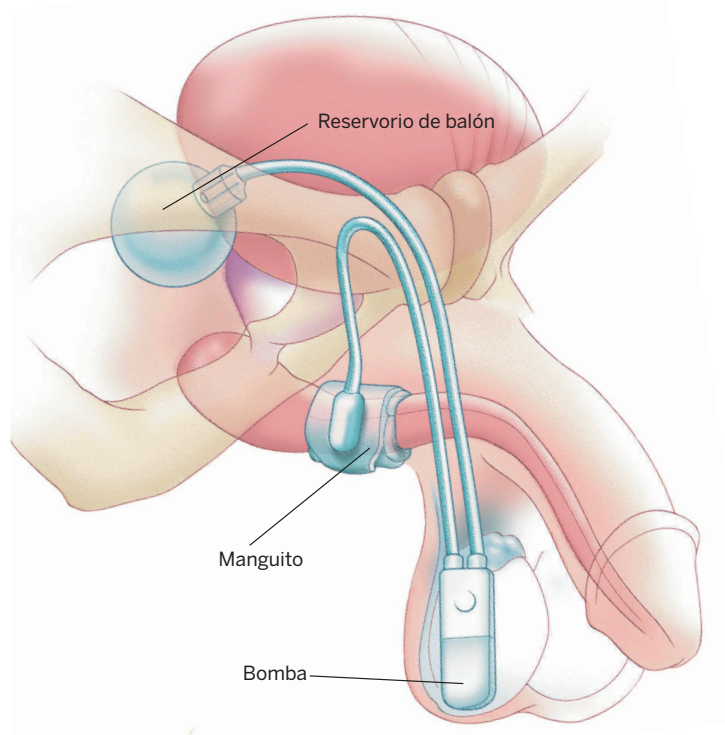

Si desea más información, consulte a su médico y visite MaleContinence.com

Resultados satisfactorios

- En un estudio con 50 pacientes, se documentó un alto nivel de satisfacción de los pacientes:¹⁰
 - El 90 % de los pacientes estaban satisfechos
 - El 96 % recomendaría la implantación del Sistema de control urinario AMS 800 a un amigo
 - El 92 % volvería a colocarse el Sistema de control urinario AMS 800
- Estudios clínicos publicados indican que el 59 %-90 % utilizaba 0-1 compresas/día después de la intervención¹¹

El Sistema de control urinario AMS 800 no es para hombres con⁹

- Una obstrucción irreversible de las vías urinarias inferiores
- Disfunción vesical permanente
- Alergia o sensibilidad conocida a los antibióticos contenidos en el dispositivo (rifampicina, minociclina u otras tetraciclinas)



Ventajas y efectos secundarios del Sistema de sling masculino AdVance™ y del Sistema de control urinario AMS 800™

Sistema de sling masculino AdVance

Ventajas:

- Intervenciones mínimamente invasivas¹²
- El paciente no necesita hacer nada para accionar el dispositivo, porque funciona automáticamente⁷
- El sling masculino AdVance puede ayudar a restaurar la calidad de vida¹³

Los siguientes son algunos de sus efectos secundarios:⁵

- Dolor e inflamación
- Pérdida de sangre e irritación en el lugar de la herida
- Daño uretral o tisular
- Retención urinaria⁶

Sistema de control urinario AMS 800

Ventajas:

- Este sistema proporciona eficazmente a la mayoría de los hombres la capacidad de lograr la continencia¹⁴
- El Sistema de control urinario AMS 800 puede ayudar a restaurar la calidad de vida¹⁵

Los siguientes son algunos de sus efectos secundarios:⁹

- Dolor / molestias e inflamación
- Pérdida de sangre e irritación en el lugar de la herida
- Daño en la uretra y/o en el tejido circundante
- Retrasos en la cicatrización
- Reaparición de las pérdidas de orina

Información importante sobre seguridad para el paciente

Sistema de sling masculino AdVance™

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas del Sistema de sling masculino AdVance™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, advertencias e información importante de seguridad. La siguiente información es un resumen de la información importante de seguridad y de los riesgos asociados con el Sistema de sling masculino AdVance. Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.

El Sistema de sling masculino AMS AdVance está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en varones. Estos dispositivos no están concebidos para pacientes con infección de las vías urinarias; tendencia a sangrar con facilidad; trastornos de coagulación sanguínea, incapacidad para combatir las infecciones o cualquier otra enfermedad que pueda interferir con la cicatrización, disminución de la función renal; o bloqueo relativo de los riñones. Se recomienda un período de tratamiento no invasivo de 6 meses (p. ej., modificación de rutinas, ejercicios con la vejiga, biorretroalimentación, estimulación magnética extracorpórea del suelo pélvico o terapia con medicamentos) antes de considerar un implante de sling en varones con incontinencia urinaria de esfuerzo. Póngase en contacto con el médico si nota alguno de los siguientes síntomas: fiebre, hinchazón cerca de la incisión, enrojecimiento o erupción cerca de la incisión, o cualquier otro signo de infección, dolor o malestar prolongado; hematomas inusuales cerca de la incisión; si la zona de la intervención no cicatriza; o cualquier problema de micción. Antes de la colocación del sling masculino AdVance debe recibir orientación realista sobre las expectativas tras el implante. Su médico es la mejor fuente para obtener más información sobre el sling masculino AdVance. Su médico es la persona más familiarizada con su situación médica y puede ayudarle a obtener los mejores resultados posibles. Póngase en contacto con su médico si tiene preguntas o desea recibir información adicional. El dispositivo solo se puede utilizar con prescripción facultativa.

Sistema de control urinario AMS 800™

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas del Sistema de control urinario AMS 800™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, advertencias e información importante de seguridad. La siguiente información es un resumen de la información importante de seguridad y de los riesgos asociados con el Sistema de control urinario AMS 800. Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.

El Sistema de control urinario AMS 800 está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina tras un cáncer de próstata. Este dispositivo no está concebido para pacientes que, a juicio de su médico, sean candidatos poco idóneos para una intervención quirúrgica, que presenten bloqueo permanente de las vías urinarias inferiores o que presenten contracciones incontrolables de la vejiga. Algunos dispositivos de control urinario AMS 800 pueden contener un antibiótico (InhibiZone™). Es posible que el dispositivo no resulte adecuado para los pacientes que sean alérgicos a los antibióticos contenidos en el dispositivo (rifampicina, minociclina o cualquier otra tetraciclina). Hable con su médico si tiene o cree que tiene alergia a uno de los antibióticos impregnados en el dispositivo. Los pacientes con infecciones de las vías urinarias, diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden sufrir un mayor riesgo de infección. Póngase en contacto con su médico si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, hinchazón cerca de la incisión, enrojecimiento o hinchazón alrededor de la incisión, o cualquier otro signo de infección; si la zona de la intervención no cicatriza; dolor o malestar prolongado; si el dispositivo puede ser verse o sentirse fuera de la piel; reaparición de la pérdida de orina; o si el dispositivo no funciona correctamente. Su médico es la mejor fuente para obtener más información sobre el Sistema de control urinario AMS 800. Su médico es la persona más familiarizada con su situación médica y puede ayudarle a obtener los mejores resultados posibles con el Sistema de control urinario AMS 800. Póngase en contacto con su médico si tiene preguntas o desea recibir información adicional. El dispositivo solo se puede utilizar con prescripción facultativa.



¿Qué es la disfunción eréctil (DE)?

Es la incapacidad persistente para alcanzar o mantener una erección con suficiente rigidez que permita una relación sexual.¹⁶ No existe una única causa para la DE. Existen razones físicas y psicológicas reales que motivan la DE.

*Entre las causas más frecuentes se incluyen:*¹⁶

- Diabetes
- Problemas cardiovasculares
- Traumatismo o cirugía (próstata, vejiga, colon, rectal)
- Lesiones de la médula espinal
- Medicamentos
- Problemas hormonales
- Opciones de estilo de vida (tabaco, alcohol excesivo, obesidad, falta de ejercicio)

*Las opciones de tratamiento son las siguientes:*¹⁷


- Medicamentos orales (Viagra®, Levitra®, Cialis®)
- Inyecciones
- Implantes de pene
- Dispositivos de erección por vacío
- Supositorios intrauretrales

Viagra es una marca comercial registrada de Pfizer Inc. Levitra es una marca comercial registrada de Bayer Pharmaceuticals, Inc. Cialis es una marca comercial registrada de Eli Lilly and Company Corporation.

Implante de pene inflable de tres piezas

Prótesis de pene inflable AMS 700™ con MS Pump™¹⁸

- Par de cilindros implantado en el pene
- Bomba implantada en el escroto
- Reservorio implantado en la parte inferior del abdomen
- Apretar y soltar la bomba repetidamente para inflar
- Pulsar el botón de la bomba para desinflar

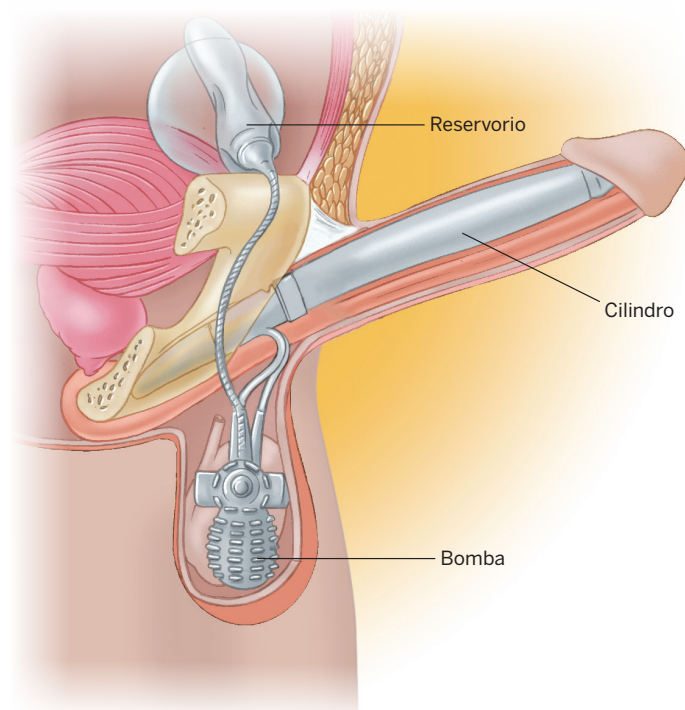

Si desea más información, consulte a su médico y visite EDCure.org

Acerca del dispositivo

- Integrado totalmente en el cuerpo¹⁸
- Diseñado para producirse como una erección natural¹⁹
- El dispositivo se infla para aportar rigidez y se desinfla para ocultarlo¹⁸
- Se expande a lo ancho (todos los cilindros AMS 700) y a lo largo (AMS 700 LGX™)
- Requiere cierto grado de destreza manual¹⁸
- La erección con este dispositivo puede ser diferente de la erección natural original¹⁸
- Pérdida de la capacidad natural de tener una erección¹⁸

Resultados satisfactorios


En un estudio efectuado con 200 pacientes y 120 parejas de los mismos, tanto los pacientes como sus parejas consideraron que el implante de pene de tres piezas AMS fue satisfactorio:²⁰

- Un 92 % de los pacientes expresan su satisfacción
- Un 96 % de las parejas expresan su satisfacción

Implante de pene inflable de dos piezas

Prótesis de pene AMS Ambicor™²¹

- Par de cilindros llenos de líquido implantado en el pene
- Bomba implantada en el escroto
- Apretar y soltar la bomba repetidamente para inflar
- Doblar el pene hacia abajo para desinflar

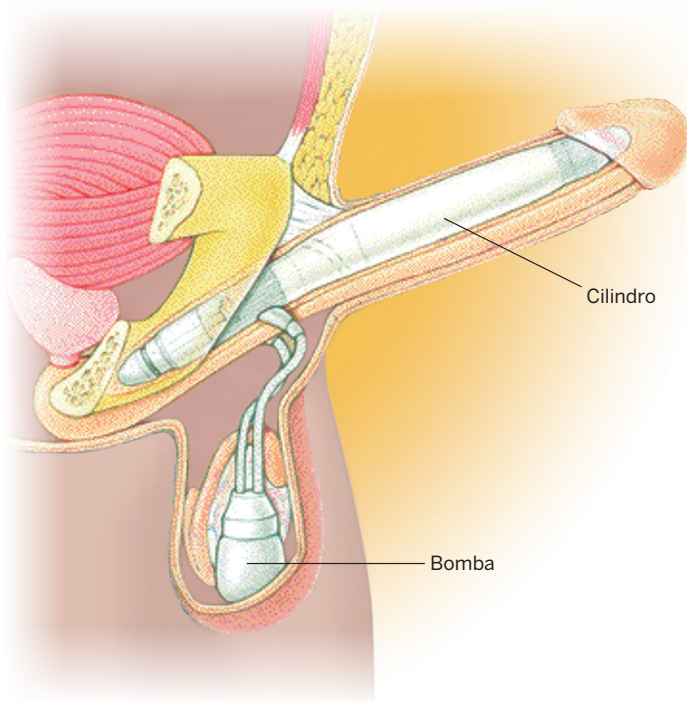

Si desea más información, consulte a su médico y visite EDCure.org

Acerca del dispositivo

- Integrado totalmente en el cuerpo²¹
- Diseñado para facilitar su uso
- Desinflado en un solo paso²¹
- El dispositivo se infla para aportar rigidez y se desinfla para ocultarlo²¹
- Requiere cierto grado de destreza manual²¹
- Los cilindros permanecen parcialmente llenos de líquido cuando están desinflados
- La erección con este dispositivo puede ser diferente de la erección natural original²¹
- Pérdida de la capacidad natural de tener una erección²¹

Resultados satisfactorios²²


En un estudio efectuado con 112 pacientes y 91 parejas de los mismos, el 96 % de los pacientes y el 91 % de sus parejas consideraron que el implante de pene de dos piezas AMS fue muy satisfactorio.

- Un 96 % volvería a someterse a la intervención
- Un 93 % recomendaría el dispositivo a otros pacientes
- El 90 % de las parejas se lo recomendaría a otras parejas

Implante de pene plegable de una pieza

Prótesis ocultable AMS Spectra™ 23

- Par de cilindros implantado en el pene
- Siempre rígida, pero lo suficientemente flexible como para colocarla hacia arriba o hacia abajo
- Colocar el pene hacia arriba para el coito o doblarlo hacia abajo cuando no se desee una erección

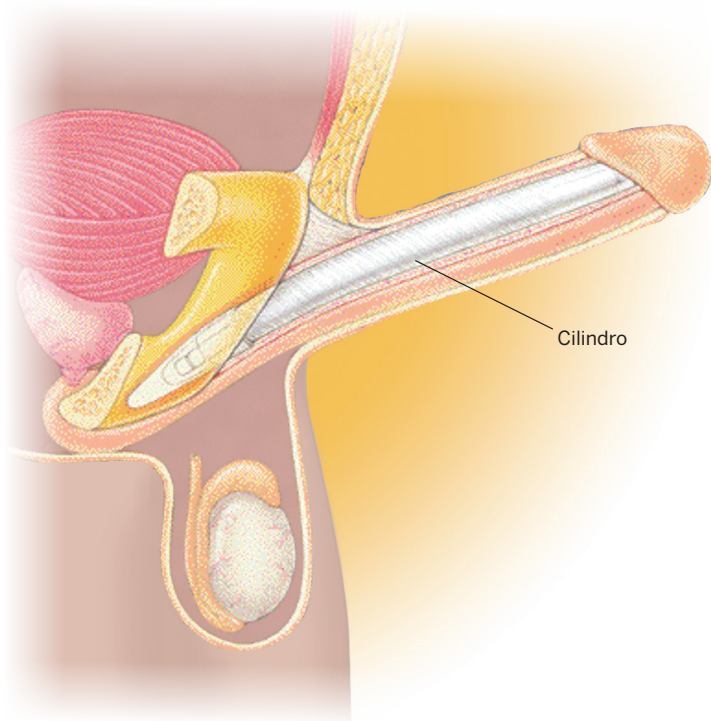

Acerca del dispositivo²³

- Integrado totalmente en el cuerpo
- Diseñado para un uso sencillo para usted y su pareja
- Opción para hombres con destreza limitada
- Mantiene siempre la firmeza, aunque no se use
- La erección con este dispositivo puede ser diferente de la erección natural original
- Pérdida de la capacidad natural de tener una erección

Si desea más información, consulte a su médico y visite EDCure.org



Ventajas y efectos secundarios de un implante de pene

Ventajas

- Alto nivel de satisfacción tanto para los pacientes como para sus parejas^{20,22}
- Aporta la capacidad para obtener una erección cuando usted quiera¹⁹
- Espontaneidad: puede mantener relaciones sexuales cuando le apetezca²²
- Tras activarlo, puede mantener una erección durante el tiempo que desee¹⁹
- Diseñado para ofrecer una sensación natural durante el coito¹⁹
- Normalmente no dificulta la eyaculación ni en el orgasmo¹⁹
- Puede constituir una solución a largo plazo para la DE¹⁹

Efectos secundarios¹⁸

- Elimina las erecciones naturales o espontáneas y no es compatible con otras opciones de tratamiento quirúrgico
- En caso de infección, cabe la posibilidad de que haya que retirar el implante
- Puede hacer que el pene se acorte, se curve o que aparezcan cicatrices en él
- Dolor (por lo general asociado con el proceso de curación)
- El implante puede sufrir fallos mecánicos
- Posible aparición de sensibilidad a los materiales del dispositivo

Imágenes de paciente

Prótesis de pene AMS 700™

Implante de pene inflable de tres piezas



Deflated



Inflated

Inflado de la prótesis

Apriete la perilla de la bomba rápida y firmemente, y suéltela para activarla. Continúe apretando y soltando la perilla de la bomba alternativamente hasta que los cilindros se llenen de líquido y alcance la erección. La erección completa requiere apretar la perilla de la bomba entre un mínimo de 10 veces y un máximo de 25.

Desinflado de la prótesis

Localice el botón de desinflado que sobresale del bloque de la bomba. Apriete el botón de desinflado durante unos 4 segundos y luego suéltelo. Cuando los cilindros se hayan desinflado, puede apretarse el pene para aumentar su flacidez.

Información importante sobre seguridad para el paciente

Prótesis de pene inflable de la serie AMS 700™

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas de la Prótesis de pene inflable AMS 700™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, advertencias e información importante de seguridad. La siguiente información es un resumen de la información importante de seguridad y de los riesgos asociados con la Prótesis de pene inflable AMS 700. Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.

La Prótesis de pene inflable AMS 700 está indicada para tratar la disfunción eréctil masculina (impotencia). Este dispositivo no está concebido para los pacientes que sufran una infección en la zona de la intervención quirúrgica. Algunas Prótesis de pene inflable AMS 700 pueden contener un antibiótico (InhibiZone™). Es posible que el dispositivo no resulte adecuado para los pacientes que sean alérgicos a los antibióticos contenidos en el dispositivo (rifampicina, minociclina o cualquier otra tetraciclina). Hable con su médico si tiene o cree que tiene alergia a uno de los antibióticos impregnados en el dispositivo. El implante de una prótesis de pene puede mermar o eliminar cualquier capacidad restante de tener una erección, además de imposibilitar la aplicación de otras opciones de tratamiento. Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden sufrir un mayor riesgo de infección. El implante puede provocar el acortamiento, la curvatura o la cicatrización del pene. Póngase en contacto con el médico si nota alguno de los siguientes síntomas: fiebre, hinchazón cerca de la incisión, el escroto o el pene, enrojecimiento o erupción cerca de la incisión, el escroto o el pene, o cualquier otro signo de infección; dolor o malestar prolongado; hematomas inusuales cerca de la incisión, el escroto o el pene; si la zona de la intervención no cicatriza; si el dispositivo puede ser verse o sentirse fuera de la piel; problemas de micción; si el dispositivo no funciona correctamente; desinflado involuntario del dispositivo; o insatisfacción con el dispositivo. Su médico es la mejor fuente para obtener más información sobre la Prótesis de pene inflable AMS 700. Su médico es la persona más familiarizada con su situación médica y puede ayudarle a obtener los mejores resultados posibles con la prótesis de pene. Si desea información adicional, solicite a su médico una copia del Manual del paciente de la Prótesis de pene inflable AMS 700. El dispositivo solo se puede utilizar con prescripción facultativa.

Prótesis de pene inflable AMS Ambicor™

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas de la Prótesis de pene inflable AMS Ambicor™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, advertencias e información importante de seguridad. La siguiente información es un resumen de la información importante de seguridad y de los riesgos asociados con la Prótesis de pene inflable AMS Ambicor. Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.

La Prótesis de pene AMS Ambicor está indicada para tratar la disfunción eréctil masculina (impotencia). Este dispositivo no está concebido para los pacientes que sufran una infección en la zona de la intervención quirúrgica. El implante de una prótesis de pene puede mermar o eliminar cualquier capacidad natural restante de tener una erección, además de imposibilitar la aplicación de otras opciones de tratamiento. Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden sufrir un mayor riesgo de infección. El implante puede provocar el acortamiento, la curvatura o la cicatrización del pene. Póngase en contacto con el médico si nota alguno de los siguientes síntomas: fiebre, hinchazón cerca de la incisión, el escroto o el pene, enrojecimiento o erupción cerca de la incisión, el escroto o el pene, o cualquier otro signo de infección; dolor o malestar prolongado; hematomas inusuales cerca de la incisión, el escroto o el pene; si la zona de la intervención no cicatriza; si el dispositivo puede ser verse o sentirse fuera de la piel; problemas de micción; si el dispositivo no funciona correctamente; si el dispositivo se desinfla involuntariamente; o si no está satisfecho con el dispositivo. Su médico es la mejor fuente para obtener más información sobre la Prótesis de pene inflable AMS Ambicor. Su médico es la persona más familiarizada con su situación médica y puede ayudarle a obtener los mejores resultados posibles con la prótesis de pene. Si desea información adicional, solicite a su médico una copia del Manual del paciente de la Prótesis de pene inflable AMS Ambicor. El dispositivo solo se puede utilizar con prescripción facultativa.

Continuación

Prótesis de pene ocultable Spectra™

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas de la Prótesis de pene ocultable Spectra™. Consulte a su médico para obtener una lista completa de los riesgos, advertencias e información importante de seguridad. La siguiente información es un resumen de la información importante de seguridad y de los riesgos asociados con la Prótesis de pene ocultable AMS Spectra. Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.

La Prótesis de pene ocultable AMS Spectra está indicada para tratar la disfunción eréctil masculina (impotencia). Este dispositivo no está concebido para los pacientes que sufran una infección en la zona de la intervención quirúrgica ni para los pacientes que precisen una nueva intervención endoscópica. El implante de una prótesis de pene puede mermar o eliminar cualquier capacidad natural restante de tener una erección, además de imposibilitar la aplicación de otras opciones de tratamiento. Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden sufrir un mayor riesgo de infección. El implante puede provocar el acortamiento, la curvatura o la cicatrización del pene. Póngase en contacto con el médico si nota alguno de los siguientes síntomas: fiebre, hinchazón cerca de la incisión o el pene, enrojecimiento o erupción cerca de la incisión o el pene, o cualquier otro signo de infección; dolor o malestar prolongado; hematomas inusuales cerca de la incisión o el pene; si la zona de la intervención no cicatriza; si no puede orinar; si el dispositivo puede ser verse o sentirse fuera de la piel; si el dispositivo se mueve o se desplaza; si nota abultamientos del dispositivo en el pene o si el dispositivo sobresale del mismo; si el dispositivo no funciona correctamente; o si no está satisfecho con el dispositivo. Su médico es la mejor fuente para obtener más información sobre la Prótesis de pene ocultable AMS Spectra. Su médico es la persona más familiarizada con su situación médica y puede ayudarle a obtener los mejores resultados posibles con la prótesis de pene. Si desea información adicional, solicite a su médico una copia del Manual del paciente de la Prótesis de pene ocultable AMS Spectra. El dispositivo solo se puede utilizar con prescripción facultativa.

Descubra sus opciones de tratamiento



1. Chapelle C, Milisom I. Urinary incontinence and pelvic prolapse epidemiology and pathophysiology. In: McDougal WS, Wein JW, Kovussi AC, et al. Campbell-Walsh Urology. 10th ed. Philadelphia: WB Saunders Elsevier; 2012:1871-1895.

2. Urinary incontinence in men. National Institute of Health (NIH) Web Site: <http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/pdf/urinen.pdf>. Accessed July 9, 2012.

3. Sandhu J. Treatment options for male stress urinary incontinence. Nat Rev Urol. 2010;7:223.

4. Moore K, Lucas M. Management of male urinary incontinence. Indian J Urol. 2010;26(2):236-244.

5. Advance™ Male Sling System Instructions for Use. American Medical Systems, Inc. 2010.

6. DeRidder D, Webster G. Clinical Overview of the Advance® Male Sling in Postprostatectomy Incontinence. Eur Urol Supplements. 2011;10:401-406.

7. Weik B, Herschorn S. The Male Sling for post-prostatectomy urinary incontinence: a review of contemporary sling designs and outcomes. BJU Int. 2011;109:328-344.

8. Suskind AM, Bernstein B, Murphy-Setzko M. Patient-perceived outcomes of the Advance sling up to 40 months post procedures. Neurourol Urodyn. 2011;30(7):1267-1270.

9. AMS 800™ Urinary Control System Instructions for Use. American Medical Systems, Inc. 2011.

10. Montague DK. Artificial urinary sphincter: long-term results and patient satisfaction. Adv Urol. 2012;835290. doi:10.1155/2012/835290.

11. Kahlon B, Baverstock RJ, Carlson K. Quality of life and patient satisfaction after artificial urinary sphincter. Can Urol Assoc J. 2011;5(4):268-272.

12. Mayer M, May F, et al. Complications of the Advance Transobtrator Male Sling in the treatment of male stress urinary incontinence. Urology. 2010;75:1494-1498.

13. Rehder F, Haab F, Cornu JN, Gozzi C, Bauer RM. Treatment of post-prostatectomy male urinary incontinence with the transobtrator retroluminal reposiitioning sling suspension: 3-year follow up. Eur Urol. 2012;62(1):140-145.

14. Trost T, Elliott D. Male stress urinary incontinence: a review of surgical treatment options and outcomes. Adv Urol. 2012;2012:1-13.

15. Haab F, Trockman B, Zimmerman P, Leach G. Quality of life and continence assessment of the artificial urinary sphincter in men with a minimum of 3.5 years of follow up. J Urol. 1997;158(2):435-443.

16. Erectile dysfunction. http://kidney.niddk.nih.gov/KUDiseases/pubs/ED/ErectileDysfunction_508.pdf. National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse Web site. Downloaded May, 2013.

17. Erectile dysfunction (ED). www.aauanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf. American Urological Association Web site. Downloaded January 21, 2013.

18. AMS 700™ Inflatable Penile Prosthesis Patient Manual. Information and Instructions for Patients Considering an AMS 700 Inflatable Penile Prosthesis. American Medical Systems. 2012.

19. AMS 700™ Penile Prosthesis Product Line Instructions for Use. American Medical Systems. 2012.

20. Montorsi F, Rigatti F, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institution study in 200 consecutive patients. Eur Urol. 2000;37:50-55.

21. AMS Ambicor™ Inflatable Penile Prosthesis Patient Manual. Information and Instructions for Patients Considering an Ambicor Inflatable Penile Prosthesis. American Medical Systems. 2009.

22. Levine L, Estrada C, Morgentaler A. Mechanical Reliability and Safety of, and Patient Satisfaction with the Ambicor Inflatable Penile Prosthesis: Results of a 2 Center Study. J Urol. 2001;166:932-937.

23. AMS Spectra™ Concealable Penile Prosthesis Patient Manual. Information and Instructions for Patients Considering a Spectra Concealable Penile Prosthesis. American Medical Systems. 2012.



Solamente Rx

Advance™ AMS 800™ AMS 700™ Ambicor™ Spectra™ LGX™ MS Pump™ y InhibiZone™ son marcas comerciales de American Medical Systems, Inc. © 2013 American Medical Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Minnetonka, MN 55343 AMSUS/MH-00492(1)/a/Noviembre 2013 www.americanmedicalsystems.com 1-800-328-3881 Solo para uso en EE.UU.