



Consulte con un proveedor de infusión arterial hepática (HAI) para conocer los requisitos y la elegibilidad para la terapia HAI

Escaneos para descartar la propagación del cáncer y confirmar la elegibilidad para el procedimiento HAI

La quimioterapia sistémica se interrumpe de 3 a 4 semanas antes de la cirugía



Cirugía para implantar la bomba HAI y llenado de la bomba



Estadía hospitalaria después de la cirugía



Primera recarga de la bomba HAI 2 semanas después de la cirugía



Alta hospitalaria

Escaneo del flujo de la bomba posoperatorio



Regrese cada 2 semanas para hacerse pruebas de laboratorio y rellenar la bomba, alternando entre floxuridina y solución salina heparinizada

Si no puede acudir a la cita de recarga requerida, llame a su proveedor de HAI para asegurarse de que la bomba no se vacíe

La quimioterapia sistémica se reinicia de 4 a 6 semanas después de la cirugía



Atención de seguimiento continuo según lo determine su proveedor de HAI para controlar la respuesta al tratamiento



Durante la terapia HAI, informe a su proveedor de HAI sobre los viajes y las actividades que planea realizar

El proveedor de HAI determinará cuándo interrumpir el tratamiento con HAI y si se debe mantener la bomba con recargas periódicas



¿Necesita apoyo durante el proceso?

Escanee para conectarse con un especialista en educación de HAI



INTERA 3000™ Bomba de infusión hepática intraarterial | RECORRIDO DEL PACIENTE

**Boston
Scientific**
Avanzando la ciencia
en pro de la vida™

Bomba de infusión hepática intraarterial Intera 3000

Información importante de seguridad

La bomba de infusión hepática intraarterial Intera 3000 se usa para administrar medicamentos, como la quimioterapia, a los vasos sanguíneos del hígado.

Como con todos los procedimientos médicos, existen riesgos asociados con la implantación de la bomba en el abdomen y su uso para administrar medicamentos. Los riesgos asociados con la implantación y el uso de la bomba incluyen, entre otros, hemorragias, coágulos de sangre, obstrucción del dispositivo, daño a los vasos sanguíneos, acumulación de líquido o sangre alrededor del dispositivo debajo de la piel, infección, movimiento o desplazamiento de la bomba o el catéter, daño en la bomba y fugas o administración incorrecta de los medicamentos.

Se requieren cuidados especiales después de implantar la bomba Intera 3000, lo que incluye, entre otros, evitar la actividad física brusca, evitar el buceo en aguas profundas o el submarinismo, evitar saunas, evitar períodos prolongados en jacuzzis, evitar la exposición directa al sol y el uso de almohadillas térmicas o bolsas de agua caliente sobre la zona del abdomen donde se encuentra la bomba. Es posible que necesite cuidados adicionales para viajar en avión, trasladarse o visitar un lugar de gran altitud, o si tiene fiebre.

La bomba Intera 3000 es "MRI Conditional", lo que significa que se deben cumplir ciertas condiciones para realizar una resonancia magnética de forma segura tras la implantación de la bomba.

Asegúrese de hablar con su médico para entender completamente todos los riesgos y beneficios asociados con el uso del dispositivo. PI-2257307-AA