

LEAD HANDLEIDING VOOR DE ARTS

## **RELIANCE 4-FRONT™**

Stimulatie-/detectie- en defibrillatie-lead

Integrated bipolar DF4-LLHH- en DF4-LLHO-connectors

Fixatie d.m.v. tines

**REF**


0654, 0682, 0683 Single shock coil met Gore-coating; 0655, 0685, 0686 Dual shock coils met Gore-coating; 0636, 0665 Dual shock coils met siliconenvulling

ated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsolète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívať.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.


# Inhoudstabel

<b>INFORMATIE VOOR GEBRUIK .....</b>	<b>1</b>
Apparaatbeschrijving.....	1
Verwante informatie .....	2
Indicaties en gebruik.....	3
Contra-indicaties .....	3
Waarschuwingen.....	3
Voorzorgsmaatregelen.....	5
Mogelijk ongewenste effecten.....	10
<b>PRE-IMPLANTATIE-INFORMATIE .....</b>	<b>11</b>
Vorbereiding van de implantatie.....	12
Verpakte onderdelen.....	12
Toebehoren.....	12
Venehaakje.....	12
Radiopake fixatiemanchet.....	13
Stiletten.....	13
Leaddop.....	13
EZ-4 connectorinstrument.....	14
<b>IMPLANTATIE .....</b>	<b>14</b>
Het connectorinstrument op de lead bevestigen.....	14
Het inbrengen van het stilet.....	15
Inbrengen van de lead.....	16
De lead plaatsen in het rechter ventrikel.....	18
Controleren van de leadstabiliteit.....	19
Het functioneren van de lead evalueren.....	20
Het aansluiten op een pulsgenerator.....	22
Elektrische prestatie.....	23
Conversietest.....	23
Vasthechten van de lead.....	24
De lead tunnelen.....	26
<b>NA DE IMPLANTATIE .....</b>	<b>28</b>
Evaluatie na de implantatie.....	28
Explantatie.....	28
<b>SPECIFICATIES .....</b>	<b>29</b>
Specificaties (Nominaal).....	29
Lead-introducer.....	31
Symbolen op verpakking.....	31

DUAL COIL modellen, DF4-LLHH-connector, fixatie met tines

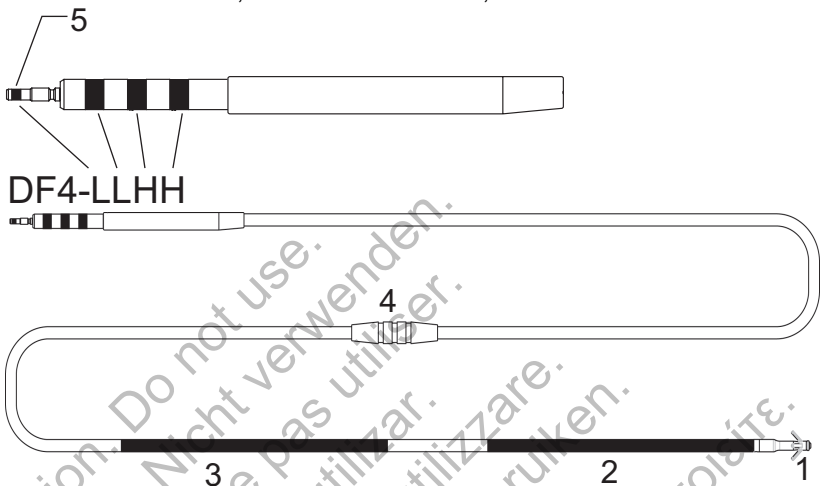

SINGLE COIL modellen, DF4-LLHO-connector, fixatie met tines

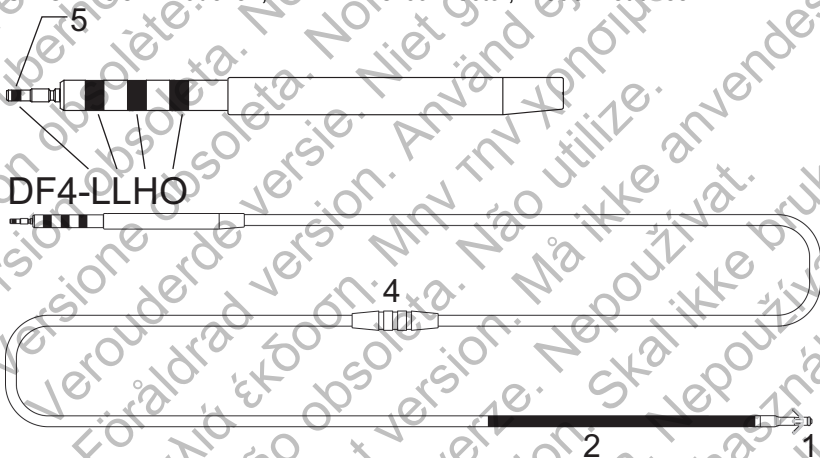

1. Distale steroïde-eluerende stimulatie-/detectie-elektrode (kathode)
2. Proximale stimulatie-/detectie-coil (anode), distale defibrillatie-coil
3. Proximale defibrillatie-coil (enkel dual-coil modellen)
4. Fixatiemanchet
5. Insertie-indicator voor connectorpin

---

## INFORMATIE VOOR GEBRUIK

### Apparaatbeschrijving

De Boston Scientific Corporation RELIANCE 4-FRONT defibrillatie-lead is een 7,3 F (8F introducer), transveneuze, steroïde-afgevendende, geïntegreerde bipolaire, DF-4 compatibele lead bedoeld voor permanente detectie, stimulatie en defibrillatie bij gebruik met een compatibele Implanterbare Cardioverter Defibrillator (ICD) of Cardiale Resynchronisatie Therapie Defibrillator (CRT-D). De RELIANCE 4-FRONT leadlijn biedt actieve en passieve fixatiemodellen, single en dual coil-modellen en defibrillatie-coil modellen met siliconenvulling of GORE™-coating.

Deze leadlijn beschikt over de volgende eigenschappen:

- Endocardiale cardioversie/defibrillatie en stimulatie-/detectielead – bedoeld voor chronische afgifte van cardioversie-/defibrillatieshocks, en bipolaire stimulatie- en detectiemogelijkheden; geïmplanteerd in de vena cava superior, rechter atrium en rechter ventrikel.
  - 4-FRONT geïntegreerde bipolaire connector – bedoeld voor aansluiting op een apparaat met een DF4-LLHH-poort, waarop een DF4-LLHH- of DF4-LLHO-lead kan worden aangesloten. Het is geconfigureerd met gealigneerde contacten en voorzien van het opschrift DF4-LLHH of DF4-LLHO, hieronder beschreven:
    - DF4: geeft aan dat de lead hoogvoltage contacten bevat<sup>1</sup>
    - L: geeft een verbinding op een stimulatie-/detectie-elektrode met laag voltage aan; eerste L (connectorpin) — distale stimulatie-/detectie-elektrode; tweede L (proximaal ringcontact) — proximale stimulatie-/detectie-elektrode
    - H: geeft een verbinding op een defibrillatie-elektrode met hoog voltage aan; eerste H (middelste ringcontact) — distale coil-elektrode; tweede H (distaal ringcontact) — proximale coil-elektrode (dual-coil modellen)
    - O: geeft een inactief distaal ringcontact aan (single-coil modellen)
- OPMERKING:** *RELIANCE 4-FRONT leads met het DF4-LLHH/LLHO-label zijn equivalent aan en compatibel met een apparaat met een GDT-LLHH- of een DF4-LLHH-poort.*
- Tip-elektrode – fungeert als de kathode voor intracardiale rechtsventriculaire stimulatie/detectie en gebruikt een IROX-gecoate elektrode die de stimulatieprestaties verbetert. Lagere en consequentere stimulatiegrenzen kunnen de levensduur van de pulsgenerator verhogen.
  - Coil-elektrodes – de distale coil-elektrode en de proximale coil-elektrode (voor dual-coil modellen) fungeert als anode en kathode tijdens cardioversie-/defibrillatie-shocks. De distale coil dient eveneens als anode voor stimulatie en detectie.

1. DF4 verwijst naar de internationale norm ISO 27186:2010.

- GORE™ met geëxpandeerd polytetrafluorethyleen (ePTFE) gecoate coils<sup>2</sup> – de ePTFE-coating verhindert het ingroeien van weefsel rond en tussen de coildraden.
- IROX-gecoate tip-elektrode – de tip-elektrode is omhuld met IROX (iridiumoxide) om de microscopische oppervlakte te vergroten.
- Steroïde-eluerend – bij blootstelling aan lichaamsvloeistoffen worden de steroïden uit de lead afgegeven. Steroïden onderdrukken de ontstekingsreactie bij de distale elektrode. De steroïden onderdrukken de ontstekingsreactie waarvan wordt gedacht dat ze verantwoordelijk is voor drempelstijgingen die gewoonlijk verbonden zijn aan geïmplanteerde stimulatie-elektrodes. Lagere drempelwaarden zijn gewenst omdat daarmee de veiligheidsmarges bij stimulatie toenemen en er minder stimulatie-energie nodig is, waardoor de levensduur van de pulsgenerator mogelijk wordt verlengd. De nominale dosis en structuur van de steroïden staan vermeld in de specificaties (Tabel 5 op pagina 29).
- Radiopake fixatiemanchet – de radiopake fixatiemanchet is zichtbaar onder fluoroscopie en wordt gebruikt om de lead aan de veneuze ingang te bevestigen, immobiliseren en te beschermen nadat de lead werd geplaatst. De vensterfunctie werd ontworpen ter assistentie van de compressie van de fixatiemanchet op de lead tijdens het hechten.
- Tines – tines uit siliconenrubber proximaal van de distale stimulatie-elektrode zorgen voor fixatie aan de wand van het hart.
- Leadbody – de isodiametrische leadbody bevat één geleider voor stimulatie/detectie. Dual-coil modellen hebben twee geleiders voor defibrillatie en single-coil modellen hebben één geleider voor defibrillatie. De geleiders van de lead zijn gecoat en binnen de siliconenrubber leadbody in afzonderlijke lumina geïsoleerd. Een tweede laag siliconen bedekt de leadbody waardoor gezorgd wordt voor extra isolatie en een uniforme diameter van de leadbody. Het proximale gedeelte van de leadbody wordt bedekt met een laag polyurethaan om bijkomende bescherming tegen schuren in de implantatiepocket te bieden. De fixatiemanchet en de aansluitinghuls zijn vervaardigd uit gegoten siliconenrubber.
- Gladde coating – de lead heeft een eigen coating die het oppervlak gladder maakt. Dit vermindert zowel de statische als de dynamische wrijvingscoëfficiënt, waardoor het oppervlak van de lead aanvoelt en kan worden gehanteerd als polyurethaan met behoud van de betrouwbaarheid van siliconen.
- Afgiftemethode met stilet – het ontwerp bestaat uit een geleiderscoil met open lumen waardoor de lead kan worden geplaatst met behulp van een stilet. Raadpleeg de informatie over het stilet ("Stiletten" op pagina 13).

## Verwante informatie

De instructies in de lead-handleiding moeten worden gebruikt in combinatie met ander bronmateriaal, waaronder de Handleiding voor de arts van

2. GORE is een handelsmerk van W.L. Gore and Associates.

de betreffende pulsgenerator en de gebruiksaanwijzing van eventuele implantatie-accessoires of -gereedschappen.

## Indicaties en gebruik

Deze Boston Scientific lead is geïndiceerd voor gebruik als volgt:

- Stimulatie, frequentiedetectie, en de afgifte van cardioversie- en defibrillatieshocks bij gebruik in combinatie met een compatibele pulsgenerator

## Contra-indicaties

Deze Boston Scientific lead is gecontra-indiceerd bij de volgende patiënten:

- Patiënten met een unipolaire pacemaker
- Patiënten met overgevoeligheid voor een maximale enkelvoudige dosis van 1,1 mg dexamethason-acetaat
- Patiënten met een mechanische tricuspidaalklep

## WAARSCHUWINGEN

### Algemeen

- **Kennis van etikettering.** Om schade aan de pulsgenerator en/of lead te voorkomen, dient deze handleiding aandachtig te worden doorgelezen voordat de pulsgenerator wordt geïmplant. Door een beschadigd systeem kan de patiënt letsel oplopen of overlijden.
- **Voor gebruik bij één patiënt.** Niet opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren kan de structurele integriteit van het apparaat aantasten en/of tot defecten van het apparaat leiden, die verwondingen, ziekte of overlijden van de patiënt tot resultaat kunnen hebben. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren kan ook een besmettingsrisico veroorzaken van het apparaat en/of infectie van de patiënt of kruisinfectie veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot de overdracht van infectieziekte(n) van de ene patiënt naar de andere. Besmetting van het apparaat kan leiden tot verwonding, ziekte of overlijden van de patiënt.
- **Back-up defibrillatiebescherming.** Zorg ervoor dat er tijdens de implantatie altijd externe defibrillatiebescherming klaar ligt en elektrofysiologische testen mogelijk zijn. Een geïnduceerde ventriculaire tachyarritmie die niet tijdig wordt beëindigd, kan tot de dood van de patiënt leiden.
- **Noodshocks afkomstig van een externe bron.** Gebruik geen onderdeel van het leadsysteem bij het afgeven van een noodshock afkomstig van een externe bron, daar dit kan leiden tot aanzienlijke weefselbeschadiging.
- **Resuscitatie beschikbaar.** Zorg dat er tijdens de post-implantatietesten van het apparaat een externe defibrillator en medisch personeel dat bedreven is in CPR aanwezig is voor het geval dat de patiënt reanimatie nodig heeft.

- **Leadbreuk.** Leadbreuk, losraken, beschadiging of een onvolledige aansluiting kunnen een tijdelijk of blijvend verlies van stimulatie of detectie of beide tot gevolg hebben.

Dit kan mogelijk resulteren in het niet detecteren van aritmieën, overdetectie van de frequentie, ongewenste afgifte van een shock door de pulsgenerator, of ongewenste afgifte van conversie-energie.

## Hanteren

- **Sterk buigen.** Hoewel de lead flexibel is, is de lead niet bestand tegen te sterke rek en spanning of overmatig buigen. Dit kan verzwakking van het materiaal, verstoring van de geleider en/of dislocatie van de lead tot gevolg hebben.
- **Vermijd knikken in leads.** Bescherm de lead tegen knikken of torsie, en bundel de lead niet samen met andere leads; de lead-isolatie zou door schuren beschadigd kunnen raken of zou de geleider kunnen beschadigen.
- **De lead hanteren zonder het connectorinstrument.** Hanteer, voor DF4-LLHH of DF4-LLHO leads, de leadconnector voorzichtig als het connectorinstrument niet op de lead aanwezig is. Breng de leadconnector niet rechtstreeks in contact met chirurgische instrumenten of elektrische aansluitingen zoals PSA (krokodillen-) bekjes, ecg-verbindingen, tangen, vaatklemmen en klemmen. Dit kan de leadconnector beschadigen en mogelijk de integriteit van de afsluiting in gevaar brengen, maar ook resulteren in een verlies van therapie of onterechte therapie, zoals een hoog-voltagekortsluiting binnen in de header.
- **De connector hanteren bij het tunnelen.** Maak behalve met de connectorpin geen contact met een ander deel van de DF4-LLHH of DF4-LLHO leadconnector, zelfs als de leaddop is aangebracht.

## Implantaatgerelateerd

- **Afzonderlijke defibrillatie-elektrode.** Om defibrillatietherapie af te kunnen geven, moeten de single-coil modellen geïmplant worden met een bijkomende defibrillatie-elektrode. Men raadt het gebruik aan van de pectoraal geïmplanteerde defibrillator-pulsgenerator die de metalen behuizing als defibrillatie-elektrode gebruikt.
- **Het connectorinstrument enkel gebruiken voor elektrische aansluitingen.** Gebruik voor DF4-LLHH of DF4-LLHO leads het connectorinstrument enkel voor elektrische aansluitingen op de pacing system analyzers of soortgelijke monitors. Bevestig geen krokodillenbekjes rechtstreeks op de leadconnector omdat dit tot beschadiging kan leiden.
- **De juiste positie van de elektrode verkrijgen.** Zorg er voor dat de elektrode in de juiste positie komt. Als dit niet gebeurt, kan dit verhoogde defibrillatiedrempels tot gevolg hebben. Ook kan dit er toe leiden dat de lead niet in staat is een patiënt te defibrilleren bij wie de tachyritmie(en) anders wel door een pulsgeneratorsysteem te converteren zou zijn geweest.



- **Correcte aansluitingen.** Bij het aansluiten van de lead op de pulsgenerator, is het erg belangrijk dat de aansluitingen correct worden uitgevoerd. De connectorpin moet verder dan het stelschroeven blok worden ingebracht voor een correcte aansluiting. Visualisatie van de insertie-indicator van de connectorpin uit het stelschroevenblok kan worden gebruikt om te bevestigen dat de connectorpin volledig in de pulsgeneratoruitgang is ingebracht. Om definitief te bevestigen dat de lead volledig is ingebracht, moet de elektrische prestatie van de lead worden geëvalueerd nadat de lead op de pulsgenerator is aangesloten. Een incorrecte aansluiting kan resulteren in verlies van therapie of ongewenste therapie.

## Na de implantatie

- **Blootstelling aan Magnetic Resonance Imaging (MRI).** Maak geen MRI-scans bij patiënten. Sterke magnetische velden kunnen de pulsgenerator en/of het leadsysteem beschadigen en mogelijk resulteren in letsel bij of het overlijden van de patiënt.
- **Diathermie.** Behandel patiënten met een geïmplanteerde pulsgenerator en/of lead niet met diathermie daar diathermie fibrillatie, verbranding van het myocardium en onherstelbare schade aan de pulsgenerator kan veroorzaken ten gevolge van de geïnduceerde stroom.

## VOORZORGSMAATREGELEN

### Klinische overwegingen

- **Dexamethason-acetaat.** Het is niet vastgesteld of de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of complicaties die gewoonlijk worden verbonden met injecteerbare dexamethason-acetaat van toepassing zijn op het gebruik van een erg lokaal apparaat met gereguleerde afgifte van lage concentraties. Raadpleeg de Physicians' Desk Reference™<sup>3</sup> voor vermelding van mogelijke bijwerkingen.

### Sterilisatie en opslag

- **Als de verpakking beschadigd is.** Voor de uiteindelijke verpakking worden de blisterverpakking en inhoud gesteriliseerd met ethyleenoxide. Bij ontvangst is/zijn de pulsgenerator en/of lead steriel, op voorwaarde dat de container intact is. Als de verpakking nat, doorboord, geopend of op een andere manier beschadigd is, moet men de pulsgenerator en/of lead retourneren naar Boston Scientific.
- **Opslagtemperatuur.** Bewaren op 25°C (77°F). Temperatuurschommelingen zijn toegestaan tussen 15°C tot 30°C (59°F tot 86°F). Transportpieken tot 50°C (122°F) zijn toegestaan.
- **Vervaldatum.** Implanter de pulsgenerator en/of lead vóór de VERVALDATUM die vermeld staat op het label van de verpakking omdat deze datum het einde van de gegarandeerde houdbaarheidsperiode aangeeft. Als de datum bijvoorbeeld 1 januari is, mag/mogen de pulsgenerator en/of lead niet op of na 2 januari worden geïmplantéerd.

3. Physicians' Desk Reference is een geregistreerd handelsmerk van Thomson Healthcare Inc.

## Hanteren

- **Niet onderdompelen in vloeistof.** Veeg de tip-elektrode niet af en dompel deze niet onder in een vloeistof. Hierdoor neemt de hoeveelheid steroïden af als de lead geïmplantéerd is.
- **Chronisch herpositioneren.** Het is mogelijk dat er geen optimale drempelwaarde bereikt kan worden wanneer de lead chronisch geherpositionéerd wordt, omdat de steroïde dan verbruikt kan zijn.
- **Beschermen tegen oppervlaktevervuiling.** De isolatie van de lead bestaat uit siliconenrubber, een materiaal dat stofdeeltjes kan aantrekken; bescherm dit materiaal daarom altijd tegen vervuiling.
- **Smeermiddelen.** Geen smeermiddelen op basis van olie aanbrengen op de ePTFE-gecoate shockcoils daar dit de elektrische prestatie kan aantasten.
- **Geen minerale olie op leadtip.** De leadtypelektrode mag nooit in contact komen met minerale olie. Minerale olie op de tip kan de weefselingroei en de geleiding inhiberen.
- **Zorg voor plaatsing van fixatiemanchet.** Zorg ervoor dat de fixatiemanchet proximaal van de veneuze ingang en in de nabijheid van de aansluitingshuls blijft gedurende de volledige procedure totdat de lead kan worden bevestigd.

## Implantatie

- **Patiënt evalueren voor chirurgie.** Er kunnen bijkomende factoren zijn betreffende de algemene gezondheid en de medische toestand van de patiënt die, hoewel ze niet verwant zijn met de apparaatfunctie of -doeleinde, de patiënt ongeschikt kunnen maken voor de implantatie van dit systeem. Belangenbehartigingsgroepen voor de gezondheid van het hart hebben richtlijnen gepubliceerd die nuttig kunnen zijn bij het uitvoeren van deze evaluatie.
- **Lead-compatibiliteit.** Controleer vóór de implantatie de compatibiliteit tussen lead en pulsgenerator. Het gebruik van niet-compatibele leads en pulsgeneratoren kan schade aan de connector veroorzaken en/of kan mogelijk negatieve consequenties tot gevolg hebben, zoals onderdetectie van de hartactiviteit of het niet afgeven van de nodige therapie.
- **Netgevoede apparatuur.** Wees zeer voorzichtig bij het testen van leads met behulp van netgevoede apparatuur, daar lekstroom sterker dan 10  $\mu$ A ventrikelfibrilleren kan induceren. Zorg ervoor dat alle netgevoede apparatuur aan de specificaties voldoet.
- **Buig in geen geval de lead nabij de leadheader-interface.** Schuif de leadconnector recht in de leadport. De lead niet buigen bij de overgang van de header naar de lead. Verkeerd inbrengen kan de isolatie of de connector beschadigen.
- **Venehaakje.** Tijdens een venasectie mag het venehaakje niet worden gebruikt om de ader aan te prikken of om weefsel te verwijderen. Zorg dat het venehaakje de isolatie van de lead niet beschadigt. Dit zou de correcte werking van de lead in het gedrang kunnen brengen.

- **De lead niet buigen als het stilet eenmaal in positie is.** Buig de lead niet met het stilet erin. Door buigen kunnen de geleider en het isolatiemateriaal van de lead worden beschadigd.
- **Hulpmiddelen aangebracht op distale einde.** Breng geen instrumenten aan op het distale einde van de lead, omdat dit de lead kan beschadigen. Vermijd om het distale einde van de lead vast te houden of te hanteren.
- **Het stilet buigen.** Gebruik geen scherp voorwerp om het distale uiteinde van het stilet te buigen. Buig het stilet niet als het in de lead zit. Wanneer een gebogen stilet gewenst is, buig een recht stilet dan voorzichtig voor het in de lead wordt ingebracht om schade aan het stilet en de lead te vermijden.
- **De lead niet implanteren onder het sleutelbeen.** Bij het implanteren van de lead via een punctie in de subclavia mag de lead niet onder het middelste derde deel van de clavicula worden ingebracht. Schade of blijvend losraken van de lead is mogelijk als de lead op deze wijze wordt geïmplanteerd. Wanneer implantatie via de vena subclavia gewenst is, moet de lead vlakbij de laterale kant van de eerste rib worden ingebracht, waarbij penetratie van de m. subclavius vermeden dient te worden. Het is van belang bij implantatie met deze voorzorgsmaatregelen rekening te houden om beschadiging van de lead bij de kruising van de clavicula en de eerste rib of blijvend losraken te voorkomen. In de literatuur is beschreven dat breuken in de lead kunnen ontstaan wanneer deze vastraakt in zachte weefsels zoals de m. subclavius, het costocoracoïde ligament of het costoclaviculaire ligament.<sup>4</sup>
- **Afstand van elektrode tot pacemaker.** Bij patiënten met een bipolaire cardiale pacemaker dient de stimulatie-/detectie-elektrode van de lead (de tip-elektrode en de distale coil-elektrode) zover mogelijk bij de elektroden van de pacemaker vandaan geplaatst te worden om kruisdetectie tussen de defibrillator-pulsgenerator en de pacemaker te voorkomen.
- **Losraken van leads.** In het geval van dislocatie is directe medische behandeling vereist om de elektrode weer in de juiste positie te brengen en endocardiale schade tot een minimum te beperken.
- **Niet-goedgekeurde afgifte-instrumenten.** Gebruik enkel goedgekeurde afgifte-instrumenten om de lead te plaatsen, omdat de lead anders kan beschadigd worden of de patiënt verwond kan worden.
- **Onnauwkeurige frequentiemeting.** R-golfamplitudes lager dan de aanbevolen waarden kunnen leiden tot onnauwkeurige frequentiemetingen in chronische toestand, waarbij wellicht een tachyaritmie niet wordt gedetecteerd, of een normaal ritme ten onrechte wordt geïnterpreteerd als abnormaal. Als een signaal langer duurt dan de geprogrammeerde refractaire periode van de pulsgenerator kan de frequentiedetectie onnauwkeurig worden wat kan resulteren in ongewenst gedrag.

4. Magney JE, et al. Anatomical mechanisms explaining damage to pacemaker leads, defibrillator leads, and failure of central venous catheters adjacent to the sternoclavicular joint. PACE. 1993;16:445-457.

- **Vermijd een te strakke ligatuur.** Vermijd te strakke fixatie bij het afbinden van de vene. Een te strakke ligatuur kan de isolatie beschadigen of de vene afsnijden. Vermijd dat de tip van de elektrode tijdens de verankeringsprocedure losraakt.
- **Niet rechtstreeks over de lead hechten.** Leg geen ligaturen direct over de leadbody, omdat dit structurele schade kan veroorzaken. Gebruik de fixatiemanchet om de lead proximaal aan de veneuze ingang te fixeren om zo te voorkomen dat de lead beweegt.
- **Wees voorzichtig bij het verwijderen van de fixatiemanchet.** Vermijd het verwijderen of wegsnijden van de fixatiemanchet van de lead. Als de fixatiemanchet verwijderd moet worden, wees dan voorzichtig dat u de lead niet beschadigt.
- **Het gebruik van meerdere fixatiemanchetten werd niet geëvalueerd.** Het gebruik van meerdere fixatiemanchetten werd niet geëvalueerd en wordt niet aanbevolen.
- **Tunnel de lead.** Tunnel de lead altijd vanaf de borst naar de implantatieplaats van de pulsgenerator. Nooit de lead tunnelen vanuit de implantatieplaats van de pulsgenerator naar de borst. Hierdoor kunnen de elektroden en/of de leadbody beschadigd raken doordat de lead permanent wordt gestrekt.
- **Bovenmatige spanning op de lead.** Voorkom dat er bij het tunnelen van de lead te veel spanning op de lead wordt uitgeoefend. Dit zou het materiaal en/of de geleiding kunnen aantasten.
- **De lead opnieuw evalueren na het tunnelen.** Evalueer na het tunnelen de lead opnieuw om te controleren dat er geen aanzienlijke wijzigingen zijn opgetreden bij of schade is aangericht aan de lead tijdens de tunnelingprocedure. Bevestig het connectorinstrument opnieuw en herhaal de stappen voor het evalueren van de elektrische prestatie van de lead.

## Ziekenhuizen en andere medische omgevingen

- **Elektrocauterisatie.** Elektrocauterisatie kan ventriculaire aritmieën en/of ventrikelfibrilleren induceren, en kan asynchrone stimulatie, geïnhibeerde stimulatie, ongewenste schokken en/of een daling in de stimulatieoutput van de pulsgenerator veroorzaken die mogelijk resulteren in verlies van stimulatie.

Als elektrocauterisatie medisch noodzakelijk is, respecteer dan de volgende maatregelen om het risico voor de lead te beperken. Raadpleeg ook de pulsgeneratoretikettering voor de programmeeraanbevelingen voor het apparaat en bijkomende informatie over het beperken van het risico voor de patiënt en het systeem.

- Vermijd rechtstreeks contact tussen de elektrocauterisatie-apparaat en de pulsgenerator of leads.
- Houd het pad van de elektrische stroom zo ver mogelijk van de pulsgenerator en leads vandaan.
- Als elektrocauterisatie wordt uitgevoerd op weefsel in de nabijheid van het apparaat of leads, monitor dan voorafgaande en opvolgende metingen voor detectie- en stimulatierempels en -impedantie om de integriteit en de stabiliteit van het systeem te bepalen.
- Gebruik korte, periodieke en onregelmatige bursts op de laagst haalbare energieniveaus.
- Gebruik een bipolair elektrocauterisatiesysteem waar mogelijk.
- **Radiofrequentie (RF) ablatie.** RF-ablatie kan ventriculaire aritmieën en/of ventrikelfibrillatie induceren, en kan asynchrone stimulatie, inhibitie van stimulatie, ongewenste schokken en/of een daling in de stimulatieoutput van de pulsgenerator veroorzaken die mogelijk resulteren in verlies van stimulatie. RF-ablatie kan eveneens ventriculaire stimulatie tot de Maximale trackingfrequentie (MTR) en/of wijzigingen in de stimulatierempels veroorzaken. Er is bovendien voorzichtigheid geboden bij het uitvoeren van elk ander type procedure voor hartablatie bij patiënten met geïmplanteerde apparaten.

Als RF-ablatie medisch noodzakelijk is, respecteer dan de volgende maatregelen om het risico voor de lead te beperken. Raadpleeg ook de pulsgeneratoretikettering voor de programmeeraanbevelingen voor het apparaat en bijkomende informatie over het beperken van het risico voor de patiënt en het systeem.

- Vermijd rechtstreeks contact met de ablatiekatheter en de pulsgenerator en leads. RF-ablatie dicht bij de leadelektrode kan de interface van het leadweefsel beschadigen.
- Houd het pad van de elektrische stroom zo ver mogelijk van de pulsgenerator en leads vandaan.
- Als RF-ablatie wordt uitgevoerd op weefsel in de nabijheid van het apparaat of leads, monitor dan voorafgaande en opvolgende metingen voor detectie- en stimulatierempels en -impedantie om de integriteit en de stabiliteit van het systeem te bepalen.

- **Inbrengen van voerdraad voor centrale lijn.** Voorzichtigheid is geboden bij het inbrengen van voerdraaden voor het plaatsen van andere types van centraal veneuze kathetersystemen zoals PIC-lijnen of Hickman-katheters op locaties waar er mogelijk pulsgeneratorleads zitten. Het inbrengen van dergelijke voerdraaden in aders waar zich leads bevinden, kan resulteren in schade aan of het losraken van de leads.

## Controletesten

- **Niet geslaagde conversietesten.** Na een mislukte hoge-energieshock, foutieve meting van de hartfrequentie, vertraagde detectie of afwezigheid van detectie ten gevolge van VF-signalen met een lage amplitude, kan het nodig zijn de lead te herpositioneren.
- **Leadprestatie in chronische status.** Bij sommige patiënten vormen de prestaties van de lead bij de implantatie mogelijk geen maatstaf voor de prestaties van de lead in de chronische status. Derhalve wordt er ten sterkste aangeraden om na de implantatie een EF-test uit te voeren indien er wijzigingen zouden optreden in de leadprestatie. Deze test dient ten minste één aritmie-inductie/conversietest van ventrikelfibrilleren te omvatten.

## Mogelijk ongewenste effecten

De volgende lijst bevat mogelijke bijwerkingen bij het implanteren van een pulsgenerator en/of leadsysteem en is gebaseerd op literatuur en op implantatie-ervaringen met pulsgenerators:

- Luchtembolie
- Allergische reactie
- Arteriële schade met stenose tot gevolg
- Bloedingen
- Breuk/niet goed functioneren van de implantatie-instrumenten
- Cardiale perforatie
- Cardiale tamponnade
- Chronische zenuwbeschadiging
- Defecten aan onderdelen
- Breuk in de geleider
- Overlijden
- Verstoorde elektrolytenhuishouding/dehydratie
- Verhoogde drempels
- Erosie
- Excessieve groei van fibrotisch weefsel
- Extracardiale stimulatie (stimulatie van spieren/zenuwen)
- Ophoping van vloeistof
- Verschijnselen die te maken hebben met de afstoting van vreemde lichamen

- Vorming van hematomen of seromen
- Hartblok
- Hemorragie
- Hemothorax
- Geen defibrillatie of stimulatie kunnen toepassen
- Een onjuiste therapie (bijv. stimulatie middels shocks en anti-tachycardiestimulatie [ATP] waar van toepassing)
- Incisiepijn
- Onvolledige aansluiting van de lead op de pulsgenerator
- Infectie inclusief endocarditis
- Losraken van leads
- Leadbreuk
- Breuk of afschuren van leadisolatie
- Vervorming en/of breuk van de leadtip
- Lokale weefselreacties
- VF-signalen met lage amplitude
- Kwaadaardigheid of brandwonden als gevolg van fluoroscopische straling
- Myocardiaal trauma (vb. prikkelbaarheid, letsel, weefsel schade)
- Detectie van myopotentialen
- Over-/onderdetectie
- Schuren langs pericard, effusie
- Pneumothorax
- Post-shock ritmestoornissen
- Migratie van pulsgenerator en/of lead
- Shuntstromen tijdens defibrillatie met interne of externe paddles
- Tachyaritmieën, waaronder versnelde aritmieën en vroegtijdig, terugkerend atriumfibrilleren
- Trombose/trombo-embolie
- Beschadiging van hartklep
- Veneuze occlusie
- Veneus letsel (bijv. perforatie, dissectie, erosie)

---

## PRE-IMPLANTATIE-INFORMATIE

De arts is verantwoordelijk voor toepassing van de juiste chirurgische ingrepen en technieken. De beschreven implantatiemethoden dienen alleen ter informatie. Iedere arts moet deze informatie toepassen in overeenstemming met zijn eigen professionele medische opleiding en ervaring.

De lead is uitsluitend ontworpen, verkocht en bedoeld voor het aangegeven gebruik.

Een belangrijke overweging om voor deze leadlijn te kiezen, is dat er geen thoracotomie nodig is. De arts dient de voordelen af te wegen tegen de mogelijkheden van de patiënt om aanvullende elektrofysiologische (EF) testen te ondergaan (het testen van de aritmie-inductie en -conversie) – en een eventuele thoracotomie - indien het leadsysteem niet doeltreffend blijkt te zijn.

Verskillende factoren, zoals ziektestatus of een behandeling met medicijnen, kunnen aanleiding geven om de defibrillatie-leads te herpositioneren of om een leadsysteem door een ander te vervangen om conversie van de aritmie te vereenvoudigen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat er met geen enkele lead bij de beschikbare defibrillatie- of pulsgeneratordefibrillatie-energieniveaus een betrouwbare conversie van de aritmie wordt verkregen.

Er kunnen bipolaire pacemakers met deze leadlijn en pulsgenerator worden gebruikt, mits er geen interactie ontstaat tussen de pacemaker en de pulsgenerator. Hierdoor zou detectie door de pulsgenerator kunnen ontbreken of onjuist zijn. Zie het hoofdstuk over het minimaliseren van pacemakerinteractie in de Handleiding voor de arts voor meer informatie.

## Vorbereiding van de implantatie

Overweeg het volgende vóór de implantatieprocedure:

- Instrumenten voor hartmonitoring, beeldvorming (fluoroscopie), externe defibrillatie, en metingen van leadsignalen moeten beschikbaar zijn tijdens de implantatie.
- Plaats de patiënt altijd uit de buurt van mogelijk gevaarlijke lekstroom bij gebruik van elektrische instrumenten.
- Er moeten steriele duplicaten van alle implanteerbare onderdelen beschikbaar zijn voor het geval er toevallige beschadiging of verontreiniging plaatsvindt.

## Verpakte onderdelen

De volgende onderdelen zitten bij de lead verpakt:

- Venehaakje
- Stiletten
- Connectorinstrument
- Literatuur

## Toebehoren

Er zijn afzonderlijk verpakte leadaccessoires beschikbaar naast deze die bij de lead verpakt zitten.

### Venehaakje

Het venehaakje is een wegwerpbaar plastic hulpmiddel dat ontworpen is ter assistentie bij het inbrengen in een ader tijdens een venasectie.



## Radiopake fixatiemanchet

De radiopake fixatiemanchet is een verschuifbare, cilindervormige versteviging die zichtbaar is onder fluoroscopie. Het wordt aangebracht over de uitwendige isolatie van de lead. De manchet wordt gebruikt om de lead na plaatsing te bevestigen en op zijn plaats te houden bij de ingang in de vene. Het gebruik van de fixatiemanchet verkleint de kans op structurele beschadiging door een hechting die direct over de leadbody wordt aangebracht. Om de fixatiemanchet te verplaatsen, knijpt u er voorzichtig in en schuift u het over de lead tot het zich in de gewenste positie bevindt. De vensterfunctie werd ontworpen ter assistentie van de compressie van de fixatiemanchet op de lead tijdens het hechten.

**OPMERKING:** De radiopake fixatiemanchet is vooraf op de lead geladen en is ook beschikbaar in een opschuifbare optie als accessoire (model 6403). Deze opschuifbare fixatiemanchet is bedoeld als vervangingsaccessoire voor de voorgeladen fixatiemanchet in geval van beschadiging of verlies.

**VOORZICHTIG:** Het gebruik van meerdere fixatiemanchetten werd niet geëvalueerd en wordt niet aanbevolen.

## Stiletten

Stiletten helpen bij het plaatsen van de lead. Zorg ervoor dat u de correcte lengte voor de lead gebruikt. Er zijn stiletten in verschillende gradaties van stijfheid beschikbaar afhankelijk van de implantatietechniek en de anatomie van de patiënt.

Tabel 1. Stijfheid van het stilet en kleur van de knop

Stijfheid van het stilet <sup>a</sup>	Kleur van knop
Flexibel	Groen
Stug	Wit

a. De stijfheid van het stilet staat op de knop gedrukt.

Tabel 2. Stiletlengte en kleur van de dop

Stiletlengte (cm) (Gedrukt op de dop van de knop)	Kleur van dop
59	Geel
64	Groen
70	Zwart

## Leaddop


De leaddop moet worden gebruikt om de leadconnector die niet in de pulsgenerator is ingebracht te isoleren of af te doppen. Plaats een hechtendraad rond de groef van de leaddop om de leaddop aan de leadconnector te bevestigen. Gebruik de correcte dop voor de lead.

**OPMERKING:** De leaddop (model 7007) is beschikbaar als accessoire.

## EZ-4 connectorinstrument

Het EZ-4 connectorinstrument zit verpakt bij de lead. Als het wordt bevestigd aan de lead kunnen de volgende functies worden uitgevoerd:

- Beschermt de leadconnector tijdens de implantatieprocedure.
- Biedt een veilige en vaste aansluiting tussen de PSA-kabels van de patiënt en de leadconnector.
- Begeleidt het stilet in de lead via de stilettrechter.

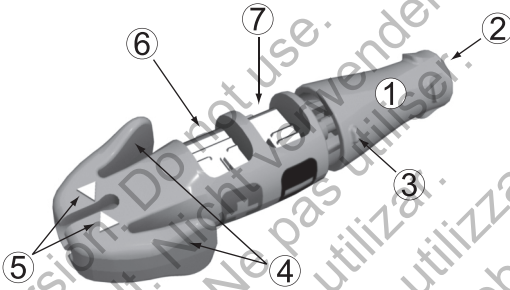

[1] Fixatieknop (losgemaakt) [2] Stilettrechter [3] Rotatiemerktken [4] Hendels van aansluitingshuls [5] Indicatorpijlen [6] Anode (+) veercontact [7] Kathode (-) veercontact

**Figuur 1. Connectorinstrument**


## IMPLANTATIE

**OPMERKING:** *Selecteer een geschikte leadlengte voor elke individuele patiënt. Het is belangrijk dat een lead wordt gekozen die lang genoeg is om eventuele scherpe hoeken of knikken te vermijden en om overtollige lead voorzichtig te buigen in de pocket. Een minimum van 5 tot 10 cm overtollige lead is gewoonlijk voldoende om dit soort configuratie in de pocket te verkrijgen. De fixatiemanchet moet zo dicht mogelijk, als klinisch van toepassing is, bij de vasculaire toegangslocatie aan de lead worden bevestigd; dit wordt beschreven in "Vasthechten van de lead" op pagina 24. Een correct geplaatste fixatiemanchet helpt deze configuratie in de pocket te behouden.*

## Het connectorinstrument op de lead bevestigen

Volg onderstaande stappen om het connectorinstrument op de lead te bevestigen.

1. Schuif het connectorinstrument op het proximale uiteinde van de lead (Figuur 2 op pagina 15).
2. Terwijl u de vleugels van het EZ-4 connectorinstrument samenknijpt, duwt u de lead in het instrument totdat de witte huls uitgelijnd is met de pijlen van het instrument om te verzekeren dat de lead volledig is ingebracht.
3. Laat de hendels van de aansluitingshuls los om het connectorinstrument vast te maken aan het proximale uiteinde van de lead.

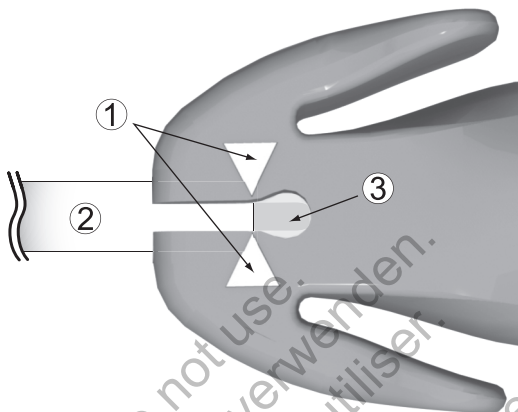

[1] Indicatorpijlen [2] Aansluitingshuls [3] Connector vorm


**Figuur 2. De lead is volledig ingebracht in het connectorinstrument**

## Het inbrengen van het stilet

Breng een stilet in met behulp van onderstaande stappen.

1. Verwijder een eventueel vooraf ingebracht stilet voordat een ander wordt ingebracht.
2. Kies een stilet volgens de functie en de gewenste stijfheid. Buig het stilet zo nodig voorzichtig met behulp van een steriel, glad voorwerp (bijvoorbeeld een injectiespuit van 10 of 12 ml) (Figuur 3 op pagina 15). Een rondere buiging zal minder snel strekken dan een scherpe bocht bij gebruik van een stilet.

**VOORZICHTIG:** Gebruik geen scherp voorwerp om het distale uiteinde van het stilet te buigen. Buig het stilet niet als het in de lead zit. Wanneer een gebogen stilet gewenst is, buig een recht stilet dan voorzichtig voor het in de lead wordt ingebracht om schade aan het stilet en de lead te vermijden.

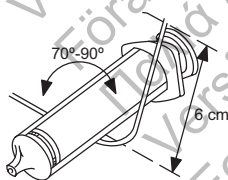

**Figuur 3. Buig het stilet**

3. Breng het stilet voorzichtig in via de trechter van het connectorinstrument en de connectorpin.

**OPMERKING:** Breng het stilet niet in aanraking met lichaamsvloeistoffen om het inbrengen in de lead niet te bemoeilijken.

4. Zorg ervoor dat het stilet volledig is ingebracht in de lead voordat de lead in de vene wordt gebracht.

**VOORZICHTIG:** Buig de lead niet met het stilet erin. Door buigen kunnen de geleider en het isolatiemateriaal van de lead worden beschadigd.

## Inbrengen van de lead


De lead kan op een van de volgende manieren worden ingebracht: via de vena cephalica, via de subclavia of vena jugularis interna.

- **Via een venasectie in de linker of de rechter vena cephalica**

Er is slechts één incisie over de deltapectorale groeve vereist voor toegang tot de rechter of linker vena cephalica in de deltapectorale groef.

Het venehaakje dat verpakt zit bij deze lead kan worden gebruikt als hulpmiddel bij de toegang tijdens een venasectie procedure. isoleer de gekozen ader en introduceer de punt van het venehaakje via de incisie in het lumen van de ader. Houd de punt van het venehaakje in de passagerichting van de lead en trek het venehaakje voorzichtig schuin naar boven. Steek de lead onder het haakje door in de ader.

**VOORZICHTIG:** Tijdens een venasectie mag het venehaakje niet worden gebruikt om de ader aan te prikken of om weefsel te verwijderen. Zorg dat het venehaakje de isolatie van de lead niet beschadigt. Dit zou de correcte werking van de lead in het gedrang kunnen brengen.

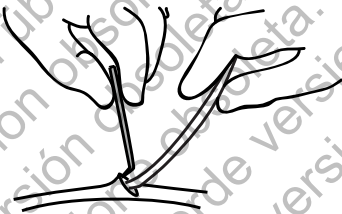

Figuur 4. Gebruik van het venehaakje

- **Percutaan of via venasectie door de vena subclavia**

Er is een subclavische introducerset beschikbaar voor gebruik tijdens het percutaan inbrengen van de lead. Raadpleeg de specificaties voor de aanbevolen afmetingen van de introducer.

**VOORZICHTIG:** Bij het implanteren van de lead via een punctie in de subclavia mag de lead niet onder het middelste derde deel van de clavícula worden ingebracht. Schade of blijvend losraken van de lead is mogelijk als de lead op deze wijze wordt geïmplanteerd. Wanneer implantatie via de vena subclavia gewenst is, moet de lead vlakbij de laterale kant van de eerste rib worden ingebracht, waarbij penetratie van de m. subclavius vermeden dient te worden. Het is van belang bij implantatie met deze voorzorgsmaatregelen rekening te houden om beschadiging van de lead bij de kruising van de clavícula en de eerste rib of blijvend losraken te voorkomen. In de literatuur is beschreven dat breuken in de lead


kunnen ontstaan wanneer deze vastraakt in zachte weefsels zoals de m. subclavius, het costocoracoïde ligament of het costoclaviculaire ligament.<sup>5</sup>

Leads ingebracht door middel van percutane subclaviculaire venapunctie moeten de v. subclavia binnengaan op het punt waar deze over de eerste rib loopt (niet verder mediaal) om te voorkomen dat de lead beklemd raakt in de m. subclavius of in ligamentstructuren in het nauwe costoclaviculaire gebied.<sup>6</sup> Er wordt aangeraden om de lead in te brengen in de vena subclavia aan de laterale kant van de eerste rib.

De injectiespuit moet direct boven de axillaire ader worden gehouden en parallel aan die ader, om de kans te beperken dat de naald in aanraking komt met de a. axillaria of subclavia, of met de plexus brachialis. Het gebruik van fluoroscopie kan nuttig zijn bij het lokaliseren van de eerste rib en het richten van de naald.

In de punten hieronder wordt aangegeven hoe de aanprikplaats kan worden vastgesteld, en hoe de naald kan worden geleid naar de plaats waar de vena subclavia over de eerste rib loopt.

1. Stel de punten St (sternumhoek) en Cp (processus coracoïdus) vast (Figuur 5 op pagina 17).

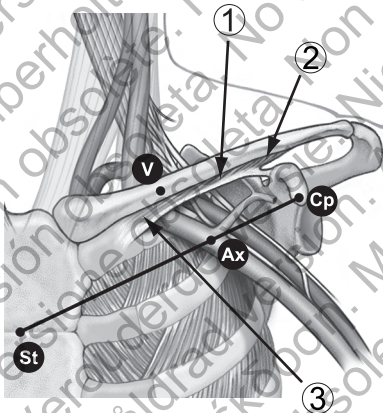


[1] M. subclavia [2] Costocoracoïde ligament [3] Costoclaviculaire ligament

#### **Figuur 5. Ingangspunt voor percutane punctie van de vena subclavia**

2. Trek een denkbeeldige lijn tussen St en Cp, en verdeel het segment in drieën. De naald moet de huid doorboren op de kruising van het middelste en het laterale derde deel, direct boven de v. axillaris (punt Ax).

5. Magney JE, et al. Anatomical mechanisms explaining damage to pacemaker leads, defibrillator leads, and failure of central venous catheters adjacent to the sternoclavicular joint. PACE. 1993;16:445–457.
6. Magney JE, et al. A new approach to percutaneous subclavian venipuncture to avoid lead fracture or central venous catheter occlusion. PACE. 1993;16:2133–2142.

3. Leg de wijsvinger op het sleutelbeen tussen het mediale en het middelste derde deel (punt V), hieronder moet de v. subclavia liggen.
4. Duw met de duim tegen de wijsvinger zodat deze 1-2 centimeter onder het sleutelbeen uitsteekt en de m. subclavius beschermt tegen de naald (bij duidelijke hypertrofie van de m. pectoralis moet de duim ongeveer 2 centimeter onder de clavicula uitsteken, omdat ook de m. subclavius gehypertrofieerd dient te zijn) (Figuur 6 op pagina 18).

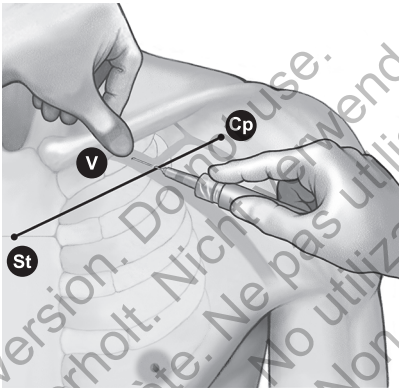

**Figuur 6. Locatie van de duim en de aanprikplaats**

5. Voel met de duim de druk wanneer de naald onder de oppervlakkige fascia doorgaat; richt de naald diep het weefsel in naar de v. subclavia en de daaronder liggende eerste rib. Fluoroscopische controle verkleint de kans dat de naald onder de eerste rib doorgaat en de long aanpikt.

## De lead plaatsen in het rechter ventrikel


De correcte functie van de lead hangt af van de correcte plaatsing van de elektrodes. Volg de onderstaande instructies om de lead te positioneren.

1. Trek het stilet gedeeltelijk terug bij het plaatsen van de lead om de stijfheid van de tip te beperken.

**OPMERKING:** Een gebogen stilet kan de beweegbaarheid verhogen.

2. Voer onder fluoroscopie en met een stilet in de lead, de lead zo ver mogelijk op totdat de lead het gezonde myocardium in de apex van het rechter ventrikel binnendringt en er blijft steken.

**WAARSCHUWING:** Zorg er voor dat de elektrode in de juiste positie komt. Als dit niet gebeurt, kan dit verhoogde defibrillatiedrempels tot gevolg hebben. Ook kan dit er toe leiden dat de lead niet in staat is een patiënt te defibrilleren bij wie de tachyritmie(en) anders wel door een pulsgeneratorsysteem te converteren zou zijn geweest.

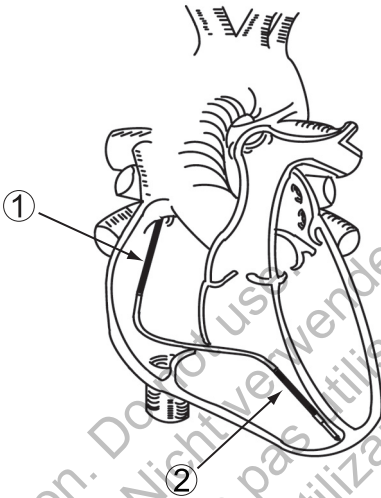

[1] Proximale coil-elektrode [2] Distale coil-elektrode

**Figuur 7. Aanbevolen positie van de elektrode in het hart**

3. Controleer onder fluoroscopie dat de distale coil-elektrode in het rechter ventrikel onder de tricuspidaalklep ligt, en dat de proximale coil-elektrode (bij dual-coil modellen) in de vena cava superior en hoog in het rechter atrium ligt.

**VOORZICHTIG:** Bij patiënten met een bipolaire cardiale pacemaker dient de stimulatie-/detectie-elektrode van de lead (de tip-elektrode en de distale coil-elektrode) zover mogelijk bij de elektroden van de pacemaker vandaan geplaatst te worden om kruisdetectie tussen de defibrillator-pulsgenerator en de pacemaker te voorkomen.

4. Zorg voor voldoende contact tussen de leadtip en de fixatielocatie.

**WAARSCHUWING:** Om defibrillatietherapie af te kunnen geven, moeten de single-coil modellen geïmplantéerd worden met een bijkomende defibrillatie-elektrode. Men raadt het gebruik aan van de pectoraal geïmplantéerde defibrillator-pulsgenerator die de metalen behuizing als defibrillatie-elektrode gebruikt.

**Controleren van de leadstabiliteit**

Volg deze stappen om de leadstabiliteit te controleren:

1. Trek na fixatie het stilet 20 tot 25 cm gedeeltelijk terug.
2. Controleer de stabiliteit van de lead met behulp van fluoroscopie. Ruk niet aan de lead. Laat de patiënt zo mogelijk hoesten of een paar keer diep ademen.
3. Trek bij een bevredigende positie van de elektrode, het stilet verder dan het rechter atrium.

**VOORZICHTIG:** In het geval van dislocatie is directe medische behandeling vereist om de elektrode weer in de juiste positie te brengen en endocardiale schade tot een minimum te beperken.

## Het functioneren van de lead evalueren

Controleer de elektrische prestatie van de lead met behulp van een Pacing System Analyzer (PSA) voordat de lead aan de pulsgenerator wordt bevestigd.

1. Sluit de lead aan op de PSA.

- Bevestig de krokodillenbekjes van de PSA-kabel op het kathode (–) veercontact en anode veercontact (+) van het connectorinstrument. Het gebruik van het connectorinstrument zal de connectorpin beschermen tegen beschadiging van het krokodillenbekje en een overbrugging tussen de connectorcontacten voorkomen. Bevestig de krokodillenbekjes volledig op de kathode en anode veercontacten om onnauwkeurige baseline metingen te voorkomen (Figuur 8 op pagina 20).

**WAARSCHUWING:** Gebruik voor DF4-LLHH of DF4-LLHO leads het connectorinstrument enkel voor elektrische aansluitingen op de pacing system analyzers of soortgelijke monitors. Bevestig geen krokodillenbekjes rechtstreeks op de leadconnector omdat dit tot beschadiging kan leiden.



**Figuur 8. PSA-klemmen bevestigd op connectorinstrument**

2. Voer de metingen uit zoals beschreven in de tabel.

**Tabel 3. Aanbevolen drempel- en detectiemetingen**

Signaaltype	Amplitude	Duur	Stimulatie-drempel <sup>a</sup>	Impedantie
Stimulatie/Detectie	≥ 5 mV	< 100 ms	≤ 1,5 V	300–1200 Ω
Defibrillatie	≥ 1 mV	< 150 ms	N.v.t.	20–125 Ω

a. Instelling pulsduur 0,5 ms.



- Metingen van de pulsgenerator correleren mogelijk niet exact met de metingen van de PSA ten gevolge van signaalfiltering. De basale meetgegevens dienen binnen de aanbevolen waarden te vallen, zoals aangegeven in de tabel.
- Lagere intrinsieke potentialen, langere duur en hogere stimulatierempels kunnen betekenen dat de lead zich in een ischemisch gebied of op littekenweefsel bevindt. Hierdoor kan de kwaliteit van het signaal verslechteren; herpositioneer de lead als dat nodig is, om een signaal te krijgen met een zo hoog mogelijke amplitude, een zo kort mogelijke duur en een zo laag mogelijke stimulatierempel.
- Veranderingen in het oppervlak van de defibrillatie-elektrode, zoals van een TRIAD-configuratie naar een single coil configuratie, kunnen de impedantiemetingen beïnvloeden. Uitgangswaarden voor defibrillatie-impedantiemetingen dienen binnen de aanbevolen waarden in de tabel te vallen.

**VOORZICHTIG:** R-golfamplitudes lager dan de aanbevolen waarden kunnen leiden tot onnauwkeurige frequentiemetingen in chronische toestand, waarbij wellicht een tachyarritmie niet wordt gedetecteerd, of een normaal ritme ten onrechte wordt geïnterpreteerd als abnormaal. Als een signaal langer duurt dan de geprogrammeerde refractaire periode van de pulsgenerator kan de frequentiedetectie onnauwkeurig worden wat kan resulteren in ongewenst gedrag.

3. Als de metingen de waarden in de tabellen niet bevestigen, voer dan de volgende stappen uit:
  - Verwijder de PSA-krokodillenbekjes van het connectorinstrument.
  - Breng het stilet opnieuw in en verplaats de lead volgens de eerder besproken procedures en herhaal het evaluatieproces voor de lead.
  - Als de onderzoeksresultaten ontoereikend zijn, kan het nodig zijn het leadsysteem verder te verplaatsen of te vervangen.

Overweeg de volgende informatie:

- Lage stimulatierempelwaarden duiden op een gewenste veiligheidsmarge aangezien de stimulatierempel na implantatie kan stijgen.
  - Initiële elektrische metingen kunnen afwijken van aanbevelingen als gevolg van acuut cellulair trauma. Als dit gebeurt, wacht dan ongeveer 10 minuten en herhaal de test. De waarden kunnen afhankelijk zijn van patiëntspecifieke factoren zoals weefselconditie, elektrolytenevenwicht en interactie van medicijnen.
  - Amplitude- en duurmetingen behoren niet tot het huidige letsel en worden genomen tijdens het normale baseline-ritme van de patiënt.
4. Test op diafragmatische stimulatie door de lead te stimuleren op een hoge uitgangsspanning, met professionele medische beoordeling om de uitgangsspanning te selecteren. Pas de leadconfiguraties en leadpositie aan, indien nodig. Er kan ook overwogen worden om

PSA-tests uit te voeren bij hogere voltages om de stimulatierempels beter te karakteriseren. De tests moeten worden uitgevoerd voor alle leadplaatsingen.

5. Als eenmaal aanvaardbare metingen zijn verkregen, verwijder de aansluitingen van de Pacing System Analyzer en verwijder het stilet.
6. Knijp de hendels van de aansluitingshuls samen en schuif het connectorinstrument van het proximale uiteinde van de lead.
7. Indien bijkomende herpositionering en/of PSA-metingen noodzakelijk zijn, herbevestig u het connectorinstrument om zeker te zijn dat de lead volledig is ingebracht en herhaalt u het evaluatieproces.

## Het aansluiten op een pulsgenerator

Raadpleeg de Handleiding voor de arts voor de betreffende pulsgenerator voor meer aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van de leadconnectors op de pulsgenerator.

1. Controleer of het stilet en de accessoires van de connectorpin zijn verwijderd voordat de lead op de pulsgenerator wordt aangesloten.
2. Houd de leadbody vast in de gelabelde zone distaal van de ringcontacten van de connector en breng de leadconnector volledig in de pulsgeneratoruitgang in totdat de connectorpin verder dan het stelschroevenblok uitsteekt. Als de connectorpin moeilijk in te brengen is, controleer dan of de stelschroef volledig teruggetrokken is. Visualisatie van de insertie-indicator van de connectorpin uit het stelschroevenblok kan worden gebruikt om te bevestigen dat de connectorpin volledig in de pulsgeneratoruitgang is ingebracht.

**OPMERKING:** *Breng, indien nodig, wat steriel water op de leadconnectors aan om het insteken te vergemakkelijken.*

3. Trek zachtjes aan de lead door de gelabelde zone van de leadbody vast te nemen om een vaste aansluiting te garanderen.

**VOORZICHTIG:** Schuif de leadconnector recht in de leadport. De lead niet buigen bij de overgang van de header naar de lead. Verkeerd inbrengen kan de isolatie of de connector beschadigen.

**WAARSCHUWING:** Bij het aansluiten van de lead op de pulsgenerator, is het erg belangrijk dat de aansluitingen correct worden uitgevoerd. De connectorpin moet verder dan het stelschroeven blok worden ingebracht voor een correcte aansluiting. Visualisatie van de insertie-indicator van de connectorpin uit het stelschroevenblok kan worden gebruikt om te bevestigen dat de connectorpin volledig in de pulsgeneratoruitgang is ingebracht. Om definitief te bevestigen dat de lead volledig is ingebracht, moet de elektrische prestatie van de lead worden geëvalueerd nadat de lead op de pulsgenerator is aangesloten. Een incorrecte aansluiting kan resulteren in verlies van therapie of ongewenste therapie.

**OPMERKING:** *Als de leadconnector niet meteen na implantatie van de lead op een pulsgenerator wordt aangesloten, moet de connector worden afgedopt voordat de pocket wordt gesloten. De leaddop is specifiek voor dit doeleinde ontworpen. Plaats een hechtdraad rond de lead om de dop in positie te houden.*

4. Houd rekening met de anatomie van de patiënt en de grootte en beweging van de pulsgenerator, buig eventueel overtollige leadlengte weg en plaats deze naast de pulsgenerator. Het is belangrijk de lead in de pocket zodanig te plaatsen dat spanning, verdraaiingen, scherpe hoeken en/of druk tot een minimum beperkt blijven.

## Elektrische prestatie

1. Beoordeel de leadsignalen met behulp van de pulsgenerator.
2. Plaats de pulsgenerator in de implantatiepocket zoals aangegeven in de Handleiding voor de arts van de pulsgenerator. Raadpleeg eveneens de instructies in deze handleiding ("Het aansluiten op een pulsgenerator" op pagina 22).
3. Beoordeel de leadsignalen aan de hand van de real-time EGM. Overweeg het volgende:
  - Het signaal uit de geïmplanteerde lead dient continu te zijn en vrij van artefacten, zoals bij een oppervlakte-ECG.
  - Een niet-continu signaal kan wijzen op een breuk of een beschadigde lead of op een kapotte isolatie; in beide gevallen moet de lead worden vervangen.
  - Bij ontoereikende signalen is het mogelijk dat het pulsgeneratorsysteem een aritmie niet detecteert of onnodig therapie afgeeft.
4. Test op diafragmatische stimulatie door de lead te stimuleren op een hoge uitgangsspanning, met professionele medische beoordeling om de uitgangsspanning te selecteren. Pas de leadconfiguraties en leadpositie aan, indien nodig. De tests moeten worden uitgevoerd voor alle leadplaatsingen.

## Conversietest

Wanneer er aanvaardbare signalen verkregen zijn, gebruikt u de pulsgenerator om het vermogen aan te tonen om ventrikelfibrilleren (VF), en indien van toepassing op de patiënt, ventriculaire tachycardie op een betrouwbare manier te converteren. Bij deze testen worden aritmieën geïnduceerd en worden shocks met hoog voltage aan de patiënt afgegeven van de pulsgenerator, door middel van de defibrillatie-elektroden van de lead, aan het hart. Metingen van de basiswaarden zouden binnen de aanbevolen waarden, die genoteerd staan in de tabel met Aanbevolen drempel- en detectiemetingen (Tabel 3 op pagina 20).

**VOORZICHTIG:** Na een mislukte hoge-energieshock, foutieve meting van de hartfrequentie, vertraagde detectie of afwezigheid van detectie ten gevolge van VF-signalen met een lage amplitude, kan het nodig zijn de lead te repositioneren.

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat er tijdens de implantatie altijd externe defibrillatiebescherming klaar ligt en elektrofysiologische testen mogelijk zijn. Een geïnduceerde ventriculaire tachyarritmie die niet tijdig wordt beëindigd, kan tot de dood van de patiënt leiden.

Een betrouwbare conversie van VF dient aangetoond te worden bij een energie niveau dat lager ligt dan de maximale energie-instelling van de pulsgenerator. Overweeg het volgende:

- Men beveelt aan om meerdere inductieconversietesten van VF uit te voeren om de betrouwbaarheid van de conversie en de defibrillatiedrempel (DFT) van de patiënt vast te stellen.
- De arts bepaalt wat een betrouwbare conversie inhoudt. Aangezien de resultaten van een enkelvoudige test een gevolg kunnen zijn van statistische variatie, voorspelt een eenmalige conversie van een ritmestoornis bij een bepaald energieniveau niet noodzakelijkerwijze de toekomstige energieniveaus van een conversie.
- Raadpleeg de Handleiding van de arts voor de toepasselijke pulsgenerator voor richtlijnen betreffende conversietesten.
- Weeg de waarschijnlijkheid van een betrouwbare conversie in ambulante status af tegen de beschikbaarheid van de energie-instelling van de pulsgenerator en het vermogen van de patiënt om meerdere aritmie-inducties te ondergaan.
- Indien de aritmie(-ën) van een patiënt niet betrouwbaar met de lead te converteren is (zijn), zullen er voor het implanteren van een ander leadsysteem aanvullende conversietests noodzakelijk zijn.

**WAARSCHUWING:** Gebruik geen onderdeel van het leadsysteem bij het afgeven van een noodshock afkomstig van een externe bron, daar dit kan leiden tot aanzienlijke weefselbeschadiging.

- De beslissing om een leadsysteem van een pulsgenerator in een bepaalde configuratie te implanteren, dient gebaseerd te zijn op aantoonbare adequate veiligheidsmarges bij de geprogrammeerde shockenergie zoals die zijn vastgesteld bij het testen van de DFT en de energie behoefte bij cardioversie (CER). Zie de bijbehorende Handleiding van de arts voor de toepasselijke pulsgenerator voor de voorwaarden voor het testen van de DFT en de CER.
- Klinisch onderzoek geeft aan dat bij het merendeel van de patiënten een geprogrammeerde veiligheidsmarge van 9–10 J boven de DFT van de patiënt werd aangehouden. Overweeg het plaatsen van een alternatief defibrillatieleadsysteem, als er geen veiligheidsmarge van 9–10 J kan worden bereikt.

**OPMERKING:** *Indien er na langdurig en herhaaldelijk induceren van VF een thoracotomie dient te worden uitgevoerd, dient overwogen te worden dit op een later tijdstip te doen.*

## Vasthechten van de lead

Nadat de elektrodes correct geplaatst zijn, gebruikt u de fixatiemanchet om de lead vast te maken en permanente hemostase en een stabiele lead te verkrijgen. De bevestigingstechnieken voor de fixatiemanchet kunnen variëren afhankelijk van de techniek die voor het inbrengen van de lead is toegepast. Houd rekening met de volgende waarschuwingen tijdens het vastmaken van de lead.

**WAARSCHUWING:** Bescherm de lead tegen knikken of torsie, en bundel de lead niet samen met andere leads; de lead-isolatie zou door schuren beschadigd kunnen raken of zou de geleider kunnen beschadigen.

**VOORZICHTIG:** Vermijd te strakke fixatie bij het afbinden van de vene. Een te strakke ligatuur kan de isolatie beschadigen of de vene afsnijden. Vermijd dat de tip van de elektrode tijdens de verankeringsprocedure losraakt.


**VOORZICHTIG:** Leg geen ligaturen direct over de leadbody, omdat dit structurele schade kan veroorzaken. Gebruik de fixatiemanchet om de lead proximaal aan de veneuze ingang te fixeren om zo te voorkomen dat de lead beweegt.

**VOORZICHTIG:** Vermijd het verwijderen of wegsnijden van de fixatiemanchet van de lead. Als de fixatiemanchet verwijderd moet worden, wees dan voorzichtig dat u de lead niet beschadigt.

**VOORZICHTIG:** Het gebruik van meerdere fixatiemanchetten werd niet geëvalueerd en wordt niet aanbevolen.

### **Percutane implantatietechniek**

1. Verwijder de introducer-sheath en schuif de fixatiemanchet tot diep in het weefsel (Figuur 9 op pagina 25).

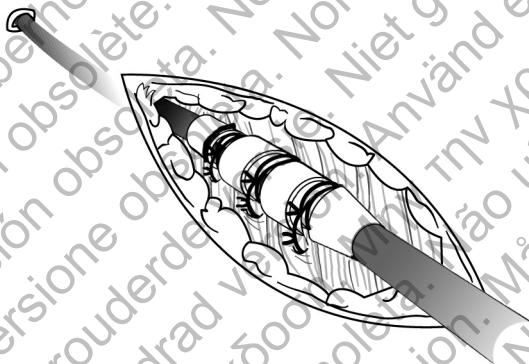


**Figuur 9. Voorbeeld van een fixatiemanchet, percutane implantatietechniek**

2. Bind de fixatiemanchet en de lead af aan de fascia door middel van minstens twee groeven. Voor bijkomende stabiliteit kan de manchets eerst bevestigd worden aan de lead en daarna aan de fascia.
3. Controleer of de fixatiemanchet goed is bevestigd en niet wegglijdt door deze met de vingers vast te houden en te proberen de lead in beide richtingen te bewegen.

### **Venasectietechniek**

1. Schuif de fixatiemanchet in de vene tot voorbij de distale groef.
2. Bind de vene rond de fixatiemanchet om hemostase te bereiken.
3. Fixeer vervolgens met gebruikmaking van dezelfde groef de lead en de vene aan de aanliggende fascia (Figuur 10 op pagina 26).

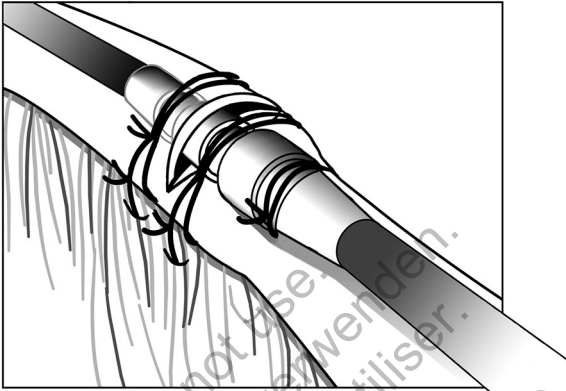


**Figuur 10. Voorbeeld van fixatiemanchet, venasectie-techniek**

4. Gebruik ten minste twee groeven om de manchets aan de lead vast te maken. Maak de lead en de fixatiemanchet vast aan de aanliggende fascia.
5. Controleer of de fixatiemanchet goed is bevestigd en niet wegglijdt door deze met de vingers vast te houden en te proberen de lead in beide richtingen te bewegen.

### **De lead tunnels**

Volg deze stappen bij het tunnelen van de lead:

1. Zorg er bij het vastzetten van de leads aan het lichaamsweefsel voor dat de lead aan de laterale kant van de fixatiemanchet, bij de insteekplaats in de ader, voldoende speling heeft. Hiermee wordt voorkomen dat de lead losraakt door het gewicht van de pulsgenerator of door armbewegingen.

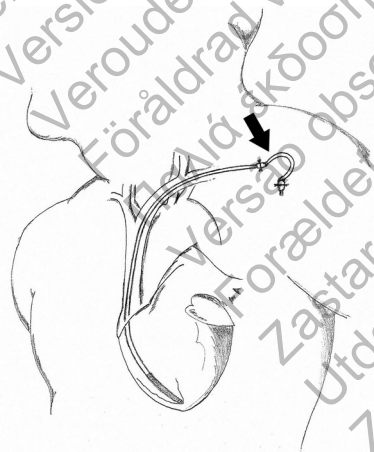

**Figuur 11. Ontspanningslus**

**WAARSCHUWING:** Hanteer, voor DF4-LLHH of DF4-LLHO leads, de leadconnector voorzichtig als het connectorinstrument niet op de lead aanwezig is. Breng de leadconnector niet rechtstreeks in contact met chirurgische instrumenten of elektrische aansluitingen zoals PSA (krokodillen-) bekjes, ecg-verbindingen, tangen, vaatklemmen en klemmen. Dit kan de leadconnector beschadigen en mogelijk de integriteit van de afsluiting in gevaar brengen, maar ook resulteren in een verlies van therapie of onterechte therapie, zoals een hoog-voltagekortsluiting binnen in de header.

2. Verwijder het stilet en connectorinstrument.

**OPMERKING:** *Als de pulsgenerator verder weg van de insertieplaats van de vene wordt geïmplant, is een compatibele tunnelingtip aanbevolen wanneer deze lead wordt gebruikt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen voor de tunnelingtip en/of tunneler kit als er één wordt gebruikt. Dop de lead niet af als er een compatibele tunnelingtip wordt gebruikt.*

3. Plaats een dop op de leadconnector als er geen tunnelingtip en/of tunneler kit wordt gebruikt. Neem de connectorpin vast met een vaatklem of iets gelijkaardig.

**WAARSCHUWING:** Maak behalve met de connectorpin geen contact met een ander deel van de DF4-LLHH of DF4-LLHO leadconnector, zelfs als de leaddop is aangebracht.

4. Tunnel de lead zachtjes subcutaan uit de insertieplaats van de vene naar de implantatiepocket.

**VOORZICHTIG:** Tunnel de lead altijd vanaf de borst naar de implantatieplaats van de pulsgenerator. Nooit de lead tunnelen vanuit de implantatieplaats van de pulsgenerator naar de borst. Hierdoor kunnen de elektroden en/of de leadbody beschadigd raken doordat de lead permanent wordt gestrekt.

**VOORZICHTIG:** Voorkom dat er bij het tunnelen van de lead te veel spanning op de lead wordt uitgeoefend. Dit zou het materiaal en/of de geleiding kunnen aantasten.

**VOORZICHTIG:** Evalueer na het tunnelen de lead opnieuw om te controleren dat er geen aanzienlijke wijzigingen zijn opgetreden bij of schade is aangericht aan de lead tijdens de tunnelingprocedure. Bevestig het connectorinstrument opnieuw en herhaal de stappen voor het evalueren van de elektrische prestatie van de lead.

**OPMERKING:** *Zet tijdelijk een dop op de leadconnector indien het tunnelen uitgesteld moet worden, en maak een tijdelijke pocket voor de lead. De dop beschermt de connector en voorkomt dat lichaamsvloeistoffen in het lumen van de lead doordringen.*

5. Sluit de leadconnectors opnieuw aan op de pulsgenerator en evalueer de leadsignalen met de pulsgenerator zoals eerder beschreven.

- Controleer de elektrische aansluitingen als de meetresultaten niet acceptabel zijn. Een niet-continu of abnormaal signaal kan betekenen dat de lead los is geraakt, dat de verbinding niet vastzit of de lead beschadigd is.

- Verplaats, indien nodig, de leadelektrodes totdat er aanvaardbare waarden worden verkregen. Om de lead te verplaatsen, trekt u het getunnelde deel voorzichtig terug naar de veneuze ingang. Maak de permanente ligaturen los en verplaats de lead volgens de hierboven beschreven procedures.

---

## NA DE IMPLANTATIE

### Evaluatie na de implantatie

Voer een controle-evaluatie uit zoals wordt aanbevolen in de Handleiding voor de arts van de betreffende pulsgenerator.

**VOORZICHTIG:** Bij sommige patiënten vormen de prestaties van de lead bij de implantatie mogelijk geen maatstaf voor de prestaties van de lead in de chronische status. Derhalve wordt er ten sterkste aangeraden om na de implantatie een EF-test uit te voeren indien er wijzigingen zouden optreden in de leadprestatie. Deze test dient ten minste één aritmie-inductie/conversietest van ventrikelfibrilleren te omvatten.

**WAARSCHUWING:** Zorg dat er tijdens de post-implantatietesten van het apparaat een externe defibrillator en medisch personeel dat bedreven is in CPR aanwezig is voor het geval dat de patiënt reanimatie nodig heeft.

**OPMERKING:** *Na langere tijd kan het herpositioneren van de lead problemen opleveren vanwege het binnendringen van lichaamsvloeistoffen of fibrotisch weefsel.*

### Explantatie

**OPMERKING:** *Alle geëxplanteerde pulsgeneratoren en leads moeten naar Boston Scientific worden teruggestuurd. Onderzoek van geëxplanteerde pulsgeneratoren en leads kan informatie opleveren voor verdere verbetering van de betrouwbaarheid van het systeem en garantieoverwegingen.*

**WAARSCHUWING:** Niet opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren kan de structurele integriteit van het apparaat aantasten en/of tot defecten van het apparaat leiden, die verwondingen, ziekte of overlijden van de patiënt tot resultaat kunnen hebben. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren kan ook een besmettingsrisico veroorzaken van het apparaat en/of infectie van de patiënt of kruisinfectie veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot de overdracht van infectieziekte(n) van de ene patiënt naar de andere. Besmetting van het apparaat kan leiden tot verwonding, ziekte of overlijden van de patiënt.

Neem contact op met Boston Scientific als het volgende zich voordoet:

- Als een product buiten werking wordt gesteld.
- Bij het overlijden van een patiënt (ongeacht de oorzaak), samen met een autopsieverlag, indien deze werd uitgevoerd.
- Voor andere redenen betreffende observatie of complicaties.



**OPMERKING:** Het verwijderen van geëxplanteerde pulsgeneratoren en/of leads is onderhevig aan de geldende wetten en regelgevingen. Neem voor een Returned Product Kit contact op met Boston Scientific; u vindt de informatie op de achterkant.

Houd rekening met de volgende onderdelen als u de pulsgenerator en/of de lead explanteert en terugstuurt:

- Vraag de pulsgenerator op en druk het Gecombineerde controlerapport af.
- Stel de pulsgenerator vóór explantatie buiten werking.
- Koppel de leads van de pulsgenerator los.
- Als de leads ook geëxplanteerd worden, probeer ze dan in hun geheel te verwijderen, en stuur ze terug ongeacht de toestand. Verwijder de leads niet met vaatklemmen of andere klemmen die de leads zouden kunnen beschadigen. Gebruik uitsluitend instrumenten als handmatige verwijdering onmogelijk blijkt.
- Was de pulsgenerator en de leads met een desinfecterende oplossing - vermijd onderdompelen - om lichaamsvloeistoffen en weefselresten te verwijderen. Zorg dat er geen vloeistof in de leadautgangen van de pulsgenerator terechtkomt.
- Gebruik een Returned Product Kit van Boston Scientific voor het correct verpakken van de pulsgenerator en stuur het naar Boston Scientific.

## SPECIFICATIES

### Specificaties (Nominaal)

Tabel 4. Modelnummer en leadlengte

Model	Single coil/Dual coil	ePTFE-gecoate coil(s)	Lengte
0665	Dual coil	Nee	59 cm
0636	Dual coil	Nee	64 cm
0682	Single coil	Ja	59 cm
0683	Single coil	Ja	64 cm
0654	Single coil	Ja	70 cm
0685	Dual coil	Ja	59 cm
0686	Dual coil	Ja	64 cm
0655	Dual coil	Ja	70 cm

Tabel 5. Specificaties (Nominaal)

Kenmerken	Nominaal
Connectortype	DF4-LLHH (dual-coil modellen) DF4-LLHO (single-coil modellen)

**Tabel 5. Specificaties (Nominaal) (vervolg)**

<b>Kenmerken</b>	<b>Nominaal</b>
Compatibiliteit	Pulsgenerators met een DF4-LLHH-uitgang of GDT-LLHH-poort, waarop een DF4-LLHH- of DF4-LLHO-connector aangesloten kan worden
Fixatie	Met tines
Elektrode:	
Oppervlak distale coil	450 mm <sup>2</sup>
Oppervlak proximale coil (dual-coil modellen)	660 mm <sup>2</sup>
Oppervlak tip	3,5 mm <sup>2</sup>
Lengte van tip tot proximale coil-elektrode (dual-coil modellen)	18 cm
Lengte van tip tot distale coil-elektrode	12 mm
Diameter:	
Inbrengdiameter	2,7 mm (8F)
Isodiametrische leadbody	2,4 mm (7,3F)
Materiaal:	
Uitwendige isolatie	Siliconenrubber
Connectorvorm	Polyurethaan (75D)
Connectorpin en ringcontacten	MP35N nikkel-kobaltlegering
Stimulatie-/detectiegeleider	MP35N nikkel-kobaltlegering, PTFE-gecoat
Shockgeleider	Getrokken gevulde kabelbuis, ETFE-gecoat
Tip-elektrode	IROX-gecoate (iridiumoxide) Pt-Ir
Distale hulpelektrode	Titanium
Coil-elektrode bedekking (modellen met ePTFE-gecoate coils)	ePTFE
Coil bekleding (modellen zonder ePTFE-gecoate coils)	Siliconen
Steroïde	0,97 mg dexamethasonacetaat
Maximale weerstand van leadgeleider:	
Van (laag voltage) connectorpin naar distale tip-elektrode	80 Ω

**Tabel 5. Specificaties (Nominaal) (vervolg)**

Kenmerken	Nominaal
Van (laag voltage) proximaal connector-ringcontact naar distale tip-elektrode	80 $\Omega$
Van (hoog voltage) middelste connector-ringcontact naar distale coil-elektrode	2,5 $\Omega$
Van (hoog voltage) distale connector-ringcontact naar proximale coil-elektrode (dual-coil modellen)	2,5 $\Omega$

## Lead-introducer

**Tabel 6. Lead-introducer**

Aanbevolen lead-introducer	
Introducer zonder voerdraad <sup>a</sup>	8F (2,7 mm)

a. Als u een voerdraad in positie laat, is een introducer die 2,5F groter is aanbevolen.

## Symbolen op verpakking

De volgende symbolen kunnen weergegeven worden op de verpakking en etikettering (Tabel 7 op pagina 31):

**Tabel 7. Symbolen op verpakking**

Symbool	Beschrijving
	Referentienummer
	Serienummer
	Vervaldatum
	Lotnummer
	Productiedatum
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide
	Niet opnieuw steriliseren
	Niet opnieuw gebruiken

**Tabel 7. Symbolen op verpakking (vervolg)**

Symbol	Beschrijving
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
<b>CE 0086</b>	CE-conformiteitsmerkteken met de identificatie van de op de hoogte gebrachte groep die het gebruik van het merkteken goedgeurt
	Instructies voor het openen van de verpakking
	Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Fabrikant
	Adres Australische sponsor

ated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsolète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívať.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

ated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsolète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívať.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

ated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsolète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke anvendes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívať.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

# Boston Scientific



Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA, Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
Botany NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2012 Boston Scientific or its affiliates.

All rights reserved.  
350063-031/NL Europe 2012-08

CE0086

Authorized 2012

