



Belangrijke informatie betreffende software-update COGNIS 100-D TELIGEN 100

Voordat u deze pulsgenerator uitleest, controleert u of de PRM softwareapplicatie model 2868 versie 1.03 of recenter op de PRM is geïnstalleerd. Als de pulsgenerator wordt uitgelezen met een eerdere versie van de software kan de PRM ongeldige parameterwaarden detecteren.

Als dit voorkomt, zal de PRM een bericht weergeven waarin wordt vermeld dat de pulsgeneratorinstellingen niet kunnen worden weergegeven. Bij het sluiten van dit berichtenvenster worden alle programmeerbare parameters automatisch geprogrammeerd op standaardwaarden en de PRM zal de pulsgenerator opnieuw uitlezen om ervoor te zorgen dat de standaardwaarden correct worden geprogrammeerd.

Als eenmaal de standaardwaarden zijn ingesteld, bekijk deze en herprogrammeer de pulsgeneratorinstellingen, indien nodig, zodat deze klinisch geschikt zijn voor uw patiënt. U kunt het Post-shock Stimulatie-uitstel niet opnieuw programmeren; dit wordt definitief gewijzigd van 2,25 seconden naar 3 seconden.

Als dit zich blijft voordoen, neem dan contact op met Boston Scientific.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358009-006 NL 06/08

