



Vigtig information om softwareopdatering COGNIS 100-D TELIGEN 100

Inden denne impulsgenerator interrogeres, skal det kontrolleres, at softwareapplikation version 1.03 eller en senere version er installeret på programmer model 2868.

Hvis impulsgeneratoren interrogeres med en tidligere version af softwaren, kan programmeren detektere ugyldige parameterværdier.

Hvis dette forekommer, viser programmeren en meddelelse om, at impulsgeneratorens indstillinger ikke kunne vises. Når meddelelsesvinduet lukkes, bliver alle programmerbare parametre automatisk programmeret til standardværdierne, og programmeren interrogerer impulsgeneratoren igen for at sikre, at det lykkedes at programmere standardværdierne.

Når standardværdierne er blevet indstillet, skal impulsgeneratorens indstillinger gennemgås og omprogrammeres til de indstillinger, der er klinisk velegnede for patienten. Det er ikke muligt at omprogrammere Post-Shock Pacing Delay, der bliver ændret permanent fra 2,25 sekunder til 3 sekunder.

Kontakt Boston Scientific, hvis dette fortsat forekommer.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358009-010 DA 06/08

