

SUPPLÉMENT AU GUIDE D'UTILISATION

LUX-Dx™

Système de surveillance cardiaque insérable

REF M301, 2925, 2935

Ces sous-sections de la section **APPLICATION DU CENTRE** du chapitre **Applications mobiles** du manuel du médecin LUX-Dx ont été mises à jour.

Configuration

Pour configurer l'application du centre :

1. Mettez le dispositif mobile en marche.
2. Appuyez sur l'icône de l'application **LUX Clinique** pour ouvrir cette dernière. Un écran s'affiche, indiquant que la langue est définie sur l'anglais.
Astuce concernant l'écran tactile : Appuyez doucement et rapidement sur l'écran du bout du doigt. N'utilisez pas votre ongle.
3. Pour continuer avec l'anglais comme paramètre de langue, appuyez sur **NEXT** et passer à l'étape suivante.
Pour modifier le paramètre de langue, appuyez sur **CHANGE LANGUAGE** et effectuez les opérations suivantes :
 - a. Sélectionnez votre langue favorite en effleurant la langue de votre choix, puis effleurez **APPLY**. Un écran s'affiche dans la langue sélectionnée indiquant la langue que vous avez choisie.
 - b. Appuyez sur **SUIVANT**.
4. Appuyez sur le bouton **DÉMARRER LA CONFIGURATION** sur l'écran **Bienvenue !**.
Suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE : Si l'application ne parvient pas à se connecter au serveur à l'aide d'une connexion cellulaire, elle invite l'utilisateur à se connecter au Wi-Fi pour achever la configuration.

5. Un message vous confirmera que la configuration est terminée. Appuyez sur **CONTINUER**.

Se connecter au Wi-Fi

Connectez-vous au Wi-Fi à tout moment en suivant les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton d'accueil du dispositif mobile.
2. Appuyez sur l'icône Réglages dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Wi-Fi**.
4. Si une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche, appuyez pour sélectionner un réseau dans la liste.
5. Suivez les instructions à l'écran. Vous serez peut-être invité à saisir un mot de passe réseau pour vous connecter.
6. L'écran indique que le dispositif mobile est connecté au Wi-Fi.
7. Appuyez sur le bouton d'accueil de votre dispositif mobile.
8. Appuyez sur l'icône **LUX Clinique** pour revenir à l'application.

Sécuriser l'écran du dispositif mobile

Sur un dispositif mobile Boston Scientific, il est possible de verrouiller l'écran du dispositif mobile pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à l'application du centre :

1. Appuyez sur le bouton d'accueil du dispositif mobile.
2. Appuyez sur l'icône Réglages dans le coin supérieur droit de l'écran de votre application.
3. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
4. Appuyez sur pour sélectionner la méthode à utiliser (par exemple, code PIN, mot de passe) et suivez les instructions à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton d'accueil du dispositif mobile.
6. Appuyez sur l'icône **LUX Clinique** pour revenir à l'application.

Changer la langue

Sur un dispositif mobile Boston Scientific, le paramétrage de la langue est sélectionné lors de la configuration de l'application. Modifiez le paramètre de la langue à tout moment en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton d'accueil du dispositif mobile.
2. Appuyez sur l'icône Réglages dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Appuyez sur **Langue** sur cet écran et sur l'écran suivant.
4. Sélectionnez votre langue favorite en effleurant la langue de votre choix, puis effleurez **APPLIQUER**. Un écran s'affiche dans la langue sélectionnée indiquant la langue que vous avez choisie.
5. Appuyez sur le bouton d'accueil du dispositif mobile.
6. Appuyez sur l'icône **LUX Clinique** pour revenir à l'application.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000
www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

CE 2797

© 2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

51676508-002 FR

2023-06

