



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ LATITUDE™,
ΜΟΝΤΕΛΟ 3300
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ***

*Τεχνικά Εγχειρίδια Ιατρού και Οδηγός Αναφοράς

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versija. Neizmantot.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Το παρόν συμπληρωματικό εγχειρίδιο παρέχει μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση των βασικών διαφορών μεταξύ του Συστήματος προγραμματισμού ZOOM® LATITUDE, Μοντέλο 3120, και του Συστήματος προγραμματισμού LATITUDE, Μοντέλο 3300 (ενδέχεται να μην διατίθεται ακόμα σε όλες τις χώρες).

Τα τρέχοντα εγχειρίδια της γεννήτριας ερεθισμάτων περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες όταν η γεννήτρια χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Σύστημα προγραμματισμού, Μοντέλο 3120 και έναν Αναλυτή Συστήματος Βηματοδότησης (PSA), Μοντέλο 3145. Αυτή η βιβλιογραφία συμπληρώνει το περιεχόμενο των εγχειριδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σύστημα προγραμματισμού, Μοντέλο 3300 διαθέτει τις ίδιες βασικές δυνατότητες και την ίδια προοριζόμενη χρήση με το Σύστημα προγραμματισμού, Μοντέλο 3120 (Σχήμα 1).


Κύριοι Πόροι

Το Σύστημα προγραμματισμού LATITUDE, Μοντέλο 3300 περιγράφεται από χωριστά εγχειρίδια. Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω στοιχεία:

- Εγχειρίδιο Χειριστή του Συστήματος προγραμματισμού LATITUDE, Μοντέλο 3300
- Εγχειρίδιο Χειριστή Διαχείρισης δεδομένων ασθενούς, Μοντέλο 3931
- Εγχειρίδιο Χειριστή Δικτύου και Συνδεσιμότητας, Μοντέλο 3924

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη λειτουργία του PSA, δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή του Αναλυτή Συστήματος Βηματοδότησης (PSA), Μοντέλο 3922.

Για ηλεκτρονικά αντίγραφα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.bostonscientific-labeling.com. Για έντυπα αντίγραφα, επικοινωνήστε με την Boston Scientific χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στο πίσω μέρος αυτού του συμπληρωματικού εγχειριδίου.

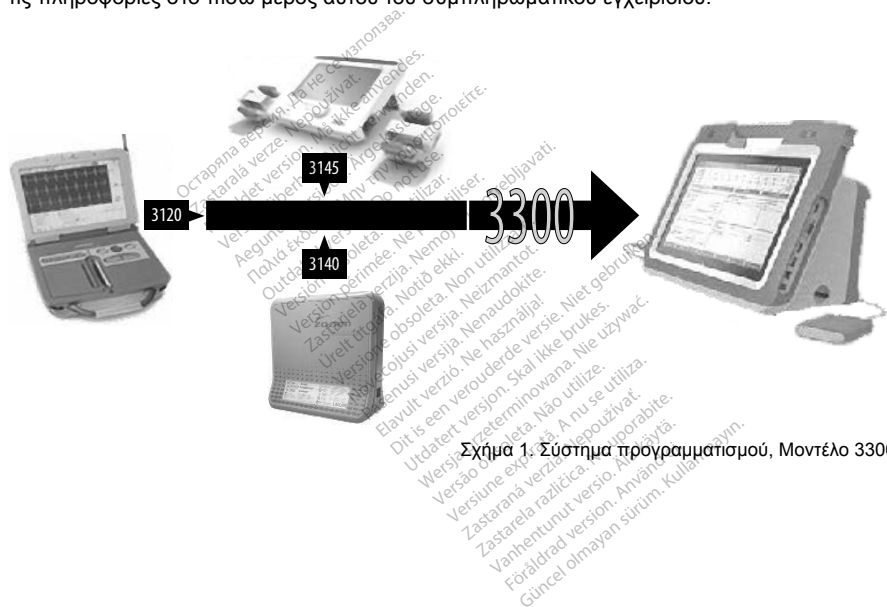

Σχήμα 1. Σύστημα προγραμματισμού, Μοντέλο 3300

Βασικές διαφορές

Λογισμικό

- Η εφαρμογή υποστήριξης ICD/CRT-D, Μοντέλο 3868 αντικαθιστά την εφαρμογή, Μοντέλο 2868.
 - Το Μοντέλο 3868 αντικαθιστά επίσης το Μοντέλο 2868 όσον αφορά το αναγνωριστικό ακτίνων X της γεννήτριας ερεθισμάτων (PG).
- Η εφαρμογή υποστήριξης Βηματοδότη/CRT-P, Μοντέλο 3869 αντικαθιστά την εφαρμογή, Μοντέλο 2869.
 - Το Μοντέλο 3869 αντικαθιστά επίσης το Μοντέλο 2869 όσον αφορά το αναγνωριστικό ακτίνων X της γεννήτριας ερεθισμάτων (PG).
- Η εφαρμογή λογισμικού του συστήματος, Μοντέλο 3909 με εφαρμογή γρήγορης εκκίνησης αντικαθιστά την εφαρμογή, Μοντέλο 3923.

Δίκτυα

- Η ασύρματη μεταφορά των δεδομένων του ασθενούς μέσω Bluetooth® είναι πλέον εφικτή.

Πλήκτρα

- Το κουμπί RED STAT αντικαθιστά τα πλήκτρα λειτουργίας STAT PACE (Άμεση Βηματοδότηση), STAT SHOCK (Άμεση Εκκένωση) και DIVERT THERAPY (Εκτροπή Θεραπείας). Παρέχει υποστήριξη για τις λειτουργίες STAT Pace (Άμεση Βηματοδότηση) του PSA, STAT Pace (Άμεση Βηματοδότηση), STAT Shock (Άμεση Εκκένωση) και Divert (Εκτροπή).

- Τα πλήκτρα λειτουργίας INTERROGATE (Ανάκτηση δεδομένων) και PROGRAM (Προγραμματισμός) αντικαθίστανται με προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
- Η λειτουργία δημιουργίας αρχείου καταγραφής σε πραγματικό χρόνο αντικαθιστά τα πλήκτρα λειτουργίας ταχύτητας τροφοδότησης χαρτιού. Τα πλήκτρα λειτουργίας Calibrate (Βαθμονόμηση) και Baseline (Γραμμή αναφοράς) αντικαθίστανται με προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Αποθήκευση δεδομένων

- Η θύρα USB αντικαθιστά τη μονάδα/υποστήριξη δισκέτας.

Εκτύπωση

- Η υποστήριξη εξωτερικού εκτυπωτή μέσω USB και Bluetooth® αντικαθιστά την εσωτερική συσκευή καταγραφής σχεδιογράφου ταινίας.

Zoom Wireless Transmitter

- Ο ασύρματος πομπός Zoom Wireless Transmitter αντικαθίσταται από εσωτερικό υλικό εξοπλισμό.

Υποστήριξη τηλεμετρίας RF

Τα ακόλουθα Μοντέλα χρησιμοποιούν μόνο τηλεμετρία με ράβδο έως ότου πιστοποιηθεί η τηλεμετρία με συσκευή μικρής εμβέλειας (SRD) σύμφωνα με την Οδηγία για τον εξοπλισμό ραδιοσυχνοτήτων (RED) για τον προγραμματιστή Μοντέλο 3300:

Οικογένειες COGNIS / TELIGEN

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (ICD): F102, F103, F110, F111

Οικογένεια INGENIO

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277
- FORMIO: J278
- FORMIO MRI: J279
- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

Οικογένεια PROGENY

- INCEPTA (ICD): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (ICD): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

Παλαιότερες γεννήτριες ερεθισμάτων

- Ο Προγραμματιστής, Μοντέλο 3300 υποστηρίζει τις περισσότερες τρέχουσες γεννήτριες ερεθισμάτων της Boston Scientific. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Boston Scientific για να προσδιορίσετε ποια μοντέλα γεννητριών ερεθισμάτων υποστηρίζονται.

Δήλωση σημάτων κατατεθέντων

Τα ακόλουθα είναι εμπορικά σήματα της Boston Scientific Corporation ή των συνδεδεμένων εταιρειών της: LATITUDE και ZOOM.

Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth® SIG.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



92059496-008 EL 2017-02



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

AUS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.