

**SYSTEM PROGRAMOWANIA LATITUDE™
MODEL 3300
DODATEK DO PODRĘCZNIKÓW DOTYCZĄCYCH
GENERATORÓW IMPULSÓW***

*Podręczniki techniczne dla lekarzy i instrukcje obsługi

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantoj.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Pasenusi versija. Neizmaukite.
Elavult versija. Nenaudokite.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Niniejszy dodatek zawiera dokładny przegląd kluczowych różnic między systemem programowania ZOOM® LATITUDE model 3120 a systemem programowania LATITUDE model 3300 (może jeszcze nie być dostępny we wszystkich krajach).

Aktualne podręczniki dotyczące generatorów impulsów opisują funkcje i funkcjonalności w przypadku stosowania z systemem programowania model 3120 i analizatorem systemu stymulacji (PSA), tj. model 3145; niniejsza publikacja uzupełnia zawartość tych podręczników.

UWAGA: System programowania model 3300 charakteryzuje się takimi samymi podstawowymi funkcjami i zastosowaniem jak system programowania model 3120 (ilustracja 1).


Podstawowe materiały

System programowania LATITUDE model 3300 opisano w oddzielnych podręcznikach. Najpierw należy przeczytać następujące pozycje:

- Podręcznik operatora systemu programowania LATITUDE model 3300
- Podręcznik operatora narzędzia Patient Data Management (Zarządzanie danymi pacjentów) model 3931
- Podręcznik operatora sieci i połączeń model 3924

UWAGA: Informacje na temat funkcjonalności PSA zawiera Podręcznik operatora analizatora systemu stymulacji (PSA) model 3922.

Kopie elektroniczne są dostępne na stronie www.bostonscientific-elabeling.com. W celu uzyskania kopii drukowanych należy skontaktować się z firmą Boston Scientific, korzystając z informacji podanych z tyłu niniejszego dodatku.

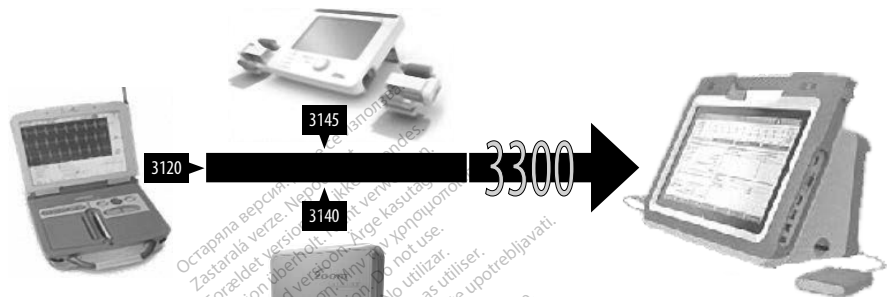

Ilustracja 1. System programowania model 3300

Kluczowe różnice

Oprogramowanie

- Aplikacja do obsługi urządzeń ICD/CRT-D model 3868 zastępuje aplikację modelu 2868.
 - Model 3868 zastępuje również model 2868 w obrębie rentgenowskiego identyfikatora generatora impulsów (PG).

- Aplikacja do obsługi stymulatora/CRT-P model 3869 zastępuje aplikację modelu 2869.
 - Model 3869 zastępuje również model 2869 w obrębie rentgenowskiego identyfikatora generatora impulsów (PG).
- Aplikacja oprogramowania systemu model 3909 z funkcją Quickstart App zastępuje aplikację modelu 3923.

Połączenia sieciowe

- Możliwe jest teraz bezprzewodowe przesyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth®.

Klawisze

- Przycisk RED STAT (Natychmiast) zastępuje fizyczne klawisze funkcyjne STAT PACE (Stymulacja natychmiastowa), STAT SHOCK (Wyładowanie natychmiastowe) i DIVERT THERAPY (Odwrócenie terapii). Umożliwia on obsługę funkcji PSA STAT Pace (Stymulacja natychmiastowa PSA), STAT Pace (Stymulacja natychmiastowa), STAT Shock (Wyładowanie natychmiastowe) i Divert (Odwrócenie).
- Fizyczne klawisze funkcyjne INTERROGATE (Pobieranie danych) i PROGRAM (Programowanie) zastąpiono klawiszami programowymi.
- Funkcja Real-time Log (Rejestr w czasie rzeczywistym) zastępuje fizyczne klawisze szybkości przesuwu papieru. Klawisze programowe zastępują fizyczne klawisze funkcyjne Calibrate (Kalibruj) i Baseline (Pomiar wyjściowy).

Przechowywanie danych

- Złącze USB zastępuje napęd/obsługę dyskiekietek.

Drukowanie

- Obsługa zewnętrznej drukarki za pośrednictwem złącza USB i technologii Bluetooth® zastępuje wewnętrzny rejestrator taśmowy.

Przekaznik Zoom Wireless Transmitter

- Wbudowany sprzęt zastępuje przekaznik Zoom Wireless Transmitter.

Obsługa telemetrii RF

Następujące modele korzystają wyłącznie z sondy telemetrycznej, chyba że programator model 3300 jest certyfikowany do obsługi telemetrii urządzeń bliskiego zasięgu (ang. Short Range Device, SRD) zgodnie z wymogami Dyrektywy ws. urządzeń radiowych (ang. Radio Equipment Directive, RED):

Rodzina COGNIS/TELIGEN

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (ICD): F102, F103, F110, F111

Rodzina INGENIO

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277

- FORMIO: J278
- FORMIO MRI: J279
- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

Rodzina PROGENY

- INCEPTA (ICD): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (ICD): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

Starsze generatory impulsów

- Programator model 3300 obsługuje najnowsze generatory impulsów firmy Boston Scientific. W razie potrzeby należy skontaktować się z firmą Boston Scientific, aby ustalić, które modele generatorów impulsów są obsługiwane.

Oświadczenie dotyczące znaków towarowych

Poniższe znaki towarowe należą do firmy Boston Scientific Corporation lub jej spółek zależnych: LATITUDE i ZOOM.

Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth® SIG.

Остаряна версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Änge kasutage.
Πολύ έξδωση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Zastariela verzija. Ne pas utilizati.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne használjat.
Pasenusi versija. Neizmantoj.
Elavult versio. Skal ikke brukes.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Neizmantoj.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne utilizare.
Elavult versio. Neizmantot.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



92059496-012 PL 2017-02



WYTWÓRCA

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

MIEJSCE WYTWORZENIA

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

AUS

ADRES SPONSORA AUSTRALUSKIEGO

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.