

**Boston
Scientific**

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ LATITUDE™,
ΜΟΝΤΕΛΟ 3300
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ***

Τεχνικά Εγχειρίδια Ιατρού και Οδηγός Αναφοράς

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποι
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Το παρόν συμπληρωματικό εγχειρίδιο παρέχει μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση των βασικών διαφορών μεταξύ του Συστήματος προγραμματισμού ZOOM® LATITUDE, Μοντέλο 3120, και του Συστήματος προγραμματισμού LATITUDE, Μοντέλο 3300 (ενδέχεται να μην διατίθεται ακόμα σε όλες τις χώρες).

Τα τρέχοντα εγχειρίδια της γεννήτριας ερεθισμάτων περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες όταν η γεννήτρια χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Σύστημα προγραμματισμού, Μοντέλο 3120 και έναν Αναλυτή Συστήματος Βηματοδότησης (PSA), Μοντέλο 3145. Αυτή η βιβλιογραφία συμπληρώνει το περιεχόμενο των εγχειριδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σύστημα προγραμματισμού, Μοντέλο 3300 διαθέτει τις ίδιες βασικές δυνατότητες και την ίδια προοριζόμενη χρήση με το Σύστημα προγραμματισμού, Μοντέλο 3120 (Σχήμα 1).


Κύριοι Πόροι

Το Σύστημα προγραμματισμού LATITUDE, Μοντέλο 3300 περιγράφεται από χωριστά εγχειρίδια. Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω στοιχεία:

- Εγχειρίδιο Χειριστή του Συστήματος προγραμματισμού LATITUDE, Μοντέλο 3300
- Εγχειρίδιο Χειριστή Διαχείρισης δεδομένων ασθενούς, Μοντέλο 3931
- Εγχειρίδιο Χειριστή Δικτύου και Συνδεσιμότητας, Μοντέλο 3924

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη λειτουργία του PSA, δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή του Αναλυτή Συστήματος Βηματοδότησης (PSA), Μοντέλο 3922.

Για ηλεκτρονικά αντίγραφα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.bostonscientific-labeling.com. Για έντυπα αντίγραφα, επικοινωνήστε με την Boston Scientific χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στο πίσω μέρος αυτού του συμπληρωματικού εγχειριδίου.

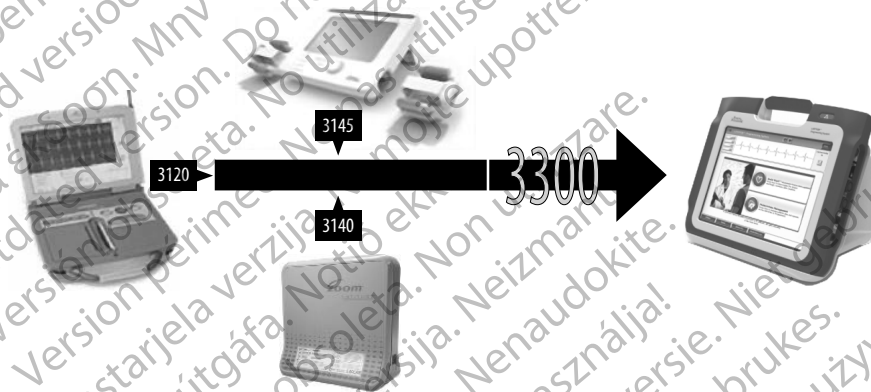

Σχήμα 1. Σύστημα προγραμματισμού, Μοντέλο 3300

Βασικές διαφορές

Λογισμικό

- Η εφαρμογή υποστήριξης ICD/CRT-D, Μοντέλο 3868 αντικαθιστά την εφαρμογή, Μοντέλο 2868.
 - Το Μοντέλο 3868 αντικαθιστά επίσης το Μοντέλο 2868 όσον αφορά το αναγνωριστικό ακτίνων X της γεννήτριας ερεθισμάτων (PG).
- Η εφαρμογή υποστήριξης Βηματοδότη/CRT-P, Μοντέλο 3869 αντικαθιστά την εφαρμογή, Μοντέλο 2869.
 - Το Μοντέλο 3869 αντικαθιστά επίσης το Μοντέλο 2869 όσον αφορά το αναγνωριστικό ακτίνων X της γεννήτριας ερεθισμάτων (PG).
- Η εφαρμογή λογισμικού του συστήματος, Μοντέλο 3909 με εφαρμογή γρήγορης εκκίνησης αντικαθιστά την εφαρμογή, Μοντέλο 2909.

Δίκτυα

- Η ασύρματη μεταφορά των δεδομένων του ασθενούς μέσω Bluetooth® είναι πλέον εφικτή.

Πλήκτρα

- Το κουμπί RED STAT αντικαθιστά τα πλήκτρα λειτουργίας STAT PACE (Άμεση Βηματοδότηση), STAT SHOCK (Άμεση Εκκένωση) και DIVERT THERAPY (Εκτροπή Θεραπείας). Παρέχει υποστήριξη για τις λειτουργίες STAT Pace (Άμεση Βηματοδότηση) του PSA, STAT Pace (Άμεση Βηματοδότηση), STAT Shock (Άμεση Εκκένωση) και Divert (Εκτροπή).

- Τα πλήκτρα λειτουργίας INTERROGATE (Ανάκτηση δεδομένων) και PROGRAM (Προγραμματισμός) αντικαθίστανται με προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
- Η λειτουργία δημιουργίας αρχείου καταγραφής σε πραγματικό χρόνο αντικαθιστά τα πλήκτρα λειτουργίας ταχύτητας τροφοδότησης χαρτιού. Τα πλήκτρα λειτουργίας Calibrate (Βαθμονόμηση) και Baseline (Γραμμή αναφοράς) αντικαθίστανται με προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Αποθήκευση δεδομένων

- Η θύρα USB αντικαθιστά τη μονάδα/υποστήριξη δισκέτας.

Εκτύπωση

- Η υποστήριξη εξωτερικού εκτυπωτή μέσω USB και Bluetooth® αντικαθιστά την εσωτερική συσκευή καταγραφής σχεδιογράφου ταινίας.

Zoom Wireless Transmitter

- Ο ασύρματος πομπός Zoom Wireless Transmitter αντικαθίσταται από εσωτερικό υλικό εξοπλισμό.

Παλαιότερες γεννήτριες ερεθισμάτων

- Ο Προγραμματιστής, Μοντέλο 3300 υποστηρίζει τις περισσότερες τρέχουσες γεννήτριες ερεθισμάτων της Boston Scientific. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Boston Scientific για να προσδιορίσετε ποια μοντέλα γεννητριών ερεθισμάτων υποστηρίζονται.

Δήλωση σημάτων κατατεθέντων

Τα ακόλουθα είναι εμπορικά σήματα της Boston Scientific Corporation ή των συνδεδεμένων εταιρειών της: LATITUDE και ZOOM.

Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth® SIG.

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποι
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Boston Scientific



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ
Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

EC REP

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΘΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666



92059496-027 EL 2017-08

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.