

KÄYTTÄJÄN OPAS

# Heart Connect™ System

REF 3932, 3300, 3935, 3936, 3937

рсия. Да не се използва.  
erze. Nepoužívajte.  
version. Må ikke anvendes.  
n überholt. Nicht verwenden.  
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreлт útгáфа. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.  
Zastarana verzija. Nepoužívajte.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd  
ancel olmayan sürüm. K

# Sisällysluettelo

<b>JOHDANTO</b> .....	<b>1</b>
Tavaramerkkilausekkeet .....	1
Käyttötarkoitus .....	2
Kohderyhmä .....	2
Kontraindikaatiot .....	2
Varoitukset .....	2
Varotoimenpiteet .....	2
Haittavaikutukset .....	2
Miten Heart Connect -järjestelmä toimii .....	2
Turvallisuus .....	3
Käyttäjäroolit .....	3
Osat .....	4
Järjestelmän rajoitukset ja huomioon otettavat asiat .....	4
<b>PAIKALLINEN KÄYTTÄJÄ: HEART CONNECT -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÄMINEN</b> .....	<b>5</b>
Internetyhteyden määrittäminen .....	6
Heart Connect -järjestelmän yhteyshenkilöt .....	6
Online-kokouksen aloittaminen .....	7
Online-kokouksen pitäminen .....	9
Paikallisen Heart Connect -ohjelmiston kunnossapito .....	12
<b>ETÄKÄYTTÄJÄ: HEART CONNECT -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÄMINEN</b> .....	<b>12</b>
Käyttäjätilin luominen .....	13
Heart Connect -etäohjelmiston asentaminen .....	13
Yhteyshenkilökutsujen hyväksyminen .....	13
Online-kokouspuheluiden vastaanottaminen .....	14
Online-kokouksiin liittyminen .....	14
Online-kokouksiin osallistuminen .....	14
Heart Connect -etäohjelmiston kunnossapito .....	17
<b>LISÄTIETOJA</b> .....	<b>17</b>
Euroopan unionin maahantuojat .....	17

рсия. Да не се използва.  
erze. Nepoužívajte.  
version. Må ikke anvendes.  
n überholt. Nicht verwenden.  
unud version. Ärge kasutage.  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.


Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úrejt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Versione expirată. A nu se utiliza.  
Zastaraná verzija. Nepoužívajte.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd  
ancel olmayan sürüm. K

## JOHDANTO

Tämä opas sisältää tietoa Heart Connect™ -järjestelmän käyttöönottamisesta ja käyttämisestä. Pyydä Heart Connect -järjestelmän käyttöoikeuden aktivointia Boston Scientificin edustajalta tai Boston Scientificilta käyttämällä tämän oppaan takakannen tietoja.

Seuraava kuva esittää Heart Connect -järjestelmän osien yleiskuvan ja liittämistavan.

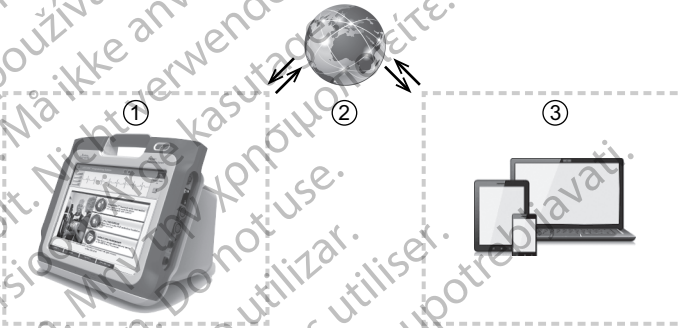

[1] LATITUDE™-ohjelmointijärjestelmä, malli 3300 [2] Internet [3] Etäkäyttäjän yhteensopivat laitteet (eivät sisälly toimitukseen) Heart Connect -etäohjelmiston käyttämiseen

### Kuva 1. Heart Connect -järjestelmän osat

Heart Connect -järjestelmä koostuu paikallisesta käyttäjästä ja yhdestä tai useasta etäkäyttäjästä.

- Paikallisen käyttäjän osat koostuvat 3300-mallisesta ohjelmointilaitteesta, Heart Connect -ohjelmistosovelluksesta (malli 3932) ja internetyhteydestä.
- Etäkäyttäjän osat koostuvat yhteensopivasta laitteesta (iOS-, Android- tai Windows-käyttöjärjestelmä), johon on asennettu etäyhteysohjelmisto ja jossa on internetyhteys.

**HUOMAA:** Boston Scientific ylläpitää lisensointia Heart Connect -sovelluksen ("sovellus") asentamiseen BSC-ohjelmointijärjestelmään ("ohjelmointijärjestelmä"). Boston Scientific voi siirtää lisenssin ohjelmointilaitteesta harkintansa mukaisesti, esimerkiksi jos sovellusta käytetään rajallisesti tai ei ollenkaan.

**HUOMAA:** Tämä opas ja 3300-mallisen LATITUDE™-ohjelmointijärjestelmän käyttöoppaat ovat saatavilla verkossa osoitteessa [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com).

### Tavaramerkkilausekkeet

Heart Connect ja LATITUDE ovat Boston Scientific Corporationin tavaramerkkejä.

Tässä oppaassa mainittuja kolmansien osapuolten tavaramerkkejä koskevat tavaramerkkilausekset luetellaan alla:

- Internet Explorer ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä.
- iOS on Cisco Apple Inc:lle lisensoima tavaramerkki.

- iPhone ja iPad ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.
- Android on Google Inc:n tavaramerkki.

## Käyttötarkoitus

Heart Connect -järjestelmä on valinnainen tiedonjakojärjestelmä, joka on tarkoitettu fysiologisten ja/tai muiden lääketieteellisten tietojen jakamiseen 3300-mallisesta ohjelmointilaitteesta. Heart Connect -järjestelmä tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ja Boston Scientificin henkilöstölle keinon pitää online-kokous ja jakaa 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näyttö etäsiainnissa oleville henkilöille. Katso mallin 3300 ohjelmointilaitteen mukana tulleista käyttöohjeista lisätietoa järjestelmän klinisistä hyödyistä.

## Kohderyhmä

Nämä tiedot on tarkoitettu Heart Connect -järjestelmää käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille ja Boston Scientificin henkilöstölle.

## Kontraindikaatiot

Heart Connect -järjestelmä on vasta-aiheinen käytettynä sellaisten lääkinnällisten laitteiden kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia järjestelmän tässä oppaassa määritettyjen ominaisuuksien kanssa.

## Varoitukset

Katso kaikki varoitukset LATITUDE-ohjelmointijärjestelmän 3300-mallin käyttäjän oppaasta.

## Varotoimenpiteet

Katso lisää varotoimenpiteitä LATITUDE-ohjelmointijärjestelmän 3300-mallin käyttäjän oppaasta.

- **Potilastietojen käsittely.** Heart Connect -järjestelmä siirtää näytön sisällön, joka voi sisältää potilaan suojattuja terveystietoja. Potilastietoja saavat käsitellä vain valtuutetut terveydenhuollon ammattilaiset ja Boston Scientificin henkilöstö.

Tietoa potilastietojen suojaamisesta ja järjestelmän turvallisuudesta on kohdassa "Turvallisuus" sivulla 3.

## Haittavaikutukset

Katso haittavaikutukset LATITUDE-ohjelmointijärjestelmän 3300-mallin käyttäjän oppaasta.

## Miten Heart Connect -järjestelmä toimii

Paikallinen käyttäjä käyttää Heart Connect -järjestelmää online-kokouksen pitämiseen yhden tai useamman etäkäyttäjän kanssa. Paikallinen käyttäjä käyttää Heart Connect -sovellusta aloittaakseen kokouksen ja jakaakseen 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näytön. Etäkäyttäjä käyttää Heart Connect -etäohjelmistoa omalla laitteellaan (ei sisälly toimitukseen) nähdäkseen paikallisen käyttäjän ja kommunikoidakseen tämän kanssa.

Paikallinen käyttäjä tekee yhteistyötä ja/tai jakaa tietoja etäkäyttäjien kanssa tarvittaessa.

Paikallisen käyttäjän on käytettävä ulkoista USB-äänilaitetta (mikrofonia) ottaakseen ääniyhteyden käyttöön kokouksessa.

Vaihtoehdot:

- Jos kokouksen ääntä ei käytetä, paikallinen käyttäjä voi käyttää puhelinta kommunikoidakseen etäkäyttäjien kanssa.
- Paikallisen käyttäjän videon voi jakaa etäkäyttäjille USB-videolaitteen (kameran) avulla.
- Etäkäyttäjien ääniyhteyttä paikalliselle käyttäjälle voidaan parantaa käyttämällä USB-äänilaitetta (kaiutinta).

## Turvallisuus

Heart Connect -järjestelmä sisältää turvakeinoja potilastietojen ja järjestelmän suojaamiseen. Nämä turvatoimet tukevat yleisiä turvallisuuskäytäntöjä ja -menettelytapoja. Online-kokous, mukaan lukien mahdollisesti lähetettävät kuvat, salataan potilastietojen ja laitetietojen suojaamiseksi.

Katso *potilastietojen hallinnan käyttäjän oppaasta (malli 3931)* lisätietoa potilastietojen turvallisuudesta.

Katso *verkon ja yhteyden käyttäjän oppaasta (malli 3924)* lisätietoa verkon ja yhteyden turvallisuudesta.

## Käyttäjäroolit

### TÄRKEÄÄ:

- Paikallisen käyttäjän pitää osata käyttää LATITUDE™-ohjelmointijärjestelmää oikein, sillä verkkoyhteydessä voi ilmetä viiveitä tai katkoksia milloin tahansa. Jos paikallinen käyttäjä luottaa liikaa etäkäyttäjään, verkkoyhteyden viiveistä tai katkoksista voi seurata haittaa potilaalle.
- Paikallisen käyttäjän on täytettävä LATITUDE™-ohjelmointijärjestelmän käyttötarkoitusta vastaavan käytön pätevyysvaatimukset. Katso 3300-mallisen ohjelmointilaitteen käyttöohjeet 3300-mallisen LATITUDE™-ohjelmointijärjestelmän käyttäjän oppaasta.
- Kokouksen osallistujilla tulee olla selkeä käsitys paikallisen käyttäjän ja etäkäyttäjien potilaan hoitoon liittyvistä vastuista online-kokouksen aikana. Potilaaseen ja liitettyyn lääkinälliseen laitteeseen liittyvästi saattaa ilmetä tilanteita, jotka edellyttävät paikallisen käyttäjän pikaista reaktiota. Paikallisen käyttäjän on oltava valmistautunut toimimaan tällaisissa tilanteissa.

### Paikallinen käyttäjä

- Osaa käyttää 3300-mallista ohjelmointilaitetta oikein ja täyttää sen käyttötarkoitusta vastaavan käytön pätevyysvaatimukset.
- Aloittaa online-kokouksen, jossa jaetaan 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näyttö.
- Sijaitsee fyysisesti potilaan ja Heart Connect -sovellusta käyttävän 3300-mallisen ohjelmointilaitteen läheisyydessä.
- Määrittää äänen (puhelimella tai USB-liitäntäisellä mikrofonilla) ja videon valinnaisen USB-kameran avulla tapahtuvan käytön.

## Etäkäyttäjät(t)

- Kuka tahansa online-kokoukseen osallistuva henkilö, joka ei ole paikallinen käyttäjä. Etäkäyttäjät sijaitsevat tyypillisesti eri paikassa kuin paikallinen käyttäjä.
- Voi osallistua online-kokoukseen, mutta ei voi aloittaa online-kokousta Heart Connect -järjestelmässä.

## Kokouksen osallistuja

- Kuka tahansa online-kokoukseen osallistuja, mukaan lukien paikallinen käyttäjä ja etäkäyttäjät.

## Osat

Katso esitys Heart Connect -järjestelmän osista kohdasta Kuva 1 Heart Connect -järjestelmän osat sivulla 1.

## Paikallinen Heart Connect -järjestelmä

Paikallinen Heart Connect -järjestelmä sisältää 3300-mallisen ohjelmointilaitteen, johon on asennettu 3932-mallinen Heart Connect -sovellus.

- 3300-mallinen ohjelmointilaitte voidaan liittää internetiin etäkäyttäjien kanssa pidettäviä online-kokouksia varten.
- 3300-mallinen ohjelmointilaitte sisältää integroidun kaiuttimen<sup>1</sup>, jonka avulla etäkäyttäjät saa äänilyhteyden online-kokouksissa. Ulkoinen USB-liitäntäinen mikrofoni mahdollistaa paikallisen käyttäjän äänilyhteyden.

**HUOMAA:** Paikallinen käyttäjä voi käyttää videokameraa näyttääkseen paikallisen käyttäjän videon etäkäyttäjille.

- Heart Connect -sovelluksen avulla paikallinen käyttäjä voi pitää online-kokouksia etäkäyttäjien kanssa jakaakseen 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näytön.

## Heart Connect -etäohjelmisto

Etäkäyttäjät käyttävät Heart Connect -etäohjelmistoa online-kokouksiin osallistumiseen. Heart Connect -etäohjelmisto koostuu seuraavista sovelluksista:

- Mallin 3935 iOS-etäohjelmisto
- Mallin 3936 Android-etäohjelmisto
- Mallin 3937 työpöytäetäohjelmisto

Heart Connect -etäohjelmisto:

- sallii etäkäyttäjien osallistua online-kokouksiin, kun paikallinen käyttäjä tai muut etäkäyttäjät ovat kutsuneet heidät mukaan
- sallii etäkäyttäjien tarkastella liitetyn lääkinnällisen laitteen jaettua videonäyttöä
- asennetaan etäkäyttäjien yhteensopiville laitteille (ei toimiteta ohjelmiston mukana).

## Järjestelmän rajoitukset ja huomioon otettavat asiat

- **3300-mallinen ohjelmointilaitte.** Heart Connect -sovellus on suunniteltu jakamaan 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näyttölähtö online-kokouksen osallistujien kanssa.

1. Lisäksi paikallinen käyttäjä voi käyttää ulkoista USB-kaiutinta.



Paikallinen käyttäjä voi hallita 3300-mallisen ohjelmointilaitteen toimintoja koko Heart Connect -istunnon ajan.

- **Sisäiset ja ulkoiset tekijät.** On monia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka voivat haitata tai viivyttää 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näytön jakamista kokouksen osallistujien kanssa tai estää sen ja samoin haitata tai viivyttää Heart Connect -järjestelmän ääni-/videoyhteyttä tai estää sen. Tässä on esimerkkejä tällaisista tekijöistä:
  - **Internet.** Internetin infrastruktuurin ja internetpalveluntarjoajien laatuerot voivat vaikuttaa online-kokouksessa jaetun äänen, videon ja 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näyttötietojen laatuun ja reagointikykyyn.

**Tärkeää:** Huonolaatuinen yhteys voi aiheuttaa jaetun videonäytön tietojen näkymisen etäkäyttäjälle eriaikaisesti lääkinällisen laitteen näyttöön verrattuna. Jos paikallisen käyttäjän ja etäkäyttäjän välinen video-/ääniyhteys katkeaa, katkeamisen havaitsemisessa voi lisäksi olla noin 30 sekunnin viive. Jos yhteyden heikko laatu ei parane, ota yhteyttä paikalliseen IT-osastoon tai Boston Scientificiin.
  - **Paikallinen verkko.** Paikallisen verkon tukiasemien eri sijainnit ja laatu sekä näihin liittyvä verkon infrastruktuuri (esimerkiksi aktiivisen internetin signaalin vahvuus) tai palomuuuri voivat vaikuttaa online-kokouksessa jaetun äänen, videon ja 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näyttötietojen laatuun ja reagointikykyyn.
  - **Matkapuhelinyhteys.** Matkapuhelinyhteyttä käyttävien Heart Connect -kokouksien matkapuhelinyhteyden tulisi olla 3G tai uudempi.
  - **Pistorasian käytettävyy.** 3300-mallisen ohjelmointilaitteen asianmukaisen toiminnan varmistamisen kannalta on suositeltavaa, että käytettävissä on pistorasia, jotta paristo ei pääse tyhjenemään.
  - **Laitteet.** Online-kokouksessa jaettava ääni, video ja 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näyttötiedot voivat viivästyä tai estyä seuraavista syistä:
    - 3300-mallinen ohjelmointilaitte ei voi muodostaa luotettavaa yhteyttä internetin infrastruktuuriin.
    - Etäkäyttäjien laitteet eivät välttämättä toimi online-kokouksen tiedonsiirron tukemisen edellyttämällä tavalla.
    - Jotta 3300-mallista ohjelmointilaitetta käyttävä paikallinen käyttäjä voi käyttää ääntä, ohjelmointilaitteen käytettävissä olevaan USB-porttiin on liitettävä ulkoinen mikrofoni.
- **Verkko- ja tietoturva.** Heart Connect -järjestelmä käyttää alalla hyväksytyttä protokollia käyttäjien todentamiseen ja siirrettyjen tietojen salaamiseen. On hyvän käytännön mukaista muodostaa yhteys vain hallittuihin, turvallisiin verkkoihin. Katso *verkon ja yhteyden käyttäjän oppaasta (malli 3924)* lisätietoa verkon ja yhteyden turvallisuudesta.

---

## PAIKALLINEN KÄYTTÄJÄ: HEART CONNECT -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖNOTTO JA KÄYTTÄMINEN

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu paikalliselle käyttäjälle Heart Connect -järjestelmän osien liittämistä ja järjestelmän internetverkkoon määrittämistä varten. Apua saat ottamalla

yhteyttä Boston Scientificiin. Käytä tämän oppaan takakannen tietoja tai ota yhteyttä paikalliseen Boston Scientificin edustajaan.

## Internetyhteyden määrittäminen

Heart Connect -järjestelmä käyttää 3300-mallista ohjelmointilaitetta internetyhteyden muodostamiseen. Varmista järjestelmänvalvojalta, että Heart Connect -järjestelmä on hyväksytty käyttöön verkkoympäristössäsi.

**HUOMAA:** Määritä internetyhteys katsomalla ohjeita 3924-mallin verkon ja yhteyden käyttäjän oppaasta.

Kun Heart Connect -sovellus on valittu 3300-mallisen ohjelmointilaitteen Utilities (Apuohjelmat) -valikosta (jos yhteyden muodostaminen aiemmin määritettyyn verkkoon onnistuu ja internetyhteys toimii), Heart Connect -sovelluksen Meet Now (Aloita kokous nyt) -painike avaa Manage Meeting (Hallitse kokousta) -ikkunan.

Jos 3300-mallinen ohjelmointilaitte ei ole internetyhteydessä, kun painat Meet Now (Aloita kokous nyt) -painiketta, Connection Error (Yhteysvirhe) -ponnahdusikkunassa näkyy viesti "Please check your network" (Tarkista verkkoyhteytesi).

Alla ovat Heart Connect -sovelluksen peruskäyttöohjeet online-kokouksen aloittamiseen.

## Heart Connect -järjestelmän yhteyshenkilöt

### Boston Scientificin yhteyshenkilöt

Heart Connect -järjestelmän avulla voi ottaa yhteyttä Boston Scientificiin teknistä tukea varten. Nämä yhteyshenkilöt voi määrittää tietyille 3300-malliselle ohjelmointilaitteelle.

Boston Scientificin yhteystietoja on kahta tyyppiä:

- **Yksittäiset yhteyshenkilöt.** Tämä luettelo voi sisältää henkilöitä, kuten Boston Scientificin edustajia. Ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön soitat suoraan kyseiselle henkilölle.
- **Yhteysryhmät.** Ottamalla yhteyttä yhteysryhmään soitat valittuun yhteysryhmään kuuluville henkilöille ja yksi ryhmän jäsenistä vastaa puheluun.

Voit pyytää muutoksia Heart Connect -järjestelmän Boston Scientific -yhteysryhmiin ottamalla yhteyttä Boston Scientificiin. Käytä tämän oppaan takakannessa olevia tietoja tai ota yhteyttä Boston Scientificin paikalliseen edustajaan.

### Muut yhteyshenkilöt

Heart Connect -järjestelmän avulla voi ottaa yhteyttä muihin kuin Boston Scientificin henkilöstöön kuuluviin henkilöihin.

### Yhteyshenkilöiden lisääminen

Boston Scientificin yhteyshenkilöt ja muut yhteyshenkilöt luodaan Heart Connect -sovelluksessa, paikallisen käyttäjän 3300-mallisessa ohjelmointilaitteessa, ja niitä hallitaan sen kautta. Boston Scientific ei voi hallita niitä etäyhteydellä.

### Yhteyshenkilöiden lisääminen:

1. Paina 3300-mallisen ohjelmointilaitteen **Utilities** (Apuohjelmat) -valikossa **Heart Connect** -välilehteä, jolloin näkyviin tulee **Heart Connect** -ikkuna.
2. Paina **Meet Now** (Aloita kokous nyt), jolloin näkyviin tulee **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -ikkuna.

3. Avaa **Edit Contacts** (Muokkaa yhteyshenkilöitä) -ikkuna painamalla Edit (Muokkaa) -painiketta.
4. Avaa **Add Contact** (Lisää yhteyshenkilö) -ikkuna painamalla Add Contact Email Address (Lisää yhteyshenkilön sähköpostiosoite) -tekstin vieressä olevaa painiketta.
5. Avaa näppäimistöikkuna painamalla Email (Sähköposti) -tekstin vieressä olevaa painikealuetta.
6. Kirjoita yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja paina sitten **Accept Changes** (Hyväksy muutokset) -painiketta, jolloin näkyviin tulee **Add Contact** (Lisää yhteyshenkilö) -ikkuna.
7. Lähetä yhteyshenkilökutsu sähköpostiosoitteeseen painamalla **Add** (Lisää) -painiketta.
8. Toista vaiheita 4-7 jokaisen lisättävän yhteyshenkilön osalta.
9. Paina **Edit Contacts** (Muokkaa yhteyshenkilöitä) -ikkunassa **Close** (Sulje) -painiketta.
10. Paina **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -ikkunassa **Close** (Sulje) -painiketta.

**HUOMAA:** Jokainen yhteyshenkilö saa sähköpostikutsun, ja heidän kaikkien on hyväksyttävä kutsu, jotta heidät lisättäisiin yhteyshenkilöluetteloon. Katso lisätietoa yhteyshenkilökutsujen hyväksymisestä kohdasta "Yhteyshenkilökutsujen hyväksyminen" sivulla 13.

#### Yhteyshenkilöiden poistaminen:

1. Paina 3300-mallisen ohjelmointilaitteen **Utilities** (Apuohjelmat) -valikossa **Heart Connect** -välilehteä, jolloin näkyviin tulee **Heart Connect** -ikkuna.
2. Paina **Meet Now** (Aloita kokous nyt), jolloin näkyviin tulee **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -ikkuna.
3. Avaa **Edit Contacts** (Muokkaa yhteyshenkilöitä) -ikkuna painamalla Edit (Muokkaa) -painiketta.
4. Valitse poistettavan henkilön vieressä olevaa valintaruutua ja paina sitten **Remove selected contacts** (Poista valitut yhteyshenkilöt) -painiketta.
5. Kun **Remove Contacts** (Poista yhteyshenkilöt) -vahvistusikkuna näkyy, poista yhteyshenkilö(t) painamalla **Remove** (Poista) -painiketta.
6. Paina **Edit Contacts** (Muokkaa yhteyshenkilöitä) -ikkunassa **Close** (Sulje) -painiketta.
7. Paina **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -ikkunassa **Close** (Sulje) -painiketta.

#### Online-kokouksen aloittaminen

**HUOMAA:** Varmista, että 3300-mallinen ohjelmointilaitte on kytketty pistorasiaan tai että siinä on riittävästi paristovirtaa (vähintään 50 %) online-kokousten pitämiseen.

Ennen Heart Connect -online-kokouksen aloittamista tutki potilaan laite ja aloita istunto potilaan kanssa. Jos potilasistunto on päättynyt, myös Heart Connect -online-kokous päättyy. Tahdistinjärjestelmän testauslaite (PSA) -sovelluksen voi käynnistää, kun Heart Connect -kokous on alkanut.

**HUOMAA:** Jos Heart Connect -kokous on käynnissä ja paikallinen käyttäjä aloittaa tai lopettaa potilasistunnon, online-kokous päättyy ja paikallisen käyttäjän on aloitettava uusi Heart Connect -kokous.

**HUOMAA:** Muista päättää Heart Connect -kokous ennen sellaisten toimintojen käyttämistä,<sup>2</sup> jotka estävät pääsyn ohjelmointilaitteen näytön yläpalkkiin. Kun nämä toiminnot ovat käytössä, Heart Connect -kokous jatkuu mutta sitä ei voi päättää.

**HUOMAA:** Ulkoinen USB-äänilaite (mikrofoni) on liitettävä ohjelmointilaitteeseen, jotta paikallisen käyttäjän ääniyhteys on käytettävissä kokouksessa.

Online-kokouksen voi aloittaa kahdella eri tavalla: yhteyshenkilöiden kanssa tai ilman yhteyshenkilöitä.

### Yhteyshenkilöiden kanssa

#### Online-kokouksen aloittaminen yhteyshenkilöiden kanssa:

1. Paina Heart Connect -päänäytössä **Meet Now** (Aloita kokous nyt) -painiketta.
2. Valitse haluamasi yhteyshenkilöt.<sup>3</sup> Yhteyshenkilöitä voi valita kummastakin luettelosta.
3. Paina haluamaasi äänipainiketta – **Use Programmer audio** (Käytä ohjelmointilaitteen ääntä). Kansainvälisillä käyttäjillä vain ohjelmointilaitteen ääni on käytettävissä. Henkilökohtaista puhelinta voidaan kuitenkin käyttää kommunikoimiseen Heart Connect -kokouksen ulkopuolella.
4. Aloita kokous painamalla **Call** (Soita) -painiketta.
5. Lue palveluehdot ponnahdusikkunasta ja jatka painamalla **I Agree** (Hyväksyn) -painiketta.

Näytössä lukee, että yhteyshenkilöille soitetaan. Kokouskutsun hyväksyneet yhteyshenkilöt näkyvät nykyisen kokouksen alapuolella **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -ikkunassa ja Heart Connect -päänäytössä. Kokouskutsun hylkäävät yhteyshenkilöt näkyvät nykyisen kokouksen alapuolella merkinnällä **Call Declined** (Puhelu hylätty). Jos kutsuttu yhteyshenkilö ei vastaa noin yhteen minuuttiin, kyseisen yhteyshenkilön kutsu peruuntuu. Jos yksikään yhteyshenkilö ei hyväksy kokousta, Heart Connect -sovellus päättää kokouksen automaattisesti.

**HUOMAA:** Kun teknisen tuen yhteysryhmä kutsutaan, vastauksen saamisessa voi kestää kauemmin, jos osa ryhmään kuuluvista henkilöistä ei ole saatavilla.

**HUOMAA:** Jos online-kokouksessa on useita etäkäyttäjiä, kokouksen toiminta voi hidastua. Heart Connect -näytössä voi näkyä yhdestä enintään neljään osallistujaa.

**HUOMAA:** Heart Connect -näytön galleriavideoasettelussa voi näkyä yhdestä enintään neljään osallistujaa.

### Ilman yhteyshenkilöitä


Online-kokouksen voi aloittaa valitsematta yhteyshenkilöitä painamalla Heart Connect -kotinäytön **Meet Now** (Aloita kokous nyt) -painiketta. Kokoukseen voi lisätä osallistujia painamalla Heart Connect -päänäytön **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -painiketta, valitsemalla osallistujat ja painamalla sitten **Add a Participant** (Lisää osallistuja) -painiketta. Etäkäyttäjä voi liittyä olemassa olevaan kokoukseen myös lisäämällä paikallisen käyttäjän antaman kokoustunnuksen. Kokoustunnus näkyy Manage Meeting (Hallitse kokousta) -näytön oikeassa alakulmassa. Lisätietoja on kohdassa "Online-kokouksen pitäminen" sivulla 9.

2. Toiminnot, kuten sähköpostit, MRI-tila ja PSA STAT Shock.
3. Heart Connect -etäohjelmiston on oltava aktiivisena henkilöiden etälaitteessa, jotta heidät voi valita.

# Online-kokouksen pitäminen

## Kokousvaihtoehtojen käyttäminen

Pääset kokousvaihtoehtoihin, kun näyttö on jaettu, painamalla **Utilities** (Apuohjelmat) -painiketta ja sitten **Heart Connect** -välilehteä. Katso Kuva 2 3300-mallinen ohjelmointilaite – Heart Connect -ikkuna sivulla 9.

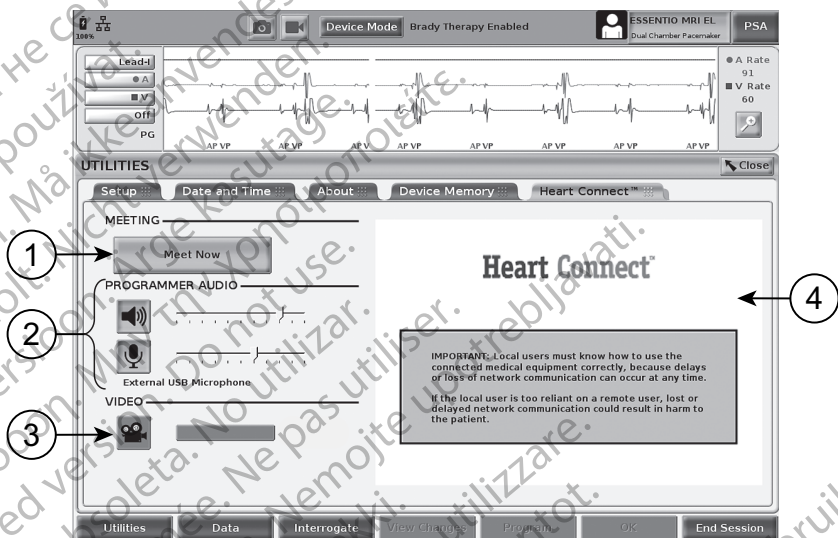

[1] Näkyvässä on Meet Now (Aloita kokous nyt) -painike kokouksen aloittamista varten ja Manage Meeting (Hallitse kokousta) -painike kokouksen ollessa kesken [2] Paikallisen käyttäjän äänen säätimet: äänenvoimakkuus ja ulkoinen USB-mikrofoni [3] Paikallisen käyttäjän videon asetteluun hallinta (galleria tai aktiivinen puhuja) [4] Videoikkuna, jossa näkyy aluksi Heart Connect -logo ja tärkeitä käyttäjätietoja

Kuva 2. 3300-mallinen ohjelmointilaite – Heart Connect -ikkuna

## Etäkäyttäjien lisääminen online-kokoukseen

Etäkäyttäjä voi lisätä olemassa olevaan online-kokoukseen kahdella tavalla:


- lisää osallistuja
- anna kokoustunnuksen etäkäyttäjälle.

Lisää osallistuja:

1. Paina Heart Connect -näytössä **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -painiketta, jolloin näkyviin tulee **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -näyttö.
2. Valitse haluamasi yhteyshenkilö(t) luettelosta. Yhteyshenkilöitä voi valita kummastakin luettelosta.
3. Aloita puhelu valituille etäkäyttäjille painamalla **Add a participant** (Lisää osallistuja) -painiketta.
4. Valitut yhteyshenkilöt saavat puhelun asennetulta Heart Connect -etäohjelmistoltaan, jos he ovat kirjautuneet sisään Heart Connect -järjestelmään. Katso "Online-kokouspuheluiden vastaanottaminen" sivulla 14.

Anna kokoustunnus etäkäyttäjille:

1. Paina Heart Connect -näytössä **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -painiketta, jolloin näkyviin tulee **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -näyttö.
2. Kokoustunnus sijaitsee Manage Meeting (Hallitse kokousta) -näytön oikeassa alakulmassa.
3. Anna tämä kokoustunnus etäkäyttäjille.

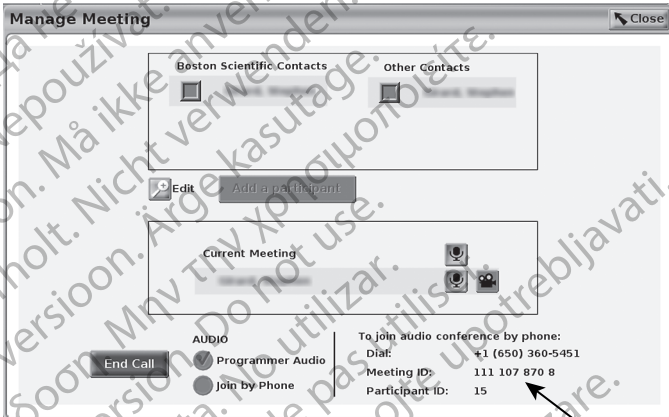

[1] Kokoustunnus, osallistujatunnus ja puhelinnumero (puhelinnumero näkyy vain Yhdysvaltojen sisäisille puheluille)

### Kuva 3. Kokoustunnus

Kun kokous on alkanut, näytön yläosassa näkyy kaksi kuvaketta. Katso Kuva 4 Heart Connect -kokous kesken sivulla 11.

- Kaksoisnuoli vilkkuu merkinä siitä, että jaat näytön.
- Kynäkuvake on näkyvässä, ja sitä painamalla voit sijoittaa merkintänuolen mihin tahansa 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näytössä.



[1] Kokous kesken - kaksisoisnuoli vilkkuu merkinä siitä, että näyttö jaetaan [2] Kynämerkintätyökalu

#### Kuva 4. Heart Connect -kokous kesken

##### Ääniyhteyden muodostaminen

Paikallinen käyttäjä voi säätää äänenvoimakkuutta ja mykistää äänen Heart Connect -sovelluksen päävalikosta käyttämällä kajuttimen ja mikrofonin **Audio** (Ääni) -painikkeita.

Etäkäyttäjä (jos hän ei ole vielä muodostanut yhteyttä) voi päättää muodostaa yhteyden käyttämällä tietokoneensa ääntä. Äänen säätimet sijaitsevat etäkäyttäjän tietokoneen näytössä. Siirrä kohdistinta tietokoneen näytössä nähdäksesi äänen/videon ponnahdusvalikkopalkin. Lisäksi henkilökohtaista puhelinta voidaan käyttää Heart Connect -kokouksen ulkopuolella kommunikoidmiseen.

##### Videoyhteyden käyttöön ottaminen

3300-mallinen ohjelmointilaitte ei sisällä sisäänrakennettua videokameraa. Ulkoisen USB-videokameran käyttö on kuitenkin mahdollista tarvittaessa. Jos käytössä on videoyhteys, sen voi poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön valitsemalla Heart Connect -päänäytön **Video**-painikkeen.

Kokouksen jokaisen etäkäyttäjän video voi näkyä Heart Connect -päänäytössä. Paikallinen käyttäjä voi valita aktiivisen puhujan videon tai galleriavideon, jossa näkyvät videoyhteyden käyttöön ottaneiden etäkäyttäjien videoiden pikkukuvat.

**TÄRKEÄÄ:** Huonolaatuinen yhteys voi aiheuttaa jaetun videonäytön tietojen näkymisen etäkäyttäjälle eriaikaisesti lääkinnällisen laitteen näyttöön verrattuna. Jos paikallinen käyttäjä ja etäkäyttäjän välinen video-/ääniyhteys katkeaa, katkeamisen havaitsemisessa

voi lisäksi olla noin 30 sekunnin viive. Jos yhteyden heikko laatu ei parane, ota yhteyttä paikalliseen IT-osastoon tai Boston Scientificiin.

### **Osallistujien hallinta**

Paikallinen käyttäjä voi hallita alla lueteltuja online-kokouksen etäkäyttäjää koskevia asioita. Näihin asetuksiin pääsee käyttämällä Heart Connect -päänäytön **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -painiketta.

- Lisää etäkäyttäjää kokoukseen.
- Vaimenna ja palauta etäkäyttäjän ääni.
- Ota etäkäyttäjän video käyttöön ja poista se käytöstä.

### **Kokouksen päättäminen**

Kokouksen voi päättää kolmella eri tavalla:

1. Paina **Meeting in progress** (Kokous käynnissä) (vilkkuvat nuolet) -painiketta ja päättää kokous painamalla **Confirm** (Vahvista) -painiketta.
2. Paina Heart Connect -päänäytössä **Manage Meeting** (Hallitse kokousta) -painiketta, paina **End Call** (Päätä puhelu) -painiketta ja päättää sitten kokous painamalla **Confirm** (Vahvista) -painiketta.
3. Jos jaat näyttösi potilasistunnon aikana, paina **End Session** (Päätä istunto) -painiketta ja sitten **End Session** (Päätä istunto) -painiketta End Session Confirmation (Istunnon päättämisen vahvistaminen) -pönnahdusikkunassa.

**HUOMAA:** Jos viimeinen etäkäyttäjä poistuu kokouksesta, kokous päättyy myös paikallisen käyttäjän osalta.

## **Paikallisen Heart Connect -ohjelmiston kunnossapito**

### **Paikallisen Heart Connect -ohjelmiston päivitykset**

Heart Connect -sovelluksen ohjelmistopäivitykset tarjotaan verkossa internetin kautta. Katso **LATITUDE™ -ohjelmointijärjestelmän käyttäjän oppaasta** ohjeet ohjelmistopäivitysten asentamiseen<sup>4</sup>. Voit myös ottaa yhteyttä Boston Scientificiin tämän oppaan takakannessa näytettyjen yhteystietojen avulla.

---

## **ETÄKÄYTTÄJÄ: HEART CONNECT -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÄMINEN**

Etäkäyttäjät muodostavat yhteyden Heart Connect -järjestelmän kokouksiin käyttämällä Heart Connect -etäohjelmistoa ja omaa iOS-, Android- tai Windows-laitettaan. Heart Connect -etäohjelmiston avulla käyttäjät voivat vastaanottaa kutsuja paikalliselta käyttäjältä osallistuakseen kokoukseen tai osallistuakseen kokoukseen kokoustunnuksen avulla.

Kokouskutsu sisältää ohjeet Heart Connect -etäohjelmiston lataamiseen ja asentamiseen. Tämä lataus ja asennus tarvitsee tehdä vain kerran.

4. Paikallinen Boston Scientific -edustajasi voi tarjota Heart Connect -sovelluksen ohjelmistopäivitykset USB-muistitikun avulla



## Käyttäjätilin luominen

Käyttäjätili tarvitaan yhteyden muodostamiseen Heart Connect -järjestelmään ja jotta käyttäjä voi vastaanottaa kokouspuheluita ja liittyä olemassa oleviin kokouksiin.

### Käyttäjätilin luominen:

1. Mene osoitteeseen <http://heartconnect.bostonscientific.com>.
2. Valitse uuden tilin rekisteröiminen ja anna tarvittavat tiedot. Saat vahvistusviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
3. Vahvista tilin aktivointi käyttämällä sähköpostiviestin linkkiä.
4. Viimeistele tilin määrittäminen antamalla tarvittavat tiedot.

**HUOMAA:** Näiden tarvittavien tietojen avulla Heart Connect -järjestelmän käyttäjiin voidaan ottaa yhteyttä tarvittaessa.

5. Asenna liittyvä sovellus kohdan "Heart Connect -etäohjelmiston asentaminen" sivulla 13 ohjeiden mukaisesti.

## Heart Connect -etäohjelmiston asentaminen

### Järjestelmävaatimukset

Heart Connect -etäohjelmisto on suunniteltu seuraaville käyttöjärjestelmille:

- Windows™-käyttöjärjestelmä (työpöytä)
- iOS™-mobiilikäyttöjärjestelmä (iPhone™/iPad™-mobiililaitteet)
- Android™-mobiilikäyttöjärjestelmä (mobiililaitte)

### Ohjelmiston asentaminen

#### Heart Connect -etäohjelmiston asentaminen:

1. Mene osoitteeseen <http://heartconnect.bostonscientific.com/download>.
2. Valitse asianmukaisen käyttöjärjestelmäympäristön latausvaihtoehto.

**HUOMAA:** Mobiililaitteympäristöjen sovellukset saa vastaavista mobiilisovelluskaupoista. iOS-käyttäjillä sovelluksen nimi on Heart Connect Remote Software (Heart Connect -etäohjelmisto). Android-käyttäjillä sovelluksen nimi on Heart Connect.

3. Aloita asennus lataamalla asennustiedosto ja suorittamalla se (työpöytäsovellus) tai valitsemalla asentamisvaihtoehto sovelluskaupassa (mobiilisovellus).
4. Kun asennus on valmis, käynnistä sovellus ja kirjaudu sisään käyttämällä kohdan "Käyttäjätilin luominen" sivulla 13 mukaisesti luotua käyttäjätiliä.

**TÄRKEÄÄ:** jotta voit vastaanottaa kokouspuheluita paikalliselta käyttäjältä, varmista, että sovellus on käytössä ja että olet kirjautunut sisään.

## Yhteyshenkilökutsujen hyväksyminen

Heart Connect -järjestelmää käyttävä paikallinen käyttäjä voi lisätä etäkäyttäjää yhteyshenkilöluetteloon voidakseen muodostaa yhteyden etäkäyttäjiiin online-kokouksissa. Kun etäkäyttäjää kutsutaan, järjestelmä lähettää hänelle sähköpostin, jossa häntä pyydetään hyväksymään kutsu.

### Yhteyshenkilökutsun hyväksyminen:

1. Valitse sähköpostiviestissä oleva linkki. Heart Connect -järjestelmän verkkosivu avautuu.
2. Kirjaudu sisään kohdan "Käyttäjätilin luominen" sivulla 13 mukaisesti luotua käyttäjätiliä käyttämällä. Järjestelmä antaa ilmoituksen kutsun hyväksymisestä.

**HUOMAA:** Jos käyttäjätiliä ei ole vielä luotu, valitse uuden tilin rekisteröimistä vastaava vaihtoehto ja luo tili noudattamalla kohdan "Käyttäjätilin luominen" sivulla 13 ohjeita. Asenna liittyvä sovellus noudattamalla kohdan "Heart Connect -etäohjelmiston asentaminen" sivulla 13 ohjeita. **Kun käyttäjätili on luotu, palaa yhteyshenkilökutsun sähköpostiin ja suorita edellä kuvatut vaiheet 1 ja 2.**

## Online-kokouspuheluiden vastaanottaminen

### TÄRKEÄÄ:

- Paikallisen käyttäjän pitää osata käyttää liitettyä lääkinällistä laitetta oikein, sillä verkkoyhteydessä voi ilmetä viiveitä tai katkoksia milloin tahansa. Jos paikallinen käyttäjä luottaa liikaa etäkäyttäjään, verkkoyhteyden viiveistä tai katkoksista voi seurata haittaa potilaalle.
- Paikallisen käyttäjän on täytettävä liitetyn lääkinällisen laitteen käyttötarkoitusta vastaavan käytön pätevyysvaatimukset.
- Kokouksen osallistujilla tulee olla selkeä käsitys paikallisen käyttäjän ja etäkäyttäjien potilaan hoitoon liittyvistä vastuista online-kokouksen aikana. Potilaaseen ja yhdistettyyn lääkinälliseen laitteeseen liittyvästi saattaa ilmetä tilanteita, jotka edellyttävät paikallisen käyttäjän pikaista reaktiota. Paikallisen käyttäjän on oltava valmistautunut toimimaan tällaisissa tilanteissa.
- Jotta voit vastaanottaa kokouspuheluita paikalliselta käyttäjältä, varmista, että sovellus on käytössä ja että olet kirjautunut sisään.

Kun paikallinen käyttäjä aloittaa online-kokouksen yhteyshenkilön kanssa, laitoksen nimi (jos se on määritetty About (Tietoja) -näytössä) ja valinnaisesti sijainti näkyvät etäkäyttäjälle yhdessä kutsun hyväksymiseen tai hylkäämiseen käytettävien valintapainikkeiden kanssa. Liity kokoukseen napsauttamalla tai painamalla **Accept** (Hyväksy) -vaihtoehtoa.

## Online-kokouksiin liittyminen

Meneillään oleviin online-kokouksiin on mahdollista liittyä käyttämällä paikallisen käyttäjän antamaa kokoustunnusta. Liity kokoukseen Heart Connect -etäohjelmistolla napsauttamalla tai napauttamalla vastaavaa vaihtoehtoa ja anna kokoustunnus. Liity kokoukseen napsauttamalla tai napauttamalla Join Meeting (Liity kokoukseen) -painiketta.

## Online-kokouksiin osallistuminen

### Paikallisen käyttäjän jaetun näytön tarkasteleminen

Etäkäyttäjä voi tarkastella 3300-mallisen ohjelmointilaitteen näyttöä hyväksytyään Heart Connect -puhelun.

**TÄRKEÄÄ:** Huonolaatuinen yhteys voi aiheuttaa jaetun videonäytön tietojen näkymisen etäkäyttäjälle eriaikaisesti lääkinällisen laitteen näyttöön verrattuna. Jos paikallisen käyttäjän ja etäkäyttäjän välinen video-/ääniyhteys katkeaa, katkeamisen havaitsemisessa

voi lisäksi olla noin 30 sekunnin viive. Jos yhteyden heikko laatu ei parane, ota yhteyttä paikalliseen IT-osastoon tai Boston Scientificiin.

### **Valikkovaihtoehtoihin siirtyminen paikallisen käyttäjän jaetun näytön tarkastelun aikana**

Useimmat valikkovaihtoehdot ovat etäkäyttäjän saatavilla, kun tämä vie kohdistimen niiden päälle tai napauttaa niitä näytössä. Valikkovaihtoehtoihin, kuten **Annotate** (Lisää merkintä), pääsee työpöytäsovelluksessa viemällä kohdistimen näytön yläosassa sijaitsevan **More** (Lisää)- tai **View Options** (Näytä vaihtoehdot) -valikon päälle tai valitsemalla sen.

**HUOMAA:** **More** (Lisää) -valikko saattaa olla käytettävissä vain koko näytön tilassa.

**HUOMAA:** **Annotate** (Lisää merkintä) -ominaisuuteen pääsee mobiilisovelluksella napauttamalla kynäkuvaketta.

### **Muiden etäkäyttäjien lisääminen online-kokoukseen**

Etäkäyttäjät voivat kutsua muita etäkäyttäjää olemassa olevaan online-kokoukseen kahdella eri tavalla: kutsulla tai kokoustunnuksella.

#### **Muiden etäkäyttäjien lisääminen kutsun avulla (työpöytäsovellus):**

1. Napauta tai napsauta **Invite** (Kutsu) -valikkovaihtoehtoa.
2. Lähetä sähköpostikutsu napauttamalla tai napsauttamalla.
3. Lisää halutut sähköpostiosoitteet ja lähetä sähköposti.
4. Vastaanottaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää kokoustunnuksen ja saatavilla olevat liittymismenetelmät (URL-linkki ja puhelin) kokoukseen liittymistä varten.

#### **Muiden etäkäyttäjien lisääminen kutsun avulla (mobiilisovellus):**

1. Napauta tai napsauta **Participants** (Osallistujat) -valikkovaihtoehtoa.
2. Napauta tai napsauta **Invite** (Kutsu) -valikkovaihtoehtoa.
3. Napauta tai napsauta halutun palvelun sovellusta luettelossa (esimerkiksi sähköposti, tekstiviesti).
4. Lisää vastaanottajan tiedot ja lähetä kutsu valitulla palvelulla.
5. Vastaanottaja saa linkin ja kokoustunnuksen, joiden avulla hän voi liittyä kokoukseen.

#### **Muiden etäkäyttäjien lisääminen kokoustunnuksen avulla (työpöytäsovellus):**

1. Avaa kutsunäyttö napauttamalla tai napsauttamalla kutsuvalikkovaihtoehtoa. Kokoustunnus näkyy näytön yläosassa.
2. Anna vastaanottajille kokoustunnus, jotta nämä voivat liittyä kokoukseen etäkäyttäjinä. Katso "Online-kokouksiin liittyminen" sivulla 14.

#### **Muiden etäkäyttäjien lisääminen kokoustunnuksen avulla (mobiilisovellus):**

1. Näytä valikkovaihtoehdot napsauttamalla tai napauttamalla mitä tahansa kohtaa näytössä. Kokoustunnus näkyy näytön yläosassa.
2. Anna vastaanottajille kokoustunnus, jotta nämä voivat liittyä kokoukseen etäkäyttäjinä. Katso "Online-kokouksiin liittyminen" sivulla 14.

## Ääniyhteys

Online-kokouksen ääniyhteyteen voi liittyä kahdella eri tavalla: tietokoneen ääniyhteydellä tai puhelimen ääniyhteydellä.

Tietokoneen ääniyhteys muodostetaan muiden kokoukseen osallistujien kanssa internetyhteyden kautta. Tietokoneen ääniyhteys kokouksessa:

1. Ääniyhteyden käyttöön ottaminen kokousta varten:

Tietokoneita käyttävät etäkäyttäjät -

- Valitse **Join Audio** (Liity ääneen), sitten **Computer Audio** (Tietokoneen ääni), sitten **Join Audio Conference by Computer** (Liity äänineuvotteluun tietokoneella).

Mobiililaitteita käyttävät etäkäyttäjät -

- Napauta ja valitse **Audio/Join Audio** (Ääni / Liity ääneen) näytössä ja valitse sitten **Call Using Internet Audio/Call via Device Audio** (Soita internetin ääniyhteydellä / Soita laitteen ääniyhteydellä).

2. Kun tietokoneen ääniyhteys on käytössä, se on mahdollista mykistää näytön valikkovaihtoehtojen avulla. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää tietokoneen tai mobiililaitteen säädinten avulla.

3. Ääniyhteyden käytöstä poistaminen kokousta varten:

Tietokoneita käyttävät etäkäyttäjät -

- Napauta tai napsauta **Leave Computer Audio** (Poistu tietokoneen ääniyhteydestä) -painiketta **Audio** (Ääni) -valikossa.

Mobiililaitteita käyttävät etäkäyttäjät -

- Napauta tai napsauta **Disconnect Audio** (Katkaise ääniyhteys) -painiketta **More** (Lisää) -valikossa.

**Puhelimen ääniyhteys** muodostetaan liittymällä kokoukseen puhelimella. Puhelimen ääniyhteys kokouksessa:

1. Napauta tai napsauta äänivalikon kohtaa **Phone Call** (Puhelu). (Jos käytät mobiilisovellusta, napauta tai napsauta äänivalikkovaihtoehtoon kohtaa **Dial in** [Soita].)
2. Soita johonkin luettelon sisältämistä puhelinnumeroista ja anna kokoustunnus ja osallistujatunnus puhelimesta saamiesi ohjeiden mukaisesti. (Jos käytät mobiilisovellusta, Heart Connect soittaa ja antaa kokoustunnuksen ja osallistujatunnuksen automaattisesti.)

**HUOMAA:** Kokouspuhelinnumerot eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

## Videoyhteys

Video on pois käytöstä aluksi, kun etäkäyttäjä liittyy online-kokoukseen. Videon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valitsemalla videovalikkovaihtoehdot näytössä.

## Ääni- ja videoasetusten käyttäminen

Tietokonekäyttäjät näkevät lisää ääni- ja videoasetuksia napauttamalla/napsauttamalla näytön vasemmassa alakulmassa, videokuvakkeen oikealla puolella olevaa karaattikuvaketta (A). Tämä näyttää **Video Settings** (Videoasetukset) -valikkovaihtoehdon.

Mobiilikäyttäjät näkevät lisää ääni- ja videoasetuksia napauttamalla/napsauttamalla näytön vasemmassa alakulmassa olevaa **Video Settings** (Videoasetukset) -kohtaa.

### **Etäkäyttäjän merkinnän lisäystoiminto**

Etäkäyttäjä voi lisätä merkinnän nuolella napauttamalla/napsauttamalla **Annotate** (Lisää merkintä) -vaihtoehtoa **View Options** (Näytä vaihtoehdot) -valikossa.

Jos käytetään työpöytäsovellusta, lisää valikkovaihtoehtoja on saatavilla napauttamalla/napsauttamalla näytön yläosassa sijaitsevaa **View Options** (Näytä vaihtoehdot) -valikkoa.

**HUOMAA:** **Annotate** (Lisää merkintä) -ominaisuuden pääsee mobiilisovelluksella napauttamalla kynäkuvaketta.

### **Kokouksesta poistuminen**

Etäkäyttäjä voi poistua kokouksesta napauttamalla napsauttamalla näytön oikeassa alakulmassa sijaitsevaa **Leave Meeting** (Poistu kokouksesta) -painiketta.

**HUOMAA:** Jos viimeinen etäkäyttäjä poistuu kokouksesta, kokous päättyy myös paikallisen käyttäjän osalta.

## **Heart Connect -etäohjelmiston kunnossapito**

### **Heart Connect -etäohjelmiston päivitykset**

Kun Heart Connect -etäohjelmiston päivityksiä tulee saataville, etäkäyttäjät saavat ilmoituksen sähköpostilla ja voivat halutessaan ladata ja asentaa päivityksen. Tee päivitykset heti kun mahdollista varmistaaksesi, että mahdolliset tärkeät muutokset otetaan käyttöön.

---

## **LISÄTIETOJA**

### **Euroopan unionin maahantuojat**

EU-maahantuojat: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, Nederland

рсия. Да не се използва.  
erze. Nepoužívajte.  
version. Må ikke anvendes.  
n überholt. Nicht verwenden.  
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreлт útгáфа. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.  
Zastarana verzija. Nepoužívajte.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd  
ancel olmayan sürüm. K

рсия. Да не се използва.  
erze. Nepoužívajte.  
version. Må ikke anvendes.  
n überholt. Nicht verwenden.  
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreлт útгáфа. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.  
Zastarana verzija. Nepoužívajte.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd  
ancel olmayan sürüm. K



Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
Botany NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.  
92302087-022 FI OUS 2020-06

