


Nuttige informatie over de LATITUDE Communicator

Waarvoor wordt hij gebruikt?

De LATITUDE Communicator is bestemd voor het verzamelen van informatie van uw geïmplanteerde apparaat. Uw Communicator verstuurt deze gegevens vervolgens naar de artsenwebsite zodat uw zorgteam ze kan gebruiken als hulpmiddel bij uw voortdurende zorg.

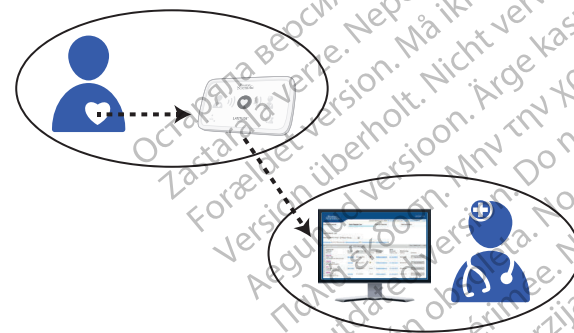

⚠ Dit is geen systeem voor medische noodgevallen.

Hoe werkt het?

Zodra uw Communicator is ingesteld (sla om voor de stappen voor het instellen), wordt uw apparaat periodiek gecontroleerd conform een schema dat door uw ziekenhuis is ingesteld. De ene keer gebeurt dat automatisch, de andere keer heeft uw Communicator daarbij uw hulp nodig. Druk eenvoudigweg op de hartknop wanneer die knippert, om de controle van het apparaat te voltooien.



Waar moet u uw Communicator neerzetten?

- In de buurt van uw slaapplek of naast uw bed, binnen een afstand van 3 meter (10 feet). Als dit niet mogelijk is, plaatst u uw Communicator daar waar u een aanzienlijk deel van de dag doorbrengt.
- Minimaal op 30 cm (12 inch) afstand van televisies, dvd-spelers, pc's, modems, routers, magnetrons en andere elektronische apparaten.
- Op een plek waar u gemakkelijk kunt zitten en de voorzijde van de Communicator kunt zien.
- Afhankelijk van de gebruikte verbindingmethode:
 - **Mobiel:** op een locatie waar het mobiele signaal goed is.
 - **Internet:** in de buurt, maar niet dichterbij dan 1 meter (3 feet), van uw internetmodem of -router.

Wat betekenen deze lampjes?

Als u dit ziet ...	Betekent dat ...	Doe dit ...
Knipperende hartknop	De Communicator moet geholpen worden om een geplande controle van het apparaat te voltooien. <i>Opmerking: dit duidt niet op een probleem met uw geïmplanteerde apparaat.</i>	Druk op de hartknop. Blijf naast de Communicator staan tot alle indicators overeenkomen met wat in de volgende rij wordt getoond.
Gegevens uit uw geïmplanteerde apparaat zijn naar de website voor artsen verzonden.		Verder geen handelingen nodig.
Er is een mogelijk probleem dat door uw arts moet worden opgelost.		Neem contact op met uw arts.
OF Elke geel oplichtende golfvorm of geel oplichtend pictogram Arts bellen betekent dat uw Communicator een probleem met verbinden heeft of niet goed werkt.		Raadpleeg de rubriek Probleemoplossing over de betreffende fout in uw patiëntenhandleiding.

Sla om voor de stappen voor het instellen.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
Wereldwijd: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific
Corporation or its affiliates.

92436021-005 nl Europe 2020-04

QUICK START-HANDLEIDING

LATITUDE™ Communicator




Lees dit voorafgaand aan het installeren.

CE 2797




1 Bevestig de schakelaarinstellingen.

OPMERKING: Deze Quick Start-handleiding bevat uitsluitend instructies voor de schakelaarinstellingen en het instellen voor mobiele telefoon- of internetverbindingen. Raadpleeg uw patiëntenhandleiding voor deze informatie als u gebruikmaakt van een standaard telefoonlijnverbinding.

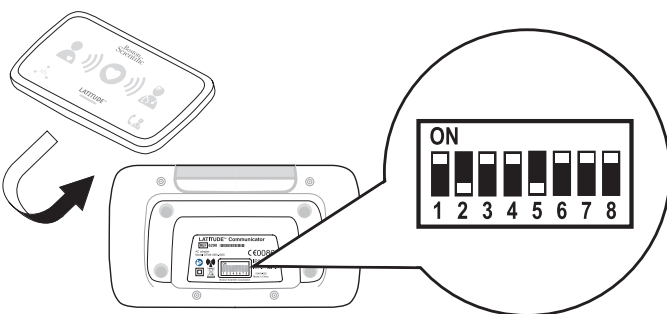

Controleer de witte schakelaars met nummers 1-8 aan de onderzijde van uw Communicator. Als deze in overeenstemming zijn met bovenstaande instellingen, is er geen verdere actie nodig. Als deze niet in overeenstemming, schuift u ze op de hierboven getoonde wijze omhoog of omlaag.

2 Sluit de voeding aan.

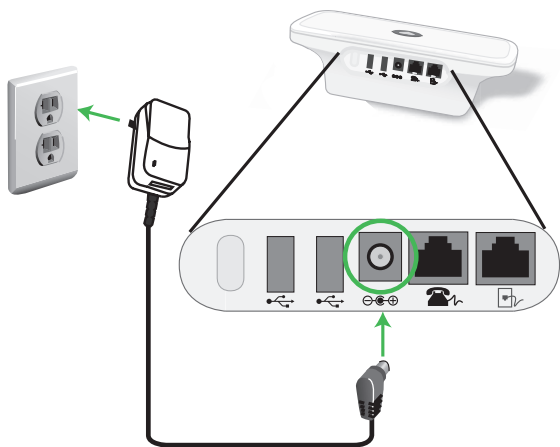

3 Identificeer de verbindingmethode die u zult gebruiken om met de website voor artsen te verbinden:


- A. Mobiele telefoon **of**
- B. Internet

Sluit daarna kabels aan voor **deze methode** zoals getoond.


Raadpleeg uw patiëntenhandleiding voor meer details.

4 Sluit de kabels aan voor één verbindingmethode (A of B).

A. Aansluiting voor mobiele telefoon, gebruikmakend van een USB-adapter voor een mobiele telefoon

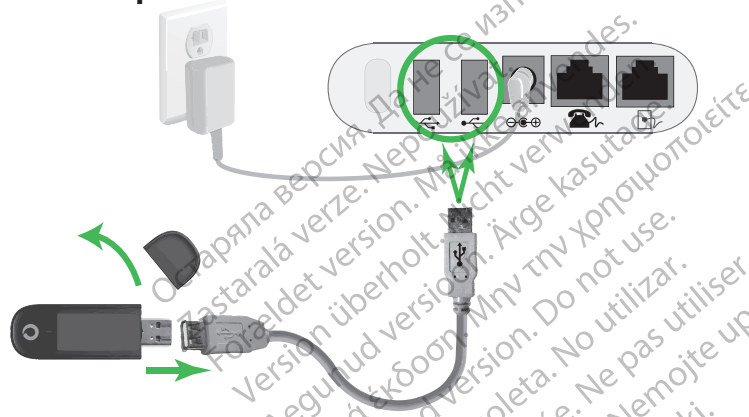

of B. Internetverbinding, met gebruik van een USB-ethernetadapter

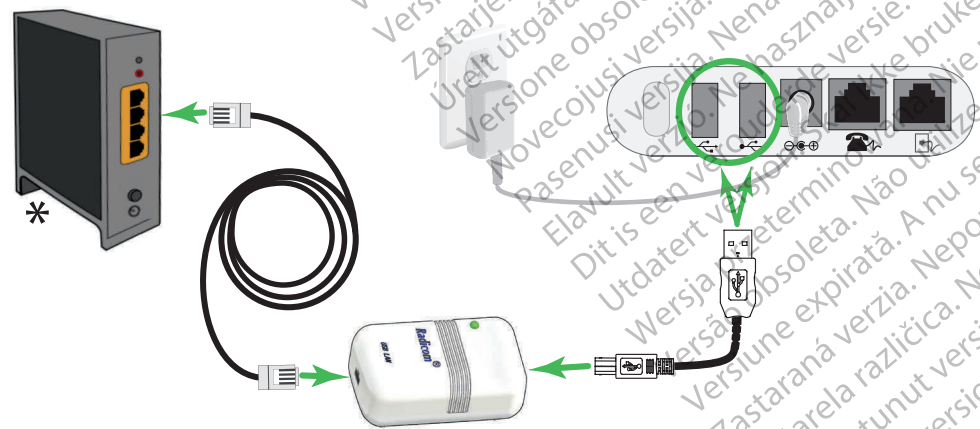

* Internetrouter of -modem

Houd uw verbindingmethode te allen tijde aangesloten op uw Communicator.

Hiermee kan uw Communicator de gegevens die van uw geïmplanteerde apparaat verzameld zijn, verzenden naar de website voor artsen om door uw zorgverlener te worden gebruikt.

5 Druk op de knipperende hartknop op de LATITUDE Communicator om het instelproces te starten.



6 Wacht terwijl de gegevens worden verzonden. Dit kan enkele minuten duren.

Gegevens verzamelen uit uw geïmplanteerde apparaat

Gegevens verzenden
Als de hartknop weer knippert, druk er dan opnieuw op.

7 Wacht op software-update.



Er kan een software-update worden uitgevoerd. Wacht enkele minuten tot de hartknop knippert en druk er vervolgens opnieuw op. Dit kan meerdere keren voorkomen. Druk elke keer op de hartknop wanneer deze knippert.

8 Succes!



Als de indicators oplichten zoals hierboven is aangegeven, zijn de instellingen correct uitgevoerd! De lampjes gaan na 2 minuten automatisch uit.

9 Zorg ervoor dat uw Communicator te allen tijde aangesloten blijft.



Dit zorgt ervoor dat uw Communicator uw geïmplanteerde apparaat kan controleren volgens het schema van uw arts.

? Hulp nodig?

Als u een gele golfvorm of een geel pictogram Arts bellen ziet (zoals op de achterkant van deze gids wordt getoond), raadpleegt u de rubriek Probleemoplossing over de betreffende fout in uw patiëntenhandleiding.

Neem voor meer hulp contact op met uw arts of bel de LATITUDE-ondersteuning op het nummer dat voor uw land in de patiëntenhandleiding staat vermeld.

Sla om voor nuttige informatie.