

AMS™ Quick Connect

Suturfrie vindueskonnektorer

Brugsanvisning

Dansk **AMS™ Quick Connect**

Suturfrie vindueskonnektorer

Brugsanvisning 3

Rx ONLY

AMS™

da Dansk


	<input type="checkbox"/> da Må ikke resteriliseres
	<input type="checkbox"/> da Må ikke genbruges
	<input type="checkbox"/> da Se brugsanvisningen
	<input type="checkbox"/> da Dampsteriliseret
	<input type="checkbox"/> da Anvendes inden DD-MM-ÅÅÅÅ
	<input type="checkbox"/> da Fremstillingsdato
Rx ONLY	<input type="checkbox"/> da Forsigtig: Ifølge amerikansk lov (USA) må denne anordning kun sælges af eller efter ordination af en læge.
LOT	<input type="checkbox"/> da Partinummer
REF	<input type="checkbox"/> da Katalognummer
	<input type="checkbox"/> da Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	<input type="checkbox"/> da Producent
	<input type="checkbox"/> da Genbrugsemballage

AMS™ Quick Connect


Suturfrie vindueskonnektorer

Brugsanvisning


Anvisninger for samling af AMS Quick Connect suturfrie vindueskonnektorer

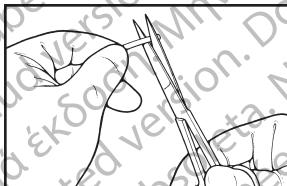


1. Klip slangen lige over.

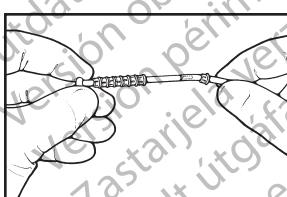


2. Sæt manchetringene på.
Anbring en ring på enden af hver slange.

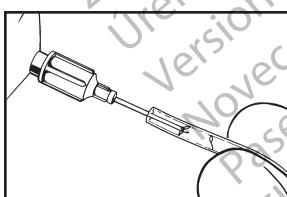


3. Skyl.
Skyl enderne på begge slanger med korrekt væske.

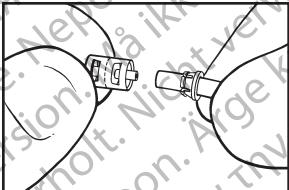


- 4.** Indsæt den første slange.
Skub med fast hånd slangen til konnektorens mellemvæg, hvilket kan ses gennem konnektorens vindue.

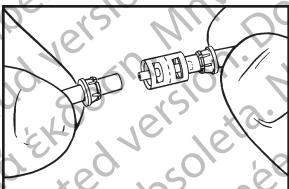


- 5.** Tilslut.
Skub med fast hånd den anden slange til mellemvæggen.
Kontrollér vinduerne for at sikre, at begge slangeender stadig berører mellemvæggen.

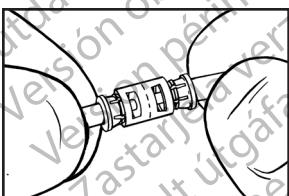

- 6.** Placer manchetterne ind mod konnektoren, før monteringsværktøjet anvendes.

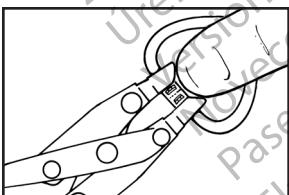


- 7.** Tilslutningen må ikke holdes i monteringsværktøjet. Det kan medvirke til, at manchetten ikke justeres korrekt i forhold til konnektoren, og manchettens spidser ikke sluttet til.

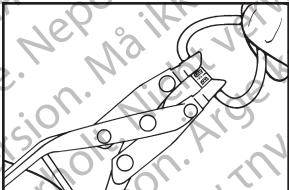

8a.

Sørg for, at tilslutningen sættes helt ind i monteringsværktøjet. Klem håndtaget langsomt sammen, så værktøjet lukker. Hvis en af manchetternes spidser ikke sidder inde i konnektoren, før tilslutningen færdiggøres, slippes trykket på tilslutningen, og manchetten justeres korrekt i forhold til konnektoren. Færdiggør tilslutningen. Lukkestoppet skal berøre det modsatte håndtag.

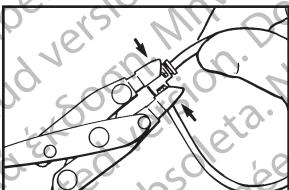


8b.

Når der benyttes en retvinklet konnektor, skal monteringsværktøjet benyttes to gange—én gang i hver ende af konnektoren. Kontrollér igen, at slangen berører mellemvæggen på begge sider af konnektoren. Monteringsværktøjets lukkestop skal berøre det modsatte håndtag hver gang.

FORSIGTIG: Kontrollér slangen, inden monteringsværktøjet lukkes.


Slangen må ikke være fanget mellem monteringsværktøjets kæbe og konnektoren. Slangerne skal stikke lige ud af konnektorens ender gennem åbningerne i monteringsværktøjet.

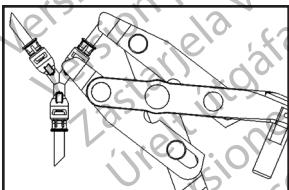


8c.

Når der benyttes en 3-vejskonnektor, skal monteringsværktøjet benyttes tre gange—én gang i hver ende af konnektoren. Monteringsværktøjet skal sættes på fra siden af hver ende af konnektoren. For slangen ind i hver ende af konnektoren, indtil slangen berører konnektorens indervæg, hvilket kan ses gennem konnektorens vindue.


FORSIGTIG: Den lange gren på 3-vejskonnektoren skal forbides med kontrolpumpen.

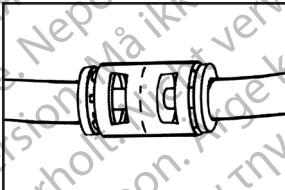**9.****Kontrollér.**

Når tilslutningen er foretaget, undersøges begge ender af tilslutningen grundigt. Hvis manchettens spids(er) ikke stikker ind i konnektoren, men udenfor, må der ikke lukkes. Foretag tilslutningen igen ved at skære tilslutningen ud og foretage en helt ny tilslutning.

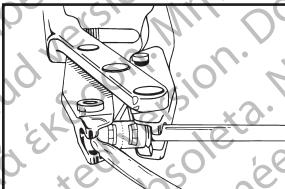**Forkert**

Perforerer slangen.

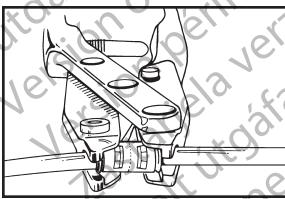**Rigtigt**

Slangerne stikker lige ud af konnektorens ender. Når AMS Quick Connect™ monteringsværktøjet har været anvendt, skal slangen bøle delvist ud gennem konnektorens vindue. Dette betyder, at slangen stadig ligger fast mod konnektorens mellemvæg.

AMS Quick Connect-systemet må ikke resteriliseres. Konventionel hospitalssterilisering vil beskadige konnektorkomponenterne. (Monteringsværktøjet kan resteriliseres.)

BEMÆRK: AMS Quick Connect suturfrie vindueskonnektorer må ikke anvendes til slanger, der tidligere har været brugt.

Levering og opbevaring

ADVARSEL: Indholdet leveres STERILT. Må ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget. Kontakt en AMS-repræsentant, hvis der konstateres beskadigelse.

Må kun anvendes til én patient. Må ikke genbruges, genforarbejdes eller resteriliseres. Genbrug, genforarbejdning eller resterilisering kan kompromittere anordningens strukturelle integritet og/eller føre til svigt af anordningen, hvilket kan resultere i patientskade, -sygdom eller -død. Genbrug, genforarbejdning eller resterilisering kan også medføre risiko for kontamínering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krydsinfektion som for eksempel overførelse af smitsom(me) sygdom(me) fra en patient til en anden. Kontamination af anordningen kan føre til skade på patienten eller dennes sygdom eller død. Bortskaf produktet og emballagen ifølge hospitallets, de administrative og/eller regionale regler efter brug.

Opbevar produktet et rent, tort, mørkt sted ved rumtemperatur.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343 U.S.A.
U.S. Toll Free: 1 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved. All trademarks are property of
the respective owners.
230128-02-MH (2017-12)

