

AMS™ Quick Connect

Suturfria fönsterkopplingar

Bruksanvisning

Svenska **AMS™ Quick Connect**












Suturfria fönsterkopplingar

Bruksanvisning 3

R ONLY

AMS™

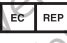sv Svenska


	sv Får inte omsteriliseras
	sv Får inte återanvändas
	sv Se bruksanvisning
	sv Steriliserad med ånga
	sv Använd före ÅÅÅÅ-MM-DD
	sv Tillverkningsdatum
Rx ONLY	sv Försiktighetsåtgärd: Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.
	sv Satsnummer
	sv Katalognummer
	sv Auktoriserad EU-representant
	sv Tillverkare
	sv Återvinningsbar förpackning

AMS™ Quick Connect


Suturfria fönsterkopplingar

Bruksanvisning


Monteringsanvisningar för AMS Quick Connect suturfria fönsterkopplingar

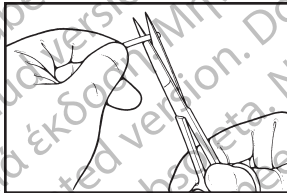


1. Klipp slangen rakt.

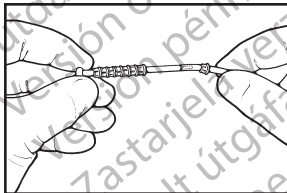


2. Sätt på spännringarna.
Placera en ring i varje slangände.

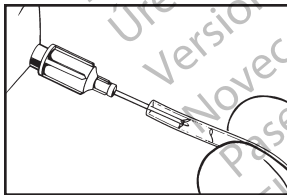


3. Spola.
Spola båda slangändarna med lämplig lösning.

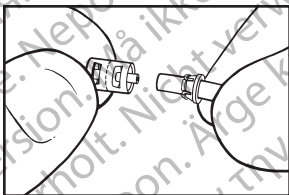


4. För in den första slangen.
För med fast hand fram slangen till kopplingens mellanvägg
och när den ses genom kopplingens fönster.

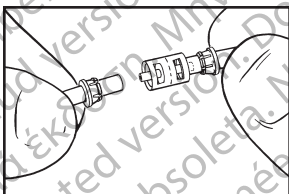


5. Koppla.
För med fast hand fram den andra slangen till mellanväggen.
Kontrollera genom fönstren att båda slangändarna fortfarande
vidrör mellanväggen.

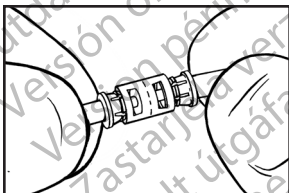


6. För spännringarna närmare mot kopplingen innan
monteringsverktyget sätts på.

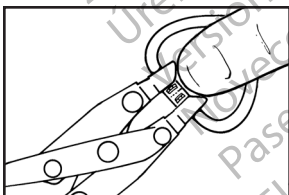

7. Håll inte kopplingen i monteringsverktyget. Det kan bidra till att
spännringen felinriktas mot kopplingen och resulterar i att
spänningsstiften missar kopplingen.

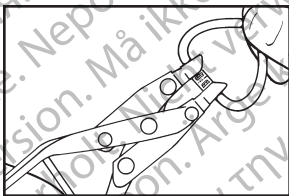


- 8a.** Se till att kopplingen är helt införd i monteringsverktyget. Tryck långsamt ihop handtaget och stäng verktyget. Om ett stift inte kommer in i kopplingen innan du slutför kopplingen ska du frigöra trycket på kopplingen och låta stiftet inriktas med kopplingen. Slutför kopplingen. Förslutningsstoppet måste vidröra det motsatta handtaget.

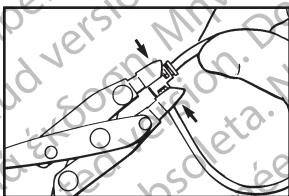


- 8b.** Vid användning av en rätvinklig koppling måste monteringsverktyget användas två gånger – en gång i var ände av kopplingen. Se åter till att slangen vidrör mellanväggen på båda sidor av kopplingen. Förslutningsstoppet på monteringsverktyget måste vidröra det motsatta handtaget varje gång.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Kontrollera slangen innan monteringsverktyget stängs. Slangen får inte fastna mellan monteringsverktygets käftar och kopplingen. Slangarna måste sticka rakt ut ur kopplingens ändar, genom skårorna i monteringsverktyget.

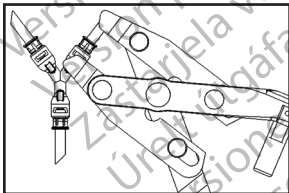

- 8c.** När en 3-vägskoppling används måste monteringsverktyget användas 3 gånger – en gång i varje ände av kopplingen. Monteringsverktyget måste aktiveras från sidan av varje kopplingsände. För fram slangen i varje kopplingsände tills slangen rör vid den inre kopplingsväggen som kan ses genom kopplingens fönster.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Den långa grenen på 3-vägskopplingen måste anslutas till kontrollpumpen.

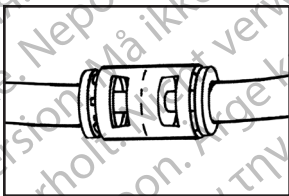

9.


Kontrollera.

När kopplingen slutförts ska du noga undersöka båda ändarna av kopplingen. Stäng inte om stiften på spänningen inte kommer in i kopplingen utan sticker ut. Gör om anslutningen genom att klippa ut kopplingen och göra en helt ny anslutning.

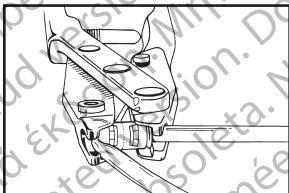

Fel

Detta tillvägagångssätt perforerar slangen.

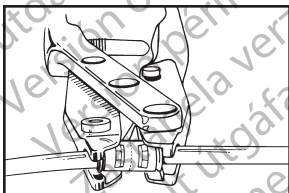

Rätt

Slangarna kommer ut direkt ur kopplingens ändar. När AMS Quick Connect™-monteringsverktyget har använts ska slangen buka ut delvis genom kopplingens fönster. Detta är ett tecken på att slangen fortfarande ligger an ordentligt mot kopplingens mellanvägg.

AMS Quick Connect-systemet kan inte steriliseras om eftersom konventionell sjukhussterilisering skulle skada kopplingskomponenterna. (Monteringsverktyget kan steriliseras om.)

OBS! AMS Quick Connect suturfrria fönsterkopplingar ska inte användas på en revisions slang.

Leveransskick och förvaring

VARNING! Innehållet levereras STERILISERAT. Använd inte produkten om det sterila skyddet är skadat. Kontakta en AMS-representant om skada upptäcks.

Endast för användning på en patient. Får ej återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras.

Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan äventyra produktens strukturella integritet och/eller leda till att den inte fungerar som den ska, vilket i sin tur kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan också skapa risk för att produkten kontamineras och/eller orsaka att patienten drabbas av infektion eller korsinfektion, inklusive, men inte begränsat till, överföring av infektionssjukdom(-ar) från en patient till en annan. Kontamination av produkten kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall. Kassera produkten och förpackningen efter användning i enlighet med sjukhusets rutiner, administrativa och/eller lokala förordningar.

Förvara produkten i rumstemperatur på en ren, torr och mörk plats.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

Brazil Local Contact

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
<http://www.bostonscientific.com/bra>



AMSTM

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343 U.S.A.
U.S. Toll Free: 1 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved. All trademarks are property of
the respective owners.
230128-05-MH (2017-12)

