

AMS™ Quick Connect

Bezstehové okénkové konektory

Návod k použití

Česky **AMS™ Quick Connect**

Bezstehové okénkové konektory

Návod k použití 3

R_x ONLY

AMS™

CS Česky


	CS Neresterilizovat
	CS Nepoužívat opakovaně
	CS Prostudujte si návod k použití
	CS Sterilizováno párou
	CS Datum expirace RRRR-MM-DD
	CS Datum výroby
Rx ONLY	CS Upozornění: Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo lékařský předpis.
	CS Číslo šarže
	CS Katalogové číslo
	CS Autorizovaný zástupce v zemích Evropského společenství
	CS Výrobce
	CS Recyklovatelný obal

AMS™ Quick Connect


Bezstehové okénkové konektory

Návod k použití


Návod k připojení bezstehových okénkových konektorů AMS Quick Connect

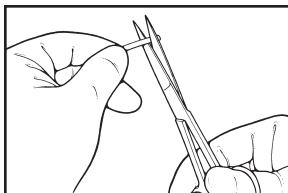


1. Rovně seřízněte hadičku.

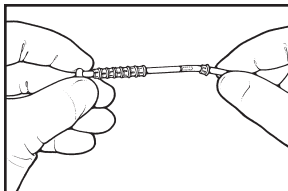


2. Nasadte prstence objímky.
Na konec každé hadičky nasadte jeden prstenec.

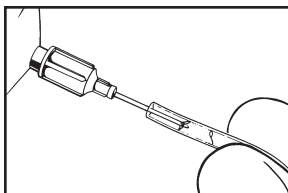


3. Propláchněte.
Propláchněte konce obou hadiček vhodným roztokem.

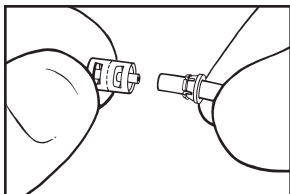


4. Nasadíte první hadičku.
Pevně zatlačte hadičku do střední stěny konektoru
a zkontrolujte umístění hadičky přes okénko konektoru.

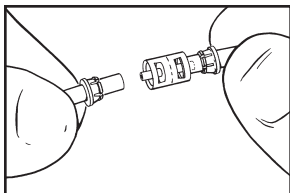


5. Provedte připojení.
Pevně zatlačte druhou hadičku do střední stěny. Zkontrolujte
okénka a ujistěte se, že oba konce hadiček se stále dotýkají
střední stěny.

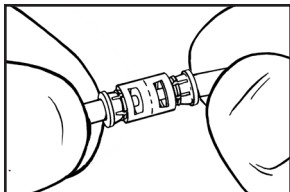


6. Před použitím sestavovacího nástroje přisuňte objímky blíže ke
konektoru.

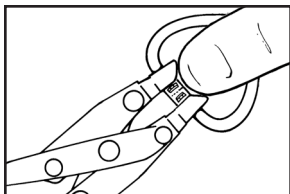

7. Nedržte spojení v sestavovacím nástroji. Mohlo by dojít
k vychýlení objímky od konektoru a následkem toho
k nesprávnému připojení kontaktů objímky.

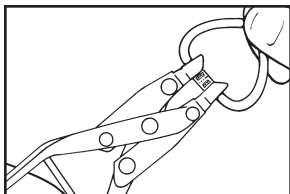


- 8a.** Zkontrolujte, zda je celé spojení vloženo do sestavovacího nástroje. Pomalým stisknutím rukojeti nástroj zavřete. Pokud kontakt objímky nevnikne do konektoru před dokončením spojení, uvolněte tlak na spojení a nechte objímku znovu vyrovnat s konektorem. Dokončete spojení. Uzavírací zarážka se musí dotýkat protější rukojeti.

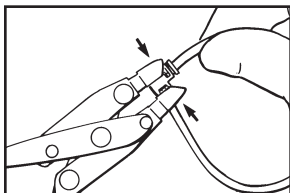


- 8b.** Při použití pravouhlého konektoru je nutné sestavovací nástroj použít dvakrát – jednou na každém konci konektoru. Opět se ujistěte, že se hadička dotýká střední stěny na obou stranách konektoru. Uzavírací zarážka sestavovacího nástroje se musí při každém spojení dotýkat protější rukojeti.

UPOZORNĚNÍ: Před uzavřením sestavovacího nástroje zkontrolujte hadičky. Hadičky nesmí být zachyceny mezi čelisti sestavovacího nástroje a konektoru. Hadičky musí vycházet rovně z obou konců konektoru přes otvory v sestavovacím nástroji.

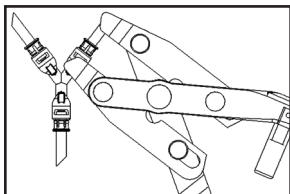


- 8c.** Při použití 3cestného konektoru je nutné sestavovací nástroj použít třikrát – jednou na každém konci konektoru. Sestavovací nástroj nasadte ze *strany* každého konce konektoru. Zasuňte hadičku do jednotlivých konců konektoru, aby se hadička dotýkala vnitřní stěny konektoru, a zkontrolujte umístění hadičky okénko konektoru.

UPOZORNĚNÍ: Dlouhá větev 3cestného konektoru musí být připojena k řídicí pumpičce.

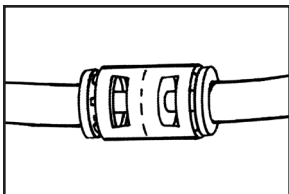


- 9.** Proveďte kontrolu.
Po dokončení spojení důkladně zkontrolujte oba konce spojení. Pokud kontakty objímky nevnikly do konektoru a vyčnívají, spojení neuzavírejte. Odřízněte spojení a vytvořte zcela nové spojení.

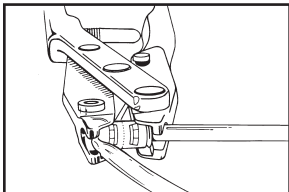

Nesprávně

Dochází k perforaci hadičky.

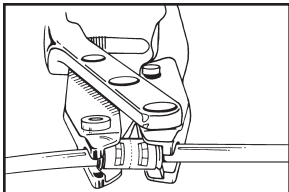

Správně

Hadičky vycházejí rovně z konců konektoru. Po použití sestavovacího nástroje AMS Quick Connect™ musí být hadičky částečně vyboulené přes okénko konektoru. To znamená, že hadičky jsou stále v pevném kontaktu se střední stěnou konektoru.

Systém AMS Quick Connect nelze resterilizovat. Konvenční nemocniční sterilizace poškodí komponenty konektoru. (Sestavovací nástroj lze resterilizovat.)

POZNÁMKA: Bezstehové okénkové konektory AMS Quick Connect nesmí být používány na revizních hadičkách.

Způsob dodání a skladování

VAROVÁNÍ: Obsah se dodává STERILNÍ. Nepoužívejte, pokud je sterilní bariéra poškozena. Pokud zjistíte, že je produkt poškozen, kontaktujte zástupce společnosti AMS.

Určeno k použití pouze u jednoho pacienta. Nepoužívejte opakovaně, nezpracovávejte k opakovanému použití ani neresterilizujte. Opakované použití, zpracování k opakovanému použití či resterilizace mohou narušit strukturální integritu zařízení a/nebo vést k jeho selhání a následnému úrazu, onemocnění nebo úmrtí pacienta. Opakované použití, zpracování k opakovanému použití či resterilizace mohou být také spojeny s rizikem kontaminace zařízení a/nebo vést k infekci či křížové infekci pacienta, včetně (mimo jiné) přenosu infekčního onemocnění (infekčních onemocnění) z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace zařízení může vést k poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta. Po použití zlikvidujte zařízení a balení v souladu s nemocničními, administrativními a/nebo místními vládními předpisy.

Produkt skladujte na čistém, suchém a tmavém místě při pokojové teplotě.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

Brazil Local Contact

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
<http://www.bostonscientific.com/bra>



AMSTM

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343 U.S.A.

U.S. Toll Free: 1 800 328 3881

Tel: +1 952 930 6000

Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved. All trademarks are property of
the respective owners.
230128-07-MH (2017-12)

