

AMS™ Quick Connect

Suturfrie hurtigkoplinger med vindu

Bruksanvisning

Norsk **AMS™ Quick Connect**

Suturfrie hurtigkoplinger med vindu

Bruksanvisning 3

R ONLY

AMS™

no Norsk



no Skal ikke resteriliseres



no Skal ikke gjenbrukes



no Se bruksanvisningen



no Sterilisert med damp



no Brukes før ÅÅÅÅ-MM-DD



no Produksjonsdato

Rx ONLY

no **Forsiktig:** Føderale lover i USA krever at dette produktet bare selges av eller etter forordning fra lege.



no Partinummer



no Katalognummer



no Autorisert representant i EU



no Produsent




no Resirkulerbar emballasje

AMS™ Quick Connect


Suturfrie hurtigkoplinger med vindu

Bruksanvisning


Monteringsanvisning for suturfrie AMS Quick Connect-koplinger med vindu

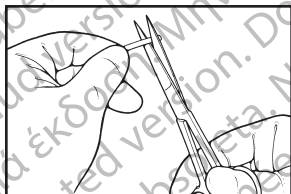


1. Beskjær slangen vinkelrett.

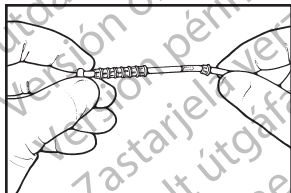


2. Trø på krageringene.
Plasser én kragering i hver ende av slangen.

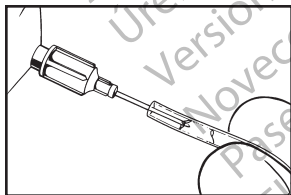


3. Skyll.
Skyll begge slangeendene med passende løsning.

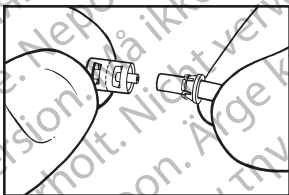


4. Før inn den først slangen.
Skyv slangen godt inn helt til midtveggen i koplingen som kan ses gjennom koplingsvinduet.

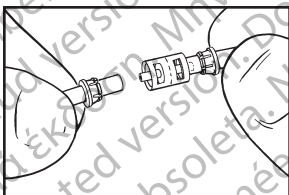


5. Tilslutning.
Skyv den andre slangen godt mot midtveggen. Sjekk i vinduet for å være sikker på at begge slangeendene fortsatt berører midtveggen.

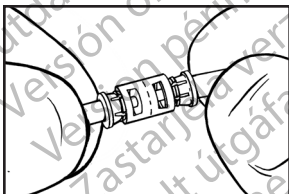


6. Sett krageringene mot koplingen før du bruker monteringsverktøyet.

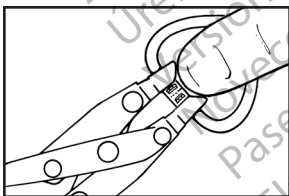

7. Hold ikke koplingen i monteringsverktøyet. Dette kan føre til at krageringen blir sittende skjevt mot koplingen og føre til at krageringens tenner ikke festes.

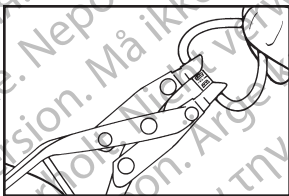


- 8a.** Pass på at koplingen er satt helt inn i monteringsverktøyet. Klem sakte sammen håndtaket for å lukke verktøyet. Hvis en tann på krageringen ikke går inn i koplingen for tilslutningen fullføres, frigjør trykket mot koplingen og still krageringen slik at den flukter med koplingen. Fullfør tilslutningen. Lukkestoppen må berøre det andre håndtaket.

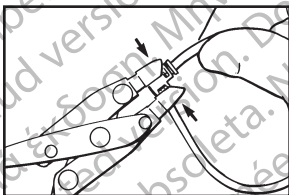


- 8b.** Ved bruk av rettvinklet kopling, må monteringsverktøyet brukes to ganger, én gang på hver ende av koplingen. Forsikre deg igjen om at slangen berører midtre vegg på begge sider av koplingen. Lukkestopperen på monteringsverktøyet må berøre motsatt håndtak hver gang.

FORSIKTIG: Kontroller slangen før du lukker monteringsverktøyet. Slangen må ikke komme i klem mellom verktøykjeven og koplingen. Slangen skal gå rett ut fra koplingsendene, gjennom sporene i monteringsverktøyet.

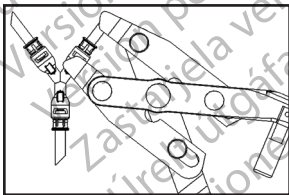

- 8c.** Hvis du bruker en treveiskopling, skal monteringsverktøyet brukes 3 ganger, én gang på hver ende av koplingen. Monteringsverktøyet skal settes på *fra siden* på hver koplingsende. Før slangen inn i hver koplingsende til slangen kommer i kontakt med den indre koplingsveggen, som du ser gjennom koplingsvinduet.


FORSIKTIG: Den lange grenen på treveiskoplingen skal være koplet til kontrollpumpen.

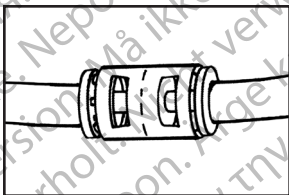

9.


Kontroll.

Etter tilslutningen er fullført må begge endene på koplingen inspiseres grundig. Hvis noen av tennene på krageringen ikke går inn i koplingen og stikker utenfor, må du ikke lukke verktøyet. Start om igjen ved å skjære bort koplingen og utføre en helt ny tilslutning.

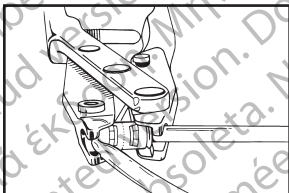

Feil

Slangen perforeres.

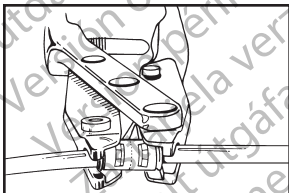

Riktig

Slangene går rett ut fra kopplingsendene. Etter at du har brukt AMS Quick Connect-verktøyet, skal du se at slangene buler litt ut gjennom kopplingsvindet. Dette angir at slangene sitter godt mot kopplings midtvegg.

AMS Quick Connect-systemet kan ikke resteriliseres. Normal sykehussterilisering vil skade koplingens komponenter. (Monteringsverktøyet kan resteriliseres.)

MERK: De stutfrie AMS Quick Connect-koplingene med vindu må ikke brukes på revisjonsslanger.

Levering og oppbevaring

ADVARSEL: Innholdet leveres STERILT. Skal ikke brukes hvis den sterile barrieren er brutt. Ta kontakt med AMS-representanten hvis du finner skader.

Kun til bruk på en pasient. Må ikke brukes om igjen, reposseseres eller resteriliseres. Gjenbruk, repossesering eller resterilisering kan ødelegge produktets strukturelle integritet og/eller føre til produktsvikt, som igjen kan føre til skade, sykdom eller død for pasienten. Gjenbruk, repossesering eller resterilisering kan dessuten medføre risiko for kontaminering av produktet og/eller forårsake pasientinfeksjon eller kryssinfeksjon, inkludert, men ikke begrenset til, overføring av smittesykdom(mer) fra en pasient til en annen. Kontaminering av produktet kan føre til skade, sykdom eller død for pasienten. Etter bruk skal produktet og emballasjen kasseres i samsvar med sykehusets retningslinjer, administrative retningslinjer og/eller offentlige retningslinjer.

Oppbevar produktet på et rent, tørt og mørkt sted ved romtemperatur.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

Brazil Local Contact

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
<http://www.bostonscientific.com/bra>



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343 U.S.A.
U.S. Toll Free: 1 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved. All trademarks are property of
the respective owners.
230128-09-MH (2017-12)

