

AMS™ Quick Connect

Sütürsüz Pencere Konektörleri

Kullanım Talimatları

Türkçe AMS™ Quick Connect












Sütürsüz Pencere Konektörleri

Kullanım Talimatları 3

R ONLY

AMS™

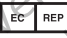tr Türkçe


	tr Yeniden sterilize etmeyin
	tr Yeniden kullanmayın
	tr Kullanım Talimatlarına Bakın
	tr Buharla Sterilize Edilmiştir
	tr Son kullanma tarihi: GG-AA-YYYY
	tr İmalat tarihi
EX ONLY	tr Dikkat: Federal yasalar (ABD), bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla satışına izin vermektedir.
	tr Lot numarası
	tr Katalog numarası
	tr Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi
	tr İmalatçı
	tr Geri dönüşümlü ambalaj

AMS™ Quick Connect


Sütürsüz Pencere Konektörleri

Kullanım Talimatları


AMS Quick Connect Sütürsüz Pencere Konektörü Montaj Talimatları

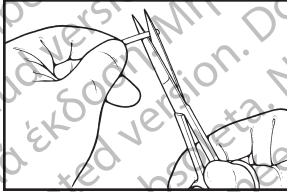


1. Boruyu dümdüz kesin.

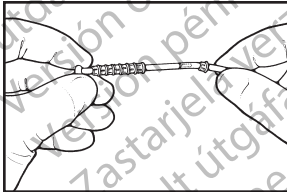


2. Tespit parçası halkalarını takın.
Her borunun ucuna bir halka yerleştirin.

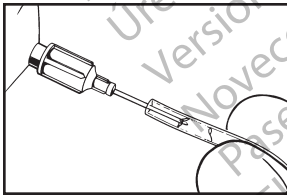


3. Yıkama.
Uygun solüsyon kullanarak her iki borunun da ucunu yıkayın.

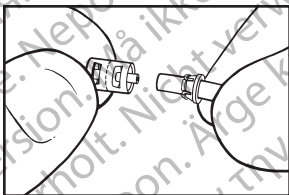


4. İlk boruyu yerleştirin.
Konektör penceresinden görülene kadar boruyu konektörün orta duvarına sıkıca itin.

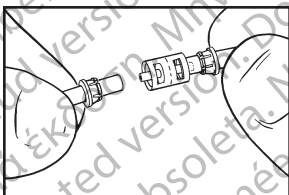


5. Bağlayın.
İkinci boruyu orta duvara sıkıca itin. Her iki boru ucunun da orta duvara temas ettiğinden emin olmak için pencereleri kontrol edin.

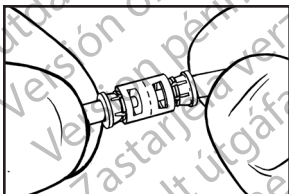


6. Tertibat aracını uygulamadan önce tespit parçalarını konektöre göre hizalayın.

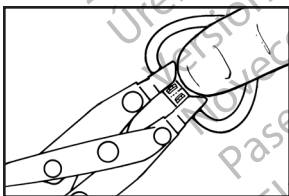

7. Bağlantıyı tertibat aracında tutmayın. Bu tespit parçasının konektör ile olan hizalamasının bozulmasına ve tespit parçası çatallının/çatallarının bağlanamamasına neden olabilir.

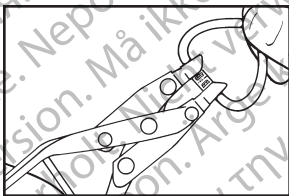


- 8a.** Bağlantının tertibat aracına tamamen yerleştirildiğinden emin olun. Aracı kapatarak tutamağı yavaşça sıkın. Bağlantı tamamlanmadan önce tespit parçasının çatalı konektöre girmezse bağlantıdaki basıncı boşaltın ve tespit parçasının, konektörle yeniden hizalanmasını sağlayın. Bağlantıyı tamamlayın. Kapatma noktası karşıdaki tutamağa temas etmelidir.

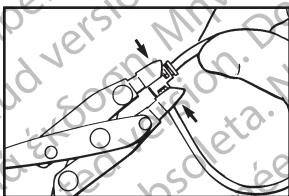


- 8b.** Dik açılı konektör kullanılırken tertibat aracı konektörün her ucunda birer kere olmak üzere toplam iki kere kullanılmalıdır. Tekrar borunun, konektörün her iki yanında orta duvara temas ettiğinden emin olun. Tertibat aracının kapatma noktası, her seferinde karşıdaki tutamağa temas etmelidir.

DİKKAT: Tertibat aracını kapatmadan önce boruyu kontrol edin. Boru, tertibat aracının çeneşiyile konektör arasında sıkışmamalıdır. Borular, tertibat aracının yuvalarından geçerek konektörün uçlarından düz bir şekilde çıkmalıdır.

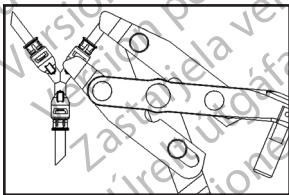

- 8c.** 3 yönlü konektör kullanılırken tertibat aracı konektörün her ucunda birer kez olmak üzere toplam üç kez kullanılmalıdır. Tertibat aracı, her konektör ucunun *yanından* devreye sokulmalıdır. Konektör penceresinden borunun iç konektöre temas ettiği görülene kadar, boruyu her konektör ucunun içine ilerletin.


DİKKAT: 3 yönlü konektörün uzun kolu, kontrol pompasına bağlanmalıdır.

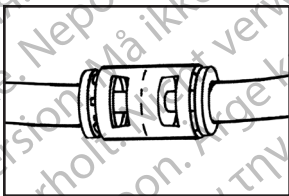

9.


Kontrol.

Bağlantıyı yaptıktan sonra bağlantının iki ucunu da iyice kontrol edin. Tespit parçasının çatalı/çatalları bağlantıya girmezse ve dışına çıkarsa kapatmayın. Bağlantıyı keserek ve tamamen yeni bir bağlantı hazırlayarak bağlantıyı yeniden yapın.

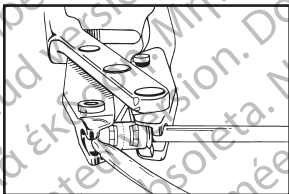

Yanlış

Borunun dışına çıkıyor.

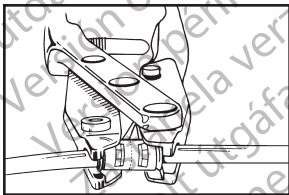

Doğru

Borular, konektörün uçlarından düz bir şekilde çıkıyor. AMS Quick Connect™ Tertibat Aracı kullanıldıktan sonra boru, pencereden kısmi olarak çıkıntı yapmalıdır. Bu, borunun konektörün orta duvarına sıkı bir şekilde dayanmaya devam ettiğini gösterir.

AMS Quick Connect Sistemi yeniden sterilize edilemez. Geleneksel hastane sterilizasyonunun uygulanması konektör bileşenlerine zarar verir. (Tertibat aracı yeniden sterilize edilebilir.)

NOT: AMS Quick Connect Sütürsüz Pencere Konektörleri revizyon borularda kullanılmamalıdır.

Sağlanma Biçimi ve Saklama

UYARI: İçerik STERİL olarak tedarik edilmektedir. Steril bariyer hasarlıysa kullanmayın. Hasar tespit edilirse AMS temsilcinizi arayın.

Yalnızca tek hastada kullanım içindir. Yeniden kullanmayın, yeniden işlem uygulamayın veya yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanım, yeniden işlem uygulama veya yeniden sterilizasyon, cihazın yapısal bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve/veya cihazın arızalanmasına neden olarak hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne yol açabilir. Yeniden kullanım, yeniden işlem uygulama veya yeniden sterilizasyon aynı zamanda cihazın kontamine olması riskini oluşturabilir ve/veya enfeksiyöz hastalığın (hastalıkların) bir hastadan diğerine bulaşması da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hasta enfeksiyonuna veya çapraz enfeksiyona neden olabilir. Cihazın kontamine olması, hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne neden olabilir. Kullanım sonrasında, ürünü ve ambalajı hastane, idari birim ve/veya yerel devlet politikasına uygun şekilde atın.

Ürünü temiz, kuru ve karanlık bir ortamda, oda sıcaklığında saklayın.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

Brazil Local Contact

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
<http://www.bostonscientific.com/bra>



AMSTM

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343 U.S.A.
U.S. Toll Free: 1 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved. All trademarks are property of
the respective owners.
230128-12-MH (2017-12)

