

AMS™ Quick Connect

Ompeleeton ikkunaliitin

Käyttöohjeet

Suomi **AMS™ Quick Connect**

Ompeleeton ikkunaliitin

Käyttöohjeet..... 3

R ONLY

AMS™

fi Suomi



fi Ei saa steriloida uudelleen



fi Ei saa käyttää uudelleen



fi Tutustu käyttöohjeisiin



fi Steriloitu höyryllä



fi Käyt. ennen VVVV-KK-PP



fi Valmistuspäivämäärä

R ONLY

fi **Huomautus:** Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.



fi Eränumero



fi Luettelonumero



fi Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä



fi Valmistaja




fi Kierrätettävä pakkaus

AMS™ QuickConnect


Ompelieton ikkunaliitin

Käyttöohjeet


Ompeliettomien AMS QuickConnect -ikkunaliittimen kokoonpano-ohjeet

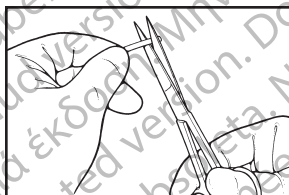


1. Katkaise letkut tasaisesti.

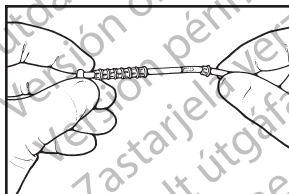


2. Kiinnitä holkkirenkaat.
Aseta yksi rengas kunkin letkun päähän.

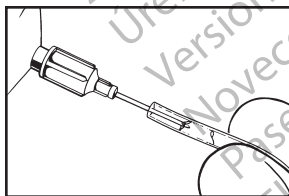


3. Huuhtelee.
Huuhtelee molempien letkujen päät sopivalla liuoksella.

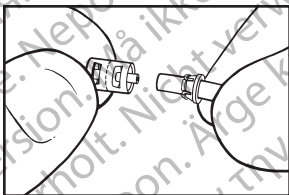


4. Työnä ensimmäinen letku sisään.
Työnä letku lujasti kiinni liittimen keskiseinämaan liittimen ikkunasta katsottuna.

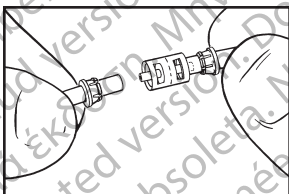


5. Liitä.
Työnä toinen letku lujasti kiinni keskiseinämaan. Varmista ikkunasta, että kummatkin letkupäät koskettavat edelleen keskiseinämaa.

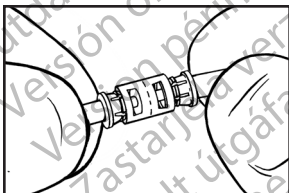


6. Vie holkit liittintä vasten, ennen kuin käytät kokoonpanovälinettä.

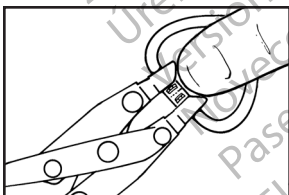

7. Älä pitele liittosta kokoonpanovälineellä. Se voi aiheuttaa holkin väärän linjaantumisen liittimeen nähden, jolloin holkin kärjet eivät ehkä osu liittokseen.

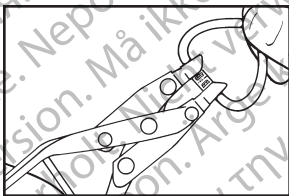


8a. Varmista, että liitos viedään kokonaisuudessaan kokoonpanovälineeseen. Purista kahvasta hitaasti siten, että kokoonpanoväline sulkeutuu. Jos holkin kärki ei mene sisään liittimeen ennen liittoksen tekemistä loppuun, vapauta liittoksen puristus ja anna holkin asettua linjaan liittimen kanssa. Tee liitos loppuun. Sulkupysäyttimen tulee koskettaa vastakkaista kahvaa.

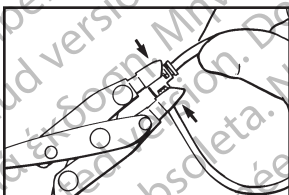


8b. Jos käytät suorakulmaliitintä, kokoonpanovälinettä täytyy käyttää kaksi kertaa – kerran kumpaankin liittinpäähän. Varmista tässäkin tapauksessa, että letkut koskettavat liittimen keskiseinämiä kummaltakin puolelta. Kokoonpanovälineen sulkupysäyttimen on kosketettava vastakkaista kahvaa joka kerran.

HUOMIO: Tarkasta letku ennen kokoonpanovälineen sulkemista. Letku ei saa jäädä kiinni kokoonpanovälineen leukoja ja liittimen väliin. Letkujen tulee kulkea suoraan ulos liittimen päistä kokoonpanovälineessä olevien aukkojen kautta.

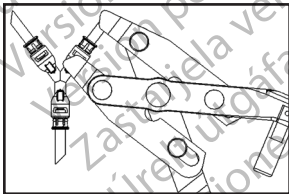

8c. Jos käytät 3-haaraista liittintä, kokoonpanovälinettä täytyy käyttää kolme kertaa — kerran kumpaankin liittinpäähän. Kokoonpanovälineen tulee tarttua liittimeen *kummankin liittimen pään puolelta*. Vie letkua eteenpäin kumpaankin liittimen päähän, kunnes näet liittimen ikkunasta, että se koskettaa liittimen sisäseinämiä.


HUOMIO: 3-haaraisen liittimen pitkä haara tulee kiinnittää ohjauspumppeihin.

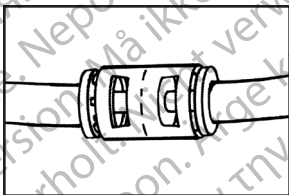

9.


Tarkista.

Kun liitos on tehty valmiiksi, tarkista sen molemmat päät huolellisesti. Jos holkin kärjet eivät mene sisään liittimeen ja työntyvät siitä ulos, älä sulje liittosta. Tee liitos uudelleen siten, että leikkaat liittoksen pois ja teet kokonaan uuden.

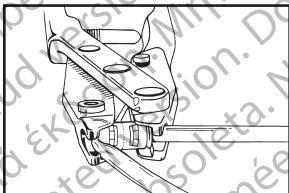

Väärin

Puhkaisee letkun.

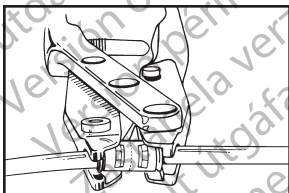

Oikein

Letkut tulevat suoraan ulos liittimen päistä. AMS Quick Connect™ kokoonpanovälineen käytön jälkeen letkun pitää pullistua osittain ulos liittimen ikkunasta. Tämä osoittaa, että letku lepää edelleen tiukasti liittimen keskiseinämää vasten.

AMS Quick Connect -järjestelmää ei voi steriloida uudelleen. Perinteinen sairaalasterilointi vaurioittaa liittimen osia. (Kokoonpanovälineen voi steriloida uudelleen.)

HUOMAUTUS: Ompeleetonta AMS Quick Connect -ikkunaliitintä ei tule käyttää tarkastusletkuissa.

Toimitustapa ja varastointi

VAROITUS: Sisältö toimitetaan STERIIILINÄ. Ei saa käyttää, jos steriili pakkaus on vaurioitunut. Jos vaurioita havaitaan, ota yhteyttä AMS-edustajaan.

Vain yhden potilaan käyttöön. Ei saa käyttää, käsitellä tai steriloida uudelleen. Uudelleenkäyttö, -käsitely tai -sterilointi voi vaarantaa laitteen rakenteen eheyden ja/tai johtaa laitteen toimintahäiriöön, joka puolestaan voi aiheuttaa potilaan loukkaantumisen, sairastumisen tai kuoleman. Uudelleenkäyttö, -käsitely tai -sterilointi voi myös aiheuttaa laitteen kontaminaatoriskin ja/tai aiheuttaa potilasinfektion tai risti-infektion, mukaan lukien - mutta siihen rajoittumatta - tarttuvien tautien siirtymisen potilaasta toiseen. Laitteen kontaminaatio voi johtaa potilaan loukkaantumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan. Käytön jälkeen tuote ja sen pakkaus on hävitettävä sairaalan, hallinnon ja/tai paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Säilytettävä puhtaassa, kuivassa ja pimeässä paikassa huoneenlämmössä.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

Brazil Local Contact

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
<http://www.bostonscientific.com/bra>



AMSTM

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343 U.S.A.
U.S. Toll Free: 1 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved. All trademarks are property of
the respective owners.
230128-13-MH (2017-12)

