

AMS™ Quick Connect

Bezstežové okienkové konektory

Návod na použitie

Slovensky **AMS™ Quick Connect**


Bezstežové okienkové konektory

Návod na použitie..... 3

R ONLY

AMS™

sk Slovensky


	sk Nesterilizujte opakovane
	sk Nepoužívajte opakovane
	sk Pozrite si návod na použitie
	sk Sterilizované parou
	sk Použite do RRRR-MM-DD
	sk Dátum výroby
	sk Upozornenie: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tejto pomôcky na lekára alebo na jeho predpis.
	sk Číslo šarže
	sk Katalógové číslo
	sk Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve
	sk Výrobca
	sk Recyklovateľný obal

AMS™ Quick Connect


Bezstebové okienkové konektory

Návod na použitie


Pokyny na zostavenie bezstebového okienkového konektora AMS Quick Connect

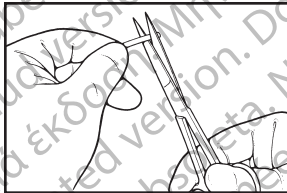


1. Hadičky kolmo zastrihnite.

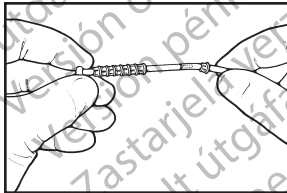


2. Pripevnite poistné prstence.
Na koniec každej hadičky umiestnite jeden poistný prstenc.

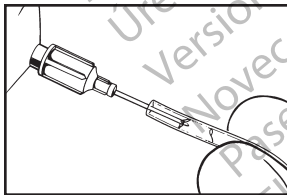


3. Prepláchnite.
Konce oboch hadičiek prepláchnite pomocou vhodného roztoku.

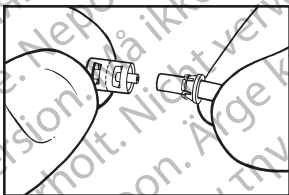


4. Vložte prvú hadičku.
Pevne zatlačte hadičku na strednú stenu konektora tak, ako to vidíte cez okienko konektora.

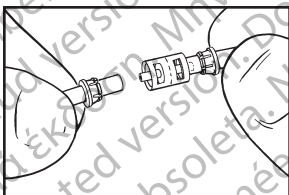


5. Pripojte.
Pevne zatlačte druhú hadičku na strednú stenu. Skontrolujte okienka a overte, či sa obidva konce hadičky stále dotýkajú strednej steny.

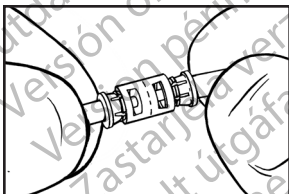


6. Pred použitím montážneho nástroja priblížte kliešťiny ku konektoru.

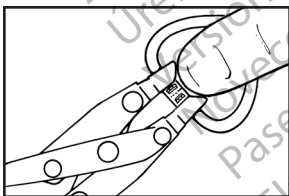

7. Pripojku nedržte v montážnom nástroji. Môže to prispieť k nesprávnemu zarovnaní kliešťiny s konektorom a spôsobiť, že sa hrot (-y) kliešťiny nebude nachádzať v prípojke.

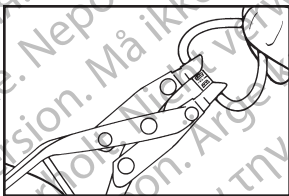


8a. Uistite sa, že je prípojka úplne vložená do montážneho nástroja. Pomaly stlačte rukoväť a zatvorte nástroj. Ak hrot klieštiny pre dokončením pripojenia nezapadne do konektora, uvoľnite tlak na pripojenie a umožnite vyrovnanie klieštiny s konektorom. Dokončíte pripojenie. Zarážka sa musí dotknúť opačnej rukoväte.

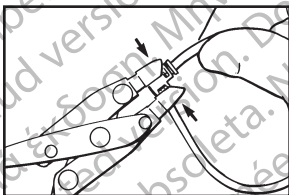


8b. Pri použití pravouhlého konektora musíte montážny nástroj použiť dvakrát, a to raz na každom konci konektora. Znovu si overte, či sa hadička dotýka stredovej steny na obidvoch stranách konektora. Zarážka na montážnom nástroji sa musí vždy dotýkať opačnej rukoväte.

POZOR: Pred uzavretím montážneho nástroja skontrolujte hadičku. Hadička sa nesmie zachytiť medzi čelustou montážneho nástroja a konektorom. Hadičky musia vychádzať priamo z konca konektora, cez štrbiny v montážnom nástroji.

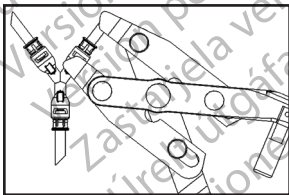

8c. Pri použití 3-cestného konektora musíte montážny nástroj použiť trikrát, a to raz na každom konci konektora. Montážny nástroj musí byť zachytený zbohu každého konca konektora. Zasuňte hadičky do každého konca konektora dovtedy, kým sa hadičky nedotknú vnútornej prepážky konektora. Uvidíte to v okienku konektora.


POZOR: Dlhé rameno 3-cestného konektora sa musí pripojiť na ovládaciu pumpu.

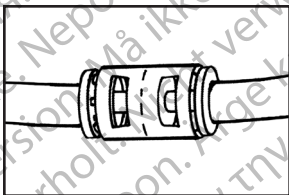

9. Skontrolujte.
Po dokončení pripojenie dôkladne skontrolujte oba konce pripojenia. Ak hrot (-y) klieštiny nezapadli do konektora a vyčnievajú, nezatvárajte. Pripojenie znovu vytvorte tak, že odstrihnete pripojenie a vytvoríte úplne nové pripojenie.


Nesprávne

Perforuje hadičku.

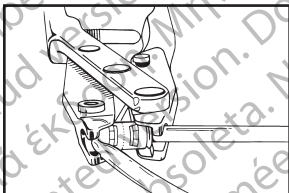

Správne

Hadičky vychádzajú priamo z koncov konektora. Po použití montážneho nástroja AMS Quick Connect™ by mala hadička čiastočne vyčnievať cez okienko konektora. Znamená to, že hadička je pevne prítlačaná na stredovú stenu konektora.

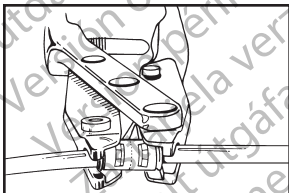

System AMS Quick Connect nie je možné opakovane sterilizovat. Konvenčna nemocnična sterilizácia spôsobí poškodenie komponentov konektora. (Montážny nástroj sa môže sterilizovat opakovane.)

POZNÁMKA: Bezstehové okienkové konektory AMS Quick Connect by sa nemali používať na revíznych hadičkách.

Stav pri dodaní a skladovanie

VÝSTRAHA: Obsah sa dodáva STERILNÝ. Nepoužívajteho, ak je poškodená sterilná bariéra. Ak zistíte, že je produkt poškodený, kontaktujte zástupcu spoločnosti AMS.

Určené len pre jedného pacienta. Opakovane nepoužívajte, nespracúvajte ani nesterilizujte. Opakované použitie, spracovanie či sterilizácia môžu narušiť štruktúrnu celistvosť pomôcky a/alebo viesť k jej zlyhaniu, čo môže následne spôsobiť poranenie, ochorenie alebo úmrtie pacienta. Opakované použitie, spracovanie či sterilizácia môžu byť takisto spojené s rizikom kontaminácie pomôcky a/alebo viesť k infekcii či krížovej infekcii pacienta vrátane (okrem iného) prenosu infekčných chorôb z jedného pacienta na druhého. Kontaminácia pomôcky môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo úmrtiu pacienta. Po použití pomôcku a balenie zlikvidujte v súlade s nemocničnými, administratívnymi a/alebo miestnymi vládnymi predpismi.

Produkt skladujte na čistom, suchom a tmavom mieste pri izbovej teplote.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

Brazil Local Contact

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
<http://www.bostonscientific.com/bra>



AMSTM

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343 U.S.A.
U.S. Toll Free: 1 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved. All trademarks are property of
the respective owners.
230128-16-MH (2017-12)

