

AMS™ Quick Connect

Hechtdraadloze raamconnectors

Gebruiksaanwijzing

Nederlands **AMS™ Quick Connect**

Hechtdraadloze raamconnectors

Gebruiksaanwijzing 3

R ONLY

AMS™

 Nederlands


	 Niet opnieuw steriliseren
	 Niet hergebruiken
	 Raadpleeg de gebruiksinstructies
	 Gesteriliseerd met stoom
	 Uiterste gebruiksdatum JJJJ-MM-DD
	 Fabricagedatum
	 Let op: De Amerikaanse federale wetgeving bepaalt dat dit product alleen mag worden verkocht door of in opdracht van een arts.
	 Partijnummer
	 Catalogusnummer
	 Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	 Fabrikant
	 Recyclebare verpakking

AMS™ Quick Connect


Hechtdraadloze raamconnectors

Gebruiksaanwijzing


Montagehandleiding voor hechtdraadloze AMS Quick Connect-raamconnectors

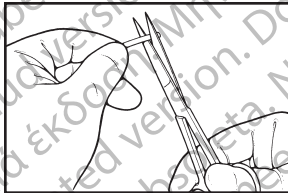


1. Slang recht afsnijden.

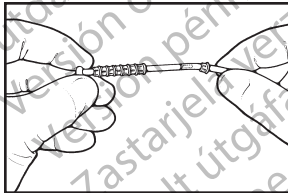


2. Metalen ringen bevestigen.
Plaats een ring aan het uiteinde van elke slang.

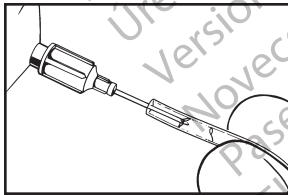


3. Spoelen.
Spoel de uiteinden van beide slangen met geschikte oplossing.

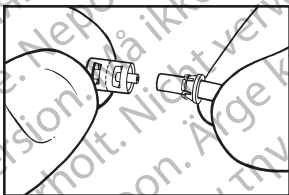


4. Breng de eerste slang in.
Duw de slang stevig op de middenwand van de connector zoals te zien via het raam van de connector.

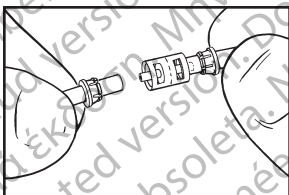


5. Koppelen.
Duw de tweede slang stevig tegen de middenwand. Controleer via het raam of beide slanguiteinden nog steeds tegen de middenwand aanliggen.

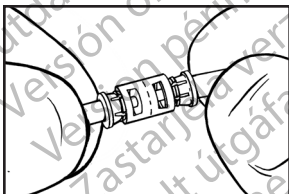


6. Plaats de metalen ringen tegen de connector voordat u het montagehulpmiddel toepast.

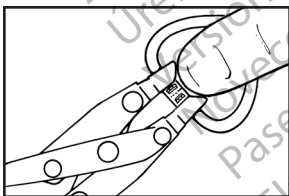

7. Houd de connector niet in het montagehulpmiddel. Dit kan ertoe leiden dat de metalen ring niet op de connector aansluit en dat de pinnen van de metalen ringen niet passen op de verbinding.

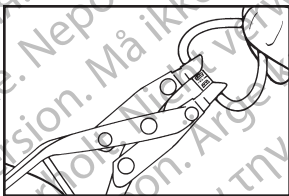


8a. Zorg ervoor dat de verbinding volledig is ingebracht in het montagehulpmiddel. Knijp langzaam in de handgreep en maak het hulpmiddel dicht. Indien een pin van de metalen ring niet in de connector gaat voordat de verbinding tot stand komt, verminder de druk op de verbinding en plaats de metalen ring weer op de connector. Breng de verbinding tot stand. De afsluitplug moet de tegenoverliggende handgreep raken.

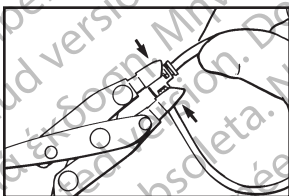


8b. Bij gebruik van een gehoekte connector moet het montagehulpmiddel twee keer worden gebruikt – een keer op elk uiteinde van de connector. Controleer ook nu of de slangen aan beide kanten tegen de middenwand van de connector aanliggen. De afsluitplug moet elke keer het montagehulpmiddel op de tegenoverliggende handgreep raken.

LET OP: Controleer de slangen voordat u het montagehulpmiddel sluit. Pas op dat de slangen niet worden afgekneld tussen de kaken van het montagehulpmiddel en de connector. De slangen moeten door de sleuven in het montagehulpmiddel recht uit de uiteinden van de connector naar buiten komen.

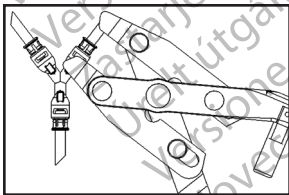

8c. Als u een 3-wegconnector gebruikt, moet het montagehulpmiddel 3 keer worden gebruikt – een keer aan elk uiteinde van de connector. Het montagehulpmiddel moet worden aangebracht *vanaf de zijde* van elk connectoruiteinde. Schuif de slang in elk connectoruiteinde totdat deze de binnenwand van de connector raakt; u kunt dit zien door het raam van de connector.


LET OP: De lange poot van de 3-wegconnector moet worden verbonden met de controlepomp.

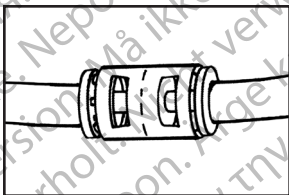

9.


Controleren.

Controleer nadat de verbinding tot stand is gebracht, beide uiteinden van de verbinding grondig. Sluit de connector niet indien de tand(en) van de metalen ring niet in de connector zitten en uitsteken. Maak de verbinding opnieuw door deze eruit te snijden en een volledig nieuwe verbinding te maken.

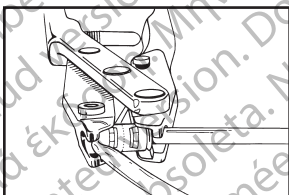

Onjuist

Perforeert de slangen.

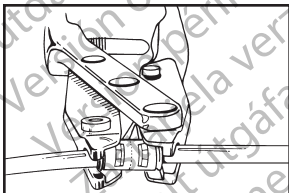

Juist

Slangen komen recht uit de uiteinden van de connector. Na gebruik van het montagehulpmiddel voor AMS Quick Connect moet de slang gedeeltelijk uit het raam van de connector uitstulpen. Dit wijst erop dat de slang nog steeds goed tegen de middenwand van de connector zit.

Het AMS Quick Connect-systeem kan niet opnieuw gesteriliseerd worden. Door de gangbare sterilisatiemethoden in het ziekenhuis zullen de connectoronderdelen beschadigd raken. (Het montagehulpmiddel kan opnieuw gesteriliseerd worden.)

OPMERKING: Hechtdraadloze AMS Quick Connect-raamconnectors mogen niet worden gebruikt bij slangen voor revisie.

Levering en opslag

WAARSCHUWING: De inhoud wordt STERIEL geleverd. Niet gebruiken als de steriele barrière is beschadigd. Bel in geval van beschadiging uw AMS-vertegenwoordiger.

Uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Niet hergebruiken, herverwerken of hersteriliseren. Hergebruiken, herverwerken of hersteriliseren kan de structurele integriteit van het hulpmiddel aantasten en/of de werking van het hulpmiddel verstoren, wat op zijn beurt letsel, ziekte of overlijden van de patiënt kan veroorzaken. Hergebruiken, herverwerken of hersteriliseren brengt tevens het risico van verontreiniging van het hulpmiddel en/of infectie of kruisbesmetting van de patiënt met zich mee, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van besmettelijke ziekte(n) tussen patiënten. Besmetting van het hulpmiddel kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt. Werp dit product en het verpakkingsmateriaal na gebruik weg volgens het hiervoor geldende beleid van de instelling en de overheid.

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een schone, droge en donkere plaats.

Australian Sponsor Address

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

Brazil Local Contact

Para informações de contato da
Boston Scientific do Brasil Ltda,
por favor, acesse o link
<http://www.bostonscientific.com/bra>



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343 U.S.A.
U.S. Toll Free: 1 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved. All trademarks are property of
the respective owners.
230128-19-MH (2017-12)

