

Sæt med CXR-spidsforlængere bagtil (Rear Tip Extender - RTE)

Brugsanvisning

Dansk Sæt med CXR-spidsforlængere bagtil (Rear Tip Extender - RTE)
Brugsanvisning.....3

Rx ONLY

AMS™

da Dansk

	da Må ikke resteriliseres
	da Må ikke genbruges
	da Se brugsanvisningen
	da Dampsteriliseret
	da Anvendes inden DD-MM-AAAA
	da Fremstillingsdato
R ONLY	da Forsigtig! Ifølge amerikansk lov (USA) må denne anordning kun sælges af eller efter ordination af en læge.
	da Partinummer
	da Katalognummer
	da Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	da Producent
	da Genbrugsemballage

Sæt med CXR-spidsforlængere bagtil (Rear Tip Extender - RTE)

Brugsanvisning

Indhold

Dette sæt med spidsforlængere bagtil (RTE) indeholder 2 sæt RTE'er i følgende størrelser:

0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm som kan stables, 2,0 cm, 3,0 cm

Indikationer for brug

Disse RTE'er er udelukkende beregnet til anvendelse sammen med AMS 700™ CXR oppumpelige penisprotesecylindere.

Anvisninger

1. Følg anvisningerne i vejledningen til operationsstuen til implantering af AMS 700 CXR-cylindere.
2. Vælg en RTE med en passende længde for hver cylinder, der passer bedst til patientens anatomi. Om ønsket kan størrelsen justeres i trin på 1/2 cm ved at påsætte størrelse 0,5 cm, 1,5 cm eller, ved længder større end 1,5 cm, ved at stable en ekstra RTE-længde på en hel centimeter til RTE'en på 1,5 cm.
3. Tryk med fast hånd RTE'en ned på den proksimale ende af AMS 700 CXR-cylindere. RTE'en er korrekt påsat, når rillen på cylinderen griber ind i den tilsvarende låsering på RTE'en, hvilket giver en glat, udvendig profil. Det samme princip gælder, når en ekstra RTE sættes på 1,5 cm RTE'en, der kan stables, for at opnå størrelser i 1/2 cm-længder.
4. Drej hver RTE en smule for at kontrollere, at låseringen er i indgreb.

Forsigtig

1. Med undtagelse af 1,5 cm RTE'en må CXR-spidsforlængere bagtil ikke stables. Hvis RTE'er i andre størrelser stables, vil låsemekanismen ikke gå i indgreb, og spidsforlængerne bagtil vil muligvis ikke forblive sammenkoblede.
2. CXR RTE'er er ikke kompatible med CX- eller LGX-cylindere.

Levering og opbevaring

ADVARSEL: Indholdet leveres STERILT. Må ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget. Kontakt en AMS-repræsentant, hvis der konstateres beskadigelse.

Må kun anvendes til én patient. Må ikke genbruges, genforarbejdes eller resteriliseres. Genbrug, genforarbejdning eller resterilisering kan kompromittere anordningens strukturelle integritet og/eller føre til svigt af anordningen, hvilket kan resultere i patientskade, -sygdom eller -død. Genbrug, genforarbejdning eller resterilisering kan også medføre risiko for kontaminering af anordningen og/eller forårsage infektion eller krydsinfektion som for eksempel overførsel af smitsom(me) sygdom(me) fra en patient til en anden. Kontamination af anordningen kan føre til skade på patienten eller dennes sygdom eller død. Bortskaf produktet og emballagen ifølge hospitalets, de administrative og/eller regionale regler efter brug.

Opbevar produktet et rent, tørt, mørkt sted ved rumtemperatur.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + +55 11 5091-9755



AMSTM

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its
affiliates. All Rights reserved.
230129-02-MH (2017-12)

