

CXR bakändesförlängarsats (RTE)

Bruksanvisning

Svenska **CXR bakändesförlängarsats (RTE)**

Bruksanvisning 3

Rx ONLY

AMS™

sv Svenska

	sv Får inte omsteriliseras
	sv Får inte återanvändas
	sv Se bruksanvisning
	sv Steriliserad med ånga
	sv Använd före ÅÅÅA-MM-DD
	sv Tillverkningsdatum
Rx ONLY	sv Försiktighetsåtgärd: Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.
	sv Satsnummer
	sv Katalognummer
	sv Auktoriserad EU-representant
	sv Tillverkare
	sv Återvinningsbar förpackning

CXR bakändesförlängarsats (RTE) **Bruksanvisning**

Innehåll

Denna bakändesförlängarsats (RTE) innehåller 2 uppsättningar bakändesförlängare i följande storlekar:

0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm (staplingsbar), 2,0 cm, 3,0 cm

Indikationer för användning

Dessa bakändesförlängare är endast avsedd för användning med AMS 700™ CXR uppumpbara penisprotescylindrar.

Anvisningar

1. Följ anvisningarna i operationshandboken för implantation av AMS 700 CXR-cylindrar.
2. Välj en bakändesförlängare av lämplig längd för varje cylinder med hänsyn till vad som passar patientens anatomi bäst. Vid behov kan storleken kan ändras i 0,5 cm-steg genom att koppla på en 0,5 cm eller 1,5 cm lång bakändesförlängare eller, för längder som överstiger 1,5 cm, genom att stapla en bakändesförlängare på ytterligare en hel centimeter till bakändesförlängaren på 1,5 cm.
3. Tryck med fast hand ner bakändesförlängaren på den proximala änden av AMS 700 CXR-cylindern. Bakändesförlängaren är ordentligt ansluten när spåret i cylindern griper i motsvarande låsring på bakändesförlängaren, vilket ger en slät yttre profil. Samma princip gäller när du ansluter ytterligare en bakändesförlängare till den 1,5 cm staplingsbara bakändesförlängaren för att kunna ändra längd med 0,5 cm.
4. Vrid varje bakändesförlängare en aning för att bekräfta att låsringen griper i.

Försiktighetsåtgärd:

- 1 Stapla inte CXR-bakändesförlängare med andra typer än den 1,5 cm långa bakändesförlängaren. Om bakändesförlängare av en annan storlek används kommer läsmekanismen inte att gripa i, vilket innebär att det finns risk för att förlängarna lossnar.
2. Bakändesförlängarna till CXR är inte kompatibla med CX- eller LGX-cylindrar.

Leveranskick och förvaring

WARNING! Innehållet levereras STERILISERAT. Använd ej om det sterila skyddet är skadat. Kontakta en representant för AMS om skada upptäcks.

Endast för användning på en patient. Får ej återanvändas, ombearbetas eller omsterilisas. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan äventyra produktens strukturella integritet och/eller leda till att den inte fungerar som den ska, vilket i sin tur kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan också skapa risk för att produkten kontamineras och/eller orsaka att patienten drabbas av infektion eller korsinfektion, inklusive, men inte begränsat till, överföring av infektionssjukdom(-ar) från en patient till en annan. Kontamination av produkten kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall. Kassera produkten och förpackningen efter användning i enlighet med sjukhusets, administrativa och/eller lokala myndigheters riktlinjer.

Förvara produkten i rumstemperatur på en ren, torr och mörk plats.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + 55 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its
affiliates. All Rights reserved.
230129-05-MH (2017-12)

