

Sada prodlužovačů zadní špičky CXR (RTE)

Návod k použití

Česky **Sada prodlužovačů zadní špičky CXR (RTE)**

Návod k použití3

Rx ONLY

AMS™

cs Česky

	cs Neresterilizovat
	cs Nepoužívat opakovaně
	cs Prostudujte si návod k použití
	cs Sterilizováno párou
	cs Datum expirace RRRR-MM-DD
	cs Datum výroby
EN ONLY	cs UPOZORNĚNÍ: Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo lékařský předpis.
	cs Číslo šarže
	cs Katalogové číslo
	cs Autorizovaný zástupce v zemích Evropského společenství
	cs Výrobce
	cs Recyklovatelný obal

Sada prodlužovačů zadní špičky CXR (RTE)

Návod k použití

Obsah

Sada prodlužovačů zadní špičky (RTE) obsahuje 2 soubory prodlužovačů RTE v následujících velikostech:

0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm k prodloužení, 2,0 cm, 3,0 cm

Indikace pro použití

Tyto prodlužovače RTE jsou určeny k použití pouze s válci inflatabilní penilní protézy AMS 700™ CXR.

Pokyny

1. Při implantaci válců AMS 700 CXR postupujte podle pokynů v příručce pro operační sály.
2. Pro každý válec vyberte takovou délku prodlužovače RTE, která bude nejlépe vyhovovat anatomii pacienta. Pokud je vyžadována úprava délky o 1/2cm přírůstky, lze k 1,5cm prodlužovači RTE připojit díly o délce 0,5 cm nebo 1,5 cm. K dosažení délky přes 1,5 cm se k 1,5cm prodlužovači RTE připojí jeden další prodlužovač RTE s délkou v celých centimetrech.
3. Pevně přitlačte prodlužovač RTE na proximální konec válce AMS 700 CXR. Prodlužovač RTE je správně připojený, jakmile drážka na válci zaklesne do odpovídajícího zajišťovacího kroužku na prodlužovači RTE a vnější povrch bude hladký. Stejný princip platí i u připojování dalších prodlužovačů RTE na prodlužovaný 1,5cm prodlužovač RTE, kdy je cílem dosáhnout změny délky v 1/2cm přírůstcích.
4. Lehce pootočte každým prodlužovačem RTE a zkontrolujte, že je zajišťovací kroužek správně na svém místě.

Upozornění

1. Neprodlužujte jiné prodlužovače zadní špičky CXR než 1,5cm prodlužovače RTE. Při prodlužování jiných velikostí prodlužovačů RTE se fixační mechanismus neaktivuje a prodlužovače zadní špičky nemusí zůstat připojené.
2. Prodlužovače CXR RTE nejsou kompatibilní s válci CX ani LGX.

Způsob dodání a skladování

VAROVÁNÍ: Obsah se dodává STERILNÍ. Nepoužívejte, pokud je sterilní bariéra poškozena. Pokud zjistíte, že je produkt poškozen, kontaktujte zástupce společnosti AMS.

Určeno k použití pouze u jednoho pacienta. Nepoužívejte opakovaně, nezpracovávejte k opakovanému použití ani neresterilizujte. Opakované použití, zpracování k opakovanému použití či resterilizace mohou narušit strukturální integritu zařízení a/nebo vést k jeho selhání a následnému úrazu, onemocnění nebo úmrtí pacienta. Opakované použití, zpracování k opakovanému použití či resterilizace mohou být také spojeny s rizikem kontaminace zařízení a/nebo vést k infekci či křížové infekci pacienta, včetně (mimo jiné) přenosu infekčního onemocnění (infekčních onemocnění) z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace zařízení může vést k poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta. Po použití zlikvidujte produkt a balení v souladu s nemocničními, administrativními a/nebo místními vládními předpisy.

Produkt skladujte na čistém, suchém, tmavém místě při pokojové teplotě.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + +55 11 5091-9755



AMSTM

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its
affiliates. All Rights reserved.
230129-07-MH (2017-12)

