

CXR-sett med bakre spissforlengere (RTE)

Bruksanvisning

Norsk CXR-sett med bakre spissforlengere (RTE)

Bruksanvisning.....3

Rx ONLY

AMSTM

no Norsk

	no Skal ikke resteriliseres
	no Skal ikke gjenbrukes
	no Se bruksanvisningen
	no Sterilisert med damp
	no Brukes før ÅÅÅÅ-MM-DD
	no Produksjonsdato
Rx ONLY	no Forsiktig: Føderale lover i USA krever at dette produktet bare selges av eller etter forordning fra lege.
	no Partinummer
	no Katalognummer
	no Autorisert representant i EU
	no Produsent
	no Resirkulerbar emballasje

CXR-sett med bakre spissforlengere (RTE) **Bruksanvisning**

Innhold

Dette settet med bakre spissforlengere (RTE) inneholder 2 sett med RTE-er i følgende størrelser:

0,5 cm; 1,0 cm; 1,5 cm til stabling; 2,0 cm; 3,0 cm

Indikasjoner for bruk

Disse RTE-ene er kun beregnet for bruk med AMS 700™ CXR fyllbare penisprotesesyndere.

Instruksjoner

1. Følg instruksjonene i operasjonstuehåndboken for implantasjon av AMS 700 CXR-sylindere.
2. Velg en RTE av passende lengde for hver sylinder for best mulig tilpasning til pasientens anatomi. Tilpasning ned til 1/2 cm kan oppnås, om ønskelig, ved å feste 0,5 cm, 1,5 cm, eller, for lengder over 1,5 cm, ved å stable en ekstra RTE med hel centimeterlengde til RTE-en på 1,5 cm.
3. Press RTE-en bestemt ned på den proksimale enden av AMS 700 CXR-sylindren. RTE-en er riktig festet når sporet på sylindren låser den tilsvarende låseringen på RTE-en, noe som gir en jevn utvendig profil. Det samme prinsippet gjelder når du fester en ekstra RTE til stable-RTE-en på 1,5 cm for å oppnå tilpasningslengder på ½ cm.
4. Vri litt på hver RTE for å kontrollere at låseringen er låst.

Forsiktighetsregler

1. Stable ikke andre CXR bakre spissforlengere enn den som er 1,5 cm. Hvis RTE-er av andre størrelser stables, vil ikke låsemekanismen fungere, og det kan føre til at de bakre spissforlengerne løsner fra hverandre.
2. CXR RTE-er er ikke kompatible med CX- eller LGX-sylindere.

Levering og oppbevaring

ADVARSEL: Innholdet leveres STERILT. Skal ikke brukes hvis den sterile barrieren er brutt. Ta kontakt med AMS-representanten hvis du finner skader.

Kun til bruk på én pasient. Skal ikke brukes om igjen, reprosesserer eller resteriliseres. Gjenbruk, reprosessering eller resterilisering kan ødelegge produktets strukturelle integritet og/eller føre til produktsvikt, som igjen kan føre til skade, sykdom eller død for pasienten. Gjenbruk, reprosessering eller resterilisering kan dessuten medføre risiko for kontaminering av produktet og/eller forårsake pasientinfeksjon eller kryssinfeksjon, inkludert, men ikke begrenset til, overføring av smittesykdom(mer) fra en pasient til en annen. Kontaminering av produktet kan føre til skade, sykdom eller død for pasienten. Etter bruk skal produktet og emballasjen kasseres i samsvar med sykehusets retningslinjer, administrative retningslinjer og/eller offentlige retningslinjer.

Oppbevar produktet på et rent, tørt og mørkt sted ved romtemperatur.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + 55 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its
affiliates. All Rights reserved.
230129-09-MH (2017-12)

