

# CXR:n takakärjen pidennysosapakkaus

## Käyttöohjeet

Suomi **CXR:n takakärjen pidennysosapakkaus**

Käyttöohjeet ..... 3

**Rx ONLY**

**AMS™**

**fi** Suomi

	<b>fi</b> Ei saa steriloida uudelleen
	<b>fi</b> Ei saa käyttää uudelleen
	<b>fi</b> Tutustu käyttöohjeisiin
	<b>fi</b> Steriloitu höyryllä
	<b>fi</b> Käyt. ennen VVVV-KK-PP
	<b>fi</b> Valmistuspäivämäärä
<b>R ONLY</b>	<b>fi</b> <b>Huomautus:</b> Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
<b>LOT</b>	<b>fi</b> Eränumero
<b>REF</b>	<b>fi</b> Luettelonumero
<b>EC REP</b>	<b>fi</b> Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	<b>fi</b> Valmistaja
	<b>fi</b> Kierätettävä pakkaus

## **CXR:n takakärjen pidennysosapakkaus** **Käyttöohjeet**

### **Sisältö**

Tämä takakärjen pidennysosapakkaus sisältää 2 sarjaa, jotka koostuvat seuraavankokoisista pidennysosista:

0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm (pällekkäin asetettava), 2,0 cm, 3,0 cm

### **Käyttöaihe**

Nämä takakärjen pidennysosat on tarkoitettu käytettäviksi vain AMS 700™ -sarjan pumppattavien CXR-penisproteesisylinterien kanssa.

### **Ohjeet**

1. Noudata AMS 700 CXR -sylinderien implantointiin liittyvän leikkaussalioppaan ohjeita.
2. Valitse kullekin sylinterille potilaan anatomiaan parhaiten soveltuva takakärjen pidennysosa. Kokoja voidaan haluttaessa säätää 1/2 cm:n tarkkuudella liittämällä 0,5 cm:n, 1,5 cm:n - tai yli 1,5 cm:n pituuksia käytettäessä lisäksi yksi ylimääräinen yhden senttimetrin pituinen pidennysosa - 1,5 cm:n pidennysosaan.
3. Paina takakärjen pidennysosa tiukasti AMS 700 CXR -sylinderin proksimaalipäähän. Takakärjen pidennysosa on liitetty oikein, kun sylinterin ura kytkeytyy pidennysosan vastaavaan lukitusrenkaaseen ja ulkopinnan profiili on sileä. Sama periaate koskee ylimääräisen pidennysosan liittämistä 1,5 cm:n pällekkäin asetettavaan pidennysosaan, kun koko halutaan säätää ½ cm:n tarkkuudella.
4. Varmista lukitusrenkaan kytkeytyminen kääntämällä hieman jokaista takakärjen pidennysosaa.

## Huomio

1. Vain 1,5 cm:n CXR-pidennysosat saa asettaa päällekkäin. Älä aseta mitään muita CXR:n takakärjen pidennysosia päällekkäin. Jos muunkokoisia takakärjen pidennysosia asetetaan päällekkäin, lukitusmekanismi ei kytkeydy ja pidennysosien keskinäinen liitos saattaa aueta.
2. CXR:n takakärjen pidennysosat eivät ole yhteensopivia CX- tai LGX-sylinterien kanssa.

## Toimitustapa ja varastointi

**VAROITUS:** Sisältö toimitetaan STERILINÄ. Ei saa käyttää, jos steriili pakkaus on vaurioitunut. Jos vaurioita havaitaan, ota yhteyttä AMS-edustajaan.

**Vain yhden potilaan käyttöön.** Ei saa käyttää, käsitellä tai steriloida uudelleen. Uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voi vaarantaa laitteen rakenteen eheyden ja/tai johtaa laitteen toimintahäiriöön, joka puolestaan voi aiheuttaa potilaan loukkaantumisen, sairastumisen tai kuoleman. Uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voi myös aiheuttaa laitteen kontaminaatoriskin ja/tai aiheuttaa potilasinfektion tai risti-infektion, mukaan lukien - mutta siihen rajoittumatta - tarttuvien tautien siirtymisen potilaasta toiseen. Laitteen kontaminaatio voi johtaa potilaan loukkaantumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan. Käytön jälkeen tuote ja sen pakkaus on hävitettävä sairaalan, hallinnon ja/tai paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Säilytettävä puhtaassa, kuivassa ja pimeässä paikassa huoneenlämmössä.

Australian Sponsor Address  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY  
NSW 1455  
Australia  
Free Phone 1800 676 133  
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil  
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.  
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212  
São Paulo-SP CEP 04029-200  
Brasil  
Tel: + 55 11 5091 9753  
Fax: + 55 11 5091-9755



# AMS™

**American Medical Systems, Inc.**

10700 Bren Road West  
Minnetonka, MN 55343  
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881  
Tel: +1 952 930 6000  
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems  
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G  
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost  
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its  
affiliates. All Rights reserved.  
230129-13-MH (2017-12)

