

Kit de prelungitoare proximale (RTE, Rear Tip Extender) CXR

Instrucțiuni de utilizare



Română **Kit de prelungitoare proximale (RTE, Rear Tip Extender) CXR**

Instrucțiuni de utilizare 3

RX ONLY

AMS™

ro Română

	ro A nu se resteriliza
	ro Nu reutilizați
	ro Consultați instrucțiunile de utilizare
	ro Sterilizat cu abur
	ro A se utiliza înainte de AAAA-LL-ZZ
	ro Data fabricației
R ONLY	ro Atenție: Legislația federală (SUA) restricționează comercializarea acestui dispozitiv doar către sau la comanda unui medic.
LOT	ro Număr lot
REF	ro Număr de catalog
	ro Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
	ro Fabricant
	ro Ambalaj reciclabil

Kit de prelungitoare proximale (RTE, Rear Tip Extender) CXR

Instrucțiunile de utilizare

Conținut

Acest kit de prelungitoare proximale (RTE, Rear Tip Extender) conține două seturi de RTE de următoarele dimensiuni:

0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm superpozabil, 2,0 cm, 3,0 cm

Indicații de utilizare

Aceste RTE sunt destinate numai pentru utilizarea împreună cu cilindrii protezelor peniene gonflabile AMS 700™ CXR.

Instrucțiuni

1. Urmăți instrucțiunile din Manualul pentru sala de operație pentru implantarea cilindrilor AMS 700 CXR.
2. Selectați RTE de lungime adecvată pentru fiecare cilindru care se va potrivi cel mai bine cu conformația anatomică a pacientului. Dimensionarea la jumătăți de centimetri poate fi obținută, dacă se dorește, prin atașarea unui RTE de 0,5 cm, a unuia de 1,5 cm sau, pentru lungimi mai mari de 1,5 cm, prin suprapunerea unui RTE suplimentar având lungimea de centimetri întregi la un RTE de 1,5 cm.
3. Apăsați în jos cu fermitate RTE pe capătul proximal al cilindrului AMS 700 CXR. RTE este atașat corect atunci când striția de pe cilindru se fixează în inelul de blocare corespunzător de pe RTE, rezultând un profil exterior neted. Același principiu se aplică atunci când se atașează un RTE suplimentar la un RTE superpozabil de 1,5 cm pentru a obține lungimi de dimensionare la jumătăți de centimetri.
4. Rotiți ușor fiecare RTE pentru a verifica fixarea inelului de blocare.

Atenționare

1. Nu suprapuneți prelungitoarele proximale CXR unele peste altele, cu excepția RTE de 1,5 cm. În cazul în care sunt suprapuse RTE de alte dimensiuni, mecanismul de blocare nu se va fixa și este posibil ca prelungitoarele proximale să nu rămână conectate unul de altul.
2. Prelungitoarele proximale (RTE) CXR nu sunt compatibile cu cilindrii CX sau LGX.

Mod de furnizare și depozitare

AVERTISMENT: Conținutul este furnizat STERIL. A nu se utiliza dacă bariera sterilă este deteriorată. În cazul în care constatați o deteriorare, contactați reprezentantul dvs. AMS.

Pentru utilizare la un singur pacient. Nu reutilizați, reprocesați sau resterilizați. Reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea poate să compromită integritatea structurală a dispozitivului și/sau să ducă la defectarea dispozitivului care, la rândul său, poate cauza lezarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului. De asemenea, reutilizarea, reprocesarea sau resterilizarea poate să ducă la apariția unui risc de contaminare a dispozitivului și/sau să producă infecția sau infecția încrucișată a pacienților, inclusiv, însă fără a se limita la transmiterea uneia sau mai multor boli infecțioase de la un pacient la altul. Contaminarea dispozitivului poate cauza lezarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului. După utilizare, eliminați produsul și ambalajul în conformitate cu politicile intraspitalicești, administrative și/sau ale guvernului local.

Depozitați produsul într-un loc curat, uscat și întunecos, la temperatura camerei.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + 55 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its
affiliates. All Rights reserved.
230129-14-MH (2017-12)

