

# Súprava zadných nastavcov (RTE) CXR

## Návod na použitie

Slovensky **Súprava zadných nastavcov (RTE) CXR**

Návod na použitie.....3

**Rx ONLY**

**AMS™**

sk Slovensky

	sk Nesterilizujte opakovane
	sk Nepoužívajte opakovane
	sk Pozrite si návod na použitie
	sk Sterilizované parou
	sk Použite do RRRR-MM-DD
	sk Dátum výroby
<b>R ONLY</b>	sk <b>Upozornenie:</b> Federálne zákony USA obmedzujú predaj tejto pomôcky na lekára alebo na jeho predpis.
<b>LOT</b>	sk Číslo šarže
<b>REF</b>	sk Katalógové číslo
	sk Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve
	sk Výrobca
	sk Recyklovateľný obal

## Súprava zadných nadstavcov (RTE) CXR Návod na použitie

### Obsah

Táto súprava zadných nadstavcov (RTE) obsahuje 2 súpravy RTE nasledujúcich veľkostí:

0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm nadstavovacie, 2,0 cm, 3,0 cm

### Indikácie na použitie

RTE sú určené na použitie s valcami nafukovacej penilnej protézy AMS 700™ CXR.

### Pokyny

1. Pri implantácii valcov AMS 700 CXR postupujte podľa pokynov v príručke pre operačný sál.
2. Vyberte vhodnú dĺžku RTE pre každý valec, ktorý bude najlepšie zodpovedať anatomickým pomerom pacienta. Odstupňovanie veľkosti po 1/2 cm je možné dosiahnuť nasadením nadstavcov veľkosti 0,5 cm, 1,5 cm, alebo pri dĺžkach väčších ako 1,5 cm, nastavením jednej celej centimetrovej dĺžky RTE na 1,5 cm RTE.
3. Pevne zatlačte RTE na proximálny koniec valca AMS 700 CXR. RTE je nasadený správne, keď drážka na valci zapadne do príslušného prstenca na RTE, výsledkom je hladký vonkajší profil. Rovnaký profil sa vzťahuje na pripojenie ďalšieho RTE na 1,5 cm nadstavovací RTE, ak chcete dosiahnuť odstupňovanie veľkosti po 1/2 cm.
4. Mierne pootočte každý RTE, skontrolujte, či poistný krúžok zapadol.

## Upozornenie

1. Neskladajte RTE CXR na seba, okrem 1,5 cm RTE. Ak budete na seba skladat' iné veľkosti RTE, poistný mechanizmus nezapadne, a môže sa stať, že sa RTE rozpoja.
2. RTE CXR nie sú kompatibilné s CX alebo LGX valcami.

## Stav pri dodaní a skladovanie

**VYSTRAHA:** Obsah sa dodáva STERILNÝ. Nepoužívajteho, ak je poškodená sterilná bariéra. Ak zistíte, že je produkt poškodený, kontaktujte zástupcu spoločnosti AMS.

**Určené len pre jedného pacienta.** Opakovane nepoužívajte, nesterilizujte ani nesterilizujte. Opakované použitie, spracovanie či sterilizácia môžu narušiť štruktúrnu celistvosť pomôcky a/alebo viesť k jej zlyhaniu, čo môže následne spôsobiť poranenie, ochorenie alebo úmrtie pacienta. Opakované použitie, spracovanie či sterilizácia môžu byť takisto spojené s rizikom kontaminácie pomôcky a/alebo viesť k infekcii či krížovej infekcii pacienta vrátane (okrem iného) prenosu infekčných chorôb z jedného pacienta na druhého. Kontaminácia pomôcky môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo úmrtiu pacienta. Po použití pomôcku a balenie zlikvidujte v súlade s nemocničnými, administratívnymi a/alebo miestnymi vládnymi predpismi.

Produkt skladujte na čistom, suchom a tmavom mieste pri izbovej teplote.

Australian Sponsor Address  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY  
NSW 1455  
Australia  
Free Phone 1800 676 133  
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil  
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.  
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212  
São Paulo-SP CEP 04029-200  
Brasil  
Tel: + 55 11 5091 9753  
Fax: + 55 11 5091-9755



# AMS™

**American Medical Systems, Inc.**

10700 Bren Road West  
Minnetonka, MN 55343  
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881  
Tel: +1 952 930 6000  
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems  
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G  
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost  
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its  
affiliates. All Rights reserved.  
230129-16-MH (2017-12)

