

Pakket met CXR achtertippverlengers (RTE)

Gebruiksaanwijzing

Nederlands	Pakket met CXR achtertippverlengers (RTE)	
	Gebruiksaanwijzing	3

Rx ONLY

AMS™

 Nederlands

	 Niet opnieuw steriliseren
	 Niet hergebruiken
	 Raadpleeg de gebruiksinstructies
	 Gesteriliseerd met stoom
	 Uiterste gebruiksdatum JJJJ-MM-DD
	 Fabricagedatum
R ONLY	 Let op: De Amerikaanse federale wetgeving bepaalt dat dit product alleen mag worden verkocht door of in opdracht van een arts.
	 Partijnummer
	 Catalogusnummer
	 Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	 Fabrikant
	 Recyclebare verpakking

Pakket met CXR achtertippverlengers (RTE) **Gebruiksaanwijzingen**

Inhoud

Dit pakket met achtertippverlengers (rear tip extender, RTE) bevat telkens twee sets RTE's in de volgende maten:

0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm stapelbaar, 2,0 cm, 3,0 cm

Indicatie voor gebruik

Deze RTE's zijn bestemd voor gebruik met de cilinders van de AMS 700™ CXR oppompbare penisprothese.

Aanwijzingen

1. Volg de aanwijzingen in de operatiekamerhandleiding voor het implanteren van de AMS 700 CXR-cilinders.
2. Selecteer voor elke cilinder een RTE van de juiste lengte voor een optimale passing volgens de anatomie van de patiënt. De juiste maat kan tot op 0,5 cm zorgvuldig worden verkregen door het bevestigen van een RTE van 0,5 cm, van 1,5 cm of voor lengten van meer dan 1,5 cm, door het "stapelen" van een RTE van nog eens 1,0 cm op de RTE van 1,5 cm.
3. Druk de RTE stevig aan op het proximale uiteinde van de AMS 700 CXR-cilinder. De RTE is goed bevestigd als de groef op de cilinder over de bijbehorende borging op de RTE valt, zodat een glad uitwendig profiel wordt verkregen. Hetzelfde geldt voor het bevestigen van een aanvullende RTE op de stapelbare RTE van 1,5 cm voor het verkrijgen van maten in stappen van ½ cm.
4. Draai de RTE na het aanbrengen telkens een stukje om te verzekeren dat de borging goed op zijn plaats komt te zitten.

Let op

1. Alleen de CXR-achttertijverlengstukken van 1,5 cm mogen gestapeld worden. Als er andere maten RTE's gestapeld worden, werkt het borgmechanisme niet en blijven de achttertijverlengers niet op elkaar zitten.
2. CXR RTE's zijn niet compatibel met CX- of LGX-cilinders.

Levering en opslag

WAARSCHUWING: De inhoud wordt STERIEL geleverd. Niet gebruiken als de steriele barrière is beschadigd. Bel in geval van beschadiging uw AMS-vertegenwoordiger.

Uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Niet hergebruiken, herverwerken of hersteriliseren. Hergebruiken, herverwerken of hersteriliseren kan de structurele integriteit van het instrument aantasten en/of de werking van het instrument verstoren, wat op zijn beurt letsel, ziekte of overlijden van de patiënt kan veroorzaken. Hergebruiken, herverwerken of hersteriliseren brengt tevens het risico van verontreiniging van het instrument en/of infectie of kruisbesmetting van de patiënt met zich mee, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van besmettelijke ziekte(n) tussen patiënten. Besmetting van het instrument kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt. Werp dit product en het verpakkingsmateriaal na gebruik weg volgens het hiervoor geldende beleid van het ziekenhuis, de instelling en/of de overheid.

Bewaar het product bij kamertemperatuur op een schone, droge en donkere plaats.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + 55 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its
affiliates. All Rights reserved.
230129-19-MH (2017-12)

