

# Комплект удължител за заден връх (УЗВ) CXR

## Инструкции за употреба

Български **Комплект удължител за заден връх (УЗВ) CXR**

Инструкции за употреба .....3

**Rx ONLY**

**AMS™**

**bg** Български

|   |   |
|---|---|
|  | <b>bg</b> Да не се стерилизира повторно   |
|  | <b>bg</b> Само за еднократна употреба   |
|  | <b>bg</b> Прочетете инструкциите за употреба  |
|  | <b>bg</b> Стерилизирано чрез пара   |
|  | <b>bg</b> Да се използва до: ПТГГ-ММ-ДД   |
|  | <b>bg</b> Дата на производство  |
| <b>R ONLY</b>   | <b>bg</b> <b>Внимание:</b> Федералното законодателство (на САЩ) ограничава продажбата на това устройство да се извършва от или по нареждане на лекар. |
| <b>LOT</b>  | <b>bg</b> Партиден номер  |
| <b>REF</b>  | <b>bg</b> Каталоген номер   |
| <b>EC REP</b>   | <b>bg</b> Упълномощен представител за Европейската общност  |
|  | <b>bg</b> Производител  |
|  | <b>bg</b> Рециклируема опаковка   |

## Комплект удължител за заден връх (УЗВ) CXR Инструкции за употреба

### Съдържание

Този комплект удължител за заден връх (УЗВ) съдържа 2 набора УЗВ със следните размери:

0,5 см, 1,0 см, 1,5 см с групиране, 2,0 см, 3,0 см

### Показания за употреба

Тези УЗВ са предназначени само за използване с надуваеми цилиндри на протеза за пенис AMS 700™ CXR.

### Инструкции

1. Следвайте инструкциите в ръководството за операционната зала за имплантирането на цилиндрите AMS 700 CXR.
2. Изберете УЗВ с подходяща дължина за всеки цилиндър, който най-добре ще пасне на анатомията на пациента. По желание може да се постигне оразмеряване до стъпка от 1/2 см, като се прикрепят дължината от 0,5 см, 1,5 см или, за дължини над 1,5 см, чрез групирането на една допълнителна дължина от цял сантиметър УЗВ към УЗВ от 1,5 см.
3. Натиснете здраво УЗВ надолу към проксималния край на цилиндъра AMS 700 CXR. УЗВ е правилно прикрепен, когато жлебът на цилиндъра се прикрепят към съответния заключващ пръстен на УЗВ и се постигне гладък външен профил. Същият принцип важи и при прикрепянето на допълнителен УЗВ към 1,5 см УЗВ за групиране, за да се постигне дължина с оразмеряване от 1/2 см.
4. Леко завъртете всеки УЗВ, за да се уверите, че заключващият пръстен е активиран.

## Внимание

1. Не групирайте удължители за заден връх CXR, различни от 1,5 см УЗВ. Ако са групирани други размери УЗВ, тогава заключващият механизъм няма да се активира и удължителите за заден връх може да не останат свързани един с друг.
2. УЗВ CXR не са съвместими с цилиндри CX или LGX.

## Доставка и съхранение

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Съдържанието се доставя СТЕРИЛНО. Не използвайте, ако стерилната опаковка е повредена. Ако установите увреждане, се свържете с представителя на AMS.

**Само за еднократна употреба.** Не използвайте повторно и не подлагайте на повторна обработка или стерилизация. Повторната употреба, обработка или стерилизация може да наруши структурната цялост на изделието и/или да доведе до неизправност на изделието, която на свой ред да доведе до нараняване, болест или смърт на пациента. Повторната употреба, обработка или стерилизация може също така да създаде риск от замърсяване на изделието и/или да причини инфектиране на пациента или кръстосани инфекции, включително, но не само, предаването на инфекциозни заболявания от един пациент на друг. Замърсяването на изделието може да доведе до нараняване, болест или смърт на пациента. След употреба изхвърлете продукта и опаковката в съответствие с политиката на болницата, регулаторните органи и/или местното законодателство.

Съхранявайте продукта на чисто, сухо и тъмно място при стайна температура.

Australian Sponsor Address  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY  
NSW 1455  
Australia  
Free Phone 1800 676 133  
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil  
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.  
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212  
São Paulo-SP CEP 04029-200  
Brasil  
Tel: + 55 11 5091 9753  
Fax: + 55 11 5091-9755



# AMS™

**American Medical Systems, Inc.**

10700 Bren Road West  
Minnetonka, MN 55343  
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881  
Tel: +1 952 930 6000  
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems  
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G  
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost  
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its  
affiliates. All Rights reserved.  
230129-23-MH (2017-12)

