

# CXR bakändesförlängarsats (RTE)

## Bruksanvisning

|         |                                 |   |
|---------|---------------------------------|---|
| Svenska | CXR bakändesförlängarsats (RTE) |   |
|         | Bruksanvisning .....            | 3 |

**R ONLY**

**AMS™**

**sv** Svenska

|   |   |
|---|---|
|  | <b>sv</b> Får inte omsteriliseras   |
|  | <b>sv</b> Får inte återanvändas   |
|  | <b>sv</b> Se bruksanvisning   |
|  | <b>sv</b> Steriliserad med ånga   |
|  | <b>sv</b> Använd före ÅÅÅÅ-MM-DD  |
|  | <b>sv</b> Tillverkningsdatum  |
| <b>Rx ONLY</b>  | <b>sv</b> <b>Försiktighetsåtgärd:</b> Enligt federal lag (USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination. |
|  | <b>sv</b> Satsnummer  |
|  | <b>sv</b> Katalognummer   |
|  | <b>sv</b> Auktoriserad EU-representant  |
|  | <b>sv</b> Tillverkare   |
|  | <b>sv</b> Återvinningsbar förpackning   |

## **CXR bakändesförlängarsats (RTE) Bruksanvisning**

### **Innehåll**

Denna bakändesförlängarsats (RTE) innehåller 2 uppsättningar bakändesförlängare i följande storlekar:

4 cm, 5 cm, 6 cm

### **Indikationer för användning**

Dessa bakändesförlängare är endast avsedda för användning med AMS 700™ CXR uppumpbara penisprotescylindrar.

### **Anvisningar**

1. Följ anvisningarna i operationshandboken för implantation av AMS 700 CXR-cylindrar.
2. Välj en bakändesförlängare (RTE) av rätt längd för varje cylinder med hänsyn till vad som passar patientens anatomi bäst. Vid behov kan storleken kan ändras i steg om 0,5 cm genom att koppla på en 0,5 cm eller 1,5 cm lång bakändesförlängare eller, för längder som överstiger 1,5 cm, genom att stapla en bakändesförlängare på ytterligare en hel centimeter till bakändesförlängaren på 1,5 cm.
3. Tryck med fast hand ner bakändesförlängaren på den proximala änden av AMS 700 CXR-cylindern. Bakändesförlängaren är ordentligt ansluten när spåret i cylindern griper i motsvarande läsring på bakändesförlängaren, vilket ger en slät yttre profil. Samma princip gäller när du ansluter ytterligare en bakändesförlängare till den 1,5 cm staplingsbara bakändesförlängaren för att kunna ändra längd med 0,5 cm.
4. Vrid varje bakändesförlängare en aning för att bekräfta att läsringen griper i.

## Försiktighetsåtgärd:

1. Stapla inte CXR-bakändesförlängare med andra typer än den 1,5 cm långa bakändesförlängaren. Om bakändesförlängare av en annan storlek används kommer läsmekanismen inte att gripa i, vilket innebär att det finns risk för att förlängarna lossnar.
2. Bakändesförlängarna till CXR är inte kompatibla med CX- eller LGX-cylindrar.

## Leveransskick och förvaring

**WARNING!** Innehållet levereras STERILISERAT. Använd inte produkten om det sterila skyddet är skadat. Kontakta en AMS-representant om skada upptäcks.

**Endast för användning på en patient.** Får ej återanvändas, ombearbetas eller omsteriliseras. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan äventyra produktens strukturella integritet och/eller leda till att den inte fungerar som den ska, vilket i sin tur kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall. Återanvändning, ombearbetning eller omsterilisering kan också skapa risk för att produkten kontamineras och/eller orsaka att patienten drabbas av infektion eller korsinfektion, inklusive, men inte begränsat till, överföring av infektionssjukdom(-ar) från en patient till en annan. Kontamination av produkten kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall. Kassera produkten och förpackningen efter användning i enlighet med sjukhusets rutiner, administrativa och/eller lokala förordningar.

Förvara produkten i rumstemperatur på en ren, torr och mörk plats.

Australian Sponsor Address  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY  
NSW 1455  
Australia  
Free Phone 1800 676 133  
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil  
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.  
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212  
São Paulo-SP CEP 04029-200  
Brasil  
Tel: + 55 11 5091 9753  
Fax: + 455 11 5091-9755



# AMS™

## American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West  
Minnetonka, MN 55343  
U.S.A.  
U.S. Toll Free: 800 328 3881  
Tel: +1 952 930 6000  
Tel: +31 20 593 8800



## American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G  
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost  
The Netherlands



**CE**  
0086

©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.  
230132-05-MH (2017-12)

