

CXR hátsó csúcsi hosszabbító (RTE) készlet

Használati útmutató

Magyar	CXR hátsó csúcsi hosszabbító (RTE) készlet	
	Használati útmutató	3

Rx ONLY

AMS™

 Magyar

	 Ne sterilizálja újra!
	 Ne használja fel újra!
	 Olvassa el a Használati útmutatót!
	 Gőzzel sterilizált
	 Lejárat dátum: ÉÉÉÉ-HH-NN
	 Gyártás időpontja
	 Figyelem! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében az eszköz forgalmazása kizárólag orvos által vagy orvosi utasításra történhet.
	 Tételszám
	 Katalógusszám
	 Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	 Gyártó
	 Újrahasznosítható csomagolás

CXR hátsó csúcsi hosszabbító (RTE) készlet

Használati útmutató

Tartalom

A hátsó csúcsi hosszabbító (RTE) készlet két RTE készletet tartalmaz, az alábbi méretekben:

4 cm, 5 cm, 6 cm

Felhasználási terület

Ezek az RTE-k kizárólag az AMS 700™ CXR felpumpálható péniszprotézis hengereivel használhatók.

Utasítások

1. Az AMS 700 CXR hengerek beültetésekor kövesse a műtőhelyiség kézikönyvben található utasításokat.
2. Mindig olyan méretű RTE-t válasszon az egyes hengerekhez, amelyek a legjobban illeszkednek a páciens anatómiájához. Fél centiméteres lépésekkel úgy méretezhető az RTE, hogy egy 0,5 cm-es vagy 1,5 cm-es RTE-t csatlakoztat, vagy 1,5 cm hossz felett az 1,5 cm-es RTE-hez egy egész centiméternyi hosszú RTE-t csatlakoztat.
3. Erőteljesen nyomja rá az RTE-t az AMS 700 CXR henger proximális végére. Az RTE akkor van megfelelő módon csatlakoztatva a hengerhez, ha hengeren található mélyedés és az RTE zárógyűrűje illeszkedik, ezzel síma külső felületet képezve. Ugyanígy csatlakoztasson újabb RTE-t a 1,5 cm-es csatlakozó RTE-hez, amikor fél centiméterrel szeretné a hosszt megtoldani.
4. Óvatosan csavarja meg az RTE-ket, ellenőrizve, hogy a zárógyűrű megfelelően illeszkedik-e.

Figyelem!

1. A CXR hátsó csúcsi hosszabbító kizárólag 1,5 cm-es RTE-vel bővíthető. Ha más méretű RTE-t helyez egy másikra, akkor a zárszerkezet nem fog megfelelően illeszkedni, és a hátsó csúcsi hosszabbítók szétválhatnak.
2. A CXR RTE-k nem kompatibilisek a CX és az LGX hengerekkel.

Kiszerezés és tárolás

FIGYELEM! A leszállított alkatrészek STERILEK. Ne használja fel, ha a steril védőcsomagolás sérült. Amennyiben sérülést talál, hívja az AMS képviselőjét.

Kizárólag egy páciensnél történő használatra szolgál. Ne használja fel, ne dolgozza fel és ne sterilizálja újra. Az ismételt felhasználás, feldolgozás vagy újrasztilizálás károsíthatja az eszköz szerkezeti integritását és/vagy az eszköz meghibásodását okozhatja, valamint a páciens sérüléséhez, betegségéhez vagy halálához vezethet. Az ismételt felhasználás, feldolgozás vagy újrasztilizálás az eszköz szennyeződésének a kockázatával is járhat és/vagy a páciens fertőzését vagy keresztfertőzését okozhatja, beleértve többek között a fertőző betegség(ek) egyik páciensről a másikra történő átvitelét. Az eszköz szennyeződése a páciens sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet. Használat után a termék és a csomagolás hulladékkezelése a kórházi, a közigazgatási és/vagy önkormányzati irányelvek szerint történjen.

A terméket tárolja tiszta, száraz és sötét helyen, szobahőmérsékleten.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + 55 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343

U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881

Tel: +1 952 930 6000

Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



CE
0086

©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.
230132-06-MH (2017-12)

