

Zestaw urządzeń typu CXR Rear Tip Extender (RTE) Instrukcja stosowania

Polski	Zestaw urządzeń typu CXR Rear Tip Extender (RTE) Instrukcja stosowania	3
--------	---	---

R ONLY

AMS™

PL Polski

	<p>PL Nie sterylizować ponownie</p>
	<p>PL Nie używać ponownie</p>
	<p>PL Patrz instrukcja stosowania</p>
	<p>PL Wysterylizowano parą</p>
	<p>PL Data ważności RRRR-MM-DD</p>
	<p>PL Data produkcji</p>
<p>Rx ONLY</p>	<p>PL Ostrzeżenie: zgodnie z prawem federalnym (USA) ten wyrób może być sprzedawany wyłącznie przez lekarzy lub na ich zamówienie.</p>
	<p>PL Numer partii</p>
	<p>PL Numer katalogowy</p>
	<p>PL Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej</p>
	<p>PL Producent</p>
	<p>PL Opakowanie przeznaczone do recyklingu</p>

Zestaw urządzeń typu CXR Rear Tip Extender (RTE) Instrukcja stosowania

Zawartość

Ten zestaw urządzeń typu Rear Tip Extender (RTE) zawiera 2 komplety urządzeń RTE o następujących rozmiarach:

4 cm, 5 cm, 6 cm

Wskazania do stosowania

Te urządzenia RTE przeznaczone są wyłącznie do stosowania z cylindrami hydraulicznymi przez prącia AMS 700™ CXR.

Instrukcja

1. W przypadku wszczepiania cylindrów AMS 700 CXR należy przestrzegać instrukcji zawartych w Instrukcji stosowania na sali zabiegowej.
2. Dla każdego cylindra wybrać urządzenie RTE o odpowiedniej długości, najbardziej dopasowane do anatomii pacjenta. Jeśli to konieczne, można dostosowywać rozmiar co 1/2 cm, dodając 0,5 cm, 1,5 cm, lub, dla długości powyżej 1,5 cm, nakładając jedno dodatkowe centymetrowe urządzenie RTE do urządzenia RTE o długości 1,5 cm.
3. Mocno docisnąć urządzenie RTE do proksymalnego końca cylindra AMS 700 CXR. Urządzenie RTE jest prawidłowo połączone, kiedy w rowek na cylindrze wpasowany zostanie odpowiedni pierścień blokujący na urządzeniu RTE, tworząc w efekcie jednolity profil zewnętrzny. Ta sama zasada obowiązuje przy dołączaniu dodatkowego urządzenia RTE do urządzenia RTE o długości 1,5 cm w celu uzyskania długości różniących się o 1/2 cm.
4. Delikatnie przekręcić każde urządzenie RTE, aby sprawdzić, czy pierścień blokujący jest połączony.

Przeostroga

1. Nie nakładac na siebie urzadzen typu CXR RTE innych niz RTE o dlugosci 1,5 cm. Przy nakladaniu na siebie innych rozmiarow RTE mechanizm blokujacy nie zaskoczy i urzadzenia RTE moga byc niepolaczone ze soba.
2. Cylindry CXR RTE nie sa kompatybilne z cylindrami CX lub LGX.

Sposob dostarczenia i przechowywanie

OSTRZEZENIE: dostarczana zawartosc jest JAŁOWA. Nie uzywac w przypadku uszkodzenia bariery jałowej. W przypadku wykrycia uszkodzenia skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy AMS.

Produkt przeznaczony do uzytku wyłacznie u jednego pacjenta. Nie nalezy go uzywac ponownie, przygotowowac do ponownego uzycia ani ponownie sterylizowac. Ponowne uzycie, przygotowanie do ponownego uzycia lub ponowna sterylizacja moga naruszyc strukturalna integralnosc wyrobu i/lub doprowadzic do jego usterki powodujacej obrazenia ciala, chorobę lub zgon pacjenta. Ponowne uzycie, przygotowanie do ponownego uzycia lub ponowna sterylizacja moga rowniez stwarzac ryzyko zanieczyszczenia wyrobu i/lub spowodowac zakazenie pacjenta lub zakazenie krzyzowe, w tym m.in. przeniesienie chorob zakaźnych z jednego pacjenta na drugiego. Zanieczyszczenie wyrobu moze prowadzic do obrazen ciala, choroby lub zgonu pacjenta. Po uzyciu produkt i jego opakowanie nalezy zutylizowac zgodnie z przepisami szpitalnymi, administracyjnymi i/lub ustanowionymi przez wladze lokalne.

Produkt nalezy przechowywac w czystym, suchym, ciemnym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + 455 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.
U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



CE
0086

©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.
230132-08-MH (2017-12)

