

# CXR Arka Uç Uzatici (RTE) Kiti

## Kullanım Talimatları

Türkçe	CXR Arka Uç Uzatici (RTE) Kiti	
	Kullanım Talimatları .....	3

**RX ONLY**

**AMS™**

tr Türkçe

	tr Yeniden sterilize etmeyin
	tr Yeniden kullanmayın
	tr Kullanım Talimatlarına Bakın
	tr Buharla Sterilize Edilmiştir
	tr Son kullanma tarihi: GG-AA-YYYY
	tr İmalat tarihi
<b>R ONLY</b>	tr <b>Dikkat:</b> Federal yasalar (ABD) bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla satışına izin vermektedir.
<b>LOT</b>	tr Lot numarası
<b>REF</b>	tr Katalog numarası
<b>EC REP</b>	tr Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi
	tr İmalatçı
	tr Geri dönüşümlü ambalaj

## CXR Arka Uç Uzatici (RTE) Kiti Kullanım Talimatları

### İçindekiler

Bu Arka Uç Uzatici (RTE) kiti, aşağıda belirtilen boyutlardaki 2 RTE seti içerir:

4 cm, 5 cm, 6 cm

### Kullanım Endikasyonu

Bu RTE'ler yalnızca AMS 700™ CXR şişirilebilir penil protez silindirleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

### Talimatlar

1. AMS 700 CXR Silindirlerin implante edilmesi için Ameliyathane Kılavuzunda yer alan talimatları takip edin.
2. Her silindir için, hastanın anatomisine en uygun uzunluktaki RTE'yi seçin. Gerekirse 0,5 cm ve 1,5 cm kullanılarak veya 1,5 cm'den büyük uzunluklar için 1,5 cm'lik RTE'ye ek bir tam santimetre uzunluk eklenerek 1/2 cm boyut elde edilebilir.
3. RTE'yi AMS 700 CXR silindirin proksimal ucuna sıkıca bastırın. Silindirin üzerindeki girinti RTE üzerindeki eşleşen kilitleme halkasına geçtiğinde RTE doğru şekilde takılmış demektir, bu sayede pürüzsüz bir dış profil elde edilebilir. Aynı prensip, 1/2 cm'lik uzunluklar elde etmek için 1,5 cm'lik ekleme RTE'sine ek RTE'ler takılırken de geçerlidir.
4. Kilitleme halkasının geçtiğini doğrulamak için her RTE'yi hafifçe çevirin.

## Dikkat

1. CXR Arka Uç Uzaticıları, 1,5 cm'lik hariçindeki RTE'lere eklemeyin. Diğer boydaki RTE'ler eklenirse kilitleme mekanizması devreye girmez ve arka uç uzaticılar birbirine bağlı kalmayabilir.
2. CXR RTE'ler, CX veya LGX silindirlerle uyumlu değildir.

## Sağlanma Biçimi ve Saklama

**UYARI:** İçerik STERIL olarak tedarik edilmektedir. Steril bariyer hasarlıysa kullanmayın. Hasar tespit edilirse AMS temsilcinizi arayın.

**Yalnızca tek hastada kullanım içindir.** Yeniden kullanmayın, yeniden işlem uygulamayın veya yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanım, yeniden işlem uygulama veya yeniden sterilizasyon, cihazın yapısal bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve/veya cihazın arızalanmasına neden olarak hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne yol açabilir.

Yeniden kullanım, yeniden işlem uygulama veya yeniden sterilizasyon aynı zamanda cihazın kontamine olması riskini oluşturabilir ve/veya enfeksiyöz hastalığın (hastalıkların) bir hastadan diğerine bulaşması da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hasta enfeksiyonuna veya çapraz enfeksiyona neden olabilir. Cihazın kontamine olması, hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne neden olabilir. Kullanım sonrasında ürünü ve ambalajı hastane, idari birim ve/veya yerel devlet politikasına uygun şekilde atın.

Ürünü temiz, kuru ve karanlık bir konumda, oda sıcaklığında saklayın.

Australian Sponsor Address  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY  
NSW 1455  
Australia  
Free Phone 1800 676 133  
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil  
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.  
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212  
São Paulo-SP CEP 04029-200  
Brasil  
Tel: + 55 11 5091 9753  
Fax: + 455 11 5091-9755



# AMS™

## American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West  
Minnetonka, MN 55343  
U.S.A.  
U.S. Toll Free: 800 328 3881  
Tel: +1 952 930 6000  
Tel: +31 20 593 8800



## American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G  
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost  
The Netherlands



**CE**  
0086

©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.  
230132-12-MH (2017-12)

