

Súprava zadných nastavcov (RTE) CXR


Návod na použitie

Slovensky	Súprava zadných nastavcov (RTE) CXR	
	Návod na použitie.....	3

R ONLY

AMS™

sk Slovensky

	sk Nesterilizujte opakovane
	sk Nepoužívajte opakovane
	sk Pozrite si návod na použitie
	sk Sterilizované parou
	sk Použite do RRRR-MM-DD
	sk Dátum výroby
Rx ONLY	sk Upozornenie: Federálne zákony USA obmedzujú predaj tejto pomôcky na lekára alebo na jeho predpis.
LOT	sk Číslo šarže
REF	sk Katalógové číslo
EC REP	sk Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve
	sk Výrobca
	sk Recyklovateľný obal

Súprava zadných nastavcov (RTE) CXR Návod na použitie

Obsah

Táto súprava zadných nastavcov (RTE) obsahuje 2 súpravy RTE nasledujúcich veľkostí:

4 cm, 5 cm, 6 cm

Indikácie na použitie

RTE sú určené na použitie s valcami nafukovacej penilnej protézy AMS 700™ CXR.

Pokyny

1. Pri implantácii valcov AMS 700 CXR postupujte podľa pokynov v príručke pre operačnú sálu.
2. Vyberte vhodnú dĺžku RTE pre každý valec, ktorý bude najlepšie zodpovedať anatomickým pomerom pacienta. Odstupňovanie veľkosti po 1/2 cm je možné dosiahnuť nasadením nastavcov veľkosti 0,5 cm, 1,5 cm, alebo pri dĺžkach väčších ako 1,5 cm, nadstavením jednej celej centimetrovej dĺžky RTE na 1,5 cm RTE.
3. Pevne zatlačte RTE na proximálny koniec valca AMS 700 CXR. RTE je nasadený správne, keď drážka na valci zapadne do príslušného prstenca na RTE, výsledkom je hladký vonkajší profil. Rovnaký princíp sa vzťahuje na pripojenie ďalšieho RTE na 1,5 cm nastavovací RTE, ak chcete dosiahnuť odstupňovanie veľkostí po 1/2 cm.
4. Mierne pootočte každý RTE, skontrolujte, či poistny krúžok zapadol.

Upozornenie

1. Neskladajte RTE CXR na seba, okrem 1,5 cm RTE. Ak budete na seba skladat' iné veľkosti RTE, poistný mechanizmus nezapadne, a môže sa stať, že sa RTE rozpoja.
2. RTE CXR nie sú kompatibilné s CX alebo LGX valcami.

Stav pri dodaní a skladovanie

VÝSTRAHA: Obsah sa dodáva STERILNÝ. Nepoužívajte ho, ak je poškodená sterilná bariéra. Ak zistíte, že je produkt poškodený, kontaktujte zástupcu spoločnosti AMS.

Určené len pre jedného pacienta. Opakovane nepoužívajte, nespracúvajte ani nesterilizujte. Opakované použitie, spracovanie či sterilizácia môžu narušiť štruktúrálnu celistvosť pomôcky a/alebo viesť k jej zlyhaniu, čo môže následne spôsobiť poranenie, ochorenie alebo úmrtie pacienta. Opakované použitie, spracovanie či sterilizácia môžu byť takisto spojené s rizikom kontaminácie pomôcky a/alebo viesť k infekcii či krížovej infekcii pacienta, okrem iného vrátane prenosu infekčných chorôb z jedného pacienta na druhého. Kontaminácia pomôcky môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo úmrtiu pacienta. Po použití pomôcky a balenie zlikvidujte v súlade s nemocničnými, administratívnymi a/alebo miestnymi vládnyimi predpismi.

Produkt skladujte na čistom, suchom a tmavom mieste pri izbovej teplote.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + 455 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.
U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



CE
0086

©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.
230132-16-MH (2017-12)

