



Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA  
Tel: 651.582.4000

Personal Médico: 1.800.CARDIAC (227.3422)  
Pacientes y familiares: 1.866.484.3268

www.bostonscientific.com

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.

359411-002 ES US 2015-03



## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

# Comunicador LATITUDE®



Lea esta información antes de realizar la instalación.

## Información útil acerca del Comunicador LATITUDE

### ¿Para qué se usa?

El Comunicador LATITUDE está diseñado para recopilar información del dispositivo implantado y enviarla a su equipo de atención Médica para ayudarlos en el seguimiento del cuidado que está recibiendo.

 **No es un sistema médico de urgencia.**

### ¿Cómo funciona?






Una vez configurado (**consulte los pasos de configuración en el dorso**), el Comunicador comprobará periódicamente el dispositivo de acuerdo con un programa establecido por su médico. En ocasiones, esto se producirá de forma automática y, otras veces, puede que el Comunicador necesite su asistencia. Solo debe pulsar el botón Corazón intermitente (cuando parpadee) para completar la comprobación del dispositivo.



### Dónde debe colocarse el Comunicador.

- Junto a una toma eléctrica a la que pueda accederse con facilidad.
- Cerca de donde duerme o junto a la cama, a un máximo de 3 metros (10 pies). Si esto no es posible, coloque el Comunicador en un lugar donde pase una cantidad significativa de tiempo cada día.
- Donde pueda sentarse cómodamente y ver la parte delantera del Comunicador.
- En función del método de conexión utilizado:
  - **Línea telefónica estándar:** cerca de un enchufe telefónico de pared.
  - **Red de datos para móviles:** en una ubicación donde pueda recibir una señal buena.
  - **Internet (con el adaptador USB para Ethernet LATITUDE):** cerca del módem/enrutador de Internet.
  - **Internet (con el adaptador de Internet inalámbrico LATITUDE):** el Comunicador puede ubicarse en una habitación diferente de donde esté situado el módem/enrutador de Internet, pero debe encontrarse a un máximo de 30 metros (100 pies) del adaptador de Internet inalámbrico LATITUDE.
- **NOTA:** El adaptador debe permanecer conectado al módem/enrutador de Internet, no al Comunicador.
- Donde el Comunicador y todos sus cables y accesorios se mantengan secos y fuera de la exposición a la humedad o a un posible contacto con el agua.

### ¿Qué significan las luces?

| Si ve...  | Significa que...  | Qué hacer...   |
|---|---|--|
|  Botón Corazón intermitente  | El Comunicador necesita ayuda para completar una comprobación del dispositivo programada anteriormente.<br><b>Nota:</b> Esto no indica un problema con el dispositivo implantado. | Pulse el botón Corazón.<br><br>Permanezca cerca del comunicador hasta que se envíen los datos. |
|    | Los datos del dispositivo implantado se han enviado al sistema LATITUDE.  | No es necesaria ninguna acción.  |
|  O  | Existe un posible problema que debe abordar un médico.  | Llame a su médico.   |
|  Ondas amarillas  | El Comunicador está teniendo problemas para conectarse.   | Consulte el apartado de solución de problemas del manual del paciente.                         |

Consulte los pasos de configuración en el dorso.



# 1 Conecte el cable de alimentación.




# 2 Elija su método de conexión **único**:

- A. Línea telefónica estándar
- B. Red de datos para móviles\*
- C. Internet (con el adaptador USB para Ethernet LATITUDE)\*
- D. Internet (con el adaptador de Internet inalámbrico LATITUDE)\*


\*Requiere un kit de adaptadores que se encuentra disponible por separado.

# 3 Conecte los cables para su método de conexión **único** (A, B, C o D).

## A. Línea telefónica estándar

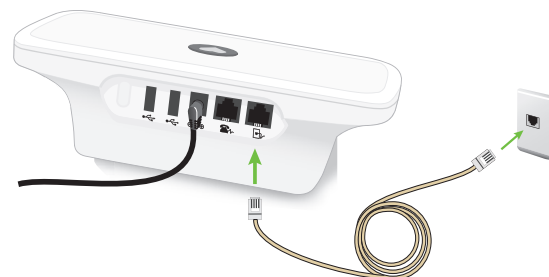


## B. Red de datos para móviles

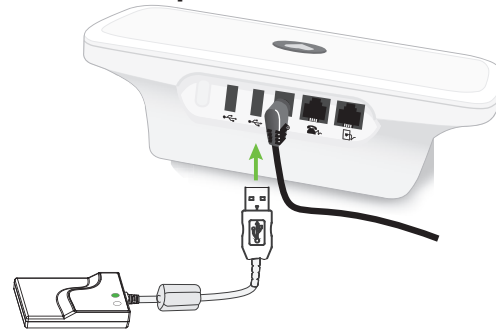


## C. Internet (con el adaptador USB para Ethernet LATITUDE)



## D. Internet (con el adaptador de Internet inalámbrico LATITUDE: MultiConnect BE)

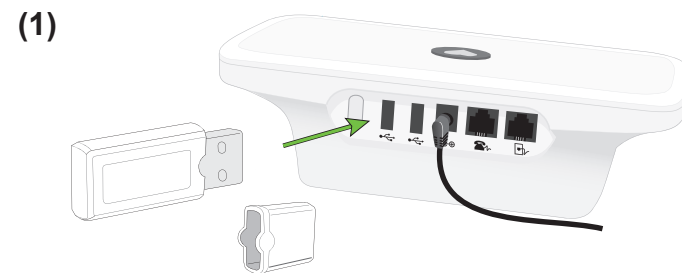


Retire la tapa e inserte el adaptador USB

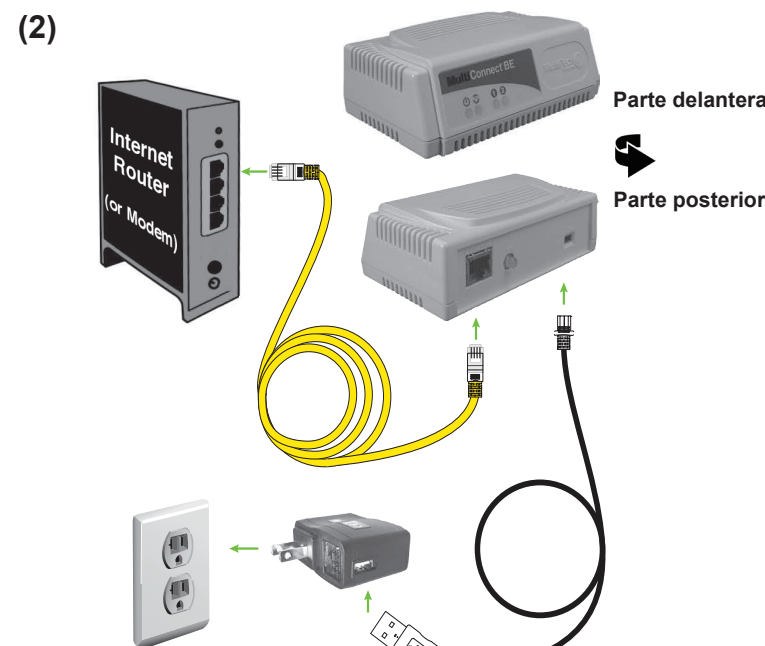


Espera a que solo la luz de la parte delantera se encienda en verde

(Esto puede tardar hasta 30 segundos)

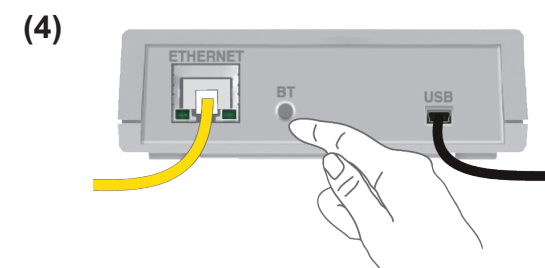

Pulse el botón que se encuentra en la parte posterior del MultiConnect BE

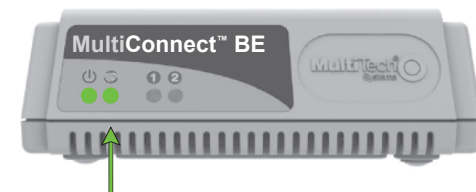

El indicador parpadeará

# 4 Pulse el botón Corazón intermitente del Comunicador LATITUDE.



# 5 Espere mientras se envían los datos. Esto puede tardar unos minutos.




Recopilación de datos del dispositivo implantado



Envío de datos

# 6 ¡Listo!

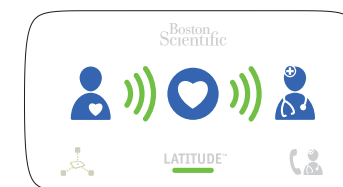

Si las luces están encendidas como se muestra arriba, la configuración habrá finalizado. Las luces se apagarán automáticamente después de 2 minutos.

# 7 Deje el Comunicador enchufado.



Esto le permitirá comprobar el dispositivo implantado según haya planificado el personal médico.

# ? ¿Necesita más ayuda?

Si alguna de las ondas del Comunicador es de color amarillo (intermitente o fija), consulte el apartado de solución de problemas del manual del paciente.

Para obtener más ayuda, póngase en contacto con el personal médico o con el servicio de atención al paciente a través del 1-866-484-3268.

Consulte la información útil en el dorso.

